

Instrução de Uso em formato não impresso conforme IN N°4 de 15/06/12

Esta Instrução de Uso está disponível no site: www.factorycirurgico.com.br

Para consultar no site a instrução de uso pertinente ao produto desejado, basta verificar no rótulo o número de registro, o número de referência do produto e o modelo comercial.

Modo de Uso do Produto

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY devem ser utilizados somente por profissionais qualificados e devidamente treinados de acordo com as técnicas médicas disponíveis e apropriadas para a utilização do produto.

Instruções:

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e ambulatorial e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do instrumento a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica e/ou ambulatorial antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS

Utilização:

A utilização dos INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita à ambientes clínicos e hospitalares; com os seguintes cuidados:

Inspeções: Só poderão ser utilizados os instrumentais submetidos à inspeção técnica prévia.

Inspeção Técnica: Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY antes de serem disponibilizados para uso devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado. As peças reprovadas devem ser separadas para revisão e manutenção pelo fornecedor ou destinadas para descarte. A inspeção deve verificar as características associadas à conservação e a funcionalidade do instrumental, incluindo aspectos superficiais, como manchas, oxidações e danos, além de características pertinentes a cada instrumental, tais como facilidade de articulação e capacidade de apreensão.

Limpeza: - Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY devem ser limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras. **IMPORTANTE:** Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

Esterilização: Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY devem ser esterilizados antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Nota: Todo o instrumental deve ser limpo tão logo o término do procedimento cirúrgico, desta forma evitando o endurecimento de líquidos originados do trabalho cirúrgico. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas, batidas que possam comprometer os instrumentais.

Reutilização: O processo para reutilização dos INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY envolve, no mínimo, seis etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágüe, secagem e esterilização. Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados. Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza. Deve-se assegurar que os instrumentais, estejam livres de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microorganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do aço inoxidável, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

Limpeza prévia: O instrumental deve ser mergulhado, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, preferencialmente enzimático, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

Descontaminação: - É feita através da imersão do instrumental, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

Lavagem: - As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias, dandose especial atenção às articulações, serrilhas e cremalheiras. Especial atenção deve ser dada às áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

Enxágüe: - O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágüe do instrumental.

Secagem: - Deve-se assegurar que os processos de secagem não introduzam umidade, partículas ou felpas na superfície do instrumental. Recomenda-se que o tecido seja absorvente, macio.

Descarte: O descarte de peças desqualificadas deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. Após a substituição, destruir os componentes danificados evitando o uso posterior de forma indevida.

Condições de Armazenamento

O instrumental deve ser armazenado em local limpo e seco, de modo a evitar danos à embalagem. O mesmo não pode ser estocado com produtos e resíduos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

Condições para o Transporte

O instrumental deve ser transportado em local limpo e seco, de modo a evitar danos à embalagem. O mesmo não pode ser transportado com produtos e resíduos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

Condições de Manipulação

Deve-se manusear os instrumentos cuidadosamente para evitar danos e alterações de suas características. Evitando batidas e quedas bruscas.

Advertências

O produto deve ser utilizado unicamente na finalidade para a qual é indicado, o mesmo deve ser utilizado por profissionais da área com conhecimento sobre o manuseio do mesmo. Todos os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

Precauções

É necessário que o profissional tenha formação especializada em técnicas estabelecidas. O manuseio dos instrumentais deve ser feita por pessoas qualificadas. A infra estrutura e higiene devem ser garantidas na manipulação dos produtos. Nunca armazenar instrumentais limpos em locais que possam ser focos de contaminação. Todos os instrumentais deteriorados ou que apresentarem indícios de corrosão deverão ser separados para evitar que o processo de corrosão se alastre. Deve se ter muito cuidado com a temperatura e o período na hora da esterilização, pois os danos podem ser irreversíveis, nunca deve ser ultrapassados a esterilização em:

Auto Clave, à temperatura de 121°C por um período de 30 minutos.

Auto Clave de Alto Vácuo, à temperatura de 132°C por um período de 4 minutos.

Estufa, à temperatura de 170°C por um período de 120 minutos.

Contra Indicações

Todos os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

Efeitos Adversos

Não ocorrerão efeitos adversos, desde que sejam atendidas todas as recomendações presentes na Instrução de Uso.

Modelos Comerciais:

0001	-	Abre boca whitead 11 cm c/ trava
0002	-	Abre boca whitead 13 cm c/ trava
0003	-	Abre boca whitead 15 cm c/ trava

0004	-	Abre boca Dingman
0005	-	Abre boca Jennings 9 cm
0006	-	Abre boca Jennings 11 cm
0007	-	Abre boca Jennings 13 cm
0008	-	Abre boca Jennings 15 cm
0009	-	Abre boca de molt 10 cm infantil
0010	-	Abre boca de molt 11 cm infantil
0021	-	Abridor de gesso beeson 30 cm
0022	-	Abridor de gesso henning 28 cm
0023	-	Abridor de gesso woff 23 cm
0024	-	Abridor de gesso woff 27 cm
0025	-	Afastador balfuor-baby 115 mm n°1 c/ válvula
0026	-	Afastador balfuor-baby 140 mm n°2 c/ válvula
0027	-	Afastador balfuor 170 mm c/ válvula
0028	-	Afastador balfuor 200 mm c/ válvula
0029	-	Afastador balfuor 240 mm n°1 c/ válvula
0030	-	Afastador balfuor 240 mm n°2 c/ válvula
0031	-	Afastador balfuor 250 mm n°1 c/ válvula
0032	-	Afastador balfuor 250 mm n°2 c/ válvula
0033	-	Afastador balfuor 250 mm n°3 c/ válvula
0034	-	Afastador balfuor 270 mm c/ válvula
0035	-	Afastador balfuor 300 mm n°1 c/ válvula
0036	-	Afastador balfuor 300 mm n°2 c/ válvula
0046	-	Afastador gosset 100 mm s/ válvula
0047	-	Afastador gosset 115 mm s/ válvula
0048	-	Afastador gosset 120 mm s/ valvula
0049	-	Afastador gosset 180 mm s/ valvula
0050	-	Afastador gosset 170 mm s/ valvula
0051	-	Afastador gosset 200 mm n°1 s/ válvula
0052	-	Afastador gosset 300 mm n°2 s/ válvula
0053	-	Afastador gosset 200 mm n°1 c/ válvula
0054	-	Afastador gosset 200 mm n°2 c/ válvula
0055	-	Afastador adson 14 cm curvo agudo
0056	-	Afastador adson 14 cm curvo rombo
0057	-	Afastador adson 16 cm curvo agudo
0058	-	Afastador adson 16 cm curvo rombo
0059	-	Afastador adson 18 cm curvo agudo
0060	-	Afastador adson 18 cm curvo rombo
0061	-	Afastador adson 20 cm curvo agudo
0062	-	Afastador adson 20 cm curvo rombo
0063	-	Afastador adson 22 cm curvo agudo
0064	-	Afastador adson 22 cm curvo rombo
0065	-	Afastador adson 24 cm curvo agudo
0066	-	Afastador adson 24 cm curvo rombo
0067	-	Afastador adson 26 cm curvo agudo
0068	-	Afastador adson 26 cm curvo rombo
0069	-	Afastador adson 28 cm curvo agudo
0070	-	Afastador adson 28 cm curvo rombo
0071	-	Afastador adson 30 cm curvo agudo
0072	-	Afastador adson 30 cm curvo rombo
0073	-	Afastador adson 32 cm curvo agudo
0074	-	Afastador adson 32 cm curvo rombo
0075	-	Afastador adson 14 cm reto agudo
0076	-	Afastador adson 14 cm reto rombo
0077	-	Afastador adson 16 cm reto agudo
0078	-	Afastador adson 16 cm reto rombo
0079	-	Afastador adson 18 cm reto agudo
0080	-	Afastador adson 18 cm reto rombo
0081	-	Afastador adson 20 cm reto agudo
0082	-	Afastador adson 20 cm reto rombo
0083	-	Afastador adson 22 cm reto agudo
0084	-	Afastador adson 22 cm reto rombo

0085	-	Afastador adson 24 cm reto agudo
0086	-	Afastador adson 24 cm reto rombo
0087	-	Afastador adson 26 cm reto agudo
0088	-	Afastador adson 26 cm reto rombo
0089	-	Afastador adson 28 cm reto agudo
0090	-	Afastador adson 28 cm reto rombo
0091	-	Afastador adson 30 cm reto agudo
0092	-	Afastador adson 30 cm reto rombo
0093	-	Afastador adson 32 cm reto agudo
0094	-	Afastador adson 32 cm reto rombo
0095	-	Afastador adson baby articulado 14 cm agudo
0096	-	Afastador adson baby articulado 14 cm rombo
0097	-	Afastador adson articulado 12 cm agudo
0098	-	Afastador adson articulado 12 cm rombo
0099	-	Afastador adson articulado 14 cm agudo
0100	-	Afastador adson articulado 14 cm rombo
0101	-	Afastador adson articulado 16 cm agudo
0102	-	Afastador adson articulado 16 cm rombo
0103	-	Afastador adson articulado 18 cm agudo
0104	-	Afastador adson articulado 18 cm rombo
0105	-	Afastador adson articulado 20 cm agudo
0106	-	Afastador adson articulado 20 cm rombo
0107	-	Afastador adson articulado 22 cm agudo
0108	-	Afastador adson articulado 22 cm rombo
0109	-	Afastador adson articulado 24 cm agudo
0110	-	Afastador adson articulado 24 cm rombo
0111	-	Afastador adson articulado 26 cm agudo
0112	-	Afastador adson articulado 26 cm rombo
0113	-	Afastador adson articulado 28 cm agudo
0114	-	Afastador adson articulado 28 cm rombo
0115	-	Afastador adson articulado 30 cm agudo
0116	-	Afastador adson articulado 30 cm rombo
0117	-	Afastador adson articulado 32 cm agudo
0118	-	Afastador adson articulado 32 cm rombo
0119	-	Afastador adson articulado 34 cm agudo
0120	-	Afastador adson articulado 34 cm rombo
0121	-	Afastador adson articulado duplamente 12 cm
0122	-	Afastador adson articulado duplamente 14 cm
0123	-	Afastador adson articulado duplamente 16 cm
0124	-	Afastador adson articulado duplamente 18 cm
0125	-	Afastador adson articulado duplamente 19 cm
0126	-	Afastador adson articulado duplamente 20 cm
0127	-	Afastador adson articulado duplamente 22 cm
0128	-	Afastador adson articulado duplamente 24 cm
0129	-	Afastador adson articulado duplamente 26 cm
0130	-	Afastador adson articulado duplamente 28 cm
0131	-	Afastador adson articulado duplamente 30 cm
0132	-	Afastador adson articulado duplamente 32 cm
0133	-	Afastador anderson adson curvo 14 cm agudo
0134	-	Afastador anderson adson curvo 14 cm rombo
0135	-	Afastador anderson adson curvo 16 cm agudo
0136	-	Afastador anderson adson curvo 16 cm rombo
0137	-	Afastador anderson adson curvo 17 cm agudo
0138	-	Afastador anderson adson curvo 17 cm rombo
0139	-	Afastador anderson adson curvo 18 cm agudo
0140	-	Afastador anderson adson curvo 18 cm rombo
0141	-	Afastador anderson adson curvo 19 cm agudo
0142	-	Afastador anderson adson curvo 19 cm rombo
0143	-	Afastador anderson adson curvo 20 cm agudo
0144	-	Afastador anderson adson curvo 20 cm rombo
0145	-	Afastador anderson adson curvo 22 cm agudo
0146	-	Afastador anderson adson curvo 22 cm rombo

0147	-	Afastador anderson adson curvo 24 cm agudo
0148	-	Afastador anderson adson curvo 24 cm rombo
0149	-	Afastador anderson adson curvo 26 cm agudo
0150	-	Afastador anderson adson curvo 26 cm rombo
0151	-	Afastador anderson adson curvo 28 cm agudo
0152	-	Afastador anderson adson curvo 28 cm rombo
0153	-	Afastador anderson adson curvo 30 cm agudo
0154	-	Afastador anderson adson curvo 30 cm rombo
0155	-	Afastador anderson adson curvo 32 cm agudo
0156	-	Afastador anderson adson curvo 32 cm rombo
0157	-	Afastador anderson adson curvo 34 cm agudo
0158	-	Afastador anderson adson curvo 34 cm rombo
0159	-	Afastador anderson adson reto 14 cm agudo
0160	-	Afastador anderson adson reto 14 cm rombo
0161	-	Afastador anderson adson reto 16 cm agudo
0162	-	Afastador anderson adson reto 16 cm rombo
0163	-	Afastador anderson adson reto 17 cm agudo
0164	-	Afastador anderson adson reto 17 cm rombo
0165	-	Afastador anderson adson reto 18 cm agudo
0166	-	Afastador anderson adson reto 18 cm rombo
0167	-	Afastador anderson adson reto 19 cm agudo
0168	-	Afastador anderson adson reto 19cm rombo
0169	-	Afastador anderson adson reto 20 cm agudo
0170	-	Afastador anderson adson reto 20cm rombo
0171	-	Afastador anderson adson reto 22 cm agudo
0172	-	Afastador anderson adson reto 22 cm rombo
0173	-	Afastador anderson adson reto 24 cm agudo
0174	-	Afastador anderson adson reto 24 cm rombo
0175	-	Afastador anderson adson reto 26 cm agudo
0176	-	Afastador anderson adson reto 26 cm rombo
0177	-	Afastador anderson adson reto 28 cm agudo
0178	-	Afastador anderson adson reto 28 cm rombo
0179	-	Afastador anderson adson reto 30 cm agudo
0180	-	Afastador anderson adson reto 30 cm rombo
0181	-	Afastador anderson adson reto 32 cm agudo
0182	-	Afastador anderson adson reto 32 cm rombo
0183	-	Afastador anderson adson reto 34 cm agudo
0184	-	Afastador anderson adson reto 34 cm rombo
0185	-	Afastador baby collin abnominal
0186	-	Afastador gelpi 9 cm aguda
0187	-	Afastador gelpi 9 cm romba
0188	-	Afastador gelpi 10 cm aguda
0189	-	Afastador gelpi 10 cm romba
0190	-	Afastador gelpi 12 cm aguda
0191	-	Afastador gelpi 12 cm romba
0192	-	Afastador gelpi 14 cm aguda
0193	-	Afastador gelpi 14 cm romba
0194	-	Afastador gelpi 15 cm aguda
0195	-	Afastador gelpi 15 cm romba
0196	-	Afastador gelpi 16 cm aguda
0197	-	Afastador gelpi 16 cm romba
0198	-	Afastador gelpi 17 cm aguda
0199	-	Afastador gelpi 17 cm romba
0200	-	Afastador gelpi 18 cm aguda
0201	-	Afastador gelpi 18 cm romba
0202	-	Afastador gelpi 19 cm aguda
0203	-	Afastador gelpi 19 cm romba
0204	-	Afastador gelpi 20 cm aguda
0205	-	Afastador gelpi 20 cm romba
0206	-	Afastador gelpi 21 cm aguda
0207	-	Afastador gelpi 21 cm romba
0208	-	Afastador gelpi 22 cm aguda

0209	-	Afastador gelpi 22 cm romba
0210	-	Afastador gelpi 23 cm aguda
0211	-	Afastador gelpi 23 cm romba
0212	-	Afastador gelpi 24 cm aguda
0213	-	Afastador gelpi 24 cm romba
0214	-	Afastador gelpi 25 cm aguda
0215	-	Afastador gelpi 25 cm romba
0216	-	Afastador gelpi 26 cm aguda
0217	-	Afastador gelpi 26 cm romba
0218	-	Afastador gelpi 27 cm aguda
0219	-	Afastador gelpi 27 cm romba
0220	-	Afastador gelpi 28 cm aguda
0221	-	Afastador gelpi 28 cm romba
0222	-	Afastador gelpi 29 cm aguda
0223	-	Afastador gelpi 29 cm romba
0224	-	Afastador gelpi 30 cm aguda
0225	-	Afastador gelpi 30 cm romba
0226	-	Afastador gelpi 31 cm aguda
0227	-	Afastador gelpi 31 cm romba
0228	-	Afastador gelpi 32 cm aguda
0229	-	Afastador gelpi 32 cm romba
0230	-	Afastador gelpi 33 cm aguda
0231	-	Afastador gelpi 33 cm romba
0232	-	Afastador gelpi 34 cm aguda
0233	-	Afastador gelpi 34 cm romba
0234	-	Afastador gelpi 35 cm aguda
0235	-	Afastador gelpi 35 cm romba
0236	-	Afastador gelpi 40 cm aguda
0237	-	Afastador gelpi 40 cm romba
0238	-	Afastador gelpi 42 cm aguda
0239	-	Afastador gelpi 42 cm romba
0240	-	Afastador gelpi garra 90° c/ 4 dentes 24 cm
0241	-	Afastador henkey 14 cm agudo
0242	-	Afastador henkey 14 cm rombo
0243	-	Afastador henkey 16 cm agudo
0244	-	Afastador henkey 16 cm rombo
0245	-	Afastador henkey 18 cm agudo
0246	-	Afastador henkey 18 cm rombo
0247	-	Afastador henkey 20 cm agudo
0248	-	Afastador henkey 20 cm rombo
0249	-	Afastador beckmann adson 29 cm agudo 25 x 29 mm
0250	-	Afastador beckmann adson 29 cm agudo 44 x 29 mm
0251	-	Afastador beckmann adson 29 cm rombo 25 x 29 mm
0252	-	Afastador beckmann adson 29 cm rombo 44 x 29 mm
0253	-	Afastador beckmann adson 31 cm 4 x 4 dentes agudos
0254	-	Afastador beckmann adson 32 cm 4 x 5 dentes agudos
0255	-	Afastador beckmann adson 32 cm 7 x 7 dentes agudos
0256	-	Afastador beckmann eaton 29 cm
0257	-	Afastador beckmann eaton duplamente 32 cm
0258	-	Afastador beckmann adson 31 cm
0259	-	Afastador caspar 5,0 cm
0260	-	Afastador caspar 5,5 cm
0261	-	Afastador caspar 6,0 cm
0262	-	Afastador caspar 6,5 cm
0263	-	Afastador caspar lombar 5,0 cm
0264	-	Afastador caspar lombar 5,5 cm
0265	-	Afastador caspar lombar 6,0 cm
0266	-	Afastador caspar lombar 6,5 cm
0267	-	Afastador jefferson 3 x 4 dentes 140 mm
0268	-	Afastador spreader reto 18 cm c/ cremalheira
0269	-	Afastador spreader reto 22 cm c/ cremalheira
0270	-	Afastador spreader reto 25 cm c/ cremalheira

0271	-	Afastador spreader curvo 18 cm c/ cremalheira
0272	-	Afastador spreader curvo 22 cm c/ cremalheira
0273	-	Afastador spreader curvo 25 cm c/ cremalheira
0274	-	Afastador lâmina spreader 26 cm lamina concava
0275	-	Afastador lâmina spreader 26 cm lamina lisa
0276	-	Afastador casper 165 mm com articulação 5 valvulas
0277	-	Afastador collin grande 3 valvulas
0278	-	Afastador collin pequeno 3 n°1 valvulas
0279	-	Afastador collin pequeno 3 n°2 valvulas
0280	-	Afastador collin
0281	-	Afastador casper 120 mm com articulação c/ valvulas
0282	-	Afastador casper 180 mm com articulação c/ valvulas
0283	-	Afastador casper 200 mm com articulação c/ valvulas
0284	-	Afastador casper 250 mm com articulação c/ valvulas
0285	-	Afastador casper 300 mm com articulação c/ valvulas
0286	-	Afastador casper 350 mm com articulação c/ valvulas
0287	-	Afastador casper 400 mm com articulação c/ valvulas
0288	-	Afastador casper 450 mm com articulação c/ valvulas
0289	-	Afastador casper 500 mm com articulação c/ valvulas
0290	-	Afastador mayo Adams 165 mm
0291	-	Afastador harvey jackson 280 mm
0292	-	Afastador sullivan connor
0293	-	Afastador plester 110 mm agudo
0294	-	Afastador plester 110 mm rombo
0295	-	Afastador plester 130 mm agudo
0296	-	Afastador plester 130 mm rombo
0297	-	Afastador wullstein 110 mm agudo
0298	-	Afastador wullstein 110 mm rombo
0299	-	Afastador wullstein 130 mm agudo
0300	-	Afastador wullstein 130 mm rombo
0301	-	Afastador Celebrar 14 cm
0302	-	Afastador Celebrar 16 cm
0303	-	Afastador Celebrar 18 cm
0304	-	Afastador Celebrar 19 cm
0305	-	Afastador Celebrar 20 cm
0306	-	Afastador Celebrar 22 cm
0307	-	Afastador Celebrar 24 cm
0308	-	Afastador Celebrar 26 cm
0309	-	Afastador Celebrar 28 cm
0310	-	Afastador Celebrar 30 cm
0311	-	Afastador Celebrar 32 cm
0312	-	Afastador weitlaner 11 cm agudo
0313	-	Afastador weitlaner 11 cm rombo
0314	-	Afastador weitlaner 12 cm agudo
0315	-	Afastador weitlaner 12 cm rombo
0316	-	Afastador weitlaner 13 cm agudo
0317	-	Afastador weitlaner 13 cm rombo
0318	-	Afastador weitlaner 14 cm agudo
0319	-	Afastador weitlaner 14 cm rombo
0320	-	Afastador weitlaner 15 cm agudo
0321	-	Afastador weitlaner 15 cm rombo
0322	-	Afastador weitlaner 16 cm agudo
0323	-	Afastador weitlaner 16 cm rombo
0324	-	Afastador weitlaner 17 cm agudo
0325	-	Afastador weitlaner 17 cm rombo
0326	-	Afastador weitlaner 18 cm agudo
0327	-	Afastador weitlaner 18 cm rombo
0328	-	Afastador weitlaner 19 cm agudo
0329	-	Afastador weitlaner 19 cm rombo
0330	-	Afastador weitlaner 20 cm agudo
0331	-	Afastador weitlaner 20 cm rombo
0332	-	Afastador weitlaner 21 cm agudo

0333	-	Afastador weitlaner 21 cm rombo
0334	-	Afastador weitlaner 22 cm agudo
0335	-	Afastador weitlaner 22 cm rombo
0336	-	Afastador weitlaner 23 cm agudo
0337	-	Afastador weitlaner 23 cm rombo
0338	-	Afastador weitlaner 24 cm agudo
0339	-	Afastador weitlaner 24 cm rombo
0340	-	Afastador weitlaner 25 cm agudo
0341	-	Afastador weitlaner 25 cm rombo
0342	-	Afastador weitlaner 26 cm agudo
0343	-	Afastador weitlaner 26 cm rombo
0344	-	Afastador weitlaner 27 cm agudo
0345	-	Afastador weitlaner 27 cm rombo
0346	-	Afastador weitlaner 28 cm agudo
0347	-	Afastador weitlaner 28 cm rombo
0348	-	Afastador weitlaner 30 cm agudo
0349	-	Afastador weitlaner 30 cm rombo
0350	-	Afastador weitlaner 32 cm agudo
0351	-	Afastador weitlaner 32 cm rombo
0352	-	Afastador weitlaner 12 cm 2 x 3 dentes
0353	-	Afastador weitlaner 14 cm 2 x 3 dentes
0354	-	Afastador weitlaner 17 cm 2 x 3 dentes
0355	-	Afastador weitlaner 23 cm 2 x 3 dentes
0356	-	Afastador weitlaner 25 cm 2 x 3 dentes
0357	-	Afastador weitlaner 12 cm 3 x 4 dentes
0358	-	Afastador weitlaner 14 cm 3 x 4 dentes
0359	-	Afastador weitlaner 17 cm 3 x 4 dentes
0360	-	Afastador weitlaner 19 cm 3 x 4 dentes
0361	-	Afastador weitlaner 23 cm 3 x 4 dentes
0362	-	Afastador weitlaner 25 cm 3 x 4 dentes
0363	-	Afastador weitlaner 23 cm 3 x 4 dentes curvo
0364	-	Afastador Alm delicado 5 x 9 x 100 mm
0365	-	Afastador Alm delicado 4 x 8 x 60 mm
0366	-	Afastador Alm 4 x 4 dentes agudo 70 mm
0367	-	Afastador Alm 4 x 4 dentes agudo 100 mm
0368	-	Afastador Alm 4 x 4 dentes semi agudo 100 mm
0369	-	Afastador Alm 4 x 4 dentes rombo 70 mm
0370	-	Afastador Alm 4 x 4 dentes rombo 100 mm
0371	-	Afastador jansen 3 x 3 dentes agudo
0372	-	Afastador jansen 3 x 3 dentes agudo e rombo
0373	-	Afastador jansen 3 x 3 dentes rombo
0374	-	Afastador cloward 10 valvulas
0375	-	Afastador cloward 155 mm separador
0376	-	Afastador inge 16 cm
0377	-	Afastador inge 17 cm
0378	-	Afastador inge 24 cm
0379	-	Afastador inge 28 cm
0380	-	Afastador finnochieto baby n°1 c/ valvulas
0381	-	Afastador finnochieto n°2
0382	-	Afastador finnochieto n°3
0383	-	Afastador finnochieto n°4
0384	-	Afastador finnochieto n°5
0385	-	Afastador finnochieto n°6
0386	-	Afastador finnochieto n°7
0387	-	Afastador finnochieto n°8
0388	-	Afastador finnochieto-bulford
0389	-	Afastador casper 100 mm com articulação 6 valvulas
0390	-	Afastador ankeney
0391	-	Afastador apfelbaum
0392	-	Afastador cervical longitudinal
0393	-	Afastador cervical transversal
0394	-	Afastador cloward lombar 23 cm

0395	-	Afastador cloward p/ vertebra
0396	-	Afastador de corpo vertebral
0397	-	Afastador leyla duplo c/ 4 espatulas
0398	-	Afastador leyla simples c/ 2 espatulas
0399	-	Afastador markhan meyerding direito 60 x 25 mm
0400	-	Afastador markhan meyerding esquerdo 60 x 25 mm
0401	-	Afastador meyerding 18 cm lâmina 41 x 25 mm-neuro
0402	-	Afastador meyerding 18 cm lâmina 51 x 25 mm-neuro
0403	-	Afastador meyerding 18 cm lâmina 57 x 25 mm-neuro
0404	-	Afastador meyerding grande 25 cm lâmina 50 x 94 mm
0405	-	Afastador meyerding médio 22 cm lâmina 25 x 70 mm
0406	-	Afastador meyerding p/ bookwalter 82 x 25 mm
0407	-	Afastador meyerding p/ bookwalter 95 x 50 mm
0408	-	Afastador meyerding pequeno 22 cm lâmina. 17 x 55 mm
0409	-	Afastador miskimon agudo 38 x 22 mm x 19 cm
0410	-	Afastador miskimon rombo 38 x 22 mm x 19 cm
0411	-	Afastador mollison 155 mm
0412	-	Afastador seletz gelpi Ang. reto
0413	-	Afastador spreader
0414	-	Afastador miskimon
0415	-	Afastador Willians 30 cm
0416	-	Afastador willians 50 x 20 mm
0417	-	Afastador willians 70 x 20 mm
0418	-	Afastador articulado diam. 5 x 150 mm
0419	-	Afastador articulado diam. 5 x 200 mm
0420	-	Afastador articulado diam. 5 x 250 mm
0421	-	Afastador articulado diam. 5 x 330 mm
0422	-	Afastador articulado diam. 5 x 420 mm
0423	-	Afastador articulado diam. 10 x 150 mm
0424	-	Afastador articulado diam. 10 x 200 mm
0425	-	Afastador articulado diam. 10 x 250 mm
0426	-	Afastador articulado diam. 10 x 330 mm
0427	-	Afastador articulado diam. 10 x 420 mm
0428	-	Afastador articulado flexível 3 laminas diam. 5 x 150 mm
0429	-	Afastador articulado flexível 3 laminas diam. 5 x 200 mm
0430	-	Afastador articulado flexível 3 laminas diam. 5 x 250 mm
0431	-	Afastador articulado flexível 3 laminas diam. 5 x 330 mm
0432	-	Afastador articulado flexível 3 laminas diam. 5 x 420 mm
0433	-	Afastador articulado flexível 5 laminas diam. 10 x 150 mm
0434	-	Afastador articulado flexível 5 laminas diam. 10 x 200 mm
0435	-	Afastador articulado flexível 5 laminas diam. 10 x 250 mm
0436	-	Afastador articulado flexível 5 laminas diam. 10 x 330 mm
0437	-	Afastador articulado flexível 5 laminas diam. 10 x 420 mm
0438	-	Afastador articulado palheta 150 mm
0439	-	Afastador articulado palheta 200 mm
0440	-	Afastador articulado palheta 250 mm
0441	-	Afastador articulado palheta 330 mm
0442	-	Afastador articulado palheta 420 mm
0443	-	Afastador scoville Richter nº1
0444	-	Afastador scoville Richter nº2
0445	-	Afastador scoville haverfield 160 x 185 mm
0446	-	Afastador gold finger flexível 150 mm
0447	-	Afastador gold finger flexível 200 mm
0448	-	Afastador gold finger flexível 250 mm
0449	-	Afastador gold finger flexível 330 mm
0450	-	Afastador gold finger flexível 420 mm
0458	-	Afastador de obesidade mórbida
0459	-	Afastador thompson
0460	-	Amassador de fascia
0461	-	Amassador cartilagem
0463	-	Compasso 20 mm
0464	-	Compasso 40 mm

0465	-	Compasso 60 mm
0466	-	Compasso 100 mm
0467	-	Compasso 120 mm
0468	-	Capa
0469	-	Clamp p/ anastomose 15 cm x 15 mm
0470	-	Clamp p/ anastomose 15 cm x 18 mm
0471	-	Clamp p/ anastomose 15 cm x 22 mm
0472	-	Clamp p/ muti purpose 13 cm 30°
0473	-	Clamp p/ muti purpose 13 cm 50°
0474	-	Clamp TP colher 13 cm
0475	-	Dilatador La borde 12 cm
0476	-	Descolador facial di viterbo P
0477	-	Descolador facial di viterbo M
0478	-	Descolador facial di viterbo G
0479	-	Empunhadura longitudinal
0480	-	Empunhadura p/ porta agulha
0481	-	Empunhadura plastica c/ cremalheira
0482	-	Empunhadura plastica s/ cremalheira
0483	-	Empunhadura mathie reta
0484	-	Empunhadura mathie curva
0485	-	Especímetro 10 cm
0486	-	Especímetro 14 cm
0487	-	Especulo nasal autostático n.1
0488	-	Especulo nasal autostático n.2
0489	-	Especulo nasal autostático n.3
0490	-	Especulo nasal hartman n.1
0491	-	Especulo nasal hartman n.2
0492	-	Especulo nasal hartman n.3
0493	-	Especulo nasal de killian n.1
0494	-	Especulo nasal de killian n.2
0495	-	Especulo nasal de killian n.3
0496	-	Especulo nasal hartman infantil nº1
0497	-	Especulo nasal hartman infantil nº2
0498	-	Especulo nasal Cotle P
0499	-	Especulo nasal Cotle M
0500	-	Especulo collin 75 x 25 mm
0501	-	Especulo collin 85 x 30 mm
0502	-	Especulo collin vaginal nº0 micro
0503	-	Especulo collin vaginal nº1 pequeno
0504	-	Especulo collin vaginal nº2 médio
0505	-	Especulo collin vaginal nº3 grande
0506	-	Especulo collin vaginal p/ virgem
0507	-	Especulo collin vaginal nº1 pequeno FO
0508	-	Especulo collin vaginal nº2 médio FO
0509	-	Especulo collin vaginal nº3 grande FO
0510	-	Especulo cushing 70 x 15 mm
0511	-	Especulo cushing 90 x 15 mm
0512	-	Especulo cushing 110 x 15 mm
0514	-	Especulo hardy nasal 70 mm
0515	-	Especulo hardy nasal 80 mm
0516	-	Especulo hardy nasal 90 mm
0517	-	Especulo mathieu retal trivale
0518	-	Especulo paravero-caspar 80 x 10 mm
0519	-	Especulo paravero-caspar 90 x 13 mm
0520	-	Especulo paravero-caspar 100 x 15 mm
0521	-	Especulo pitanga santos retal 13 cm
0522	-	Especulo sims nº1
0523	-	Especulo sims nº2
0524	-	Especulo sims nº3
0525	-	Especulo sims retal
0526	-	Estribo bohler 140 x 100 mm
0527	-	Estribo bohler 160 x 90 mm

0528	-	Estribo bohler 170 x 130 mm
0529	-	Estribo bohler 210 x 110 mm
0530	-	Estribo bohler 220 x 170 mm
0531	-	Estribo bohler 230 x 100 mm
0532	-	Estribo bohler 260 x 120 mm
0533	-	Estribo de kirschner 14 cm abertura 127 mm
0534	-	Estribo de kirschner 19 cm abertura 215 mm
0535	-	Estribo de kirschner 24 cm abertura 254 mm
0536	-	Estribo de steinmann pequeno 90 x 75 mm
0537	-	Estribo de steinmann médio 160 x 90 mm
0538	-	Estribo de steinmann grande 210 x 150 mm
0539	-	Forceps kielland 42 cm
0540	-	Forceps nagele 35,5 cm
0541	-	Forceps nagele 40 cm
0542	-	Forceps marelli
0543	-	Forceps boerrma 28 cm
0544	-	Forceps Simpson 23,5 cm
0545	-	Forceps Simpson 25 cm
0546	-	Forceps simpson- braun 30,5 cm
0547	-	Forceps simpson- braun 33 cm
0548	-	Forceps simpson- braun 35 cm
0549	-	Forceps simpson- braun 36 cm
0550	-	Forceps simpson- braun 44,5 cm
0551	-	Guia drill
0552	-	Micro porta agulha barraquer reto 12 cm c/ trava pta cv
0553	-	Micro porta agulha barraquer reto 12 cm c/ trava pta rt
0554	-	Micro porta agulha barraquer reto 12 cm s/ trava pta cv
0555	-	Micro porta agulha barraquer reto 12 cm s/ trava pta rt
0556	-	Micro porta agulha cabo redondo s/ 14 cm
0557	-	Micro porta agulha cabo redondo s/ 15 cm
0558	-	Micro porta agulha cabo redondo s/ 16 cm
0559	-	Micro porta agulha cabo redondo s/ 17 cm
0560	-	Micro porta agulha cabo redondo s/ 18 cm
0561	-	Micro porta agulha cabo redondo s/ 19 cm
0562	-	Micro porta agulha cabo redondo s/ 20 cm
0563	-	Micro porta agulha cabo redondo s/ 23 cm
0564	-	Micro porta agulha cabo redondo s/ 25 cm
0565	-	Micro porta agulha cabo redondo s/ 30 cm
0566	-	Micro porta agulha cabo redondo c/ 14 cm
0567	-	Micro porta agulha cabo redondo c/ 15 cm
0568	-	Micro porta agulha cabo redondo c/ 16 cm
0569	-	Micro porta agulha cabo redondo c/ 17 cm
0570	-	Micro porta agulha cabo redondo c/ 18 cm
0571	-	Micro porta agulha cabo redondo c/ 19 cm
0572	-	Micro porta agulha cabo redondo c/ 20 cm
0573	-	Micro porta agulha cabo redondo c/ 23 cm
0574	-	Micro porta agulha cabo redondo c/ 25 cm
0575	-	Micro porta agulha cabo redondo c/ 30 cm
0576	-	Micro porta agulha jacobson reto 18,5 cm s/ trava
0577	-	Micro porta agulha jacobson reto 21 cm s/ trava
0578	-	Micro porta agulha jacobson reto 23 cm s/ trava
0579	-	Micro porta agulha jacobson reto 18,5 cm c/ trava
0580	-	Micro porta agulha jacobson reto 21 cm c/ trava
0581	-	Micro porta agulha jacobson reto 23 cm c/ trava
0582	-	Micro porta agulha yasargil baioneta 16 cm pta cv
0583	-	Micro porta agulha yasargil baioneta 16 cm pta rt
0584	-	Micro porta agulha yasargil baioneta 18 cm pta cv
0585	-	Micro porta agulha yasargil baioneta 18 cm pta rt
0586	-	Micro porta agulha yasargil baioneta 20 cm pta cv
0587	-	Micro porta agulha yasargil baioneta 20 cm pta rt
0588	-	Micro porta agulha yasargil baioneta 22 cm pta cv
0589	-	Micro porta agulha yasargil baioneta 22 cm pta rt

0590	-	Micro porta agulha yasargil reta 18 cm pta cv
0591	-	Micro porta agulha yasargil reta 18 cm pta rt
0592	-	Micro porta agulha yasargil reta 20 cm pta cv
0593	-	Micro porta agulha yasargil reta 16 cm pta cv
0594	-	Micro porta agulha yasargil reta 16 cm pta rt
0595	-	Micro porta agulha yasargil reta 18 cm pta cv
0596	-	Micro porta agulha yasargil reta 18 cm pta rt
0597	-	Micro porta agulha yasargil reta 20 cm pta cv
0598	-	Micro porta agulha yasargil reta 20 cm pta rt
0599	-	Micro porta agulha yasargil reta 22 cm pta cv
0600	-	Micro porta agulha yasargil reta 22 cm pta rt
0601	-	Micro raspador yasargil baioneta 18 cm pta cv p/ baixo 2,0 mm
0602	-	Micro raspador yasargil baioneta 18 cm pta cv p/ baixo 2,5 mm
0603	-	Micro raspador yasargil baioneta 18 cm pta reta 2,0 mm
0604	-	Micro raspador yasargil baioneta 18 cm pta reta 2,5 mm
0605	-	Micro raspador yasargil baioneta 19 cm pta cv p/ baixo 2,0 mm
0606	-	Micro raspador yasargil baioneta 19 cm pta cv p/ baixo 2,5 mm
0607	-	Micro raspador yasargil baioneta 19 cm pta reta 2,0 mm
0608	-	Micro raspador yasargil baioneta 19 cm pta reta 2,5 mm
0609	-	Micro raspador yasargil baioneta 20 cm pta cv p/ baixo 2,0 mm
0610	-	Micro raspador yasargil baioneta 20 cm pta cv p/ baixo 2,5 mm
0611	-	Micro raspador yasargil baioneta 20 cm pta reta 2,0 mm
0612	-	Micro raspador yasargil baioneta 20 cm pta reta 2,5 mm
0613	-	Porta agulha curvo boca 5,0 mm diam.5,0 x 330 mm
0614	-	Porta agulha curvo diam.5,0 x 200 mm
0615	-	Porta agulha curvo diam.5,0 x 330 mm
0616	-	Porta agulha curvo diam.5,0 x 420 mm
0617	-	Porta agulha reto boca 5,0 mm diam.5,0 x 330 mm
0618	-	Porta agulha reto diam.5,0 x 330 mm
0619	-	Porta agulha reto diam.5,0 x 420 mm
0620	-	Porta agulha microvascular 17 cm c/ widia
0621	-	Porta agulha microvascular 18 cm c/ widia
0622	-	Porta agulha microvascular 20 cm c/ widia
0623	-	Porta agulha microvascular 22 cm c/ widia
0624	-	Porta agulha microvascular 23 cm c/ widia
0625	-	Porta agulha microvascular 30 cm c/ widia
0626	-	Porta agulha mayo-hegar 12 cm s/ widia
0627	-	Porta agulha mayo-hegar 13 cm s/ widia
0628	-	Porta agulha mayo-hegar 14 cm s/ widia
0629	-	Porta agulha mayo-hegar 15 cm s/ widia
0630	-	Porta agulha mayo-hegar 16 cm s/ widia
0631	-	Porta agulha mayo-hegar 17 cm s/ widia
0632	-	Porta agulha mayo-hegar 18 cm s/ widia
0633	-	Porta agulha mayo-hegar 19 cm s/ widia
0634	-	Porta agulha mayo-hegar 20 cm s/ widia
0635	-	Porta agulha mayo-hegar 23 cm s/ widia
0636	-	Porta agulha mayo-hegar 25 cm s/ widia
0637	-	Porta agulha mayo-hegar 26 cm s/ widia
0638	-	Porta agulha mayo-hegar 28 cm s/ widia
0639	-	Porta agulha mayo-hegar 30 cm s/ widia
0640	-	Porta agulha mayo-hegar 35 cm s/ widia
0641	-	Porta agulha mayo-hegar 40 cm s/ widia
0642	-	Porta agulha mayo-hegar 12 cm c/ widia
0643	-	Porta agulha mayo-hegar 13 cm c/ widia
0644	-	Porta agulha mayo-hegar 14 cm c/ widia
0645	-	Porta agulha mayo-hegar 15 cm c/ widia
0646	-	Porta agulha mayo-hegar 16 cm c/ widia
0647	-	Porta agulha mayo-hegar 17 cm c/ widia
0648	-	Porta agulha mayo-hegar 18 cm c/ widia
0649	-	Porta agulha mayo-hegar 19 cm c/ widia
0650	-	Porta agulha mayo-hegar 20 cm c/ widia
0651	-	Porta agulha mayo-hegar 23 cm c/ widia

0652	-	Porta agulha mayo-hegar 25 cm c/ widia
0653	-	Porta agulha mayo-hegar 26 cm c/ widia
0654	-	Porta agulha mayo-hegar 28 cm c/ widia
0655	-	Porta agulha mayo-hegar 30 cm c/ widia
0656	-	Porta agulha mayo-hegar 35 cm c/ widia
0657	-	Porta agulha mayo-hegar 40 cm c/ widia
0658	-	Porta agulha sarot 18,5 cm c/ widia
0659	-	Porta agulha sarot 20 cm c/ widia
0660	-	Porta agulha sarot 26,5 cm c/ widia
0661	-	Porta agulha sarot 30 cm c/ widia
0662	-	Porta agulha sarot 35 cm c/ widia
0663	-	Porta agulha ryder 12 cm c/ widia
0664	-	Porta agulha ryder 13 cm c/ widia
0665	-	Porta agulha ryder 14 cm c/ widia
0666	-	Porta agulha ryder 15 cm c/ widia
0667	-	Porta agulha ryder 16 cm c/ widia
0668	-	Porta agulha ryder 17 cm c/ widia
0669	-	Porta agulha ryder 18 cm c/ widia
0670	-	Porta agulha ryder 19 cm c/ widia
0671	-	Porta agulha ryder 20 cm c/ widia
0672	-	Porta agulha ryder 23 cm c/ widia
0673	-	Porta agulha ryder 25 cm c/ widia
0674	-	Porta agulha ryder 26 cm c/ widia
0675	-	Porta agulha ryder 28 cm c/ widia
0676	-	Porta agulha ryder 30 cm c/ widia
0677	-	Porta agulha ryder 35 cm c/ widia
0678	-	Porta agulha ryder 40 cm c/ widia
0679	-	Porta agulha wangenstenn 25 cm c/ widia
0680	-	Porta agulha wangenstenn 26 cm c/ widia
0681	-	Porta agulha wangenstenn 27 cm c/ widia
0682	-	Porta agulha wangenstenn 28 cm c/ widia
0683	-	Porta agulha wangenstenn 29 cm c/ widia
0684	-	Porta agulha wangenstenn 30 cm c/ widia
0685	-	Porta agulha curvo 16 cm c/ widia
0686	-	Porta agulha derf 12 cm c/ widia
0687	-	Porta agulha derf 16 cm c/ widia
0688	-	Porta agulha baioneta 16 cm c/ widia
0689	-	Porta agulha p/ coronária 12 cm c/ widia
0690	-	Porta agulha p/ coronária 14 cm c/ widia
0691	-	Porta agulha p/ coronária 16 cm c/ widia
0692	-	Porta agulha p/ coronária 17 cm c/ widia
0693	-	Porta agulha p/ coronária 18 cm c/ widia
0694	-	Porta agulha p/ coronária 19 cm c/ widia
0695	-	Porta agulha p/ coronária 20 cm c/ widia
0696	-	Porta agulha p/ coronária 21 cm c/ widia
0697	-	Porta agulha p/ coronária 22 cm c/ widia
0698	-	Porta agulha p/ coronária 24 cm c/ widia
0699	-	Porta agulha p/ coronária 26 cm c/ widia
0700	-	Porta agulha p/ coronária 28 cm c/ widia
0701	-	Porta agulha p/ coronária 30 cm c/ widia
0702	-	Porta agulha p/ fio de aço 15 cm c/ widia
0703	-	Porta agulha p/ fio de aço 16 cm c/ widia
0704	-	Porta agulha p/ fio de aço 19 cm c/ widia
0705	-	Porta agulha p/ fio de aço 20 cm c/ widia
0706	-	Porta agulha hegar diam. 3,0 x 330 mm
0707	-	Porta agulha mathie cabo curvo diam.5,0 x 330 mm
0708	-	Porta agulha mathie cabo curvo diam.5,0 x 360 mm
0709	-	Porta agulha mathie cabo curvo diam.5,0 x 420 mm
0710	-	Porta agulha mathie cabo reto diam.5,0 x 330 mm
0711	-	Porta agulha mathie cabo reto diam.5,0 x 360 mm
0712	-	Porta agulha mathie cabo reto diam.5,0 x 420 mm
0713	-	Porta agulha castroviejo 13 cm curvo s/ widia

0714	-	Porta agulha castroviejo 14 cm curvo s/ widia
0715	-	Porta agulha castroviejo 13 cm reto s/ widia
0716	-	Porta agulha castroviejo 14 cm reto s/ widia
0717	-	Porta agulha castroviejo curvo
0718	-	Porta agulha castroviejo reto
0719	-	Porta agulha castroviejo 12 cm curvo c/ widia c/ trava
0720	-	Porta agulha castroviejo 12 cm curvo c/ widia s/ trava
0721	-	Porta agulha castroviejo 12 cm reto c/ widia c/ trava
0722	-	Porta agulha castroviejo 12 cm reto c/ widia s/ trava
0723	-	Porta agulha castroviejo 14 cm curvo c/ widia c/ trava
0724	-	Porta agulha castroviejo 14 cm curvo c/ widia s/ trava
0725	-	Porta agulha castroviejo 14 cm reto c/ widia c/ trava
0726	-	Porta agulha castroviejo 14 cm reto c/ widia s/ trava
0727	-	Porta agulha castroviejo 16 cm curvo c/ widia c/ trava
0728	-	Porta agulha castroviejo 16 cm curvo c/ widia s/ trava
0729	-	Porta agulha castroviejo 16 cm reto c/ widia c/ trava
0730	-	Porta agulha castroviejo 16 cm reto c/ widia s/ trava
0731	-	Porta agulha castroviejo 18 cm curvo c/ widia c/ trava
0732	-	Porta agulha castroviejo 18 cm curvo c/ widia s/ trava
0733	-	Porta agulha castroviejo 18 cm reto c/ widia c/ trava
0734	-	Porta agulha castroviejo 18 cm reto c/ widia s/ trava
0735	-	Porta agulha castroviejo 21 cm curvo c/ widia c/ trava
0736	-	Porta agulha castroviejo 21 cm curvo c/ widia s/ trava
0737	-	Porta agulha castroviejo 21 cm reto c/ widia c/ trava
0738	-	Porta agulha castroviejo 21 cm reto c/ widia s/ trava
0739	-	Porta agulha castroviejo 23 cm curvo c/ widia c/ trava
0740	-	Porta agulha castroviejo 23 cm curvo c/ widia s/ trava
0741	-	Porta agulha castroviejo 23 cm reto c/ widia c/ trava
0742	-	Porta agulha castroviejo 23 cm reto c/ widia s/ trava
0743	-	Porta agulha Baumgartner 12 cm c/ widia
0744	-	Porta agulha Baumgartner 14 cm c/ widia
0745	-	Porta agulha Baumgartner 15 cm c/ widia
0746	-	Porta agulha Baumgartner 16 cm c/ widia
0747	-	Porta agulha Baumgartner 17 cm c/ widia
0748	-	Porta agulha Baumgartner 18 cm c/ widia
0749	-	Porta agulha Baumgartner 20 cm c/ widia
0750	-	Porta agulha Baumgartner 22 cm c/ widia
0751	-	Porta agulha Baumgartner 24 cm c/ widia
0752	-	Porta agulha Baumgartner 26 cm c/ widia
0753	-	Porta agulha Baumgartner 28 cm c/ widia
0754	-	Porta agulha Baumgartner 30 cm c/ widia
0755	-	Porta agulha Baumgartner 35cm c/ widia
0756	-	Porta agulha crille-wood 15 cm s/ widia
0757	-	Porta agulha crille-wood 16 cm s/ widia
0758	-	Porta agulha crille-wood 18 cm s/ widia
0759	-	Porta agulha crille-wood 20 cm s/ widia
0760	-	Porta agulha crille-wood 23 cm s/ widia
0761	-	Porta agulha crille-wood 25 cm s/ widia
0762	-	Porta agulha crille-wood 30 cm s/ widia
0763	-	Porta agulha crille-wood 14 cm c/ widia
0764	-	Porta agulha crille-wood 15 cm c/ widia
0765	-	Porta agulha crille-wood 16 cm c/ widia
0766	-	Porta agulha crille-wood 18 cm c/ widia
0767	-	Porta agulha crille-wood 20 cm c/ widia
0768	-	Porta agulha crille-wood 23 cm c/ widia
0769	-	Porta agulha crille-wood 25 cm c/ widia
0770	-	Porta agulha crille-wood 30 cm c/ widia
0771	-	Porta agulha de bakey 12 cm c/ widia
0772	-	Porta agulha de bakey 13 cm c/ widia
0773	-	Porta agulha de bakey 14 cm c/ widia
0774	-	Porta agulha de bakey 15 cm c/ widia
0775	-	Porta agulha de bakey 16 cm c/ widia

0776	-	Porta agulha de bakey 18 cm c/ widia
0777	-	Porta agulha de bakey 20 cm c/ widia
0778	-	Porta agulha de bakey 22 cm c/ widia
0779	-	Porta agulha de bakey 23 cm c/ widia
0780	-	Porta agulha de bakey 24 cm c/ widia
0781	-	Porta agulha de bakey 26 cm c/ widia
0782	-	Porta agulha de bakey 30 cm c/ widia
0783	-	Porta agulha de bakey 35 cm c/ widia
0784	-	Porta agulha olsen hegar 12 cm
0785	-	Porta agulha olsen hegar 13 cm
0786	-	Porta agulha olsen hegar 14 cm
0787	-	Porta agulha olsen hegar 15 cm
0788	-	Porta agulha olsen hegar 16 cm
0789	-	Porta agulha olsen hegar 17 cm
0790	-	Porta agulha olsen hegar 18 cm
0791	-	Porta agulha olsen hegar 20 cm
0792	-	Porta agulha olsen hegar 23 cm
0793	-	Porta agulha olsen hegar 25 cm
0794	-	Porta agulha olsen hegar 26 cm
0795	-	Porta agulha olsen hegar 28 cm
0796	-	Porta agulha olsen hegar 30 cm
0797	-	Porta agulha olsen hegar 35 cm
0798	-	Porta agulha olsen hegar 40 cm
0799	-	Porta agulha olsen hegar 45 cm
0800	-	Porta agulha finochietto 14 cm c/ widia
0801	-	Porta agulha finochietto 15 cm c/ widia
0802	-	Porta agulha finochietto 16 cm c/ widia
0803	-	Porta agulha finochietto 18 cm c/ widia
0804	-	Porta agulha finochietto 20 cm c/ widia
0805	-	Porta agulha finochietto 24 cm c/ widia
0806	-	Porta agulha finochietto 27 cm c/ widia
0807	-	Porta agulha finochietto 28 cm c/ widia
0808	-	Porta agulha finochietto 30 cm c/ widia
0809	-	Porta halsey 12 cm c/ widia
0810	-	Porta halsey 12 cm ponta lisa
0811	-	Porta agulha heaney 14 cm c/ widia
0812	-	Porta agulha heaney 15 cm c/ widia
0813	-	Porta agulha heaney 16 cm c/ widia
0814	-	Porta agulha heaney 18 cm c/ widia
0815	-	Porta agulha heaney 20 cm c/ widia
0816	-	Porta agulha heaney 22 cm c/ widia
0817	-	Porta agulha heaney 23 cm c/ widia
0818	-	Porta agulha heaney 24 cm c/ widia
0819	-	Porta agulha heaney 26 cm c/ widia
0820	-	Porta agulha heaney 28 cm c/ widia
0821	-	Porta agulha heaney 30 cm c/ widia
0822	-	Porta agulha mathieu 11 cm c/ widia
0823	-	Porta agulha mathieu 12 cm c/ widia
0824	-	Porta agulha mathieu 14 cm c/ widia
0825	-	Porta agulha mathieu 15 cm c/ widia
0826	-	Porta agulha mathieu 16 cm c/ widia
0827	-	Porta agulha mathieu 17 cm c/ widia
0828	-	Porta agulha mathieu 18 cm c/ widia
0829	-	Porta agulha mathieu 20 cm c/ widia
0830	-	Pinça clipadora grande diam.10,0 x 330 mm
0831	-	Pinça clipadora grande diam.10,0 x 420 mm
0832	-	Pinça clipadora medio diam.6,5 x 330 mm
0833	-	Pinça clipadora medio diam.10,0 x 330 mm
0834	-	Pinça clipadora medio grande diam.10,0 x 330 mm
0835	-	Pinça clipadora medio grande diam.10,0 x 420 mm
0836	-	Pinça clipadora medio pediatrico diam.6,5 x 200 mm
0837	-	Pinça clipadora medio pediatrico diam.10,0 x 200 mm

- 0838 - Pinça clipadora micro pediatrico diam.5,0 x 200 mm
- 0839 - Pinça clipadora pequeno diam.5,0 x 330 mm
- 0840 - Pinça clipadora pequeno medio diam.5,0 x 330 mm
- 0841 - Pinça clipadora pequeno medio pediatrico diam.5,0 x 200 mm
- 0842 - Pinça clipadora pequeno pediatrico diam.5,0 x 200 mm
- 0843 - Pinça aplicadora de nó diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0844 - Pinça apreensão 2 x 4 dentes diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0845 - Pinça apreensão de allis diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0846 - Pinça apreensão denteada serri.diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0847 - Pinça apreensão diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0848 - Pinça apreensão extra. TP cre.longa diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0849 - Pinça apreensão extra. TP cre.longa diam. 5,0 x 420 mm S/C
- 0850 - Pinça apreensão extração diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0851 - Pinça apreensão extração TP cre.diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0852 - Pinça apreensão extração TP cre.diam.5,0 x 420 mm S/C
- 0853 - Pinça apreensão obesidade diam.5,0 x 420 mm S/C
- 0854 - Pinça apreensão pte ativa longa.diam.5,0 x 200 mm S/C
- 0855 - Pinça apreensão pte ativa longa.diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0856 - Pinça apreensão pte ativa redu.diam.5,0 x 200 mm S/C
- 0857 - Pinça apreensão serrilhada diam.3,0 x 330 mm S/C
- 0858 - Pinça apreensão vesicula diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0859 - Pinça atraumática curva diss.delicada diam.5,0 x 150 mm S/C
- 0860 - Pinça atraumatica diam.10,0 x 330 mm S/C
- 0861 - Pinça atraumática diss.diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0862 - Pinça babcock diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0863 - Pinça babcock serrilhada diam.10,0 x 330 mm S/C
- 0864 - Pinça babcock serrilhada diam.10,0 x 420 mm S/C
- 0865 - Pinça contra porta agulhas diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0866 - Pinça contra porta agulhas diam.5,0 x 420 mm S/C
- 0867 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep.diam.10,0 x 330 mm S/C
- 0868 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep.diam. 5,0 x 330 mm S/C
- 0869 - Pinça disse.apreensão delicada diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0870 - Pinça fenestrada 30,0 mm boca diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0871 - Pinça fenestrada denteada em garra diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0872 - Pinça maryland disse.pta ativa lon.diam.5,0 x 420 mm S/C
- 0873 - Pinça maryland disse.pta ativa redu.diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0874 - Pinça maryland dissecção diam.10,0 x 330 mm S/C
- 0875 - Pinça maryland dissecção diam.3,0 x 330 mm S/C
- 0876 - Pinça maryland dissecção diam.5,0 x 420 mm S/C
- 0877 - Pinça maryland dissecção diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0878 - Pinça maryland dissecção diam.5,0 x 200 mm S/C
- 0879 - Pinça mixter disse. pte ativa redu.diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0880 - Pinça mixter dissecção diam.10,0 x 330 mm S/C
- 0881 - Pinça mixter dissecção diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0882 - Pinça mixter dissecção diam.5,0 x 200 mm S/C
- 0883 - Pinça mixter dissecção diam.5,0 x 420 mm S/C
- 0884 - Pinça p/ biopsia diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0885 - Pinça p/ biopsia TP sacabocado diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0886 - Pinça apreensão 2 x 4 dentes diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0887 - Pinça apreensão 4 x 4 dentes diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0888 - Pinça apreensão atraumática diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0889 - Pinça apreensão denteada serrilhada diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0890 - Pinça apreensão diam.5,0 x 200 mm C/C
- 0891 - Pinça apreensão diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0892 - Pinça apreensão extr. tp crema.diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0893 - Pinça apreensão extr. tp crema.diam.5,0 x 420 mm C/C
- 0894 - Pinça apreensão extr.tp crema.longa diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0895 - Pinça apreensão extr.tp crema.longa diam.5,0 x 420 mm C/C
- 0896 - Pinça apreensão extração diam.5,0 x 200 mm C/C
- 0897 - Pinça apreensão extração diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0898 - Pinça apreensão pte ativa longa diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0899 - Pinça apreensão pte ativa longa diam.5,0 x 420 mm C/C

- 0900 - Pinça apreensão pte ativa longa.diam.5,0 x 200 mm C/C
- 0901 - Pinça apreensão vesicula diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0902 - Pinça apreensão vesicula fenes.serri. diam.5,0 x 200 mm C/C
- 0903 - Pinça apreensão vesicula fenes.serri. diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0904 - Pinça apreensão vesicula fenestrada diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0905 - Pinça apreensão vesicula serrilhada diam.5,0 x 200 mm C/C
- 0906 - Pinça apreensão vesicula serrilhada diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0907 - Pinça apreensão vesicula serrilhada diam.5,0 x 420 mm C/C
- 0908 - Pinça atraumática diam.10,0 x 330 mm C/C
- 0909 - Pinça atraumática TP Bakey 60 mm boca diam.10,0 x 330 mm C/C
- 0910 - Pinça babcock c/ serrilha de bakey diam.10,0 x 330 mm C/C
- 0911 - Pinça babcock c/ widea diam.10,0 x 330 mm C/C
- 0912 - Pinça babcock serrilhada diam.10,0 x 330 mm C/C
- 0913 - Pinça babcock serrilhada diam.5,0 x 200 mm C/C
- 0914 - Pinça babcock serrilhada diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0915 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep.diam.10,0 x 200 mm C/C
- 0916 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep. diam.10,0 x 420 mm C/C
- 0917 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep.diam.5,0 x 200 mm C/C
- 0918 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep.PTR diam.5,0 x 200 mm C/C
- 0919 - Pinça fenestrada 30 mm boca diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0920 - Pinça fenestrada denteada em garra diam.5,0 x 330 mm C/C
- 0921 - Pinça mixter dissecação diam. 5,0 x 330 mm C/C
- 0922 - Pinça atraumática apreensão em U diam.5,0 x 330 mm
- 0923 - Pinça atraumatica em U diam.5,0 x 330 mm
- 0924 - Pinça saito reta
- 0925 - Pinça saito direita
- 0926 - Pinça saito esquerda
- 0927 - Pinça pozzi diam.10,0 x 330 mm
- 0928 - Pinça pozzi diam.5,0 x 330 mm
- 0929 - Pinça trompas de falópio em U diam.5,0 x 330 mm
- 0930 - Pinça apreensão atraumática serrilhada diam.5,0 x 330 mm S/C
- 0931 - Pinça apreensão atraumática serrilhada diam.5,0 x 420 mm S/C
- 0932 - Pinça apreensão dente de rato diam. 10,0 x 330 mm S/C
- 0933 - Pinça apreensão fenestrada diam. 5,0 x 330 mm S/C
- 0934 - Pinça apreensão fenestrada diam. 5,0 x 420 mm S/C
- 0935 - Pinça babcock apreensão serrilhada 14 cm
- 0936 - Pinça babcock apreensão serrilhada 15 cm
- 0937 - Pinça babcock apreensão serrilhada 16 cm
- 0938 - Pinça babcock apreensão serrilhada 17 cm
- 0939 - Pinça babcock apreensão serrilhada 18 cm
- 0940 - Pinça babcock apreensão serrilhada 19 cm
- 0941 - Pinça babcock apreensão serrilhada 20 cm
- 0942 - Pinça babcock apreensão serrilhada 22 cm
- 0943 - Pinça babcock apreensão serrilhada 23 cm
- 0944 - Pinça babcock apreensão serrilhada 24 cm
- 0945 - Pinça babcock apreensão serrilhada 25 cm
- 0946 - Pinça babcock apreensão serrilhada 26 cm
- 0947 - Pinça babcock apreensão serrilhada 30 cm
- 0948 - Pinça babcock apreensão serrilhada 35 cm
- 0949 - Pinça babcock apreensão serrilhada 40 cm
- 0950 - Pinça babcock apreensão serrilhada 45 cm
- 0952 - Pinça backaus 8 cm
- 0953 - Pinça backaus 9 cm
- 0954 - Pinça backaus 10 cm
- 0955 - Pinça backaus 11 cm
- 0956 - Pinça backaus 12 cm
- 0957 - Pinça backaus 13 cm
- 0958 - Pinça backaus 14 cm
- 0959 - Pinça backaus 15 cm
- 0960 - Pinça backaus 16 cm
- 0961 - Pinça backaus 17 cm
- 0962 - Pinça backaus 18 cm

0963	-	Pinça backaus 19 cm
0964	-	Pinça backaus 20 cm
0965	-	Pinça backaus 18 cm p/ osso
0966	-	Pinça backaus 8 cm c/ esfera
0967	-	Pinça backaus 9 cm c/ esfera
0968	-	Pinça backaus 10 cm c/ esfera
0969	-	Pinça backaus 11 cm c/ esfera
0970	-	Pinça backaus 12 cm c/ esfera
0971	-	Pinça backaus 13 cm c/ esfera
0972	-	Pinça backaus 14 cm c/ esfera
0973	-	Pinça backaus 15 cm c/ esfera
0974	-	Pinça backaus 16 cm c/ esfera
0975	-	Pinça backaus 17 cm c/ esfera
0976	-	Pinça backaus 18 cm c/ esfera
0977	-	Pinça backaus 19 cm c/ esfera
0978	-	Pinça backaus 20 cm c/ esfera
0979	-	Pinça barret 20 cm p/ colo uterino
0980	-	Pinça beck p/ aorta 14 cm
0981	-	Pinça beck p/ aorta 16 cm
0982	-	Pinça beck p/ aorta 18 cm
0983	-	Pinça beck p/ aorta 20 cm
0984	-	Pinça beck p/ aorta 22 cm
0985	-	Pinça beck p/ aorta 24 cm
0986	-	Pinça bengolea 22 cm reta
0987	-	Pinça bengolea 22 cm curva
0988	-	Pinça Bernhard 16 cm
0989	-	Pinça bonzemann 24 cm
0990	-	Pinça clamp carótica 16 cm
0991	-	Pinça clamp carótica 17 cm
0992	-	Pinça clamp carótica 18 cm
0993	-	Pinça clamp carótica 19 cm
0994	-	Pinça clamp carótica 20 cm
0995	-	Pinça clamp intestinal curva 18 cm
0996	-	Pinça clamp intestinal curva 20 cm
0997	-	Pinça clamp intestinal curva 22 cm
0998	-	Pinça clamp intestinal curva 24 cm
0999	-	Pinça clamp intestinal curva 26 cm
1000	-	Pinça clamp intestinal curva 28 cm
1001	-	Pinça clamp intestinal curva 30 cm
1002	-	Pinça clamp intestinal curva 35 cm
1003	-	Pinça clamp intestinal mayo robson curva 25 cm
1004	-	Pinça clamp intestinal mayo robson reta 25 cm
1005	-	Pinça clamp intestinal reta 18 cm
1006	-	Pinça clamp intestinal reta 22 cm
1007	-	Pinça clamp intestinal reta 26 cm
1008	-	Pinça clamp p/ transplante 18 cm
1009	-	Pinça clamp p/ transplante 20 cm
1010	-	Pinça clamp p/ transplante 21 cm
1011	-	Pinça clamp p/ transplante 23 cm
1012	-	Pinça clamp p/ transplante 24 cm
1013	-	Pinça clamp p/ transplante 25 cm
1014	-	Pinça collin coração 14 cm
1015	-	Pinça collin coração 15 cm
1016	-	Pinça collin coração 16 cm
1017	-	Pinça collin coração 17 cm
1018	-	Pinça collin coração 18 cm
1019	-	Pinça collin coração 19 cm
1020	-	Pinça collin coração 20 cm
1021	-	Pinça collin coração 21 cm
1022	-	Pinça collin coração 22 cm
1023	-	Pinça collin coração 23 cm
1024	-	Pinça collin coração 24 cm

1025	-	Pinça collin oval 14 cm
1026	-	Pinça collin oval 15 cm
1027	-	Pinça collin oval 16 cm
1028	-	Pinça collin oval 17 cm
1029	-	Pinça collin oval 18 cm
1030	-	Pinça collin oval 19 cm
1031	-	Pinça collin oval 20 cm
1032	-	Pinça collin oval 21 cm
1033	-	Pinça collin oval 22 cm
1034	-	Pinça collin oval 23 cm
1035	-	Pinça collin oval 24 cm
1036	-	Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 150 mm
1037	-	Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 200 mm
1038	-	Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 250 mm
1039	-	Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 300 mm
1040	-	Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 350 mm
1041	-	Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 400 mm
1042	-	Pinça collin reta 25 cm
1043	-	Pinça cooley 16,0 cm
1044	-	Pinça cooley 16,5 cm
1045	-	Pinça cooley 18,0 cm
1046	-	Pinça cooley 18,5 cm
1047	-	Pinça cooley 19,0 cm
1048	-	Pinça crafoord 18 cm curva
1049	-	Pinça crafoord 18 cm reta
1050	-	Pinça crafoord 20 cm curva
1051	-	Pinça crafoord 20 cm reta
1052	-	Pinça crafoord 22 cm curva
1053	-	Pinça crafoord 22 cm reta
1054	-	Pinça crafoord 24 cm curva
1055	-	Pinça crafoord 24 cm reta
1056	-	Pinça crile 14 cm curva delicada
1057	-	Pinça crile 14 cm curva
1058	-	Pinça crile 14 cm reta delicada
1059	-	Pinça crile 14 cm reta
1060	-	Pinça crile 16 cm curva delicada
1061	-	Pinça crile 16 cm curva
1062	-	Pinça crile 16 cm reta delicada
1063	-	Pinça crile 16 cm reta
1064	-	Pinça crile 18 cm curva delicada
1065	-	Pinça crile 18 cm curva
1066	-	Pinça crile 18 cm reta delicada
1067	-	Pinça crile 18 cm reta
1068	-	Pinça dandy couro cabeludo 14 cm
1069	-	Pinça dandy couro cabeludo 16 cm
1070	-	Pinça dandy couro cabeludo 18 cm
1071	-	Pinça dandy couro cabeludo 20 cm
1072	-	Pinça dartigues (histerolabo) 24 cm
1073	-	Pinça de bakey 13 cm ponta 45 mm curva
1074	-	Pinça de bakey 16 cm em S
1075	-	Pinça de bakey 18 cm em S
1076	-	Pinça de bakey 20 cm em S
1077	-	Pinça de bakey 22 cm em S
1078	-	Pinça de bakey 24 cm em S
1079	-	Pinça de bakey 26 cm em S
1080	-	Pinça de bakey aneurisma curva 25 cm ponta 85 mm
1081	-	Pinça de bakey aneurisma curva 30 cm ponta 100 mm
1082	-	Pinça de bakey aneurisma curva 32 cm ponta 120 mm
1083	-	Pinça de bakey angulada 45° 12,5 cm ponta 40 mm
1084	-	Pinça de bakey angulada 60° 18 cm ponta 75 mm
1085	-	Pinça de bakey angulada 60° 20 cm
1086	-	Pinça de bakey angulada 60° 23 cm

- 1087 - Pinça de bakey angulada 60° 25 cm
- 1088 - Pinça de bakey angulada 90° 10 cm ponta 38 mm
- 1089 - Pinça de bakey angulada 90° 23 cm ponta 45 mm
- 1090 - Pinça de bakey angulada 90° 27 cm ponta 108 mm
- 1091 - Pinça de bakey curva 12,5 cm ponta 45 mm
- 1092 - Pinça de bakey curva p/ aorta 29 cm
- 1093 - Pinça de bakey p/ aorta angulada 60° 25 cm
- 1094 - Pinça de bakey p/ aorta angulada 60° 32 cm
- 1095 - Pinça de bakey p/ aorta pediátrica 60° 18 cm
- 1096 - Pinça de bakey p/ coarctação 21 cm ponta curva 55 mm
- 1097 - Pinça de bakey p/ coarctação cabo angulado 17 cm ponta 50 mm
- 1098 - Pinça de bakey p/ coarctação cabo angulado 22 cm ponta 75 mm
- 1099 - Pinça de bakey p/ coarctação cabo angulado 24 cm ponta 80 mm
- 1100 - Pinça de bakey p/ coarctação reta 17 cm ponta 50 mm
- 1101 - Pinça de bakey p/ coarctação reta 22 cm ponta 55 mm
- 1102 - Pinça de bakey p/ coarctação reta 22 cm ponta 75 mm
- 1103 - Pinça de bakey p/ coarctação reta 24 cm ponta 55 mm
- 1104 - Pinça de bakey p/ coarctação reta 24 cm ponta 75 mm
- 1105 - Pinça de bakey reta 12,5 cm 45 mm
- 1106 - Pinça de bakey reta 18 cm ponta 75 mm
- 1107 - Pinça de bakey reta 23 cm
- 1108 - Pinça de bakey reta 25 cm
- 1109 - Pinça de bakey vascular periférica Ang. 20 cm
- 1110 - Pinça de bakey vascular periférica curva 16 cm
- 1111 - Pinça de bakey vascular periférica curva 18,5 cm
- 1112 - Pinça de bakey vascular periférica curva 18,0 cm
- 1113 - Pinça de bakey vascular periférica curva 20,0 cm
- 1114 - Pinça de bakey-bainbridge curva 17 cm
- 1115 - Pinça de bakey-bainbridge reta 15,5 cm
- 1116 - Pinça de bakey-beck 17 cm
- 1117 - Pinça de bakey-glover curta 17 cm
- 1118 - Pinça de redução fino encaixe 16 cm
- 1119 - Pinça de redução óssea c/ ponta 12 cm
- 1120 - Pinça de redução óssea c/ ponta 14 cm
- 1121 - Pinça de redução óssea c/ ponta 16 cm
- 1122 - Pinça de redução óssea c/ ponta 18 cm
- 1123 - Pinça de redução óssea c/ ponta 20 cm
- 1124 - Pinça de redução óssea c/ ponta 22 cm
- 1125 - Pinça de redução óssea c/ ponta 24 cm
- 1126 - Pinça de redução óssea c/ ponta 26 cm
- 1127 - Pinça de redução óssea c/ ponta 28 cm
- 1128 - Pinça de redução óssea c/ ponta 20 cm abert. 9 mm
- 1129 - Pinça de redução reil 17 cm
- 1130 - Pinça de seqüestro van buren 23 cm
- 1131 - Pinça derra 14 cm
- 1132 - Pinça derra 16 cm
- 1133 - Pinça derra 17 cm
- 1134 - Pinça derra 17 cm ponta 15 mm
- 1135 - Pinça derra 17 cm ponta 20 mm
- 1136 - Pinça derra 17 cm ponta 25 mm
- 1137 - Pinça derra 18 cm
- 1138 - Pinça derra 20 cm
- 1139 - Pinça derra 22 cm
- 1140 - Pinça derra 24 cm
- 1141 - Pinça derra forte
- 1142 - Pinça cheron serrilhada 16 cm
- 1143 - Pinça cheron serrilhada 18 cm
- 1144 - Pinça cheron serrilhada 20 cm
- 1145 - Pinça cheron serrilhada 22 cm
- 1146 - Pinça cheron serrilhada 24 cm
- 1147 - Pinça cheron serrilhada 25 cm
- 1148 - Pinça cheron serrilhada 28 cm

1149	-	Pinça cheron serrilhada 30 cm
1150	-	Pinça doyen curva intestinal 25 cm
1151	-	Pinça doyen reta intestinal 25 cm
1152	-	Pinça doyen atraumática 14 cm reta
1153	-	Pinça doyen atraumática 16 cm reta
1154	-	Pinça doyen atraumática 18 cm reta
1155	-	Pinça doyen atraumática 20 cm reta
1156	-	Pinça doyen atraumática 21 cm reta
1157	-	Pinça doyen atraumática 23 cm reta
1158	-	Pinça doyen atraumática 24 cm reta
1159	-	Pinça doyen atraumática 26 cm reta
1160	-	Pinça doyen atraumática 28 cm reta
1161	-	Pinça doyen atraumática 30 cm reta
1162	-	Pinça doyen atraumática 14 cm curva
1163	-	Pinça doyen atraumática 16 cm curva
1164	-	Pinça doyen atraumática 18 cm curva
1165	-	Pinça doyen atraumática 20 cm curva
1166	-	Pinça doyen atraumática 21 cm curva
1167	-	Pinça doyen atraumática 23 cm curva
1168	-	Pinça doyen atraumática 24 cm curva
1169	-	Pinça doyen atraumática 26 cm curva
1170	-	Pinça doyen atraumática 28 cm curva
1171	-	Pinça doyen atraumática 30 cm curva
1172	-	Pinça duval 12 cm c/ widia
1173	-	Pinça duval 14 cm c/ widia
1174	-	Pinça duval 16 cm c/ widia
1175	-	Pinça duval 18 cm c/ widia
1176	-	Pinça duval 20 cm c/ widia
1177	-	Pinça duval 21 cm c/ widia
1178	-	Pinça duval 22 cm c/ widia
1179	-	Pinça duval 23 cm c/ widia
1180	-	Pinça duval 24 cm c/ widia
1181	-	Pinça duval 25 cm c/ widia
1182	-	Pinça duval 26 cm c/ widia
1183	-	Pinça duval 28 cm c/ widia
1184	-	Pinça duval 30 cm c/ widia
1185	-	Pinça duval 32 cm c/ widia
1186	-	Pinça duval 34 cm c/ widia
1187	-	Pinça duval 35 cm c/ widia
1188	-	Pinça duval collin 12 cm
1189	-	Pinça duval collin 14 cm
1190	-	Pinça duval collin 16 cm
1191	-	Pinça duval collin 18 cm
1192	-	Pinça duval collin 20 cm
1193	-	Pinça duval collin 22 cm
1194	-	Pinça duval collin 24 cm
1195	-	Pinça duval collin 26 cm
1196	-	Pinça duval collin 28 cm
1197	-	Pinça duval collin 30 cm
1198	-	Pinça faure 14 cm reta
1199	-	Pinça faure 16 cm reta
1200	-	Pinça faure 18 cm reta
1201	-	Pinça faure 20 cm reta
1202	-	Pinça faure 22 cm reta
1203	-	Pinça faure 24 cm reta
1204	-	Pinça faure 26 cm reta
1205	-	Pinça faure 14 cm curva
1206	-	Pinça faure 16 cm curva
1207	-	Pinça faure 18 cm curva
1208	-	Pinça faure 20 cm curva
1209	-	Pinça faure 22 cm curva
1210	-	Pinça faure 24 cm curva

1211	-	Pinça faure 26 cm curva
1212	-	Pinça faure p/ biopsia uterina 24 cm
1213	-	Pinça clipadora diam. 5,0 x 330 mm p/ LT200
1214	-	Pinça clipadora diam. 10,0 x 330 mm p/ LT300
1215	-	Pinça espanhola 14 cm
1216	-	Pinça espanhola 16 cm
1217	-	Pinça espanhola 18 cm
1218	-	Pinça espanhola 19 cm
1219	-	Pinça espanhola 20 cm
1220	-	Pinça espanhola 22 cm
1221	-	Pinça espanhola 24 cm
1222	-	Pinça espanhola 26 cm
1223	-	Pinça espanhola 28 cm
1224	-	Pinça espanhola 30 cm
1225	-	Pinça fergusson óssea 20 cm
1226	-	Pinça corretora
1227	-	Pinça de compressao
1228	-	Pinça finochietto 20 cm
1229	-	Pinça finochietto 22 cm
1230	-	Pinça finochietto 24 cm
1231	-	Pinça de distração
1232	-	Pinça de rinofaringe jacaré
1233	-	Pinça de rinofaringe jacaré direita
1234	-	Pinça de rinofaringe jacaré esquerda
1235	-	Pinça de rinofaringe jacaré giratória
1236	-	Pinça endoscópica apreensão trava rapida diam. 5,0 x 330 mm
1237	-	Pinça endoscópica apreensão trava rapida diam. 10 x 330 mm
1238	-	Pinça endoscópica doyen giratória 3 x 2 dentes 150 mm
1239	-	Pinça endoscópica doyen giratória 3 x 2 dentes 200 mm
1240	-	Pinça endoscópica doyen giratória 3 x 2 dentes 330 mm
1241	-	Pinça endoscópica doyen giratória 3 x 2 dentes 420 mm
1242	-	Pinça endoscópica grasper diam. 10,0 x 330 mm
1243	-	Pinça foerster 14 cm reta
1244	-	Pinça foerster 16 cm reta
1245	-	Pinça foerster 18 cm reta
1246	-	Pinça foerster 20 cm reta
1247	-	Pinça foerster 22 cm reta
1248	-	Pinça foerster 24 cm reta
1249	-	Pinça foerster 26 cm reta
1250	-	Pinça foerster 28 cm reta
1251	-	Pinça foerster 30 cm reta
1252	-	Pinça foerster 32 cm reta
1253	-	Pinça foerster 34 cm reta
1254	-	Pinça foerster 14 cm curva
1255	-	Pinça foerster 16 cm curva
1256	-	Pinça foerster 18 cm curva
1257	-	Pinça foerster 20 cm curva
1258	-	Pinça foerster 22 cm curva
1259	-	Pinça foerster 24 cm curva
1260	-	Pinça foerster 26 cm curva
1261	-	Pinça foerster 28 cm curva
1262	-	Pinça foerster 30 cm curva
1263	-	Pinça foerster 32 cm curva
1264	-	Pinça foerster 34 cm curva
1265	-	Pinça foerster 14 cm reta serrilhada
1266	-	Pinça foerster 16 cm reta serrilhada
1267	-	Pinça foerster 18 cm reta serrilhada
1268	-	Pinça foerster 20 cm reta serrilhada
1269	-	Pinça foerster 22 cm reta serrilhada
1270	-	Pinça foerster 24 cm reta serrilhada
1271	-	Pinça foerster 26 cm reta serrilhada
1272	-	Pinça foerster 28 cm reta serrilhada

1273	-	Pinça foerster 30 cm reta serrilhada
1274	-	Pinça foerster 32 cm reta serrilhada
1275	-	Pinça foerster 34 cm reta serrilhada
1276	-	Pinça foerster 14 cm curva serrilhada
1277	-	Pinça foerster 16 cm curva serrilhada
1278	-	Pinça foerster 18 cm curva serrilhada
1279	-	Pinça foerster 20 cm curva serrilhada
1280	-	Pinça foerster 22 cm curva serrilhada
1281	-	Pinça foerster 24 cm curva serrilhada
1282	-	Pinça foerster 26 cm curva serrilhada
1283	-	Pinça foerster 28 cm curva serrilhada
1284	-	Pinça foerster 30 cm curva serrilhada
1285	-	Pinça foerster 32 cm curva serrilhada
1286	-	Pinça foerster 34 cm curva serrilhada
1287	-	Pinça gemini 16 cm
1288	-	Pinça gemini 18 cm
1289	-	Pinça gemini 20 cm
1290	-	Pinça gemini 22 cm
1291	-	Pinça guyon 14 cm
1292	-	Pinça guyon 16 cm
1293	-	Pinça guyon 18 cm
1294	-	Pinça guyon 20 cm
1295	-	Pinça guyon 22 cm
1296	-	Pinça guyon 24 cm
1297	-	Pinça guyon 26 cm
1298	-	Pinça shoroeder 25 cm 2 x 2 dentes
1299	-	Pinça Hartmann 80 mm
1300	-	Pinça Hartmann 150 mm
1301	-	Pinça Hartmann 190 mm
1302	-	Pinça hemostática kelly reta 12 cm
1303	-	Pinça hemostática kelly reta delicada 14 cm
1304	-	Pinça hemostática kelly reta 14 cm
1305	-	Pinça hemostática kelly reta 15 cm
1306	-	Pinça hemostática kelly reta 16 cm
1307	-	Pinça hemostática kelly reta 18 cm
1308	-	Pinça hemostática kelly reta 20 cm
1309	-	Pinça hemostática kelly reta 24 cm
1310	-	Pinça hemostática kelly reta 25 cm
1311	-	Pinça hemostática kelly reta 26 cm
1312	-	Pinça hemostática kelly reta 28 cm
1313	-	Pinça hemostática kelly reta 30 cm
1314	-	Pinça Kelly-hankin 16 cm reta
1315	-	Pinça hemostática kelly curva 12 cm
1316	-	Pinça hemostática kelly curva delicada 14 cm
1317	-	Pinça hemostática kelly curva 14 cm
1318	-	Pinça hemostática kelly curva 15 cm
1319	-	Pinça hemostática kelly curva 16 cm
1320	-	Pinça hemostática kelly curva 18 cm
1321	-	Pinça hemostática kelly curva 20 cm
1322	-	Pinça hemostática kelly curva 24 cm
1323	-	Pinça hemostática kelly curva 25 cm
1324	-	Pinça hemostática kelly curva 26 cm
1325	-	Pinça hemostática kelly curva 28 cm
1326	-	Pinça hemostática kelly curva 30 cm
1327	-	Pinça Kelly-hankin 16 cm curva
1328	-	Pinça kern óssea 13 cm s/ cremalheira
1329	-	Pinça kern óssea 16 cm s/ cremalheira
1330	-	Pinça kern óssea 19 cm s/ cremalheira
1331	-	Pinça kern óssea 21 cm s/ cremalheira
1332	-	Pinça kern óssea 24 cm s/ cremalheira
1333	-	Pinça kern óssea 13 cm c/ cremalheira
1334	-	Pinça kern óssea 16 cm c/ cremalheira

1335	-	Pinça kern óssea 19 cm c/ cremalheira
1336	-	Pinça kern óssea 21 cm c/ cremalheira
1337	-	Pinça kern óssea 24 cm c/ cremalheira
1338	-	Pinça semb 19 cm óssea s/ cremalheira
1339	-	Pinça semb 20 cm óssea s/ cremalheira
1340	-	Pinça semb 19 cm óssea c/ cremalheira
1341	-	Pinça semb 20 cm óssea c/ cremalheira
1342	-	Pinça semb 14 cm
1343	-	Pinça semb 16 cm
1344	-	Pinça semb 18 cm
1345	-	Pinça semb 20 cm
1346	-	Pinça semb 23 cm
1347	-	Pinça semb 25 cm
1348	-	Pinça semb 26 cm
1349	-	Pinça semb 27 cm
1350	-	Pinça semb 28 cm
1351	-	Pinça semb 30 cm
1352	-	Pinça semb 32 cm
1353	-	Pinça halsted mosquito 10 cm reta
1354	-	Pinça halsted mosquito 12 cm reta
1355	-	Pinça halsted mosquito 12,5 cm reta
1356	-	Pinça halsted mosquito 13 cm reta
1357	-	Pinça halsted mosquito 14 cm reta
1358	-	Pinça halsted mosquito 15 cm reta
1359	-	Pinça halsted mosquito 16 cm reta
1360	-	Pinça halsted mosquito 17 cm reta
1361	-	Pinça halsted mosquito 18 cm reta
1362	-	Pinça halsted mosquito 19 cm reta
1363	-	Pinça halsted mosquito 20 cm reta
1364	-	Pinça halsted mosquito 21 cm reta
1365	-	Pinça halsted mosquito 10 cm curva
1366	-	Pinça halsted mosquito 12 cm curva
1367	-	Pinça halsted mosquito 12,5 cm curva
1368	-	Pinça halsted mosquito 13 cm curva
1369	-	Pinça halsted mosquito 14 cm curva
1370	-	Pinça halsted mosquito 15 cm curva
1371	-	Pinça halsted mosquito 16 cm curva
1372	-	Pinça halsted mosquito 17 cm curva
1373	-	Pinça halsted mosquito 18 cm curva
1374	-	Pinça halsted mosquito 19 cm curva
1375	-	Pinça halsted mosquito 20 cm curva
1376	-	Pinça halsted mosquito 21 cm curva
1377	-	Pinça halsted mosquito 22 cm curva
1378	-	Pinça micromosquito 12 cm reta
1379	-	Pinça micromosquito 12 cm curva
1380	-	Pinça hemostática mosquito reta 9 cm
1381	-	Pinça hemostática mosquito reta 10 cm
1382	-	Pinça hemostática mosquito reta 12 cm
1383	-	Pinça hemostática mosquito reta 14 cm
1384	-	Pinça hemostática mosquito reta 15 cm
1385	-	Pinça hemostática mosquito reta 16 cm
1386	-	Pinça hemostática mosquito reta 18 cm
1387	-	Pinça hemostática mosquito reta 21 cm
1388	-	Pinça hemostática mosquito reta 23 cm
1389	-	Pinça hemostática mosquito reta 25 cm
1390	-	Pinça hemostática mosquito reta 28 cm
1391	-	Pinça hemostática mosquito reta 30 cm
1392	-	Pinça hemostática mosquito curva 9 cm
1393	-	Pinça hemostática mosquito curva 10 cm
1394	-	Pinça hemostática mosquito curva 12 cm
1395	-	Pinça hemostática mosquito curva 14 cm
1396	-	Pinça hemostática mosquito curva 15 cm

1397	-	Pinça hemostática mosquito curva 16 cm
1398	-	Pinça hemostática mosquito curva 18 cm
1399	-	Pinça hemostática mosquito curva 21 cm
1400	-	Pinça hemostática mosquito curva 23 cm
1401	-	Pinça hemostática mosquito curva 25 cm
1402	-	Pinça hemostática mosquito curva 28 cm
1403	-	Pinça hemostática mosquito curva 30 cm
1404	-	Pinça hemostática schnidt curva leve 18 cm
1405	-	Pinça hemostática schnidt curva forte 18 cm
1406	-	Pinça hemostática schnidt curva leve 21 cm
1407	-	Pinça hemostática schnidt curva forte 21 cm
1408	-	Pinça hemostática schnidt reta leve 18 cm
1409	-	Pinça hemostática schnidt reta forte 18 cm
1410	-	Pinça hemostática schnidt reta leve 21 cm
1411	-	Pinça hemostática schnidt reta forte 21 cm
1412	-	Pinça hemostática scobee- Allis angulada
1413	-	Pinça allis 12 cm
1414	-	Pinça allis 13 cm
1415	-	Pinça allis 14 cm
1416	-	Pinça allis 15 cm
1417	-	Pinça allis 16 cm
1418	-	Pinça allis 17 cm
1419	-	Pinça allis 18 cm
1420	-	Pinça allis 19 cm
1421	-	Pinça allis 20 cm
1422	-	Pinça allis 21 cm
1423	-	Pinça allis 22 cm
1424	-	Pinça allis 23 cm
1425	-	Pinça allis 24 cm
1426	-	Pinça allis 25 cm
1427	-	Pinça allis 26 cm
1428	-	Pinça allis 27 cm
1429	-	Pinça allis 28 cm
1430	-	Pinça allis 29 cm
1431	-	Pinça allis 30 cm
1432	-	Pinça moyanihan 21 cm
1433	-	Pinça jacaré ambulatorio angulada
1434	-	Pinça jacaré ambulatorio curva direita
1435	-	Pinça jacaré ambulatorio curva esquerda
1436	-	Pinça jacaré ambulatorio reta
1437	-	Pinça jacaré delicada angulada
1438	-	Pinça jacaré delicada curva direita
1439	-	Pinça jacaré delicada curva esquerda
1440	-	Pinça jacaré delicada reta
1441	-	Pinça jacaré de laringe angulada
1442	-	Pinça jacaré de laringe curva direita
1443	-	Pinça jacaré de laringe curva esquerda
1444	-	Pinça jacaré de laringe reta
1445	-	Pinça microendonasal jacaré 140 mm
1446	-	Pinça anatômica aplic. de clips sugita biart.lateramente
1447	-	Pinça aplic. de clips tipo sugita articulada
1448	-	Pinça aplicadora anatômica clips yasargil mini
1449	-	Pinça aplicadora anatômica clips yasargil standard
1450	-	Pinça museux 22 cm reta
1451	-	Pinça museux 24 cm reta
1452	-	Pinça museux 22 cm curva
1453	-	Pinça museux 24 cm curva
1454	-	Pinça aplicadora clips mackenzie 14 cm
1455	-	Pinça aplicadora clips mackenzie 15 cm
1456	-	Pinça aplicadora clips mackenzie 16 cm
1457	-	Pinça aplicadora clips mackenzie 18 cm
1458	-	Pinça aplicadora clips mackenzie 20 cm

- 1459 - Pinça aplicadora clips raney
- 1460 - Pinça aplicadora scoville 18 cm
- 1461 - Pinça auto centrante 14 cm
- 1462 - Pinça auto centrante 16 cm
- 1463 - Pinça auto centrante 18 cm
- 1464 - Pinça auto centrante 19 cm
- 1465 - Pinça auto centrante 20 cm
- 1466 - Pinça auto centrante 22 cm
- 1467 - Pinça auto centrante 24 cm
- 1468 - Pinça auto centrante 26 cm
- 1469 - Pinça auto centrante 28 cm
- 1470 - Pinça kocher 14 cm reta
- 1471 - Pinça kocher 16 cm reta
- 1472 - Pinça kocher 18 cm reta
- 1473 - Pinça kocher 20 cm reta
- 1474 - Pinça kocher 22 cm reta
- 1475 - Pinça kocher 24 cm reta
- 1476 - Pinça kocher 25 cm reta
- 1477 - Pinça kocher 25 cm reta coprostasi e intestinal
- 1478 - Pinça kocher 26 cm reta
- 1479 - Pinça kocher 28 cm reta
- 1480 - Pinça kocher 30 cm reta
- 1481 - Pinça kocher 35 cm reta
- 1482 - Pinça kocher 14 cm curva
- 1483 - Pinça kocher 16 cm curva
- 1484 - Pinça kocher 18 cm curva
- 1485 - Pinça kocher 20 cm curva
- 1486 - Pinça kocher 22 cm curva
- 1487 - Pinça kocher 24 cm curva
- 1488 - Pinça kocher 25 cm curva
- 1489 - Pinça kocher 25cm curva coprostasi e intestinal
- 1490 - Pinça kocher 26 cm curva
- 1491 - Pinça kocher 28 cm curva
- 1492 - Pinça kocher 30 cm curva
- 1493 - Pinça kocher 35 cm curva
- 1494 - Pinça kocher atraumática 22 cm reta
- 1495 - Pinça kocher atraumática 24 cm reta
- 1496 - Pinça kocher atraumática 25 cm reta
- 1497 - Pinça kocher atraumática 26 cm reta
- 1498 - Pinça kocher atraumática 28 cm reta
- 1499 - Pinça kocher atraumática 22 cm curva
- 1500 - Pinça kocher atraumática 24 cm curva
- 1501 - Pinça kocher atraumática 25 cm curva
- 1502 - Pinça kocher atraumática 26 cm curva
- 1503 - Pinça kocher atraumática 28 cm curva
- 1504 - Pinça tuffier 14 cm
- 1505 - Pinça tuffier 16 cm
- 1506 - Pinça tuffier 18 cm
- 1507 - Pinça tuffier 20 cm
- 1508 - Pinça lahey 15 cm
- 1509 - Pinça lahey 19 cm
- 1510 - Pinça lahey 20 cm
- 1511 - Pinça lahey 24 cm
- 1512 - Pinça lambert-kay 21 cm
- 1513 - Pinça lane 22 cm s/ cremalheira
- 1514 - Pinça lane 27 cm s/ cremalheira
- 1515 - Pinça lane 32 cm s/ cremalheira
- 1516 - Pinça lane 33 cm s/ cremalheira
- 1517 - Pinça lane 43 cm s/ cremalheira
- 1518 - Pinça lane 22 cm c/ cremalheira
- 1519 - Pinça lane 27 cm c/ cremalheira
- 1520 - Pinça lane 32 cm c/ cremalheira

1521	-	Pinça lane 33 cm c/ cremalheira
1522	-	Pinça lane 43 cm c/ cremalheira
1523	-	Pinça magill 12 cm
1524	-	Pinça magill 14 cm
1525	-	Pinça magill 15 cm
1526	-	Pinça magill 16 cm
1527	-	Pinça magill 18 cm
1528	-	Pinça magill 20 cm
1529	-	Pinça magill 22 cm
1530	-	Pinça magill 24 cm
1531	-	Pinça magill 25 cm
1532	-	Pinça heiss 20 cm curva
1533	-	Pinça heiss 20 cm reta
1534	-	Pinça Harrington mixer 23 cm
1535	-	Pinça Harrington mixer 32 cm
1536	-	Pinça hartmann halsted 10 cm curva
1537	-	Pinça hartmann halsted 10 cm reta
1538	-	Pinça providence-hospital reta 14 cm
1539	-	Pinça providence-hospital curva 14 cm
1540	-	Pinça mixer 13 cm
1541	-	Pinça mixer 14 cm
1542	-	Pinça mixer 16 cm
1543	-	Pinça mixer 17 cm
1544	-	Pinça mixer 18 cm
1545	-	Pinça mixer 19 cm
1546	-	Pinça mixer 20 cm
1547	-	Pinça mixer 21 cm
1548	-	Pinça mixer 22 cm
1549	-	Pinça mixer 23 cm
1550	-	Pinça mixer 24 cm
1551	-	Pinça mixer 25 cm
1552	-	Pinça mixer 28 cm
1553	-	Pinça mixer 30 cm
1554	-	Pinça mixer 35 cm
1555	-	Pinça mixer 40 cm
1556	-	Pinça mixer 45 cm
1557	-	Pinça verbrugge 17,5 cm
1558	-	Pinça verbrugge 19 cm
1559	-	Pinça verbrugge 20 cm
1560	-	Pinça verbrugge 25 cm
1561	-	Pinça verbrugge 26 cm
1562	-	Pinça verbrugge 27 cm
1563	-	Pinça wetheim 20 cm
1564	-	Pinça wetheim 22 cm
1565	-	Pinça wetheim 24 cm
1566	-	Pinça wetheim 26 cm
1567	-	Pinça winter curva n°1 27 cm
1568	-	Pinça winter curva n°2 27 cm
1569	-	Pinça winter curva n°3 27 cm
1570	-	Pinça winter reta n°1 27 cm
1571	-	Pinça winter reta n°2 27 cm
1572	-	Pinça winter reta n°3 27 cm
1573	-	Pinça winter curva 28 cm
1574	-	Pinça winter reta 28 cm
1575	-	Pinça randall p/ calculo renal n°1
1576	-	Pinça randall p/ calculo renal n°2
1577	-	Pinça randall p/ calculo renal n°3
1578	-	Pinça randall p/ calculo renal n°4
1579	-	Pinça randall 23 cm
1580	-	Pinça randall 21 cm
1581	-	Pinça randall 19,5 cm
1582	-	Pinça randall 19,0 cm

- 1583 - Pinça forte pegada maingot 25 cm
- 1584 - Pinça martin 14 cm p/ menisco
- 1585 - Pinça martin 16 cm p/ menisco
- 1586 - Pinça martin 18 cm p/ menisco
- 1587 - Pinça martin 19 cm p/ menisco
- 1588 - Pinça martin 20 cm p/ menisco
- 1589 - Pinça martin 22 cm p/ menisco
- 1590 - Pinça martin 24 cm p/ menisco
- 1591 - Pinça p/ gancho ponte DTT
- 1592 - Pinça p/ haste longitudinal
- 1593 - Pinça p/ haste transversal
- 1594 - Pinça Z clamp 24 cm forte curva
- 1595 - Pinça Z clamp 24 cm curva
- 1596 - Pinça Z clamp 24 cm leve curva
- 1597 - Pinça Z clamp 24 cm semi curva
- 1598 - Pinça Z clamp 24 cm reta
- 1599 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 2 mm
- 1600 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 3 mm
- 1601 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 4 mm
- 1602 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 5 mm
- 1603 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 6 mm
- 1604 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 8 mm
- 1605 - Pinça pean murphy 14 cm
- 1606 - Pinça pean murphy 16 cm
- 1607 - Pinça pean murphy reta 16 cm
- 1608 - Pinça pean murphy curva 16 cm
- 1609 - Pinça pean murphy 18 cm
- 1610 - Pinça pean murphy 20 cm
- 1611 - Pinça pean murphy 23 cm
- 1612 - Pinça pean murphy 25 cm
- 1613 - Pinça pean 14 cm
- 1614 - Pinça pean 16 cm
- 1615 - Pinça pean 18 cm
- 1616 - Pinça pean 20 cm
- 1617 - Pinça pean 23 cm
- 1618 - Pinça pean 25 cm
- 1619 - Pinça schnidt 5,0 mm x 21 cm
- 1620 - Pinça zenker 29,5 cm forte curva
- 1621 - Pinça zenker 29,5 cm curva
- 1622 - Pinça zenker 29,5 cm leve curva
- 1623 - Pinça zenker 29,5 cm semi curva
- 1624 - Pinça zenker 29,5 cm reta
- 1625 - Pinça rochester carmalt 16 cm curva
- 1626 - Pinça rochester carmalt 18 cm curva
- 1627 - Pinça rochester carmalt 20 cm curva
- 1628 - Pinça rochester carmalt 22 cm curva
- 1629 - Pinça rochester carmalt 24 cm curva
- 1630 - Pinça rochester carmalt 28 cm curva
- 1631 - Pinça rochester carmalt 16 cm reta
- 1632 - Pinça rochester carmalt 18 cm reta
- 1633 - Pinça rochester carmalt 20 cm reta
- 1634 - Pinça rochester carmalt 22 cm reta
- 1635 - Pinça rochester carmalt 24 cm reta
- 1636 - Pinça rochester carmalt 28 cm reta
- 1637 - Pinça rochester-ochsner 16 cm curva
- 1638 - Pinça rochester-ochsner 18 cm curva
- 1639 - Pinça rochester-ochsner 20 cm curva
- 1640 - Pinça rochester-ochsner 22 cm curva
- 1641 - Pinça rochester-ochsner 24 cm curva
- 1642 - Pinça rochester-ochsner 28 cm curva
- 1643 - Pinça rochester-ochsner 16 cm reta
- 1644 - Pinça rochester-ochsner 18 cm reta










1645	-	Pinça rochester-ochsner 20 cm reta
1646	-	Pinça rochester-ochsner 22 cm reta
1647	-	Pinça rochester-ochsner 24 cm reta
1648	-	Pinça rochester-ochsner 28 cm reta
1649	-	Pinça rochester-pean 16 cm curva
1650	-	Pinça rochester-pean 18 cm curva
1651	-	Pinça rochester-pean 20 cm curva
1652	-	Pinça rochester-pean 22 cm curva
1653	-	Pinça rochester-pean 24 cm curva
1654	-	Pinça rochester-pean 26 cm curva
1655	-	Pinça rochester-pean 30 cm curva
1656	-	Pinça rochester-pean 16 cm reta
1657	-	Pinça rochester-pean 18 cm reta
1658	-	Pinça rochester-pean 20 cm reta
1659	-	Pinça rochester-pean 22 cm reta
1660	-	Pinça rochester-pean 24 cm reta
1661	-	Pinça rochester-pean 26 cm reta
1662	-	Pinça rochester-pean 30 cm reta
1663	-	Pinça rowel reta lado direito
1664	-	Pinça rowel baioneta lado direito
1665	-	Pinça rowel reta lado esquerdo
1666	-	Pinça rowel baioneta lado esquerdo
1667	-	Pinça rumel curva 24 cm
1668	-	Pinça rumel curva forte 24 cm
1669	-	Pinça rumel curva leve 24 cm
1670	-	Pinça rumel semi curva 24 cm
1671	-	Pinça sarot 24 cm
1672	-	Pinça espécímetro
1673	-	Pinça porta implante
1674	-	Pinça smith
1675	-	Pinça dingman
1676	-	Pinça bico de pato 16 cm
1677	-	Pinça bico de pato 18 cm
1678	-	Pinça bico de pato 20 cm
1679	-	Pinça adlerkreut
1680	-	Pinça adson hemostática reta 18,5 cm
1681	-	Pinça adson hemostática curva 18,5 cm
1682	-	Pinça Adson protetora de dura
1683	-	Pinça pozzi 16 cm
1684	-	Pinça pozzi 18 cm
1685	-	Pinça pozzi 20 cm
1686	-	Pinça pozzi 24 cm
1687	-	Pinça pozzi 26 cm
1688	-	Pinça pozzi 28 cm
1689	-	Pinça pozzi 30 cm
1690	-	Pinça pozzi 32 cm
1691	-	Pinça pozzi 34 cm
1692	-	Pinça pratt 2 x 2 dentes 26 cm
1693	-	Pinça pratt 3 x 3 dentes 26 cm
1694	-	Pinça pratt 4 x 4 dentes 26 cm
1695	-	Pinça reynald p/ tubo 14 cm
1696	-	Pinça reynald p/ tubo 16 cm
1697	-	Pinça reynald p/ tubo 18 cm
1698	-	Pinça reynald p/ tubo 20 cm
1699	-	Pinça reynald p/ tubo 22 cm
1700	-	Pinça cushing 2 x 10 x 120 mm
1701	-	Pinça cushing 2 x 10 x 150 mm
1702	-	Pinça cushing 2 x 10 x 180 mm
1703	-	Pinça cushing 2 x 10 x 200 mm
1704	-	Pinça cushing 45° p/ cima 2 x 10 x 120 mm
1705	-	Pinça cushing 45° p/ cima 2 x 10 x 150 mm
1706	-	Pinça cushing 45° p/ cima 2 x 10 x 180 mm

1707	-	Pinça cushioning 45° p/ cima 2 x 10 x 200 mm
1708	-	Pinça cushioning 45° p/ baixo 2 x 10 x 120 mm
1709	-	Pinça cushioning 45° p/ baixo 2 x 10 x 150 mm
1710	-	Pinça cushioning 45° p/ baixo 2 x 10 x 180 mm
1711	-	Pinça cushioning 45° p/ baixo 2 x 10 x 200 mm
1712	-	Pinça love gruenwald 3 x 10 x 120 mm
1713	-	Pinça love gruenwald 3 x 10 x 150 mm
1714	-	Pinça love gruenwald 3 x 10 x 180 mm
1715	-	Pinça love gruenwald 3 x 10 x 200 mm
1716	-	Pinça love gruenwald p/ cima 45 ° 3 x 10 x 120 mm
1717	-	Pinça love gruenwald p/ cima 45 ° 3 x 10 x 150 mm
1718	-	Pinça love gruenwald p/ cima 45 ° 3 x 10 x 180 mm
1719	-	Pinça love gruenwald p/ cima 45 ° 3 x 10 x 200 mm
1720	-	Pinça love gruenwald p/ baixo 45 ° 3 x 10 x 120 mm
1721	-	Pinça love gruenwald p/ baixo 45 ° 3 x 10 x 150 mm
1722	-	Pinça love gruenwald p/ baixo 45 ° 3 x 10 x 180 mm
1723	-	Pinça love gruenwald p/ baixo 45 ° 3 x 10 x 200 mm
1724	-	Pinça spurling 4 x 10 x 120 mm
1725	-	Pinça spurling 4 x 10 x 150 mm
1726	-	Pinça spurling 4 x 10 x 180 mm
1727	-	Pinça spurling 4 x 10 x 200 mm
1728	-	Pinça spurling p/ cima 45 ° 4 x 10 x 120 mm
1729	-	Pinça spurling p/ cima 45 ° 4 x 10 x 150 mm
1730	-	Pinça spurling p/ cima 45 ° 4 x 10 x 180 mm
1731	-	Pinça spurling p/ cima 45 ° 4 x 10 x 200 mm
1732	-	Pinça spurling p/ baixo 45 ° 4 x 10 x 120 mm
1733	-	Pinça spurling p/ baixo 45 ° 4 x 10 x 200 mm
1734	-	Pinça oldberg 180 mm
1735	-	Pinça landolt 200 mm
1736	-	Pinça yasargil 185 mm
1737	-	Pinça clips
1738	-	Porta especulo de holder
1739	-	Redutor de acoplar p/ bainha TP diafragma diam. 12,0 mm p/ 5,0 mm
1740	-	Redutor p/ bainha TP janela 10,0 mm p/ 5,0 mm
1741	-	Suporte de Crânio bud hallo
1742	-	Suporte de Crânio tipo gardner
1743	-	Suporte de Crânio tipo mayfield
1744	-	Suporte de Crânio hallo craniano
1745	-	Suporte flexivel
1746	-	Haste de yasargil
1747	-	Afastador millin c/ 5 lâminas abdominais e vesical
2069	-	Alicate p/ quebrar parafuso estendido
2388	-	Clamp bulldog glover boca curva 70 x 110 mm
2389	-	Clamp bulldog glover boca curva 35 x 70 mm
2390	-	Clamp bulldog glover boca curva 50 x 90 mm
2391	-	Clamp bulldog glover boca reta 70 x 110 mm
2392	-	Clamp bulldog glover boca reta 35 x 70 mm
2393	-	Clamp bulldog glover boca reta 50 x 90 mm
2406	-	Clamp lowmann 1 x 2 140 mm
2407	-	Clamp lowmann 1 x 2 185 mm
2408	-	Clamp lowmann 1 x 2 200 mm
2409	-	Clamp lowmann 2 x 2 140 mm
2410	-	Clamp lowmann 2 x 2 185 mm
2411	-	Clamp lowmann 2 x 2 200 mm
2682	-	Forceps kielland p/ obstetricia 390 mm
2683	-	Forceps lee p/ obstetricia 370 mm
2684	-	Forceps piper p/ obstetricia 440 mm
2685	-	Forceps simpsons p/ obstetricia 300 mm
2686	-	Forceps simpsons p/ obstetricia 350 mm
2687	-	Forceps simpsons p/ obstetricia 500 mm
5220	-	Adaptador bookwalter c/ regulagem de angulo
5221	-	Adaptador clipe toalha

5222	-	Adaptador engate rápido
5223	-	Adaptador omni c/ regulagem de angulo
5224	-	Adaptador synthes c/ regulagem de angulo
5225	-	Alavanca engate rápido
5226	-	Alavanca punho engate rápido
5227	-	Alavanca punho engate rápido nº1
5228	-	Alavanca punho engate rápido nº2
5229	-	Alavanca punho engate rápido bariátrica
5230	-	Barra bilateral articulada nº1
5231	-	Barra bilateral articulada nº2
5232	-	Barra duas ajustável
5233	-	Barra duas juntas
5234	-	Braço extensão articulada
5235	-	Extensor de trilho de mesa
5236	-	Grampo 25 cm c/ 1 presilha
5237	-	Grampo 25 cm c/ 2 presilha
5238	-	Grampo 45 cm c/ 1 presilha
5239	-	Grampo 45 cm c/ 2 presilha
5240	-	Grampo 55 cm c/ 1 presilha
5241	-	Grampo 55 cm c/ 2 presilha
5242	-	Grampo 65 cm c/ 1 presilha
5243	-	Grampo 65 cm c/ 2 presilha
5244	-	Grampo ajustável c/ 1 presilha p/ omni-tract
5245	-	Grampo ajustável c/ 1 presilha p/ bookwalter
5246	-	Grampo ajustável c/ 1 presilha
5247	-	Grampo ajustável c/ 2 presilha
5248	-	Grampo trilho
5249	-	Manivela engate rápido nº1
5250	-	Manivela engate rápido nº2
5251	-	Porta instrumento laparoscópica elite
5252	-	Porta instrumento laparoscópica
5253	-	Suporte de lamina flexível
5254	-	Suporte holder flexível elite
5255	-	Suporte holder flexível
5256	-	Afastador LD
2095	-	Afastador Sarks
2096	-	Afastador Smith
2939	-	Torquimetro de quebra
2940	-	Torquimetro de quebra 80 newtons
0011	-	Abre boca Davids direito
0012	-	Abre boca Davids esquerdo
0013	-	Abre boca leivers direito nº1
0014	-	Abre boca leivers direito nº2
0015	-	Abre boca leivers esquerdo nº1
0016	-	Abre boca leivers esquerdo nº2
0017	-	Abre boca MC Ivor c/ 3 abaixa lingua
0018	-	Abre Boca Mc.Ivor com 2 arcos c/ 3 abaixa lingua
0019	-	Abre Boca Mc.Ivor Infantil
0020	-	Abre Boca ovoloopato c/ 4 abaixa lingua
0037	-	Afastador kirschner 24 cm c/ válvulas
0038	-	Afastador kirschner 25,5 cm c/ valvulas
0039	-	Afastador kirschner oval
0040	-	Afastador radiolúcida c/ válvulas
0041	-	Afastador Smith c/ válvulas nº1
0042	-	Afastador Smith c/ válvulas nº2
0043	-	Afastador franz c/ válvulas nº1
0044	-	Afastador franz c/ válvulas nº2
0045	-	Afastador semm

4802	-	Afastador perma Nº1
4803	-	Afastador perma Nº2
4804	-	Afastador perma Nº3
4805	-	Presilha de trava rápida
4806	-	Presilha auxiliar
4807	-	Presilha lateral p/ haste
4808	-	Presilha lateral
4809	-	Presilha ajustável nº1
4810	-	Presilha ajustável nº2
4811	-	Presilha ajustável nº3
4812	-	Presilha de aperto
4813	-	Mini lamina giratória
4814	-	Mini válvula giratória nº1
4815	-	Prendedor lateral de mesa
2097	-	Afastador Haight 9 x 17,5 cm
2098	-	Afastador Haight 14 x 15 cm
2099	-	Afastador Struck 6,4 x 9,2 cm
2109	-	Afastador Tuffier 12,5 x 17 cm
3754	-	Pinça de Bakey (Lambert modif.) 4 x 9,7 x 25,5 cm
4746	-	Pinça de Bakey 3,8 x 8,5 22 cm
4747	-	Pinça de Bakey 4,8 x 9,5 x 26,5 cm
4748	-	Pinça de Bakey 5,1 x 21 cm
4749	-	Pinça de Bakey 5,4 x 9,9 x 27 cm
4750	-	Pinça de Bakey 5,6 x 16 cm
4751	-	Pinça de Bakey 5,8 x 10,3 x 27 cm
4752	-	Pinça de Bakey 7,5 x 11,9 x 28 cm
4753	-	Pinça de Bakey 9 x 19 cm
4754	-	Pinça de Bakey 9,25 x 20 cm
4755	-	Pinça de Bakey- Beck 3 x 6,5 x 20,5 cm
4756	-	Pinça de Bakey- Beck 4,5 x 8 x 21 cm
4757	-	Pinça de Bakey Curva 1,8 x 9,5 x 24 cm
4763	-	Pinça de Bakey curva 5 x 16,5 cm
4764	-	Pinça de Bakey Curva 5,1 x 21 cm
4765	-	Pinça de Bakey Curva 8 x 23 cm
4766	-	Pinça de Bakey curva 15° 4,1 x 20 cm
4775	-	Pinça de Bakey curva 15° 5 x 16,5 cm
4776	-	Pinça de Bakey curva 15° 5,1 x 21 cm
4777	-	Pinça de Bakey curva 15° 6,5 x 22,5 cm
4778	-	Pinça de Bakey curva 15° 8 x 24 cm
4779	-	Pinça de Bakey reta 4,1 x 20,5 cm
4780	-	Pinça de Bakey reta 5 x 17 cm
4781	-	Pinça de Bakey reta 6,5 x 22,5 cm
4782	-	Pinça de Bakey reta 8 x 24 cm
4783	-	Pinça de Bakey semi-curva 7,5 x 23 cm
4784	-	Pinça de Bakey Semi-Curva 7,7 x 19 cm
4785	-	Pinça de Bakey-Harken nº1 8,6 x 25,5 cm
4786	-	Pinça de Bakey-Harken nº2 8,6 x 24,5 cm
4787	-	Pinça de Bakey-Harken nº3 8,6 x 24,5 cm
4788	-	Pinça de Bakey-Harken nº4 8,6 x 24,5 cm
4789	-	Pinça de Bakey-MC Quigg-Mixer curva 7 x 21 cm
4790	-	Pinça de Bakey-Mixer curva 8 x 28,5 cm
4791	-	Pinça de Bakey-Rumel curva 8,1 x 24,5 cm
4792	-	Pinça de Bakey-Rumel semi-curva 8,1 x 25 cm

4793	-	Pinça de Bakey-Satinsky 3,2 x 6,8 x 23,5 cm
4794	-	Pinça de Bakey-Satinsky 4 x 7,6 x 24 cm
4795	-	Pinça de Bakey-Satinsky 4,7 x 8,4 x 24,5 cm
4796	-	Pinça Glover 4,7 x 7 x 19,5 cm
4797	-	Pinça Glover 6 x 22 cm
4798	-	Pinça Glover 6,3 x 9,5 x 21 cm
4799	-	Pinça Glover 8,6 x 24,5 cm
4800	-	Pinça Lambert-Kay 4 x 9,3 x 21,5 cm
4801	-	Pinça Lambert-Kay 4,7 x 10 x 21 cm
2110	-	Pinça para Análogo
2125	-	Pinça reta para Bloco Ósseo
4865	-	Pinça angulada para Bloco Ósseo

Explicação da simbologia utilizada no rótulo	
	Número de referência
	Número de lote
	Data de validade
	Fabricante
	Data de fabricação
	Não estéril
	Consultar as instruções de uso
	Mantenha seco
	Mantenha ao abrigo do sol

Fabricado por: Factory Instrumental Cirúrgico Indústria e Comércio LTDA.

Rua: Ambrosia do México, 392-398, Jd. Cidade Pirituba

CEP: 02945-040 - São Paulo - SP - Brasil

CNPJ: 56.294.952/0001-10

Insc. Estadual 111.573.179.110

Autorização de Funcionamento: 8.02.183-1

www.factorycirurgico.com.br – SAC: +55 11 3972-4847

Responsável Técnico Eng. Rogério Guedelha Massano

CREA-SP: 5063257311

Registro ANVISA: 80218310027

Revisão 00-06/17