

**1. Identificação do Fabricante**

Factory Instrumental Cirúrgico Indústria e Comércio Ltda.  
 Rua Ambrosia do México, 392-398, Jd. Cidade Pirituba  
 CEP: 02945-040 - São Paulo - SP - Brasil  
 CNPJ: 56.294.952/0001-10  
 I.E.: 111.573.179.110  
 AFE: 8.02.183-1  
 www.factorycirurgico.com.br – SAC: +55 11 3974-9119

**2. Dados do Produto****2.1 Nome Comercial**

Uclas Calcináveis Bioface

**2.2 Modelos Comerciais**

| Referência | Descrição do modelo comercial                  |
|------------|------------------------------------------------|
| CCA0410103 | Coping Calcinável AR ES 4,80 CW c/ paraf.      |
| CCA0506401 | Coping Calcinável AR TG 4,80 BL c/ paraf.      |
| CCR0410104 | Coping Calcinável RO ES 4,80 CW c/ paraf.      |
| CCR0506402 | Coping Calcinável RO TG 4,80 BL c/ paraf.      |
| CCR0904201 | Coping Calcinável RO MU 4,80 AP c/ paraf.      |
| CCR0904202 | Coping Calcinável RO MU 4,80 AP c/ paraf. II   |
| CCR0904203 | Coping Calcinável RO MU 4,80 AP c/ paraf. III  |
| CCR1004201 | Coping Calcinável do Pilar O'ring AP           |
| CGA0410103 | Coping Calcinável AR ES 4,80 CW s/ paraf.      |
| CGA0506401 | Coping Calcinável AR TG 4,80 BL s/ paraf.      |
| CGR0410104 | Coping Calcinável RO ES 4,80 CW s/ paraf.      |
| CGR0506402 | Coping Calcinável RO TG 4,80 BL s/ paraf.      |
| CGR0904201 | Coping Calcinável RO MU 4,80 AP s/ paraf.      |
| UCA0102701 | Ucla Calcinável AR CM 3,50 AA s/ paraf.        |
| UCA0108501 | Ucla Calcinável AR CM 3,80 CG s/ paraf.        |
| UCA0210101 | Ucla Calcinável AR CM 3,50 - 4,00 CW s/ paraf. |
| UCA0210102 | Ucla Calcinável AR CM 4,50 - 5,00 CW s/ paraf. |
| UCA0602701 | Ucla Calcinável HE 3,30 AA s/ paraf.           |
| UCA0602702 | Ucla Calcinável AR HE 5,00 AA s/ paraf.        |
| UCA0606401 | Ucla Calcinável AR HE 3,30 BL s/ paraf.        |
| UCA0608501 | Ucla Calcinável AR HE 3,40 CG s/ paraf.        |
| UCA0608502 | Ucla Calcinável AR HE 4,10 CG s/ paraf.        |
| UCA0608503 | Ucla Calcinável AR HE 5,00 CG s/ paraf.        |
| UCA0610101 | Ucla Calcinável AR HE 3,50 CW s/ paraf.        |
| UCA0610102 | Ucla Calcinável AR HE 5,10 CW s/ paraf.        |
| UCA0610301 | Ucla Calcinável AR HE 3,50 CY s/ paraf.        |
| UCA0702701 | Ucla Calcinável AR HI 4,10 AA s/ paraf.        |
| UCA0702702 | Ucla Calcinável AR HI 4,30 AA s/ paraf.        |
| UCA0702703 | Ucla Calcinável AR HI 5,00 AA s/ paraf.        |
| UCA0702801 | Ucla Calcinável RO HI 3,50 AB s/ paraf.        |
| UCA0702802 | Ucla Calcinável RO HI 4,00 AB s/ paraf.        |
| UCA0702803 | Ucla Calcinável RO HI 3,80 CG s/ paraf.        |
| UCA0702804 | Ucla Calcinável RO HI 4,50 CG s/ paraf.        |
| UCA0702805 | Ucla Calcinável RO HI 5,50 CG s/ paraf.        |
| UCA0703301 | Ucla Calcinável RO HI 3,35 AG s/ paraf.        |

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| UCA0703302 | Ucla Calcinável AR HI 3,50 AG s/ paraf.        |
| UCA0703303 | Ucla Calcinável AR HI 3,75 AG s/ paraf.        |
| UCA0703304 | Ucla Calcinável AR HI 4,00 AG s/ paraf.        |
| UCA0703305 | Ucla Calcinável AR HI 4,25 AG s/ paraf.        |
| UCA0703306 | Ucla Calcinável AR HI 4,50 AG s/ paraf.        |
| UCA0703307 | Ucla Calcinável AR HI 5,00 AG s/ paraf.        |
| UCA0703308 | Ucla Calcinável AR HI 6,00 AG s/ paraf.        |
| UCA0705401 | Ucla Calcinável AR HI 3,50 BB s/ paraf.        |
| UCA0705403 | Ucla Calcinável AR HI 5,00 BB s/ paraf.        |
| UCA0706401 | Ucla Calcinável AR HI 4,30 BL s/ paraf.        |
| UCA0708501 | Ucla Calcinável AR HI 3,80 CG s/ paraf.        |
| UCA0708502 | Ucla Calcinável AR HI 4,50 CG s/ paraf.        |
| UCA0708503 | Ucla Calcinável AR HI 5,50 CG s/ paraf.        |
| UCA0710101 | Ucla Calcinável AR HI 4,10 CW s/ paraf.        |
| UCA0710201 | Ucla Calcinável AR HI 3,40 CX s/ paraf.        |
| UCA0710202 | Ucla Calcinável AR HI 4,10 CX s/ paraf.        |
| UCA0710203 | Ucla Calcinável AR HI 5,00 CX s/ paraf.        |
| UCR0102701 | Ucla Calcinável RO CM 3,50 AA s/ paraf.        |
| UCR0108501 | Ucla Calcinável RO CM 3,80 CG s/ paraf.        |
| UCR0210101 | Ucla Calcinável RO CM 3,50 - 4,00 CW s/ paraf. |
| UCR0210102 | Ucla Calcinável RO CM 4,50 - 5,00 CW s/ paraf. |
| UCR0602701 | Ucla Calcinável RO HE 3,30 AA s/ paraf.        |
| UCR0602702 | Ucla Calcinável RO HE 5,00 AA s/ paraf.        |
| UCR0606401 | Ucla Calcinável RO HE 3,30 BL s/ paraf.        |
| UCR0608501 | Ucla Calcinável RO HE 3,40 CG s/ paraf.        |
| UCR0608502 | Ucla Calcinável RO HE 4,10 CG s/ paraf.        |
| UCR0608503 | Ucla Calcinável RO HE 5,00 CG s/ paraf.        |
| UCR0610101 | Ucla Calcinável RO HE 3,50 CW s/ paraf.        |
| UCR0610102 | Ucla Calcinável RO HE 5,10 CW s/ paraf.        |
| UCR0610301 | Ucla Calcinável RO HE 3,50 CY s/ paraf.        |
| UCR0702701 | Ucla Calcinável RO HI 4,10 AA s/ paraf.        |
| UCR0702702 | Ucla Calcinável RO HI 4,30 AA s/ paraf.        |
| UCR0702703 | Ucla Calcinável RO HI 5,00 AA s/ paraf.        |
| UCR0702801 | Ucla Calcinável RO HI 3,50 AB s/ paraf.        |
| UCR0702802 | Ucla Calcinável RO HI 4,00 AB s/ paraf.        |
| UCR0702803 | Ucla Calcinável RO HI 5,00 AB s/ paraf.        |
| UCR0703301 | Ucla Calcinável RO HI 3,35 AG s/ paraf.        |
| UCR0703302 | Ucla Calcinável RO HI 3,50 AG s/ paraf.        |
| UCR0703303 | Ucla Calcinável RO HI 3,75 AG s/ paraf.        |
| UCR0703304 | Ucla Calcinável RO HI 4,00 AG s/ paraf.        |
| UCR0703305 | Ucla Calcinável RO HI 4,25 AG s/ paraf.        |
| UCR0703306 | Ucla Calcinável RO HI 4,50 AG s/ paraf.        |
| UCR0703307 | Ucla Calcinável RO HI 5,00 AG s/ paraf.        |
| UCR0703308 | Ucla Calcinável RO HI 6,00 AG s/ paraf.        |
| UCR0705401 | Ucla Calcinável RO HI 3,50 BB s/ paraf.        |
| UCR0706401 | Ucla Calcinável RO HI 4,30 BL s/ paraf.        |
| UCR0708501 | Ucla Calcinável RO HI 3,80 CG s/ paraf.        |
| UCR0708502 | Ucla Calcinável RO HI 4,50 CG s/ paraf.        |
| UCR0708503 | Ucla Calcinável RO HI 5,50 CG s/ paraf.        |
| UCR0710101 | Ucla Calcinável RO HI 4,10 CW s/ paraf.        |

**UCLAS CALCINÁVEIS BIOFACE**

Produto de uso profissional.

Uso único. Proibido reprocessar.

Não Estéril.

**Índice****1. Identificação do Fabricante****2. Dados do Produto**

## 2.1 Nome Comercial

## 2.2 Modelos Comerciais

## 2.3 Registro ANVISA

## 2.4 Apresentação Comercial

**3. Especificação do Produto**

## 3.1 Composição

## 3.2 Indicação de Uso / Finalidade

## 3.3 Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

## 3.4 Modo de Uso do Produto

**4. Compatibilidade**

## 4.1 Dimensões

**5. Armazenamento e Transporte**

## 5.1 Condições de Armazenamento

## 5.2 Condições para o Transporte

**6. Condições de Manipulação**

## 6.1 Prazo de Validade e Lote

**7. Advertências****8. Precauções****9. Contraindicações****10. Efeitos Adversos****11. Explicação da Simbologia Utilizada na Embalagem**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| UCR0710201 | Ucla Calcinável AR HI 3,40 CX s/ paraf.        |
| UCR0710202 | Ucla Calcinável RO HI 4,10 CX s/ paraf.        |
| UCR0710203 | Ucla Calcinável RO HI 5,00 CX s/ paraf.        |
| UPA0102701 | Ucla Calcinável AR CM 3,50 AA c/ paraf.        |
| UPA0108501 | Ucla Calcinável AR CM 3,80 CG c/ paraf.        |
| UPA0210101 | Ucla Calcinável AR CM 3,50 - 4,00 CW c/ paraf. |
| UPA0210102 | Ucla Calcinável AR CM 4,50 - 5,00 CW c/ paraf. |
| UPA0602701 | Ucla Calcinável HE 3,30 AA c/ paraf.           |
| UPA0602702 | Ucla Calcinável AR HE 5,00 AA c/ paraf.        |
| UPA0602801 | Ucla Calcinável AR HE 3,50 AB c/ paraf.        |
| UPA0602802 | Ucla Calcinável AR HE 3,50 AP c/ paraf.        |
| UPA0606401 | Ucla Calcinável AR HE 3,30 BL c/ paraf.        |
| UPA0606402 | Ucla Calcinável AR HE 4,10 BL c/ paraf.        |
| UPA0606403 | Ucla Calcinável AR HE 5,00 BL c/ paraf.        |
| UPA0608501 | Ucla Calcinável AR HE 3,40 CG c/ paraf.        |
| UPA0608502 | Ucla Calcinável AR HE 4,10 CG c/ paraf.        |
| UPA0608503 | Ucla Calcinável AR HE 5,00 CG c/ paraf.        |
| UPA0610101 | Ucla Calcinável AR HE 3,50 CW c/ paraf.        |
| UPA0610102 | Ucla Calcinável AR HE 5,10 CW c/ paraf.        |
| UPA0610301 | Ucla Calcinável AR HE 3,50 CY c/ paraf.        |
| UPA0702701 | Ucla Calcinável AR HI 4,10 AA c/ paraf.        |
| UPA0702702 | Ucla Calcinável AR HI 4,30 AA c/ paraf.        |
| UPA0702703 | Ucla Calcinável AR HI 5,00 AA c/ paraf.        |
| UPA0702801 | Ucla Calcinável AR HI 3,50 AB c/ paraf.        |
| UPA0702802 | Ucla Calcinável AR HI 4,00 AB c/ paraf.        |
| UPA0702803 | Ucla Calcinável AR HI 5,00 AB c/ paraf.        |
| UPA0703301 | Ucla Calcinável AR HI 3,35 AG c/ paraf.        |
| UPA0703302 | Ucla Calcinável AR HI 3,50 AG c/ paraf.        |
| UPA0703303 | Ucla Calcinável AR HI 3,75 AG c/ paraf.        |
| UPA0703304 | Ucla Calcinável AR HI 4,00 AG c/ paraf.        |
| UPA0703305 | Ucla Calcinável AR HI 4,25 AG c/ paraf.        |
| UPA0703306 | Ucla Calcinável AR HI 4,50 AG c/ paraf.        |
| UPA0703307 | Ucla Calcinável AR HI 5,00 AG c/ paraf.        |
| UPA0703308 | Ucla Calcinável AR HI 6,00 AG c/ paraf.        |
| UPA0705401 | Ucla Calcinável AR HI 3,50 BB c/ paraf.        |
| UPA0705402 | Ucla Calcinável AR HI 4,00 BB c/ paraf.        |
| UPA0705403 | Ucla Calcinável AR HI 5,00 BB c/ paraf.        |
| UPA0706401 | Ucla Calcinável AR HI 4,30 BL c/ paraf.        |
| UPA0708501 | Ucla Calcinável AR HI 3,80 CG c/ paraf.        |
| UPA0708502 | Ucla Calcinável AR HI 4,50 CG c/ paraf.        |
| UPA0708503 | Ucla Calcinável AR HI 5,50 CG c/ paraf.        |
| UPA0710101 | Ucla Calcinável AR HI 4,10 CW c/ paraf.        |
| UPA0710201 | Ucla Calcinável AR HI 3,40 CX c/ paraf.        |
| UPA0710202 | Ucla Calcinável AR HI 4,10 CX c/ paraf.        |
| UPA0710203 | Ucla Calcinável AR HI 5,00 CX c/ paraf.        |
| UPR0102701 | Ucla Calcinável RO CM 3,50 AA c/ paraf.        |
| UPR0108501 | Ucla Calcinável RO CM 3,80 CG c/ paraf.        |
| UPR0210101 | Ucla Calcinável RO CM 3,50 - 4,00 CW c/ paraf. |
| UPR0210102 | Ucla Calcinável RO CM 4,50 - 5,00 CW c/ paraf. |
| UPR0602701 | Ucla Calcinável RO HE 3,30 AA c/ paraf.        |

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| UPR0602702 | Ucla Calcinável RO HE 5,00 AA c/ paraf. |
| UPR0602801 | Ucla Calcinável RO HE 3,50 AB c/ paraf. |
| UPR0602802 | Ucla Calcinável RO HE 3,50 AP c/ paraf. |
| UPR0606401 | Ucla Calcinável RO HE 3,30 BL c/ paraf. |
| UPR0606402 | Ucla Calcinável RO HE 4,10 BL c/ paraf. |
| UPR0606403 | Ucla Calcinável RO HE 5,00 BL c/ paraf. |
| UPR0608501 | Ucla Calcinável RO HE 3,40 CG c/ paraf. |
| UPR0608502 | Ucla Calcinável RO HE 4,10 CG c/ paraf. |
| UPR0608503 | Ucla Calcinável RO HE 5,00 CG c/ paraf. |
| UPR0610101 | Ucla Calcinável RO HE 3,50 CW c/ paraf. |
| UPR0610102 | Ucla Calcinável RO HE 5,10 CW c/ paraf. |
| UPR0610301 | Ucla Calcinável RO HE 3,50 CY c/ paraf. |
| UPR0702701 | Ucla Calcinável RO HI 4,10 AA c/ paraf. |
| UPR0702702 | Ucla Calcinável RO HI 4,30 AA c/ paraf. |
| UPR0702703 | Ucla Calcinável RO HI 5,00 AA c/ paraf. |
| UPR0702801 | Ucla Calcinável RO HI 3,50 AB c/ paraf. |
| UPR0702802 | Ucla Calcinável RO HI 4,00 AB c/ paraf. |
| UPR0702803 | Ucla Calcinável RO HI 5,00 AB c/ paraf. |
| UPR0703301 | Ucla Calcinável RO HI 3,35 AG c/ paraf. |
| UPR0703302 | Ucla Calcinável RO HI 3,50 AG c/ paraf. |
| UPR0703303 | Ucla Calcinável RO HI 3,75 AG c/ paraf. |
| UPR0703304 | Ucla Calcinável RO HI 4,00 AG c/ paraf. |
| UPR0703305 | Ucla Calcinável RO HI 4,25 AG c/ paraf. |
| UPR0703306 | Ucla Calcinável RO HI 4,50 AG c/ paraf. |
| UPR0703307 | Ucla Calcinável RO HI 5,00 AG c/ paraf. |
| UPR0703308 | Ucla Calcinável RO HI 5,50 AG c/ paraf. |
| UPR0705401 | Ucla Calcinável RO HI 3,50 BB c/ paraf. |
| UPR0705402 | Ucla Calcinável RO HI 4,00 BB c/ paraf. |
| UPR0706401 | Ucla Calcinável RO HI 4,30 BL c/ paraf. |
| UPR0708501 | Ucla Calcinável RO HI 3,80 CG c/ paraf. |
| UPR0708502 | Ucla Calcinável RO HI 4,50 CG c/ paraf. |
| UPR0708503 | Ucla Calcinável RO HI 5,50 CG c/ paraf. |
| UPR0710101 | Ucla Calcinável RO HI 4,10 CW c/ paraf. |
| UPR0710201 | Ucla Calcinável AR HI 3,40 CX c/ paraf. |
| UPR0710202 | Ucla Calcinável RO HI 4,10 CX c/ paraf. |
| UPR0710203 | Ucla Calcinável RO HI 5,00 CX c/ paraf. |

### 2.3 Registro ANVISA

Produto dispensado de registro.

### 2.4 Apresentação Comercial

O produto é acondicionado unitariamente em embalagem tipo envelope grau cirúrgico. Fornecido não estéril.

Formas de Apresentação:

- Embalagem com 01 Ucla Calcinável e 01 Parafuso Protético
- Embalagem com 01, 05 ou 10 unidades da Ucla Calcinável
- Embalagem com 01, 05, 10 e 50 Parafuso Protético

### 3. Especificação do Produto

### 3.1 Composição

Ucla: fabricada em Poli-oxi-metileno, Poliacetal (POM).

Parafuso Protético: fabricado em Liga de Titânio Ti6Al4V ELI.

### 3.2 Indicação de Uso / Finalidade

Componente protético indicado para uso laboratorial, utilizado na fase de encerramento e fundição dos componentes metálicos que serão adaptados sobre os implantes em casos de confecção de infraestruturas de próteses múltiplas ou unitárias.

### 3.3 Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

A Ucla é um pilar calcinável com corpo cilíndrico provido de retenções, tendo em sua extremidade adaptação Anti Rotacional (AR) ou Rotacional (RO) compatível com o sistema de encaixe do análogo. Serve como molde para a estrutura metálica confeccionada em ambiente laboratorial que é fixada sobre os implantes.

### 3.4 Modo de Uso do Produto

- Após a instalação do implante ou intermediário protético na boca do paciente realizar a transferência de posicionamento do mesmo no molde de trabalho utilizando Transferente de Moldagem e Análogo compatíveis;
- Utilizando uma chave digital (não acompanha o produto), aparafusar a Ucla sobre o análogo contido no modelo de trabalho (gesso). O torque (aperto) não deve exceder a 10N.cm. Os parafusos apresentam conexão para chave sextavada (1,2 mm) ou quadrada (1,3 mm);
- Realizar o encerramento. A aplicação de revestimento deve ser compatível com a liga que será utilizada no processo de fundição;
- Após a realização do processo de fundição, obtém-se a estrutura base para acrilização ou aplicação de porcelana.

Esterilização:

Utilize envelope de papel grau cirúrgico para esterilização pelo método de vapor saturado sob pressão em autoclave.

Tempo de esterilização: 04 minutos

Temperatura: 132°C (269,6°F)


Tempo de secagem: 20 minutos

### 4. Compatibilidade

Os modelos comerciais das Uclas Calcináveis Bioface variam para atender diferentes sistemas disponíveis no mercado.

Para a seleção do modelo correto para cada caso, é necessário que a Ucla tenha o encaixe compatível ao análogo, atentar-se à:

- Diâmetro da plataforma;
- Sistema de encaixe (HE, HI, CM, etc.);
- Rosca

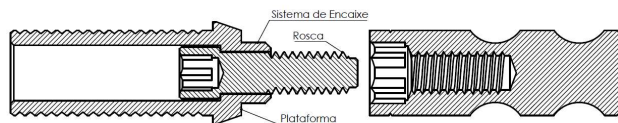

## 5. Armazenamento e Transporte

### 5.1 Condições de Armazenamento

Armazenar em local limpo, seco e protegido de radiação solar direta;  
 Conservar em temperatura e umidade ambiente;  
 Não armazenar com produtos e resíduos químicos;  
 Armazenar de forma organizada, preservando a integridade da embalagem e das informações nela contida.

### 5.2 Condições para o Transporte

Transportar o produto em sua embalagem original. Em caso de violação ou perfuração da embalagem durante o transporte o mesmo deverá ser descartado;  
 Transportar em local limpo e seco, protegido de radiação solar direta;  
 Conservar em temperatura e umidade ambiente;  
 Não transportar com produtos e resíduos químicos;  
 Transportar de forma organizada, preservando a integridade da embalagem e das informações nela contida.

## 6. Condições de Manipulação

Produto de uso profissional;  
 Utilizar o produto com o conhecimento das técnicas adequadas e executá-las sempre em condições apropriadas.  
 Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido, realizar o descarte conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do local que o gerou seguindo as legislações.

### 6.1 Prazo de Validade

A data de validade e o número de lote são informados no rótulo.

## 7. Advertências

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada;  
 Observar atentamente a plataforma, o sistema de encaixe e a rosca do componente protético que será fixado ao análogo. Utilize somente produtos que sejam compatíveis;  
 A instalação correta de componentes sobre o análogo deve ocorrer de forma suave e sem folgas, forçar o encaixe pode acarretar em deformações e engripamentos das conexões;  
 A utilização de instrumentos que não estejam em boas condições de uso, limpeza ou conservação pode prejudicar a eficácia do procedimento;  
 A utilização de instrumentais, componentes para implantes e/ou protéticos de outros fabricantes não assegura a perfeita função do sistema e isenta qualquer garantia do produto;

Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido, realizar o descarte conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do local que o gerou seguindo as legislações vigentes.

## 8. Precauções

Higienize e esterilize a prótese antes da instalação sobre o implante;  
 Recomenda-se teste de passividade e adaptação da estrutura base;  
 Utilize parafuso protético para o trabalho laboratorial;  
 Utilize parafuso estéril para fixação da prótese sobre o implante;  
 Antes de cada procedimento garantir o perfeito encaixe entre as peças;  
 Consulte o torque a ser aplicado no parafuso que fixa a prótese no implante. Torque de inserção inferior ou superior ao recomendado e chaves inadequadas podem causar efeitos indesejáveis, danos ao material ou tornar o sistema inutilizável;  
 A estabilidade do implante deve ser suficiente para suportar a carga funcional e o torque aplicado na instalação do componente protético, de acordo com as instruções de uso do implante.  
 Para aplicação de carga imediata verifique a indicação de torque do implante instalado;  
 Verifique as informações contidas na embalagem e nas instruções de uso;  
 Melhores resultados são obtidos com a utilização de produtos genuínos da marca Bioface.

## 9. Contraindicações

Não há contra indicações desde que atendidas todas as recomendações das instruções de uso.

## 10. Efeitos Adversos

Não ocorrerão efeitos adversos, desde que atendidas todas as recomendações das instruções de uso.

## 11. Explicação da Simbologia Utilizada na Embalagem

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Número de referência |
|  | Número de lote       |
|  | Fabricante           |
|  | Data de validade     |

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | Data de fabricação                          |
|  | Não utilizar se a embalagem estiver violada |
|  | Não estéril                                 |
|  | Não reutilizar                              |
|  | Consultar as instruções de uso              |
|  | Mantenha seco                               |
|  | Mantenha ao abrigo do sol                   |

Se necessário solicite o formato impresso desta instrução de uso, sem custo adicional através do e-mail [sac@factorycirurgico.com.br](mailto:sac@factorycirurgico.com.br) ou pelo telefone: 11 3974-9119.

**Responsável Técnico**  
 Rogério Guedelha Massano  
 CREA-SP: 5063257311