



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. E COM. LTDA

**INSTRUMENTAIS ARTICULADOS CORTANTES FACTORY****Produto Não Estéril**

Esterilizar antes do uso

**Índice****1. Identificação do Fabricante****2. Dados do Produto**

2.1 Nome Técnico

2.2 Nome Comercial

2.3 Modelos Comerciais

2.4 Registro ANVISA

2.5 Apresentação Comercial

**3. Especificações do Produto**

3.1 Indicação de Uso / Finalidade

3.2 Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

3.3 Modo de Uso do Produto

**4. Procedimentos Para Utilização e Reutilização dos Instrumentais**

4.1 Utilização

4.2 Inspeções

4.3 Inspeção Técnica

4.4 Limpeza

4.5 Esterilização

4.6 Reutilização

4.7 Limpeza Prévia

4.8 Descontaminação

4.9 Lavagem

4.10 Enxágue

4.11 Secagem

4.12 Descarte

**5. Armazenamento e Transporte**

5.1 Condições de Armazenamento

5.2 Condições para o Transporte

**6. Condições de Manipulação**

6.1 Prazo de Validade e Lote

**7. Advertências****8. Precauções****9. Contraindicações****10. Efeitos Adversos****11. Explicação da Simbologia Utilizada na Embalagem****1. Identificação do Fabricante**

Factory Instrumental Cirúrgico Indústria e Comércio Ltda.

Rua Ambrosia do México, 392-398, Jd. Cidade Pirituba

CEP: 02945-040 - São Paulo - SP

CNPJ: 56.294.952/0001-10

I.E.: 111.573.179.110

AFE: 8.02.183-1

www.factorycirurgico.com.br – SAC: +55 11 3974-9119

**2. Dados do Produto****2.1 Nome Técnico**

Instrumental Cirúrgico

**2.2 Nome Comercial**

Instrumentais Articulados Cortantes Factory

**2.3 Modelos Comerciais**

Referência - Descrição do Modelo Comercial:

2970 - Cizalha Beyer 150 mm

2971 - Cizalha Beyer 170 mm

2972 - Cizalha Beyer 180 mm

2973 - Cizalha Beyer 190 mm

2974 - Cizalha Beyer 200 mm

2975 - Cizalha Beyer 220 mm

2976 - Cizalha Beyer 230 mm

2977 - Cizalha Beyer 250 mm

2978 - Cizalha Beyer 270 mm

2979 - Cizalha Beyer 290 mm

2980 - Cizalha Luer curva 150 mm

2981 - Cizalha Luer curva 180 mm

2982 - Cizalha Luer curva 190 mm

2983 - Cizalha Luer curva 200 mm

2984 - Cizalha Luer curva 220 mm

2985 - Cizalha Luer curva 230 mm

2986 - Cizalha Luer curva 250 mm

2987 - Cizalha Luer curva 270 mm

2988 - Cizalha Luer curva 290 mm

2989 - Cizalha Luer reta 150 mm

2990 - Cizalha Luer reta 160 mm

2991 - Cizalha Luer reta 180 mm

2992 - Cizalha Luer reta 190 mm

2993 - Cizalha Luer reta 200 mm

2994 - Cizalha Luer reta 220 mm

2995 - Cizalha Luer reta 230 mm

2996 - Cizalha Luer reta 250 mm

2997 - Cizalha Luer reta 270 mm

2998 - Cizalha Luer reta 290 mm

2999 - Cizalha Ruskin 150 mm

3000 - Cizalha Ruskin 160 mm

3001 - Cizalha Ruskin 190 mm

3002 - Cizalha Ruskin 200 mm

3003 - Cizalha Ruskin 220 mm

3004 - Cizalha Ruskin 240 mm

3005 - Cizalha Ruskin 270 mm

3006 - Cizalha Ruskin 290 mm

3007 - Cizalha liston reta 16 cm

3008 - Cizalha liston reta 17 cm

3009 - Cizalha liston reta 19 cm

3010 - Cizalha liston reta 23 cm

3011 - Cizalha liston reta 26,5 cm

3012 - Cizalha liston reta 27 cm

3013 - Cizalha liston reta 29 cm

3014 - Cizalha liston curva 16 cm

3015 - Cizalha liston curva 17 cm

3016 - Cizalha liston curva 19 cm

3017 - Cizalha liston curva 23 cm

3018 - Cizalha liston curva 26,5 cm

3019 - Cizalha liston curva 27 cm

3020 - Cizalha liston curva 29 cm

3021 - Cizalha de reil 150 mm

3022 - Cizalha de reil 160 mm

3023 - Cizalha de reil 170 mm

3024 - Cizalha de reil 190 mm

3025 - Cizalha de reil 200 mm

3026 - Cizalha de reil 220 mm

3027 - Cizalha de reil 230 mm

3028 - Cizalha de reil 250 mm

3029 - Cizalha de reil 270 mm

3030 - Cizalha de reil 290 mm

3031 - Circuncisor

3032 - Micro tesoura laringe corte angulado 45 °

3033 - Micro tesoura laringe corte reto

3034 - Micro tesoura laringe curva direita

3035 - Micro tesoura laringe curva esquerda

3036 - Pinça biopsia de boca

3037 - Pinça hartman biopsia diam. 2,5 x 125 mm

3038 - Pinça stumpel 125 mm

3039 - Pinça Biopsia de ouvido angulada infantil

3040 - Pinça Biopsia de ouvido direita infantil

3041 - Pinça Biopsia de ouvido esquerda infantil

3042 - Pinça Biopsia de ouvido reta infantil

3043 - Pinça Biopsia angulada adulto

3044 - Pinça Biopsia direita adulto

3045 - Pinça Biopsia esquerda adulto

3046 - Pinça Biopsia de ouvido reta adulto

3047 - Pinça Bouchayer angulada

3048 - Pinça Bouchayer curva direita

3049 - Pinça Bouchayer curva esquerda

3050 - Pinça Bouchayer reta

3051 - Pinça citelli 80 mm

3052 - Pinça citelli 120 mm

3053 - Pinça beyer 9,5 cm

3054 - Pinça hanje-kofler 3,2 x 4 x 170 mm

3055 - Pinça hanje-kofler 90° 3,5 x 3,7 x 140 mm

3056 - Pinça mackenty 1,6 x 2 x 120 mm  
 3057 - Pinça mackenty 1,6 x 2 x 170 mm  
 3058 - Pinça cogumelo curva 160 mm  
 3059 - Pinça cogumelo reta 160 mm  
 3060 - Pinça cogumelo reta diam. 3,5 x 180 mm  
 3061 - Pinça cogumelo reta diam. 4,5 x 180 mm  
 3062 - Pinça horizontal em forma de pêra 65° 130 mm  
 3063 - Pinça horizontal em forma de pêra 80° 130 mm  
 3064 - Pinça come p/ frente angulada  
 3065 - Pinça come p/ frente reta  
 3066 - Pinça de biópsia de laringe angulada  
 3067 - Pinça de biópsia de laringe curva direita  
 3068 - Pinça de biópsia de laringe curva esquerda  
 3069 - Pinça de biópsia de laringe reta  
 3070 - Pinça de cordas vocais  
 3071 - Pinça de rinofaringe biópsia  
 3072 - Pinça kerrison 1 x 160 mm angulada  
 3073 - Pinça kerrison 2 x 160 mm angulada  
 3074 - Pinça kerrison 3 x 160 mm angulada  
 3075 - Pinça kerrison 4 x 160 mm angulada  
 3076 - Pinça kerrison 5 x 160 mm angulada  
 3077 - Pinça kerrison 6 x 160 mm angulada  
 3078 - Pinça kerrison 7 x 160 mm angulada  
 3079 - Pinça kerrison 8 x 160 mm angulada  
 3080 - Pinça kerrison 1 x 180 mm angulada  
 3081 - Pinça kerrison 2 x 180 mm angulada  
 3082 - Pinça kerrison 3 x 180 mm angulada  
 3083 - Pinça kerrison 4 x 180 mm angulada  
 3084 - Pinça kerrison 5 x 180 mm angulada  
 3085 - Pinça kerrison 6 x 180 mm angulada  
 3086 - Pinça kerrison 7 x 180 mm angulada  
 3087 - Pinça kerrison 8 x 180 mm angulada  
 3088 - Pinça kerrison 1 x 200 mm angulada  
 3089 - Pinça kerrison 2 x 200 mm angulada  
 3090 - Pinça kerrison 3 x 200 mm angulada  
 3091 - Pinça kerrison 4 x 200 mm angulada  
 3092 - Pinça kerrison 5 x 200 mm angulada  
 3093 - Pinça kerrison 6 x 200 mm angulada  
 3094 - Pinça kerrison 7 x 200 mm angulada  
 3095 - Pinça kerrison 8 x 200 mm angulada  
 3096 - Pinça kerrison 1 x 250 mm angulada  
 3097 - Pinça kerrison 2 x 250 mm angulada  
 3098 - Pinça kerrison 3 x 250 mm angulada  
 3099 - Pinça kerrison 4 x 250 mm angulada  
 3100 - Pinça kerrison 5 x 250 mm angulada  
 3101 - Pinça kerrison 6 x 250 mm angulada  
 3102 - Pinça kerrison 7 x 250 mm angulada  
 3103 - Pinça kerrison 8 x 250 mm angulada  
 3104 - Pinça kerrison 1 x 300 mm angulada  
 3105 - Pinça kerrison 2 x 300 mm angulada  
 3106 - Pinça kerrison 3 x 300 mm angulada  
 3107 - Pinça kerrison 4 x 300 mm angulada  
 3108 - Pinça kerrison 5 x 300 mm angulada

3109 - Pinça kerrison 6 x 300 mm angulada  
 3110 - Pinça kerrison 7 x 300 mm angulada  
 3111 - Pinça kerrison 8 x 300 mm angulada  
 3112 - Pinça kerrison 1 x 160 mm p/ baixo  
 3113 - Pinça kerrison 2 x 160 mm p/ baixo  
 3114 - Pinça kerrison 3 x 160 mm p/ baixo  
 3115 - Pinça kerrison 4 x 160 mm p/ baixo  
 3116 - Pinça kerrison 5 x 160 mm p/ baixo  
 3117 - Pinça kerrison 6 x 160 mm p/ baixo  
 3118 - Pinça kerrison 7 x 160 mm p/ baixo  
 3119 - Pinça kerrison 8 x 160 mm p/ baixo  
 3120 - Pinça kerrison 1 x 180 mm p/ baixo  
 3121 - Pinça kerrison 2 x 180 mm p/ baixo  
 3122 - Pinça kerrison 3 x 180 mm p/ baixo  
 3123 - Pinça kerrison 4 x 180 mm p/ baixo  
 3124 - Pinça kerrison 5 x 180 mm p/ baixo  
 3125 - Pinça kerrison 6 x 180 mm p/ baixo  
 3126 - Pinça kerrison 7 x 180 mm p/ baixo  
 3127 - Pinça kerrison 8 x 180 mm p/ baixo  
 3128 - Pinça kerrison 1 x 200 mm p/ baixo  
 3129 - Pinça kerrison 2 x 200 mm p/ baixo  
 3130 - Pinça kerrison 3 x 200 mm p/ baixo  
 3131 - Pinça kerrison 4 x 200 mm p/ baixo  
 3132 - Pinça kerrison 5 x 200 mm p/ baixo  
 3133 - Pinça kerrison 6 x 200 mm p/ baixo  
 3134 - Pinça kerrison 7 x 200 mm p/ baixo  
 3135 - Pinça kerrison 8 x 200 mm p/ baixo  
 3136 - Pinça kerrison 1 x 250 mm p/ baixo  
 3137 - Pinça kerrison 2 x 250 mm p/ baixo  
 3138 - Pinça kerrison 3 x 250 mm p/ baixo  
 3139 - Pinça kerrison 4 x 250 mm p/ baixo  
 3140 - Pinça kerrison 5 x 250 mm p/ baixo  
 3141 - Pinça kerrison 6 x 250 mm p/ baixo  
 3142 - Pinça kerrison 7 x 250 mm p/ baixo  
 3143 - Pinça kerrison 8 x 250 mm p/ baixo  
 3144 - Pinça kerrison 1 x 300 mm p/ baixo  
 3145 - Pinça kerrison 2 x 300 mm p/ baixo  
 3146 - Pinça kerrison 3 x 300 mm p/ baixo  
 3147 - Pinça kerrison 4 x 300 mm p/ baixo  
 3148 - Pinça kerrison 5 x 300 mm p/ baixo  
 3149 - Pinça kerrison 6 x 300 mm p/ baixo  
 3150 - Pinça kerrison 7 x 300 mm p/ baixo  
 3151 - Pinça kerrison 8 x 300 mm p/ baixo  
 3152 - Pinça kerrison 1 x 160 mm p/ cima  
 3153 - Pinça kerrison 2 x 160 mm p/ cima  
 3154 - Pinça kerrison 3 x 160 mm p/ cima  
 3155 - Pinça kerrison 4 x 160 mm p/ cima  
 3156 - Pinça kerrison 5 x 160 mm p/ cima  
 3157 - Pinça kerrison 6 x 160 mm p/ cima  
 3158 - Pinça kerrison 7 x 160 mm p/ cima  
 3159 - Pinça kerrison 8 x 160 mm p/ cima  
 3160 - Pinça kerrison 1 x 180 mm p/ cima  
 3161 - Pinça kerrison 2 x 180 mm p/ cima

3162 - Pinça kerrison 3 x 180 mm p/ cima  
 3163 - Pinça kerrison 4 x 180 mm p/ cima  
 3164 - Pinça kerrison 5 x 180 mm p/ cima  
 3165 - Pinça kerrison 6 x 180 mm p/ cima  
 3166 - Pinça kerrison 7 x 180 mm p/ cima  
 3167 - Pinça kerrison 8 x 180 mm p/ cima  
 3168 - Pinça kerrison 1 x 200 mm p/ cima  
 3169 - Pinça kerrison 2 x 200 mm p/ cima  
 3170 - Pinça kerrison 3 x 200 mm p/ cima  
 3171 - Pinça kerrison 4 x 200 mm p/ cima  
 3172 - Pinça kerrison 5 x 200 mm p/ cima  
 3173 - Pinça kerrison 6 x 200 mm p/ cima  
 3174 - Pinça kerrison 7 x 200 mm p/ cima  
 3175 - Pinça kerrison 8 x 200 mm p/ cima  
 3176 - Pinça kerrison 1 x 250 mm p/ cima  
 3177 - Pinça kerrison 2 x 250 mm p/ cima  
 3178 - Pinça kerrison 3 x 250 mm p/ cima  
 3179 - Pinça kerrison 4 x 250 mm p/ cima  
 3180 - Pinça kerrison 5 x 250 mm p/ cima  
 3181 - Pinça kerrison 6 x 250 mm p/ cima  
 3182 - Pinça kerrison 7 x 250 mm p/ cima  
 3183 - Pinça kerrison 8 x 250 mm p/ cima  
 3184 - Pinça kerrison 1 x 300 mm p/ cima  
 3185 - Pinça kerrison 2 x 300 mm p/ cima  
 3186 - Pinça kerrison 3 x 300 mm p/ cima  
 3187 - Pinça kerrison 4 x 300 mm p/ cima  
 3188 - Pinça kerrison 5 x 300 mm p/ cima  
 3189 - Pinça kerrison 6 x 300 mm p/ cima  
 3190 - Pinça kerrison 7 x 300 mm p/ cima  
 3191 - Pinça kerrison 8 x 300 mm p/ cima  
 3192 - Pinça colclough intercambiável 160 mm  
 3193 - Pinça colclough intercambiável 180 mm  
 3194 - Pinça colclough intercambiável 200 mm  
 3195 - Pinça colclough intercambiável 250 mm  
 3196 - Pinça colclough intercambiável 300 mm  
 3197 - Pinça colclough 3 X 150 mm p/ cima  
 3198 - Pinça colclough 3 X 200 mm p/ cima  
 3199 - Pinça colclough 5 X 150 mm p/ cima  
 3200 - Pinça colclough 5 X 200 mm p/ cima  
 3201 - Pinça colclough 3 X 150 mm p/ baixo  
 3202 - Pinça colclough 3 X 200 mm p/ baixo  
 3203 - Pinça colclough 5 X 150 mm p/ baixo  
 3204 - Pinça colclough 5 X 200 mm p/ baixo  
 3205 - Pinça colclough 3 x 150 mm angulada  
 3206 - Pinça colclough 3 x 200 mm angulada  
 3207 - Pinça colclough 5 x 150 mm angulada  
 3208 - Pinça colclough 5 x 200 mm angulada  
 3209 - Pinça raney 16 cm 90° p/ cima 7 mm  
 3210 - Pinça raney 19 cm 90° p/ cima 7 mm  
 3211 - Pinça raney 30 cm 90° p/ cima 7 mm  
 3212 - Pinça maleótomo  
 3213 - Pinça McGEE angulada  
 3214 - Pinça McGEE curva direita

3215 - Pinça McGEE curva esquerda  
 3216 - Pinça McGEE reta  
 3217 - Pinça midleton-jansen  
 3218 - Pinça midleton-jansen goiva  
 3219 - Pinça midleton-jansen fenestrada  
 3220 - Pinça nasal blaskeley angulada 45° 14 cm adulto n° 1  
 3221 - Pinça nasal blaskeley angulada 45° 14 cm adulto n° 2  
 3222 - Pinça nasal blaskeley angulada 45° 14 cm adulto n° 3  
 3223 - Pinça nasal blaskeley angulada 45° 14 cm infantil n° 1  
 3224 - Pinça nasal blaskeley angulada 45° 14 cm infantil n° 2  
 3225 - Pinça nasal blaskeley angulada 45° 14 cm infantil n° 3  
 3226 - Pinça nasal blaskeley angulada 90° 14 cm adulto n° 1  
 3227 - Pinça nasal blaskeley angulada 90° 14 cm adulto n° 2  
 3228 - Pinça nasal blaskeley angulada 90° 14 cm adulto n° 3  
 3229 - Pinça nasal blaskeley angulada 90° 14 cm infantil n° 1  
 3230 - Pinça nasal blaskeley angulada 90° 14 cm infantil n° 2  
 3231 - Pinça nasal blaskeley angulada 90° 14 cm infantil n° 3  
 3232 - Pinça nasal blaskeley reta 14 cm adulto n° 1  
 3233 - Pinça nasal blaskeley reta 14 cm adulto n° 2  
 3234 - Pinça nasal blaskeley reta 14 cm adulto n° 3  
 3235 - Pinça nasal blaskeley reta 14 cm infantil n° 1  
 3236 - Pinça nasal blaskeley reta 14 cm infantil n° 2  
 3237 - Pinça nasal blaskeley reta 14 cm infantil n° 3  
 3238 - Pinça nasal blaskeley reta 11 cm n°1  
 3239 - Pinça nasal blaskeley reta 11 cm n°2  
 3240 - Pinça nasal blaskeley angulada 45° 11 cm n°1  
 3241 - Pinça nasal blaskeley angulada 45° 11 cm n°2  
 3242 - Pinça nasal blaskeley angulada 90° 11 cm n°1  
 3243 - Pinça nasal blaskeley angulada 90° 11 cm n°2  
 3244 - Pinça watsson-willians 11 cm  
 3245 - Pinça rudert 11 cm  
 3246 - Pinça nasal bruening 19 cm n° 1  
 3247 - Pinça nasal bruening 19 cm n° 2  
 3248 - Pinça nasal Takahashi reta 11 cm  
 3249 - Pinça nasal Takahashi angulada 11 cm  
 3250 - Pinça nasal takahashi angulada adulto 14 cm  
 3251 - Pinça nasal takahashi angulada 45°adulto 14 cm  
 3252 - Pinça nasal takahashi angulada infantil 12 cm  
 3253 - Pinça nasal takahashi angulada 45°infantil 12 cm  
 3254 - Pinça nasal takahashi reta adulto 14 cm  
 3255 - Pinça nasal takahashi reta infantil 12 cm  
 3256 - Pinça p/ seio frontal vertical  
 3257 - Pinça p/ seio frontal horizontal  
 3258 - Pinça p/ seio frontal giratória  
 3259 - Pinça p/ seio maxilar vertical  
 3260 - Pinça p/ seio maxilar horizontal  
 3261 - Pinça p/ seio maxilar giratoria  
 3262 - Pinças nasal back bite 14 cm  
 3263 - Pinças nasal back bite de tubo giratória 10 cm  
 3264 - Pinças nasal back bite de tubo reta 10 cm  
 3265 - Pinças nasal back bite de tubo direita 10 cm  
 3266 - Pinças nasal back bite de tubo esquerda 10 cm  
 3267 - Pinça rudert direita 10 cm

3268 - Pinça rudert esquerda 10 cm  
 3269 - Pinça mackay-grünwald reta giratória 8 x 3 x 130 mm  
 3270 - Pinça mackay-grünwald reta 8 x 3 x 130 mm  
 3271 - Pinça mackay-grünwald reta giratória 11,5 x 3,5 x 130 mm  
 3272 - Pinça mackay-grünwald reta 11,5 x 3,5 x 130 mm  
 3273 - Pinça mackay-grünwald 45° 8 x 3 x 130 mm  
 3274 - Pinça mackay-grünwald 45° giratória 8 x 3 x 130 mm  
 3275 - Pinça mackay-grünwald 45° 11,5 x 3,5 x 130 mm  
 3276 - Pinça mackay-grünwald 45° giratória 11,5 x 3,5 x 130 mm  
 3277 - Pinça grünwald-henke 3 x 130 mm  
 3278 - Pinça grünwald-henke 3,5 x 130 mm  
 3279 - Pinça grünwald-henke 4 x 130 mm  
 3280 - Pinça grünwald-henke 45° 3 x 130 mm  
 3281 - Pinça grünwald-henke 45° 3,5 x 130 mm  
 3282 - Pinça grünwald-henke 45° 4 x 130 mm  
 3283 - Pinça stammlberger 65° diam.3 x 120 mm  
 3284 - Pinça stammlberger horizontal 65° diam.3 x 120 mm  
 3285 - Pinça stammlberger direita 65° diam.3 x 120 mm  
 3286 - Pinça stammlberger esquerda 65° diam.3 x 120 mm  
 3287 - Pinça biopsia diam. 2,0 mm 3 x 4 x 150 mm  
 3288 - Pinça nasal blaskeley de tubo angulada P  
 3289 - Pinça nasal blaskeley de tubo angulada M  
 3290 - Pinça nasal blaskeley de tubo angulada G  
 3291 - Pinça nasal blaskeley de tubo reta P  
 3292 - Pinça nasal blaskeley de tubo reta M  
 3293 - Pinça nasal blaskeley de tubo reta G  
 3294 - Raspador ósseo  
 3295 - Serra nó bruening  
 3296 - Serra nó eves n°1  
 3297 - Serra nó eves n°2  
 3298 - Serra nó sage  
 3299 - Sluder c/ laminas  
 3300 - Tesoura de metzenbaum curva diam. 5,0 mm x 20 cm  
 3301 - Tesoura de metzenbaum curva diam. 5,0 mm x 33 cm  
 3302 - Tesoura de metzenbaum curva diam. 5,0 mm x 42 cm  
 3303 - Tesoura de metzenbaum haste curva diam. 5,0 mm x 15 cm  
 3304 - Tesoura de metzenbaum haste curva diam. 5,0 mm x 33 cm  
 3305 - Tesoura de metzenbaum haste curva diam. 5,0 mm x 42 cm  
 3306 - Tesoura de metzenbaum reta diam. 5,0 mm x 33 cm  
 3307 - Tesoura micro diam. 3,0 mm x 33 cm  
 3308 - Tesoura tipo gancho diam. 5,0 mm x 33 cm  
 3309 - Tesoura tipo gancho serrilhada diam. 5,0 mm x 33 cm  
 3310 - Tesoura iris delicada reta 12 cm  
 3311 - Tesoura iris delicada curva 12 cm  
 3312 - Tesoura buck reta 11 cm  
 3313 - Tesoura buck curva 11 cm  
 3314 - Tesoura iris reta 10 cm  
 3315 - Tesoura iris reta 11 cm  
 3316 - Tesoura iris reta 12 cm  
 3317 - Tesoura iris reta 13 cm  
 3318 - Tesoura iris curva 10 cm  
 3319 - Tesoura iris curva 11 cm  
 3320 - Tesoura iris curva 12 cm

3321 - Tesoura iris curva 13 cm  
 3322 - Tesoura metzenbaum reta 14 cm  
 3323 - Tesoura metzenbaum reta 16 cm  
 3324 - Tesoura metzenbaum reta 18 cm  
 3325 - Tesoura metzenbaum reta 20 cm  
 3326 - Tesoura metzenbaum reta 23 cm  
 3327 - Tesoura metzenbaum reta 25 cm  
 3328 - Tesoura metzenbaum reta 30 cm  
 3329 - Tesoura metzenbaum reta 35 cm  
 3330 - Tesoura metzenbaum curva 14 cm  
 3331 - Tesoura metzenbaum curva 16 cm  
 3332 - Tesoura metzenbaum curva 18 cm  
 3333 - Tesoura metzenbaum curva 20 cm  
 3334 - Tesoura metzenbaum curva 23 cm  
 3335 - Tesoura metzenbaum curva 25 cm  
 3336 - Tesoura metzenbaum curva 30 cm  
 3337 - Tesoura metzenbaum curva 35 cm  
 3338 - Tesoura Cirúrgica reta 13 cm  
 3339 - Tesoura Cirúrgica Fina-Fina Reta 15 cm  
 3340 - Tesoura Cirúrgica Fina-Fina Reta 17 cm  
 3341 - Tesoura Cirúrgica Fina-Fina Curva 15 cm  
 3342 - Tesoura Cirúrgica Fina-Fina Curva 17 cm  
 3343 - Tesoura Cirúrgica Romba-Fina reta 15 cm  
 3344 - Tesoura Cirúrgica Romba-Fina Reta 17 cm  
 3345 - Tesoura Cirúrgica Romba-Fina Curva 15 cm  
 3346 - Tesoura Cirúrgica Romba-Fina Curva 17 cm  
 3347 - Tesoura Cirúrgica Romba- Romba reta 15 cm  
 3348 - Tesoura Cirúrgica Romba - Romba reta 17 cm  
 3349 - Tesoura Cirúrgica Romba- Romba Curva 15 cm  
 3350 - Tesoura Cirúrgica Romba - Romba Curva 17 cm  
 3351 - Tesoura nasal de tubo 13 cm reta  
 3352 - Tesoura nasal de tubo 13 cm esquerda  
 3353 - Tesoura nasal de tubo 13 cm direita  
 3354 - Tesoura mayo reta 15 cm  
 3355 - Tesoura mayo reta 17 cm  
 3356 - Tesoura mayo curva 15 cm  
 3357 - Tesoura mayo curva 17 cm  
 3358 - Tesoura heyman 17 cm  
 3359 - Tesoura heyman 19 cm  
 3360 - Tesoura heyman 17 cm curva esquerda  
 3361 - Tesoura heyman 17 cm curva direita  
 3362 - Tesoura heyman 19 cm curva esquerda  
 3363 - Tesoura heyman 19 cm curva direita  
 3364 - Tesoura fomom angulada 17 cm  
 3365 - Tesoura fomom angulada 19 cm  
 3366 - Tesoura cottle angulada 17 cm  
 3367 - Tesoura converse angulada 11 cm  
 3368 - Tesoura Stevens curva  
 3369 - Tesoura Stevens reta  
 3370 - Tesoura kilner reta  
 3371 - Tesoura kilner curva  
 3372 - Tesoura Belucci reta 80 mm  
 3373 - Tesoura Belucci curva esquerda 80 mm

3374 - Tesoura Belucci curva direita 80 mm  
3375 - Tesoura Belucci angulada 80 mm  
3376 - Tesoura Belucci reta 120 mm  
3377 - Tesoura Belucci curva esquerda 120 mm  
3378 - Tesoura Belucci curva direita 120 mm  
3379 - Tesoura Belucci angulada 120 mm  
3380 - Tesoura castroviejo angulada 9 cm  
3381 - Tesoura castroviejo angulada 12 cm  
3382 - Tesoura castroviejo reta  
3383 - Tesoura castroviejo curva  
3384 - Tesoura castroviejo 12 cm curva  
3385 - Tesoura castroviejo 14 cm curva  
3386 - Tesoura castroviejo 16 cm curva  
3387 - Tesoura castroviejo 18 cm curva  
3388 - Tesoura castroviejo 12 cm reta  
3389 - Tesoura castroviejo 14 cm reta  
3390 - Tesoura castroviejo 16 cm reta  
3391 - Tesoura castroviejo 18 cm reta  
3392 - Tesoura microendonasal reta  
3393 - Tesoura microendonasal angulada 45°  
3394 - Tesoura microendonasal curva direita  
3395 - Tesoura microendonasal curva esquerda  
3396 - Tesoura de joseph curva 14 cm  
3397 - Tesoura de joseph reta 14 cm  
3398 - Tesoura Goldman Fox Reta 13cm  
3399 - Tesoura Goldman Fox curva 13cm  
3400 - Tesoura lister 17 cm  
3401 - Tesoura lister 19 cm  
3402 - Tesoura la grange 14 cm  
3403 - Tesoura spencer reta 11 cm  
3404 - Tesoura spencer curva 11 cm  
3405 - Trator de crustchfield infantil  
3406 - Trator de crustchfield adulto

#### **2.4 Registro ANVISA**

80218310025

#### **2.5 Apresentação Comercial**

01 embalagem contém 01 unidade do produto.

### **3. Especificações do Produto**

#### **3.1 Indicação de Uso / Finalidade**

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS CORTANTES FACTORY são indicados para utilização em intervenções e apoios cirúrgicos, exames e procedimentos ambulatoriais.

#### **3.2 Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação**

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS CORTANTES FACTORY apresentam mecanismo de articulação. Devem ser utilizados por profissionais habilitados porque seus mecanismos auxiliam em

intervenções cirúrgicas, exames e procedimentos ambulatoriais para cortar tecidos, fazer biopsia e raspar osso.

#### **3.3 Modo de Uso do Produto**

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e ambulatorial e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do instrumento a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica e/ou ambulatorial antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

### **4. Procedimentos Para Utilização e Reutilização dos Instrumentais**

#### **4.1 Utilização**

A utilização dos INSTRUMENTAIS ARTICULADOS CORTANTES FACTORY deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita a ambientes clínicos e hospitalares; com os seguintes cuidados:

#### **4.2 Inspeções**

Só poderão ser utilizados os instrumentais submetidos à inspeção técnica prévia.

#### **4.3 Inspeção Técnica**

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS CORTANTES FACTORY antes de serem disponibilizados para uso devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado. As peças reprovadas devem ser separadas para revisão e manutenção ou destinadas para descarte. A inspeção deve verificar as características associadas à conservação e a funcionalidade do instrumental, incluindo aspectos superficiais, como manchas, oxidações e danos, além de características pertinentes a cada instrumental, tais como facilidade de articulação e capacidade de apreensão, raspagem, corte, etc.

#### **4.4 Limpeza**

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS CORTANTES FACTORY devem ser limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras. IMPORTANTE: Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

#### **4.5 Esterilização**

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS CORTANTES FACTORY devem ser esterilizados antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Nota: Todo o instrumental deve ser limpo logo após o término do

procedimento cirúrgico, desta forma evitando o endurecimento de líquidos originados do trabalho cirúrgico. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas ou batidas que possam comprometer os instrumentais.

Recomendamos:

Auto Clave: temperatura de 121°C, período de 30 minutos.

Auto Clave de Alto Vácuo: temperatura de 132°C, período de 4 minutos.

#### **4.6 Reutilização**

O processo para reutilização dos INSTRUMENTAIS ARTICULADOS CORTANTES FACTORY envolve, no mínimo, seis etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágüe, secagem e esterilização. Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados. Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza. Deve-se assegurar que os instrumentais, estejam livres de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microorganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do aço inoxidável, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

#### **4.7 Limpeza Prévia**

O instrumental deve ser mergulhado, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, preferencialmente enzimático, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

#### **4.8 Descontaminação**

## INSTRUÇÕES DE USO - IFU0024.1

Revisão 01

É feita através da imersão do instrumental, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

### 4.9 Lavagem

As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias, dando-se especial atenção às articulações, serrilhas, cremalheiras e áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

### 4.10 Enxágue

O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágue do instrumental.

### 4.11 Secagem

Deve-se assegurar que os processos de secagem não introduzam umidade, partículas ou felpas na superfície do instrumental. Recomenda-se que o tecido seja absorvente e macio.

### 4.12 Descarte

O descarte de peças desqualificadas deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. Após a substituição, destruir os componentes danificados evitando o uso posterior de forma indevida.

## 5. Armazenamento e Transporte

### 5.1 Condições de Armazenamento

Armazenar em local limpo, seco e protegido de radiação solar direta; Não armazenar com produtos e resíduos químicos; Armazenar de forma organizada para não danificar.

### 5.2 Condições para o Transporte

Transportar em local limpo e seco, protegido de radiação solar direta; Conservar em temperatura e umidade ambiente; Não transportar com produtos e resíduos químicos; Transportar de forma organizada para não danificar.

## 6. Condições de Manipulação

Produto de uso profissional; Não deve ser utilizado sem o conhecimento das técnicas adequadas para a execução dos procedimentos; O manuseio dos instrumentos deve ser cuidadoso para evitar danos e alterações de suas características. Evitando batidas e quedas bruscas.

### 6.1 Prazo de Validade e Lote

A data de validade, de fabricação e o número de lote são informados no rótulo.

## 7. Advertências

O produto deve ser utilizado conforme a finalidade indicada, somente por profissionais qualificados e devidamente treinados para o manuseio do mesmo. Os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

## 8. Precauções

É necessário que o profissional tenha formação especializada em técnicas estabelecidas. O manuseio dos instrumentais deve ser feita por pessoas qualificadas. A infraestrutura e higiene devem ser garantidas na manipulação dos produtos. Nunca armazenar instrumentais limpos em locais que possam ser focos de contaminação. Todos os instrumentais deteriorados ou que apresentem indícios de corrosão deverão ser separados para evitar que o processo de corrosão se alastre.

## 9. Contraindicações

Todos os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

## 10. Efeitos Adversos

Não ocorrerão efeitos adversos, desde que sejam atendidas todas as recomendações presentes nas instruções de uso.

## 11. Explicação da simbologia utilizada na embalagem

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | Número de referência |
|  | Número de lote       |
|  | Fabricante           |
|  | Data de validade     |
|  | Data de fabricação   |

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Não utilizar se a embalagem estiver violada |
|  | Não estéril                                 |
|  | Consultar as instruções de uso              |
|  | Mantenha seco                               |
|  | Mantenha ao abrigo do sol                   |
|  | Reciclável                                  |

Se necessário solicite o formato impresso desta instrução de uso, sem custo adicional através do e-mail [sac@factorycirurgico.com.br](mailto:sac@factorycirurgico.com.br) ou pelo telefone: 11 3974-9119.

### Responsável Técnico

Rogério Guedelha Massano  
CREA-SP: 5063257311