



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. E COM. LTDA

INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY

Produto Não Estéril

Esterilizar antes do uso

Índice

1. Identificação do Fabricante

2. Dados do Produto

2.1 Nome Técnico

2.2 Nome Comercial

2.3 Modelos Comerciais

2.4 Registro ANVISA

2.5 Apresentação Comercial

3. Especificações do Produto

3.1 Indicação de Uso / Finalidade

3.2 Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

3.3 Modo de Uso do Produto

4. Procedimentos Para Utilização e Reutilização dos Instrumentais

4.1 Utilização

4.2 Inspeções

4.3 Inspeção Técnica

4.4 Limpeza

4.5 Esterilização

4.6 Reutilização

4.7 Limpeza Prévia

4.8 Descontaminação

4.9 Lavagem

4.10 Enxágue

4.11 Secagem

4.12 Descarte

5. Armazenamento e Transporte

5.1 Condições de Armazenamento

5.2 Condições para o Transporte

6. Condições de Manipulação

6.1 Prazo de Validade e Lote

7. Advertências

8. Precauções

9. Contraindicações

10. Efeitos Adversos

11. Explicação da Simbologia Utilizada na Embalagem

1. Identificação do Fabricante

Factory Instrumental Cirúrgico Indústria e Comércio Ltda.

Rua Ambrosia do México, 392-398, Jd. Cidade Pirituba

CEP: 02945-040 - São Paulo - SP

CNPJ: 56.294.952/0001-10

I.E.: 111.573.179.110

AFE: 8.02.183-1

www.factorycirurgico.com.br – SAC: +55 11 3974-9119

2. Dados do Produto

2.1 Nome Técnico

Instrumental Cirúrgico

2.2 Nome Comercial

Instrumentais Articulados Não Cortantes Factory

2.3 Modelos Comerciais

Referência - Descrição do Modelo Comercial:

0001 - Abre boca whitead 11 cm c/ trava

0002 - Abre boca whitead 13 cm c/ trava

0003 - Abre boca whitead 15 cm c/ trava

0004 - Abre boca Dingman

0005 - Abre boca Jennings 9 cm

0006 - Abre boca Jennings 11 cm

0007 - Abre boca Jennings 13 cm

0008 - Abre boca Jennings 15 cm

0009 - Abre boca de molt 10 cm infantil

0010 - Abre boca de molt 11 cm infantil

0011 - Abre boca Davids direito

0012 - Abre boca Davids esquerdo

0013 - Abre boca leivers direito nº1

0014 - Abre boca leivers direito nº2

0015 - Abre boca leivers esquerdo nº1

0016 - Abre boca leivers esquerdo nº2

0017 - Abre boca MC Ivor c/ 3 abaixa lingua

0018 - Abre Boca Mc.Ivor com 2 arcos c/ 3 abaixa lingua

0019 - Abre Boca Mc.Ivor Infantil

0020 - Abre Boca ovoloopato c/ 4 abaixa lingua

0021 - Abridor de gesso beeson 30 cm

0022 - Abridor de gesso henning 28 cm

0023 - Abridor de gesso woff 23 cm

0024 - Abridor de gesso woff 27 cm

0025 - Afastador balfuor-baby 115 mm nº1 c/ válvula

0026 - Afastador balfuor-baby 140 mm nº2 c/ válvula

0027 - Afastador balfuor 170 mm c/ válvula

0028 - Afastador balfuor 200 mm c/ válvula

0029 - Afastador balfuor 240 mm nº1 c/ válvula

0030 - Afastador balfuor 240 mm nº2 c/ válvula

0031 - Afastador balfuor 250 mm nº1 c/ válvula

0032 - Afastador balfuor 250 mm nº2 c/ válvula

0033 - Afastador balfuor 250 mm nº3 c/ válvula

0034 - Afastador balfuor 270 mm c/ válvula

0035 - Afastador balfuor 300 mm nº1 c/ válvula

0036 - Afastador balfuor 300 mm nº2 c/ válvula

0037 - Afastador kirschner 24 cm c/ válvulas

0038 - Afastador kirschner 25,5 cm c/ válvulas

0039 - Afastador kirschner oval

0040 - Afastador radiolúcida c/ válvulas

0041 - Afastador Smith c/ válvulas nº1

0042 - Afastador Smith c/ válvulas nº2

0043 - Afastador franz c/ válvulas nº1

0044 - Afastador franz c/ válvulas nº2

0045 - Afastador semm

0046 - Afastador gosset 100 mm s/ válvula

0047 - Afastador gosset 115 mm s/ válvula

0048 - Afastador gosset 120 mm s/ válvula

0049 - Afastador gosset 180 mm s/ válvula

0050 - Afastador gosset 170 mm s/ válvula

0051 - Afastador gosset 200 mm nº1 s/ válvula

0052 - Afastador gosset 300 mm nº2 s/ válvula

0053 - Afastador gosset 200 mm nº1 c/ válvula

0054 - Afastador gosset 200 mm nº2 c/ válvula

0055 - Afastador adson 14 cm curvo agudo

0056 - Afastador adson 14 cm curvo rombo

0057 - Afastador adson 16 cm curvo agudo

0058 - Afastador adson 16 cm curvo rombo

0059 - Afastador adson 18 cm curvo agudo

0060 - Afastador adson 18 cm curvo rombo

0061 - Afastador adson 20 cm curvo agudo

0062 - Afastador adson 20 cm curvo rombo

0063 - Afastador adson 22 cm curvo agudo

0064 - Afastador adson 22 cm curvo rombo

0065 - Afastador adson 24 cm curvo agudo

0066 - Afastador adson 24 cm curvo rombo

0067 - Afastador adson 26 cm curvo agudo

0068 - Afastador adson 26 cm curvo rombo

0069 - Afastador adson 28 cm curvo agudo

0070 - Afastador adson 28 cm curvo rombo

0071 - Afastador adson 30 cm curvo agudo

0072 - Afastador adson 30 cm curvo rombo

0073 - Afastador adson 32 cm curvo agudo

0074 - Afastador adson 32 cm curvo rombo

0075 - Afastador adson 14 cm reto agudo

0076 - Afastador adson 14 cm reto rombo

0077 - Afastador adson 16 cm reto agudo

0078 - Afastador adson 16 cm reto rombo

0079 - Afastador adson 18 cm reto agudo

0080 - Afastador adson 18 cm reto rombo

0081 - Afastador adson 20 cm reto agudo

0082 - Afastador adson 20 cm reto rombo

0083 - Afastador adson 22 cm reto agudo

0084 - Afastador adson 22 cm reto rombo

0085 - Afastador adson 24 cm reto agudo

0086 - Afastador adson 24 cm reto rombo
 0087 - Afastador adson 26 cm reto agudo
 0088 - Afastador adson 26 cm reto rombo
 0089 - Afastador adson 28 cm reto agudo
 0090 - Afastador adson 28 cm reto rombo
 0091 - Afastador adson 30 cm reto agudo
 0092 - Afastador adson 30 cm reto rombo
 0093 - Afastador adson 32 cm reto agudo
 0094 - Afastador adson 32 cm reto rombo
 0095 - Afastador adson baby articulado 14 cm agudo
 0096 - Afastador adson baby articulado 14 cm rombo
 0097 - Afastador adson articulado 12 cm agudo
 0098 - Afastador adson articulado 12 cm rombo
 0099 - Afastador adson articulado 14 cm agudo
 0100 - Afastador adson articulado 14 cm rombo
 0101 - Afastador adson articulado 16 cm agudo
 0102 - Afastador adson articulado 16 cm rombo
 0103 - Afastador adson articulado 18 cm agudo
 0104 - Afastador adson articulado 18 cm rombo
 0105 - Afastador adson articulado 20 cm agudo
 0106 - Afastador adson articulado 20 cm rombo
 0107 - Afastador adson articulado 22 cm agudo
 0108 - Afastador adson articulado 22 cm rombo
 0109 - Afastador adson articulado 24 cm agudo
 0110 - Afastador adson articulado 24 cm rombo
 0111 - Afastador adson articulado 26 cm agudo
 0112 - Afastador adson articulado 26 cm rombo
 0113 - Afastador adson articulado 28 cm agudo
 0114 - Afastador adson articulado 28 cm rombo
 0115 - Afastador adson articulado 30 cm agudo
 0116 - Afastador adson articulado 30 cm rombo
 0117 - Afastador adson articulado 32 cm agudo
 0118 - Afastador adson articulado 32 cm rombo
 0119 - Afastador adson articulado 34 cm agudo
 0120 - Afastador adson articulado 34 cm rombo
 0121 - Afastador adson articulado duplamente 12 cm
 0122 - Afastador adson articulado duplamente 14 cm
 0123 - Afastador adson articulado duplamente 16 cm
 0124 - Afastador adson articulado duplamente 18 cm
 0125 - Afastador adson articulado duplamente 19 cm
 0126 - Afastador adson articulado duplamente 20 cm
 0127 - Afastador adson articulado duplamente 22 cm
 0128 - Afastador adson articulado duplamente 24 cm
 0129 - Afastador adson articulado duplamente 26 cm
 0130 - Afastador adson articulado duplamente 28 cm
 0131 - Afastador adson articulado duplamente 30 cm
 0132 - Afastador adson articulado duplamente 32 cm
 0133 - Afastador anderson adson curvo 14 cm agudo
 0134 - Afastador anderson adson curvo 14 cm rombo
 0135 - Afastador anderson adson curvo 16 cm agudo
 0136 - Afastador anderson adson curvo 16 cm rombo
 0137 - Afastador anderson adson curvo 17 cm agudo
 0138 - Afastador anderson adson curvo 17 cm rombo

0139 - Afastador anderson adson curvo 18 cm agudo
 0140 - Afastador anderson adson curvo 18 cm rombo
 0141 - Afastador anderson adson curvo 19 cm agudo
 0142 - Afastador anderson adson curvo 19 cm rombo
 0143 - Afastador anderson adson curvo 20 cm agudo
 0144 - Afastador anderson adson curvo 20 cm rombo
 0145 - Afastador anderson adson curvo 22 cm agudo
 0146 - Afastador anderson adson curvo 22 cm rombo
 0147 - Afastador anderson adson curvo 24 cm agudo
 0148 - Afastador anderson adson curvo 24 cm rombo
 0149 - Afastador anderson adson curvo 26 cm agudo
 0150 - Afastador anderson adson curvo 26 cm rombo
 0151 - Afastador anderson adson curvo 28 cm agudo
 0152 - Afastador anderson adson curvo 28 cm rombo
 0153 - Afastador anderson adson curvo 30 cm agudo
 0154 - Afastador anderson adson curvo 30 cm rombo
 0155 - Afastador anderson adson curvo 32 cm agudo
 0156 - Afastador anderson adson curvo 32 cm rombo
 0157 - Afastador anderson adson curvo 34 cm agudo
 0158 - Afastador anderson adson curvo 34 cm rombo
 0159 - Afastador anderson adson reto 14 cm agudo
 0160 - Afastador anderson adson reto 14 cm rombo
 0161 - Afastador anderson adson reto 16 cm agudo
 0162 - Afastador anderson adson reto 16 cm rombo
 0163 - Afastador anderson adson reto 17 cm agudo
 0164 - Afastador anderson adson reto 17 cm rombo
 0165 - Afastador anderson adson reto 18 cm agudo
 0166 - Afastador anderson adson reto 18 cm rombo
 0167 - Afastador anderson adson reto 19 cm agudo
 0168 - Afastador anderson adson reto 19cm rombo
 0169 - Afastador anderson adson reto 20 cm agudo
 0170 - Afastador anderson adson reto 20cm rombo
 0171 - Afastador anderson adson reto 22 cm agudo
 0172 - Afastador anderson adson reto 22 cm rombo
 0173 - Afastador anderson adson reto 24 cm agudo
 0174 - Afastador anderson adson reto 24 cm rombo
 0175 - Afastador anderson adson reto 26 cm agudo
 0176 - Afastador anderson adson reto 26 cm rombo
 0177 - Afastador anderson adson reto 28 cm agudo
 0178 - Afastador anderson adson reto 28 cm rombo
 0179 - Afastador anderson adson reto 30 cm agudo
 0180 - Afastador anderson adson reto 30 cm rombo
 0181 - Afastador anderson adson reto 32 cm agudo
 0182 - Afastador anderson adson reto 32 cm rombo
 0183 - Afastador anderson adson reto 34 cm agudo
 0184 - Afastador anderson adson reto 34 cm rombo
 0185 - Afastador baby collin abnominal
 0186 - Afastador gelpi 9 cm aguda
 0187 - Afastador gelpi 9 cm romba
 0188 - Afastador gelpi 10 cm aguda
 0189 - Afastador gelpi 10 cm romba
 0190 - Afastador gelpi 12 cm aguda
 0191 - Afastador gelpi 12 cm romba

0192 - Afastador gelpi 14 cm aguda
 0193 - Afastador gelpi 14 cm romba
 0194 - Afastador gelpi 15 cm aguda
 0195 - Afastador gelpi 15 cm romba
 0196 - Afastador gelpi 16 cm aguda
 0197 - Afastador gelpi 16 cm romba
 0198 - Afastador gelpi 17 cm aguda
 0199 - Afastador gelpi 17 cm romba
 0200 - Afastador gelpi 18 cm aguda
 0201 - Afastador gelpi 18 cm romba
 0202 - Afastador gelpi 19 cm aguda
 0203 - Afastador gelpi 19 cm romba
 0204 - Afastador gelpi 20 cm aguda
 0205 - Afastador gelpi 20 cm romba
 0206 - Afastador gelpi 21 cm aguda
 0207 - Afastador gelpi 21 cm romba
 0208 - Afastador gelpi 22 cm aguda
 0209 - Afastador gelpi 22 cm romba
 0210 - Afastador gelpi 23 cm aguda
 0211 - Afastador gelpi 23 cm romba
 0212 - Afastador gelpi 24 cm aguda
 0213 - Afastador gelpi 24 cm romba
 0214 - Afastador gelpi 25 cm aguda
 0215 - Afastador gelpi 25 cm romba
 0216 - Afastador gelpi 26 cm aguda
 0217 - Afastador gelpi 26 cm romba
 0218 - Afastador gelpi 27 cm aguda
 0219 - Afastador gelpi 27 cm romba
 0220 - Afastador gelpi 28 cm aguda
 0221 - Afastador gelpi 28 cm romba
 0222 - Afastador gelpi 29 cm aguda
 0223 - Afastador gelpi 29 cm romba
 0224 - Afastador gelpi 30 cm aguda
 0225 - Afastador gelpi 30 cm romba
 0226 - Afastador gelpi 31 cm aguda
 0227 - Afastador gelpi 31 cm romba
 0228 - Afastador gelpi 32 cm aguda
 0229 - Afastador gelpi 32 cm romba
 0230 - Afastador gelpi 33 cm aguda
 0231 - Afastador gelpi 33 cm romba
 0232 - Afastador gelpi 34 cm aguda
 0233 - Afastador gelpi 34 cm romba
 0234 - Afastador gelpi 35 cm aguda
 0235 - Afastador gelpi 35 cm romba
 0236 - Afastador gelpi 40 cm aguda
 0237 - Afastador gelpi 40 cm romba
 0238 - Afastador gelpi 42 cm aguda
 0239 - Afastador gelpi 42 cm romba
 0240 - Afastador gelpi garra 90° c/ 4 dentes 24 cm
 0241 - Afastador henkey 14 cm agudo
 0242 - Afastador henkey 14 cm rombo
 0243 - Afastador henkey 16 cm agudo
 0244 - Afastador henkey 16 cm rombo

0245 - Afastador henkey 18 cm agudo
 0246 - Afastador henkey 18 cm rombo
 0247 - Afastador henkey 20 cm agudo
 0248 - Afastador henkey 20 cm rombo
 0249 - Afastador beckmann adson 29 cm agudo 25 x 29 mm
 0250 - Afastador beckmann adson 29 cm agudo 44 x 29 mm
 0251 - Afastador beckmann adson 29 cm rombo 25 x 29 mm
 0252 - Afastador beckmann adson 29 cm rombo 44 x 29 mm
 0253 - Afastador beckmann adson 31 cm 4 x 4 dentes agudos
 0254 - Afastador beckmann adson 32 cm 4 x 5 dentes agudos
 0255 - Afastador beckmann adson 32 cm 7 x 7 dentes agudos
 0256 - Afastador beckmann eaton 29 cm
 0257 - Afastador beckmann eaton duplamente 32 cm
 0258 - Afastador beckmann adson 31 cm
 0259 - Afastador caspar 5,0 cm
 0260 - Afastador caspar 5,5 cm
 0261 - Afastador caspar 6,0 cm
 0262 - Afastador caspar 6,5 cm
 0263 - Afastador caspar lombar 5,0 cm
 0264 - Afastador caspar lombar 5,5 cm
 0265 - Afastador caspar lombar 6,0 cm
 0266 - Afastador caspar lombar 6,5 cm
 0267 - Afastador jefferson 3 x 4 dentes 140 mm
 0268 - Afastador spreader reto 18 cm c/ cremalheira
 0269 - Afastador spreader reto 22 cm c/ cremalheira
 0270 - Afastador spreader reto 25 cm c/ cremalheira
 0271 - Afastador spreader curvo 18 cm c/ cremalheira
 0272 - Afastador spreader curvo 22 cm c/ cremalheira
 0273 - Afastador spreader curvo 25 cm c/ cremalheira
 0274 - Afastador lâmina spreader 26 cm lamina concava
 0275 - Afastador lâmina spreader 26 cm lamina lisa
 0276 - Afastador casper 165 mm com articulação 5 válvulas
 0277 - Afastador collin grande 3 válvulas
 0278 - Afastador collin pequeno 3 nº1 válvulas
 0279 - Afastador collin pequeno 3 nº2 válvulas
 0280 - Afastador collin
 0281 - Afastador casper 120 mm com articulação c/ válvulas
 0282 - Afastador casper 180 mm com articulação c/ válvulas
 0283 - Afastador casper 200 mm com articulação c/ válvulas
 0284 - Afastador casper 250 mm com articulação c/ válvulas
 0285 - Afastador casper 300 mm com articulação c/ válvulas
 0286 - Afastador casper 350 mm com articulação c/ válvulas
 0287 - Afastador casper 400 mm com articulação c/ válvulas
 0288 - Afastador casper 450 mm com articulação c/ válvulas
 0289 - Afastador casper 500 mm com articulação c/ válvulas
 0290 - Afastador mayo Adams 165 mm
 0291 - Afastador harvey jackson 280 mm
 0292 - Afastador sullivan connor
 0293 - Afastador plester 110 mm agudo
 0294 - Afastador plester 110 mm rombo
 0295 - Afastador plester 130 mm agudo
 0296 - Afastador plester 130 mm rombo
 0297 - Afastador wullstein 110 mm agudo

0298 - Afastador wullstein 110 mm rombo
 0299 - Afastador wullstein 130 mm agudo
 0300 - Afastador wullstein 130 mm rombo
 0301 - Afastador Celebrar 14 cm
 0302 - Afastador Celebrar 16 cm
 0303 - Afastador Celebrar 18 cm
 0304 - Afastador Celebrar 19 cm
 0305 - Afastador Celebrar 20 cm
 0306 - Afastador Celebrar 22 cm
 0307 - Afastador Celebrar 24 cm
 0308 - Afastador Celebrar 26 cm
 0309 - Afastador Celebrar 28 cm
 0310 - Afastador Celebrar 30 cm
 0311 - Afastador Celebrar 32 cm
 0312 - Afastador weitlaner 11 cm agudo
 0313 - Afastador weitlaner 11 cm rombo
 0314 - Afastador weitlaner 12 cm agudo
 0315 - Afastador weitlaner 12 cm rombo
 0316 - Afastador weitlaner 13 cm agudo
 0317 - Afastador weitlaner 13 cm rombo
 0318 - Afastador weitlaner 14 cm agudo
 0319 - Afastador weitlaner 14 cm rombo
 0320 - Afastador weitlaner 15 cm agudo
 0321 - Afastador weitlaner 15 cm rombo
 0322 - Afastador weitlaner 16 cm agudo
 0323 - Afastador weitlaner 16 cm rombo
 0324 - Afastador weitlaner 17 cm agudo
 0325 - Afastador weitlaner 17 cm rombo
 0326 - Afastador weitlaner 18 cm agudo
 0327 - Afastador weitlaner 18 cm rombo
 0328 - Afastador weitlaner 19 cm agudo
 0329 - Afastador weitlaner 19 cm rombo
 0330 - Afastador weitlaner 20 cm agudo
 0331 - Afastador weitlaner 20 cm rombo
 0332 - Afastador weitlaner 21 cm agudo
 0333 - Afastador weitlaner 21 cm rombo
 0334 - Afastador weitlaner 22 cm agudo
 0335 - Afastador weitlaner 22 cm rombo
 0336 - Afastador weitlaner 23 cm agudo
 0337 - Afastador weitlaner 23 cm rombo
 0338 - Afastador weitlaner 24 cm agudo
 0339 - Afastador weitlaner 24 cm rombo
 0340 - Afastador weitlaner 25 cm agudo
 0341 - Afastador weitlaner 25 cm rombo
 0342 - Afastador weitlaner 26 cm agudo
 0343 - Afastador weitlaner 26 cm rombo
 0344 - Afastador weitlaner 27 cm agudo
 0345 - Afastador weitlaner 27 cm rombo
 0346 - Afastador weitlaner 28 cm agudo
 0347 - Afastador weitlaner 28 cm rombo
 0348 - Afastador weitlaner 30 cm agudo
 0349 - Afastador weitlaner 30 cm rombo
 0350 - Afastador weitlaner 32 cm agudo

0351 - Afastador weitlaner 32 cm rombo
 0352 - Afastador weitlaner 12 cm 2 x 3 dentes
 0353 - Afastador weitlaner 14 cm 2 x 3 dentes
 0354 - Afastador weitlaner 17 cm 2 x 3 dentes
 0355 - Afastador weitlaner 23 cm 2 x 3 dentes
 0356 - Afastador weitlaner 25 cm 2 x 3 dentes
 0357 - Afastador weitlaner 12 cm 3 x 4 dentes
 0358 - Afastador weitlaner 14 cm 3 x 4 dentes
 0359 - Afastador weitlaner 17 cm 3 x 4 dentes
 0360 - Afastador weitlaner 19 cm 3 x 4 dentes
 0361 - Afastador weitlaner 23 cm 3 x 4 dentes
 0362 - Afastador weitlaner 25 cm 3 x 4 dentes
 0363 - Afastador weitlaner 23 cm 3 x 4 dentes curvo
 0364 - Afastador Alm delicado 5 x 9 x 100 mm
 0365 - Afastador Alm delicado 4 x 8 x 60 mm
 0366 - Afastador Alm 4 x 4 dentes agudo 70 mm
 0367 - Afastador Alm 4 x 4 dentes agudo 100 mm
 0368 - Afastador Alm 4 x 4 dentes semi agudo 100 mm
 0369 - Afastador Alm 4 x 4 dentes rombo 70 mm
 0370 - Afastador Alm 4 x 4 dentes rombo 100 mm
 0371 - Afastador jansen 3 x 3 dentes agudo
 0372 - Afastador jansen 3 x 3 dentes agudo e rombo
 0373 - Afastador jansen 3 x 3 dentes rombo
 0374 - Afastador cloward 10 válvulas
 0375 - Afastador cloward 155 mm separador
 0376 - Afastador inge 16 cm
 0377 - Afastador inge 17 cm
 0378 - Afastador inge 24 cm
 0379 - Afastador inge 28 cm
 0380 - Afastador finnochieto baby nº1 c/ válvulas
 0381 - Afastador finnochieto nº2
 0382 - Afastador finnochieto nº3
 0383 - Afastador finnochieto nº4
 0384 - Afastador finnochieto nº5
 0385 - Afastador finnochieto nº6
 0386 - Afastador finnochieto nº7
 0387 - Afastador finnochieto nº8
 0388 - Afastador finnochieto-bulford
 0389 - Afastador casper 100 mm com articulação 6 válvulas
 0390 - Afastador ankeney
 0391 - Afastador apfelbaum
 0392 - Afastador cervical longitudinal
 0393 - Afastador cervical transversal
 0394 - Afastador cloward lombar 23 cm
 0395 - Afastador cloward p/ vertebra
 0396 - Afastador de corpo vertebral
 0397 - Afastador leyla duplo c/ 4 espátulas
 0398 - Afastador leyla simples c/ 2 espátulas
 0399 - Afastador markhan meyerding direito 60 x 25 mm
 0400 - Afastador markhan meyerding esquerdo 60 x 25 mm
 0401 - Afastador meyerding 18 cm lâmina 41 x 25 mm-neuro
 0402 - Afastador meyerding 18 cm lâmina 51 x 25 mm-neuro
 0403 - Afastador meyerding 18 cm lâmina 57 x 25 mm-neuro

0404 - Afastador meyerding grande 25 cm lâmina 50 x 94 mm
 0405 - Afastador meyerding médio 22 cm lâmina 25 x 70 mm
 0406 - Afastador meyerding p/ bookwalter 82 x 25 mm
 0407 - Afastador meyerding p/ bookwalter 95 x 50 mm
 0408 - Afastador meyerding pequeno 22 cm lâmina. 17 x 55 mm
 0409 - Afastador miskimon agudo 38 x 22 mm x 19 cm
 0410 - Afastador miskimon rombo 38 x 22 mm x 19 cm
 0411 - Afastador mollison 155 mm
 0412 - Afastador seletz gelpi Ang. reto
 0413 - Afastador spreader
 0414 - Afastador miskimon
 0415 - Afastador Willians 30 cm
 0416 - Afastador willians 50 x 20 mm
 0417 - Afastador willians 70 x 20 mm
 0418 - Afastador articulado diam. 5 x 150 mm
 0419 - Afastador articulado diam. 5 x 200 mm
 0420 - Afastador articulado diam. 5 x 250 mm
 0421 - Afastador articulado diam. 5 x 330 mm
 0422 - Afastador articulado diam. 5 x 420 mm
 0423 - Afastador articulado diam. 10 x 150 mm
 0424 - Afastador articulado diam. 10 x 200 mm
 0425 - Afastador articulado diam. 10 x 250 mm
 0426 - Afastador articulado diam. 10 x 330 mm
 0427 - Afastador articulado diam. 10 x 420 mm
 0428 - Afastador articulado flexível 3 laminas diam. 5 x 150 mm
 0429 - Afastador articulado flexível 3 laminas diam. 5 x 200 mm
 0430 - Afastador articulado flexível 3 laminas diam. 5 x 250 mm
 0431 - Afastador articulado flexível 3 laminas diam. 5 x 330 mm
 0432 - Afastador articulado flexível 3 laminas diam. 5 x 420 mm
 0433 - Afastador articulado flexível 5 laminas diam. 10 x 150 mm
 0434 - Afastador articulado flexível 5 laminas diam. 10 x 200 mm
 0435 - Afastador articulado flexível 5 laminas diam. 10 x 250 mm
 0436 - Afastador articulado flexível 5 laminas diam. 10 x 330 mm
 0437 - Afastador articulado flexível 5 laminas diam. 10 x 420 mm
 0438 - Afastador articulado palheta 150 mm
 0439 - Afastador articulado palheta 200 mm
 0440 - Afastador articulado palheta 250 mm
 0441 - Afastador articulado palheta 330 mm
 0442 - Afastador articulado palheta 420 mm
 0443 - Afastador scoville Richter nº1
 0444 - Afastador scoville Richter nº2
 0445 - Afastador scoville haverfield 160 x 185 mm
 0446 - Afastador gold finger flexível 150 mm
 0447 - Afastador gold finger flexível 200 mm
 0448 - Afastador gold finger flexível 250 mm
 0449 - Afastador gold finger flexível 330 mm
 0450 - Afastador gold finger flexível 420 mm
 0458 - Afastador de obesidade mórbida
 0459 - Afastador thompson
 0460 - Amassador de fascia
 0461 - Amassador cartilagem
 0463 - Compasso 20 mm
 0464 - Compasso 40 mm

0465 - Compasso 60 mm
 0466 - Compasso 100 mm
 0467 - Compasso 120 mm
 0468 - Capa
 0469 - Clamp p/ anastomose 15 cm x 15 mm
 0470 - Clamp p/ anastomose 15 cm x 18 mm
 0471 - Clamp p/ anastomose 15 cm x 22 mm
 0472 - Clamp p/ muti purpose 13 cm 30°
 0473 - Clamp p/ muti purpose 13 cm 50°
 0474 - Clamp TP colher 13 cm
 0475 - Dilatador La borde 12 cm
 0476 - Descolador facial di viterbo P
 0477 - Descolador facial di viterbo M
 0478 - Descolador facial di viterbo G
 0479 - Empunhadura longitudinal
 0480 - Empunhadura p/ porta agulha
 0481 - Empunhadura plastica c/ cremalheira
 0482 - Empunhadura plastica s/ cremalheira
 0483 - Empunhadura mathie reta
 0484 - Empunhadura mathie curva
 0485 - Especímetro 10 cm
 0486 - Especímetro 14 cm
 0487 - Espelho nasal autostático n.1
 0488 - Espelho nasal autostático n.2
 0489 - Espelho nasal autostático n.3
 0490 - Espelho nasal hartman n.1
 0491 - Espelho nasal hartman n.2
 0492 - Espelho nasal hartman n.3
 0493 - Espelho nasal de killian n.1
 0494 - Espelho nasal de killian n.2
 0495 - Espelho nasal de killian n.3
 0496 - Espelho nasal hartman infantil nº1
 0497 - Espelho nasal hartman infantil nº2
 0498 - Espelho nasal Cotle P
 0499 - Espelho nasal Cotle M
 0500 - Espelho collin 75 x 25 mm
 0501 - Espelho collin 85 x 30 mm
 0502 - Espelho collin vaginal nº0 micro
 0503 - Espelho collin vaginal nº1 pequeno
 0504 - Espelho collin vaginal nº2 médio
 0505 - Espelho collin vaginal nº3 grande
 0506 - Espelho collin vaginal p/ virgem
 0507 - Espelho collin vaginal nº1 pequeno FO
 0508 - Espelho collin vaginal nº2 médio FO
 0509 - Espelho collin vaginal nº3 grande FO
 0510 - Espelho cushioning 70 x 15 mm
 0511 - Espelho cushioning 90 x 15 mm
 0512 - Espelho cushioning 110 x 15 mm
 0514 - Espelho hardy nasal 70 mm
 0515 - Espelho hardy nasal 80 mm
 0516 - Espelho hardy nasal 90 mm
 0517 - Espelho mathieu retal trivale
 0518 - Espelho paravero-caspar 80 x 10 mm

0519 - Espelho paravero-caspar 90 x 13 mm
 0520 - Espelho paravero-caspar 100 x 15 mm
 0521 - Espelho pitanga santos retal 13 cm
 0522 - Espelho sims nº1
 0523 - Espelho sims nº2
 0524 - Espelho sims nº3
 0525 - Espelho sims retal
 0526 - Estribo bohler 140 x 100 mm
 0527 - Estribo bohler 160 x 90 mm
 0528 - Estribo bohler 170 x 130 mm
 0529 - Estribo bohler 210 x 110 mm
 0530 - Estribo bohler 220 x 170 mm
 0531 - Estribo bohler 230 x 100 mm
 0532 - Estribo bohler 260 x 120 mm
 0533 - Estribo de kirschner 14 cm abertura 127 mm
 0534 - Estribo de kirschner 19 cm abertura 215 mm
 0535 - Estribo de kirschner 24 cm abertura 254 mm
 0536 - Estribo de steinmann pequeno 90 x 75 mm
 0537 - Estribo de steinmann médio 160 x 90 mm
 0538 - Estribo de steinmann grande 210 x 150 mm
 0539 - Forceps kielland 42 cm
 0540 - Forceps nagele 35,5 cm
 0541 - Forceps nagele 40 cm
 0542 - Forceps marelli
 0543 - Forceps boerrma 28 cm
 0544 - Forceps Simpson 23,5 cm
 0545 - Forceps Simpson 25 cm
 0546 - Forceps simpson- braun 30,5 cm
 0547 - Forceps simpson- braun 33 cm
 0548 - Forceps simpson- braun 35 cm
 0549 - Forceps simpson- braun 36 cm
 0550 - Forceps simpson- braun 44,5 cm
 0551 - Guia drill
 0552 - Micro porta agulha barraquer reto 12 cm c/ trava pta cv
 0553 - Micro porta agulha barraquer reto 12 cm c/ trava pta rt
 0554 - Micro porta agulha barraquer reto 12 cm s/ trava pta cv
 0555 - Micro porta agulha barraquer reto 12 cm s/ trava pta rt
 0556 - Micro porta agulha cabo redondo s/ 14 cm
 0557 - Micro porta agulha cabo redondo s/ 15 cm
 0558 - Micro porta agulha cabo redondo s/ 16 cm
 0559 - Micro porta agulha cabo redondo s/ 17 cm
 0560 - Micro porta agulha cabo redondo s/ 18 cm
 0561 - Micro porta agulha cabo redondo s/ 19 cm
 0562 - Micro porta agulha cabo redondo s/ 20 cm
 0563 - Micro porta agulha cabo redondo s/ 23 cm
 0564 - Micro porta agulha cabo redondo s/ 25 cm
 0565 - Micro porta agulha cabo redondo s/ 30 cm
 0566 - Micro porta agulha cabo redondo c/ 14 cm
 0567 - Micro porta agulha cabo redondo c/ 15 cm
 0568 - Micro porta agulha cabo redondo c/ 16 cm
 0569 - Micro porta agulha cabo redondo c/ 17 cm
 0570 - Micro porta agulha cabo redondo c/ 18 cm
 0571 - Micro porta agulha cabo redondo c/ 19 cm

0572 - Micro porta agulha cabo redondo c/ 20 cm
0573 - Micro porta agulha cabo redondo c/ 23 cm
0574 - Micro porta agulha cabo redondo c/ 25 cm
0575 - Micro porta agulha cabo redondo c/ 30 cm
0576 - Micro porta agulha jacobson reto 18,5 cm s/ trava
0577 - Micro porta agulha jacobson reto 21 cm s/ trava
0578 - Micro porta agulha jacobson reto 23 cm s/ trava
0579 - Micro porta agulha jacobson reto 18,5 cm c/ trava
0580 - Micro porta agulha jacobson reto 21 cm c/ trava
0581 - Micro porta agulha jacobson reto 23 cm c/ trava
0582 - Micro porta agulha yasargil baioneta 16 cm pta cv
0583 - Micro porta agulha yasargil baioneta 16 cm pta rt
0584 - Micro porta agulha yasargil baioneta 18 cm pta cv
0585 - Micro porta agulha yasargil baioneta 18 cm pta rt
0586 - Micro porta agulha yasargil baioneta 20 cm pta cv
0587 - Micro porta agulha yasargil baioneta 20 cm pta rt
0588 - Micro porta agulha yasargil baioneta 22 cm pta cv
0589 - Micro porta agulha yasargil baioneta 22 cm pta rt
0590 - Micro porta agulha yasargil reta 18 cm pta cv
0591 - Micro porta agulha yasargil reta 18 cm pta rt
0592 - Micro porta agulha yasargil reta 20 cm pta cv
0593 - Micro porta agulha yasargil reta 16 cm pta cv
0594 - Micro porta agulha yasargil reta 16 cm pta rt
0595 - Micro porta agulha yasargil reta 18 cm pta cv
0596 - Micro porta agulha yasargil reta 18 cm pta rt
0597 - Micro porta agulha yasargil reta 20 cm pta cv
0598 - Micro porta agulha yasargil reta 20 cm pta rt
0599 - Micro porta agulha yasargil reta 22 cm pta cv
0600 - Micro porta agulha yasargil reta 22 cm pta rt
0601 - Micro raspador yasargil baioneta 18 cm pta cv p/ baixo 2,0 mm
0602 - Micro raspador yasargil baioneta 18 cm pta cv p/ baixo 2,5 mm
0603 - Micro raspador yasargil baioneta 18 cm pta reta 2,0 mm
0604 - Micro raspador yasargil baioneta 18 cm pta reta 2,5 mm
0605 - Micro raspador yasargil baioneta 19 cm pta cv p/ baixo 2,0 mm
0606 - Micro raspador yasargil baioneta 19 cm pta cv p/ baixo 2,5 mm
0607 - Micro raspador yasargil baioneta 19 cm pta reta 2,0 mm
0608 - Micro raspador yasargil baioneta 19 cm pta reta 2,5 mm
0609 - Micro raspador yasargil baioneta 20 cm pta cv p/ baixo 2,0 mm
0610 - Micro raspador yasargil baioneta 20 cm pta cv p/ baixo 2,5 mm
0611 - Micro raspador yasargil baioneta 20 cm pta reta 2,0 mm
0612 - Micro raspador yasargil baioneta 20 cm pta reta 2,5 mm
0613 - Porta agulha curvo boca 5,0 mm diam.5,0 x 330 mm
0614 - Porta agulha curvo diam.5,0 x 200 mm
0615 - Porta agulha curvo diam.5,0 x 330 mm
0616 - Porta agulha curvo diam.5,0 x 420 mm
0617 - Porta agulha reto boca 5,0 mm diam.5,0 x 330 mm
0618 - Porta agulha reto diam.5,0 x 330 mm
0619 - Porta agulha reto diam.5,0 x 420 mm
0620 - Porta agulha microvascular 17 cm c/ widia
0621 - Porta agulha microvascular 18 cm c/ widia
0622 - Porta agulha microvascular 20 cm c/ widia
0623 - Porta agulha microvascular 22 cm c/ widia
0624 - Porta agulha microvascular 23 cm c/ widia

0625 - Porta agulha microvascular 30 cm c/ widia
0626 - Porta agulha mayo-hegar 12 cm s/ widia
0627 - Porta agulha mayo-hegar 13 cm s/ widia
0628 - Porta agulha mayo-hegar 14 cm s/ widia
0629 - Porta agulha mayo-hegar 15 cm s/ widia
0630 - Porta agulha mayo-hegar 16 cm s/ widia
0631 - Porta agulha mayo-hegar 17 cm s/ widia
0632 - Porta agulha mayo-hegar 18 cm s/ widia
0633 - Porta agulha mayo-hegar 19 cm s/ widia
0634 - Porta agulha mayo-hegar 20 cm s/ widia
0635 - Porta agulha mayo-hegar 23 cm s/ widia
0636 - Porta agulha mayo-hegar 25 cm s/ widia
0637 - Porta agulha mayo-hegar 26 cm s/ widia
0638 - Porta agulha mayo-hegar 28 cm s/ widia
0639 - Porta agulha mayo-hegar 30 cm s/ widia
0640 - Porta agulha mayo-hegar 35 cm s/ widia
0641 - Porta agulha mayo-hegar 40 cm s/ widia
0642 - Porta agulha mayo-hegar 12 cm c/ widia
0643 - Porta agulha mayo-hegar 13 cm c/ widia
0644 - Porta agulha mayo-hegar 14 cm c/ widia
0645 - Porta agulha mayo-hegar 15 cm c/ widia
0646 - Porta agulha mayo-hegar 16 cm c/ widia
0647 - Porta agulha mayo-hegar 17 cm c/ widia
0648 - Porta agulha mayo-hegar 18 cm c/ widia
0649 - Porta agulha mayo-hegar 19 cm c/ widia
0650 - Porta agulha mayo-hegar 20 cm c/ widia
0651 - Porta agulha mayo-hegar 23 cm c/ widia
0652 - Porta agulha mayo-hegar 25 cm c/ widia
0653 - Porta agulha mayo-hegar 26 cm c/ widia
0654 - Porta agulha mayo-hegar 28 cm c/ widia
0655 - Porta agulha mayo-hegar 30 cm c/ widia
0656 - Porta agulha mayo-hegar 35 cm c/ widia
0657 - Porta agulha mayo-hegar 40 cm c/ widia
0658 - Porta agulha sarot 18,5 cm c/ widia
0659 - Porta agulha sarot 20 cm c/ widia
0660 - Porta agulha sarot 26,5 cm c/ widia
0661 - Porta agulha sarot 30 cm c/ widia
0662 - Porta agulha sarot 35 cm c/ widia
0663 - Porta agulha ryder 12 cm c/ widia
0664 - Porta agulha ryder 13 cm c/ widia
0665 - Porta agulha ryder 14 cm c/ widia
0666 - Porta agulha ryder 15 cm c/ widia
0667 - Porta agulha ryder 16 cm c/ widia
0668 - Porta agulha ryder 17 cm c/ widia
0669 - Porta agulha ryder 18 cm c/ widia
0670 - Porta agulha ryder 19 cm c/ widia
0671 - Porta agulha ryder 20 cm c/ widia
0672 - Porta agulha ryder 23 cm c/ widia
0673 - Porta agulha ryder 25 cm c/ widia
0674 - Porta agulha ryder 26 cm c/ widia
0675 - Porta agulha ryder 28 cm c/ widia
0676 - Porta agulha ryder 30 cm c/ widia
0677 - Porta agulha ryder 35 cm c/ widia

0678 - Porta agulha ryder 40 cm c/ widia
0679 - Porta agulha wangenstenn 25 cm c/ widia
0680 - Porta agulha wangenstenn 26 cm c/ widia
0681 - Porta agulha wangenstenn 27 cm c/ widia
0682 - Porta agulha wangenstenn 28 cm c/ widia
0683 - Porta agulha wangenstenn 29 cm c/ widia
0684 - Porta agulha wangenstenn 30 cm c/ widia
0685 - Porta agulha curvo 16 cm c/ widia
0686 - Porta agulha derf 12 cm c/ widia
0687 - Porta agulha derf 16 cm c/ widia
0688 - Porta agulha baioneta 16 cm c/ widia
0689 - Porta agulha p/ coronária 12 cm c/ widia
0690 - Porta agulha p/ coronária 14 cm c/ widia
0691 - Porta agulha p/ coronária 16 cm c/ widia
0692 - Porta agulha p/ coronária 17 cm c/ widia
0693 - Porta agulha p/ coronária 18 cm c/ widia
0694 - Porta agulha p/ coronária 19 cm c/ widia
0695 - Porta agulha p/ coronária 20 cm c/ widia
0696 - Porta agulha p/ coronária 21 cm c/ widia
0697 - Porta agulha p/ coronária 22 cm c/ widia
0698 - Porta agulha p/ coronária 24 cm c/ widia
0699 - Porta agulha p/ coronária 26 cm c/ widia
0700 - Porta agulha p/ coronária 28 cm c/ widia
0701 - Porta agulha p/ coronária 30 cm c/ widia
0702 - Porta agulha p/ fio de aço 15 cm c/ widia
0703 - Porta agulha p/ fio de aço 16 cm c/ widia
0704 - Porta agulha p/ fio de aço 19 cm c/ widia
0705 - Porta agulha p/ fio de aço 20 cm c/ widia
0706 - Porta agulha hegar diam. 3,0 x 330 mm
0707 - Porta agulha mathie cabo curvo diam.5,0 x 330 mm
0708 - Porta agulha mathie cabo curvo diam.5,0 x 360 mm
0709 - Porta agulha mathie cabo curvo diam.5,0 x 420 mm
0710 - Porta agulha mathie cabo reto diam.5,0 x 330 mm
0711 - Porta agulha mathie cabo reto diam.5,0 x 360 mm
0712 - Porta agulha mathie cabo reto diam.5,0 x 420 mm
0713 - Porta agulha castroviejo 13 cm curvo s/ widia
0714 - Porta agulha castroviejo 14 cm curvo s/ widia
0715 - Porta agulha castroviejo 13 cm reto s/ widia
0716 - Porta agulha castroviejo 14 cm reto s/ widia
0717 - Porta agulha castroviejo curvo
0718 - Porta agulha castroviejo reto
0719 - Porta agulha castroviejo 12 cm curvo c/ widia c/ trava
0720 - Porta agulha castroviejo 12 cm curvo c/ widia s/ trava
0721 - Porta agulha castroviejo 12 cm reto c/ widia c/ trava
0722 - Porta agulha castroviejo 12 cm reto c/ widia s/ trava
0723 - Porta agulha castroviejo 14 cm curvo c/ widia c/ trava
0724 - Porta agulha castroviejo 14 cm curvo c/ widia s/ trava
0725 - Porta agulha castroviejo 14 cm reto c/ widia c/ trava
0726 - Porta agulha castroviejo 14 cm reto c/ widia s/ trava
0727 - Porta agulha castroviejo 16 cm curvo c/ widia c/ trava
0728 - Porta agulha castroviejo 16 cm curvo c/ widia s/ trava
0729 - Porta agulha castroviejo 16 cm reto c/ widia c/ trava
0730 - Porta agulha castroviejo 16 cm reto c/ widia s/ trava

0731 - Porta agulha castroviejo 18 cm curvo c/ widia c/ trava
 0732 - Porta agulha castroviejo 18 cm curvo c/ widia s/ trava
 0733 - Porta agulha castroviejo 18 cm reto c/ widia c/ trava
 0734 - Porta agulha castroviejo 18 cm reto c/ widia s/ trava
 0735 - Porta agulha castroviejo 21 cm curvo c/ widia c/ trava
 0736 - Porta agulha castroviejo 21 cm curvo c/ widia s/ trava
 0737 - Porta agulha castroviejo 21 cm reto c/ widia c/ trava
 0738 - Porta agulha castroviejo 21 cm reto c/ widia s/ trava
 0739 - Porta agulha castroviejo 23 cm curvo c/ widia c/ trava
 0740 - Porta agulha castroviejo 23 cm curvo c/ widia s/ trava
 0741 - Porta agulha castroviejo 23 cm reto c/ widia c/ trava
 0742 - Porta agulha castroviejo 23 cm reto c/ widia s/ trava
 0743 - Porta agulha Baumgartner 12 cm c/ widia
 0744 - Porta agulha Baumgartner 14 cm c/ widia
 0745 - Porta agulha Baumgartner 15 cm c/ widia
 0746 - Porta agulha Baumgartner 16 cm c/ widia
 0747 - Porta agulha Baumgartner 17 cm c/ widia
 0748 - Porta agulha Baumgartner 18 cm c/ widia
 0749 - Porta agulha Baumgartner 20 cm c/ widia
 0750 - Porta agulha Baumgartner 22 cm c/ widia
 0751 - Porta agulha Baumgartner 24 cm c/ widia
 0752 - Porta agulha Baumgartner 26 cm c/ widia
 0753 - Porta agulha Baumgartner 28 cm c/ widia
 0754 - Porta agulha Baumgartner 30 cm c/ widia
 0755 - Porta agulha Baumgartner 35cm c/ widia
 0756 - Porta agulha crille-wood 15 cm s/ widia
 0757 - Porta agulha crille-wood 16 cm s/ widia
 0758 - Porta agulha crille-wood 18 cm s/ widia
 0759 - Porta agulha crille-wood 20 cm s/ widia
 0760 - Porta agulha crille-wood 23 cm s/ widia
 0761 - Porta agulha crille-wood 25 cm s/ widia
 0762 - Porta agulha crille-wood 30 cm s/ widia
 0763 - Porta agulha crille-wood 14 cm c/ widia
 0764 - Porta agulha crille-wood 15 cm c/ widia
 0765 - Porta agulha crille-wood 16 cm c/ widia
 0766 - Porta agulha crille-wood 18 cm c/ widia
 0767 - Porta agulha crille-wood 20 cm c/ widia
 0768 - Porta agulha crille-wood 23 cm c/ widia
 0769 - Porta agulha crille-wood 25 cm c/ widia
 0770 - Porta agulha crille-wood 30 cm c/ widia
 0771 - Porta agulha de bakey 12 cm c/ widia
 0772 - Porta agulha de bakey 13 cm c/ widia
 0773 - Porta agulha de bakey 14 cm c/ widia
 0774 - Porta agulha de bakey 15 cm c/ widia
 0775 - Porta agulha de bakey 16 cm c/ widia
 0776 - Porta agulha de bakey 18 cm c/ widia
 0777 - Porta agulha de bakey 20 cm c/ widia
 0778 - Porta agulha de bakey 22 cm c/ widia
 0779 - Porta agulha de bakey 23 cm c/ widia
 0780 - Porta agulha de bakey 24 cm c/ widia
 0781 - Porta agulha de bakey 26 cm c/ widia
 0782 - Porta agulha de bakey 30 cm c/ widia
 0783 - Porta agulha de bakey 35 cm c/ widia

0784 - Porta agulha olsen hegar 12 cm
 0785 - Porta agulha olsen hegar 13 cm
 0786 - Porta agulha olsen hegar 14 cm
 0787 - Porta agulha olsen hegar 15 cm
 0788 - Porta agulha olsen hegar 16 cm
 0789 - Porta agulha olsen hegar 17 cm
 0790 - Porta agulha olsen hegar 18 cm
 0791 - Porta agulha olsen hegar 20 cm
 0792 - Porta agulha olsen hegar 23 cm
 0793 - Porta agulha olsen hegar 25 cm
 0794 - Porta agulha olsen hegar 26 cm
 0795 - Porta agulha olsen hegar 28 cm
 0796 - Porta agulha olsen hegar 30 cm
 0797 - Porta agulha olsen hegar 35 cm
 0798 - Porta agulha olsen hegar 40 cm
 0799 - Porta agulha olsen hegar 45 cm
 0800 - Porta agulha finochietto 14 cm c/ widia
 0801 - Porta agulha finochietto 15 cm c/ widia
 0802 - Porta agulha finochietto 16 cm c/ widia
 0803 - Porta agulha finochietto 18 cm c/ widia
 0804 - Porta agulha finochietto 20 cm c/ widia
 0805 - Porta agulha finochietto 24 cm c/ widia
 0806 - Porta agulha finochietto 27 cm c/ widia
 0807 - Porta agulha finochietto 28 cm c/ widia
 0808 - Porta agulha finochietto 30 cm c/ widia
 0809 - Porta halsey 12 cm c/ widia
 0810 - Porta halsey 12 cm ponta lisa
 0811 - Porta agulha heaney 14 cm c/ widia
 0812 - Porta agulha heaney 15 cm c/ widia
 0813 - Porta agulha heaney 16 cm c/ widia
 0814 - Porta agulha heaney 18 cm c/ widia
 0815 - Porta agulha heaney 20 cm c/ widia
 0816 - Porta agulha heaney 22 cm c/ widia
 0817 - Porta agulha heaney 23 cm c/ widia
 0818 - Porta agulha heaney 24 cm c/ widia
 0819 - Porta agulha heaney 26 cm c/ widia
 0820 - Porta agulha heaney 28 cm c/ widia
 0821 - Porta agulha heaney 30 cm c/ widia
 0822 - Porta agulha mathieu 11 cm c/ widia
 0823 - Porta agulha mathieu 12 cm c/ widia
 0824 - Porta agulha mathieu 14 cm c/ widia
 0825 - Porta agulha mathieu 15 cm c/ widia
 0826 - Porta agulha mathieu 16 cm c/ widia
 0827 - Porta agulha mathieu 17 cm c/ widia
 0828 - Porta agulha mathieu 18 cm c/ widia
 0829 - Porta agulha mathieu 20 cm c/ widia
 0830 - Pinça clipadora grande diam.10,0 x 330 mm
 0831 - Pinça clipadora grande diam.10,0 x 420 mm
 0832 - Pinça clipadora medio diam.6,5 x 330 mm
 0833 - Pinça clipadora medio diam.10,0 x 330 mm
 0834 - Pinça clipadora medio grande diam.10,0 x 330 mm
 0835 - Pinça clipadora medio grande diam.10,0 x 420 mm
 0836 - Pinça clipadora medio pediatrico diam.6,5 x 200 mm

0837 - Pinça clipadora medio pediatrico diam.10,0 x 200 mm
 0838 - Pinça clipadora micro pediatrico diam.5,0 x 200 mm
 0839 - Pinça clipadora pequeno diam.5,0 x 330 mm
 0840 - Pinça clipadora pequeno medio diam.5,0 x 330 mm
 0841 - Pinça clipadora pequeno medio pediatrico diam.5,0 x 200 mm
 0842 - Pinça clipadora pequeno pediatrico diam.5,0 x 200 mm
 0843 - Pinça aplicadora de nó diam.5,0 x 330 mm S/C
 0844 - Pinça apreensão 2 x 4 dentes diam.5,0 x 330 mm S/C
 0845 - Pinça apreensão de allis diam.5,0 x 330 mm S/C
 0846 - Pinça apreensão denteada serri.diam.5,0 x 330 mm S/C
 0847 - Pinça apreensão diam.5,0 x 330 mm S/C
 0848 - Pinça apreensão extra. TP cre.longa diam.5,0 x 330 mm S/C
 0849 - Pinça apreensão extra. TP cre.longa diam. 5,0 x 420 mm S/C
 0850 - Pinça apreensão extração diam.5,0 x 330 mm S/C
 0851 - Pinça apreensão extração TP cre.diam.5,0 x 330 mm S/C
 0852 - Pinça apreensão extração TP cre.diam.5,0 x 420 mm S/C
 0853 - Pinça apreensão obesidade diam.5,0 x 420 mm S/C
 0854 - Pinça apreensão pte ativa longa.diam.5,0 x 200 mm S/C
 0855 - Pinça apreensão pte ativa longa.diam.5,0 x 330 mm S/C
 0856 - Pinça apreensão pte ativa redu.diam.5,0 x 200 mm S/C
 0857 - Pinça apreensão serrilhada diam.3,0 x 330 mm S/C
 0858 - Pinça apreensão vesícula diam.5,0 x 330 mm S/C
 0859 - Pinça atraumática curva diss.delicada diam.5,0 x 150 mm S/C
 0860 - Pinça atraumática diam.10,0 x 330 mm S/C
 0861 - Pinça atraumática diss.diam.5,0 x 330 mm S/C
 0862 - Pinça babcock diam.5,0 x 330 mm S/C
 0863 - Pinça babcock serrilhada diam.10,0 x 330 mm S/C
 0864 - Pinça babcock serrilhada diam.10,0 x 420 mm S/C
 0865 - Pinça contra porta agulhas diam.5,0 x 330 mm S/C
 0866 - Pinça contra porta agulhas diam.5,0 x 420 mm S/C
 0867 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep.diam.10,0 x 330 mm S/C
 0868 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep.diam. 5,0 x 330 mm S/C
 0869 - Pinça disse.apreensão delicada diam.5,0 x 330 mm S/C
 0870 - Pinça fenestrada 30,0 mm boca diam.5,0 x 330 mm S/C
 0871 - Pinça fenestrada denteada em garra diam.5,0 x 330 mm S/C
 0872 - Pinça maryland disse.pta ativa lon.diam.5,0 x 420 mm S/C
 0873 - Pinça maryland disse.pta ativa redu.diam.5,0 x 330 mm S/C
 0874 - Pinça maryland disseção diam.10,0 x 330 mm S/C
 0875 - Pinça maryland disseção diam.3,0 x 330 mm S/C
 0876 - Pinça maryland disseção diam.5,0 x 420 mm S/C
 0877 - Pinça maryland disseção diam.5,0 x 330 mm S/C
 0878 - Pinça maryland disseção diam.5,0 x 200 mm S/C
 0879 - Pinça mixer disse. pte ativa redu.diam.5,0 x 330 mm S/C
 0880 - Pinça mixer disseção diam.10,0 x 330 mm S/C
 0881 - Pinça mixer disseção diam.5,0 x 330 mm S/C
 0882 - Pinça mixer disseção diam.5,0 x 200 mm S/C
 0883 - Pinça mixer disseção diam.5,0 x 420 mm S/C
 0884 - Pinça p/ biopsia diam.5,0 x 330 mm S/C
 0885 - Pinça p/ biopsia TP sacabocado diam.5,0 x 330 mm S/C
 0886 - Pinça apreensão 2 x 4 dentes diam.5,0 x 330 mm C/C
 0887 - Pinça apreensão 4 x 4 dentes diam.5,0 x 330 mm C/C
 0888 - Pinça apreensão atraumática diam.5,0 x 330 mm C/C
 0889 - Pinça apreensão denteada serrilhada diam.5,0 x 330 mm C/C

0890 - Pinça apreensão diam.5,0 x 200 mm C/C
 0891 - Pinça apreensão diam.5,0 x 330 mm C/C
 0892 - Pinça apreensão extr. tp crema.diam.5,0 x 330 mm C/C
 0893 - Pinça apreensão extr. tp crema.diam.5,0 x 420 mm C/C
 0894 - Pinça apreensão extr.tp crema.longa diam.5,0 x 330 mm C/C
 0895 - Pinça apreensão extr.tp crema.longa diam.5,0 x 420 mm C/C
 0896 - Pinça apreensão extração diam.5,0 x 200 mm C/C
 0897 - Pinça apreensão extração diam.5,0 x 330 mm C/C
 0898 - Pinça apreensão pte ativa longa diam.5,0 x 330 mm C/C
 0899 - Pinça apreensão pte ativa longa diam.5,0 x 420 mm C/C
 0900 - Pinça apreensão pte ativa longa.diam.5,0 x 200 mm C/C
 0901 - Pinça apreensão vesícula diam.5,0 x 330 mm C/C
 0902 - Pinça apreensão vesícula fenes.serri. diam.5,0 x 200 mm C/C
 0903 - Pinça apreensão vesícula fenes.serri. diam.5,0 x 330 mm C/C
 0904 - Pinça apreensão vesícula fenestrada diam.5,0 x 330 mm C/C
 0905 - Pinça apreensão vesícula serrilhada diam.5,0 x 200 mm C/C
 0906 - Pinça apreensão vesícula serrilhada diam.5,0 x 330 mm C/C
 0907 - Pinça apreensão vesícula serrilhada diam.5,0 x 420 mm C/C
 0908 - Pinça atraumática diam.10,0 x 330 mm C/C
 0909 - Pinça atraumática TP Bakey 60 mm boca diam.10,0 x 330 mm C/C
 0910 - Pinça babcock c/ serrilha de bakey diam.10,0 x 330 mm C/C
 0911 - Pinça babcock c/ widea diam.10,0 x 330 mm C/C
 0912 - Pinça babcock serrilhada diam.10,0 x 330 mm C/C
 0913 - Pinça babcock serrilhada diam.5,0 x 200 mm C/C
 0914 - Pinça babcock serrilhada diam.5,0 x 330 mm C/C
 0915 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep.diam.10,0 x 200 mm C/C
 0916 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep. diam.10,0 x 420 mm C/C
 0917 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep.diam.5,0 x 200 mm C/C
 0918 - Pinça denteada garra 2 x 3 c/ mola rep.PTR diam.5,0 x 200 mm C/C
 0919 - Pinça fenestrada 30 mm boca diam.5,0 x 330 mm C/C
 0920 - Pinça fenestrada denteada em garra diam.5,0 x 330 mm C/C
 0921 - Pinça mixer dissecação diam. 5,0 x 330 mm C/C
 0922 - Pinça atraumática apreensão em U diam.5,0 x 330 mm
 0923 - Pinça atraumática em U diam.5,0 x 330 mm
 0924 - Pinça saito reta
 0925 - Pinça saito direita
 0926 - Pinça saito esquerda
 0927 - Pinça pozzi diam.10,0 x 330 mm
 0928 - Pinça pozzi diam.5,0 x 330 mm
 0929 - Pinça trompas de falópio em U diam.5,0 x 330 mm
 0930 - Pinça apreensão atraumática serrilhada diam.5,0 x 330 mm S/C
 0931 - Pinça apreensão atraumática serrilhada diam.5,0 x 420 mm S/C
 0932 - Pinça apreensão dente de rato diam. 10,0 x 330 mm S/C
 0933 - Pinça apreensão fenestrada diam. 5,0 x 330 mm S/C
 0934 - Pinça apreensão fenestrada diam. 5,0 x 420 mm S/C
 0935 - Pinça babcock apreensão serrilhada 14 cm
 0936 - Pinça babcock apreensão serrilhada 15 cm
 0937 - Pinça babcock apreensão serrilhada 16 cm
 0938 - Pinça babcock apreensão serrilhada 17 cm
 0939 - Pinça babcock apreensão serrilhada 18 cm
 0940 - Pinça babcock apreensão serrilhada 19 cm
 0941 - Pinça babcock apreensão serrilhada 20 cm
 0942 - Pinça babcock apreensão serrilhada 22 cm

0943 - Pinça babcock apreensão serrilhada 23 cm
 0944 - Pinça babcock apreensão serrilhada 24 cm
 0945 - Pinça babcock apreensão serrilhada 25 cm
 0946 - Pinça babcock apreensão serrilhada 26 cm
 0947 - Pinça babcock apreensão serrilhada 30 cm
 0948 - Pinça babcock apreensão serrilhada 35 cm
 0949 - Pinça babcock apreensão serrilhada 40 cm
 0950 - Pinça babcock apreensão serrilhada 45 cm
 0952 - Pinça backaus 8 cm
 0953 - Pinça backaus 9 cm
 0954 - Pinça backaus 10 cm
 0955 - Pinça backaus 11 cm
 0956 - Pinça backaus 12 cm
 0957 - Pinça backaus 13 cm
 0958 - Pinça backaus 14 cm
 0959 - Pinça backaus 15 cm
 0960 - Pinça backaus 16 cm
 0961 - Pinça backaus 17 cm
 0962 - Pinça backaus 18 cm
 0963 - Pinça backaus 19 cm
 0964 - Pinça backaus 20 cm
 0965 - Pinça backaus 18 cm p/ osso
 0966 - Pinça backaus 8 cm c/ esfera
 0967 - Pinça backaus 9 cm c/ esfera
 0968 - Pinça backaus 10 cm c/ esfera
 0969 - Pinça backaus 11 cm c/ esfera
 0970 - Pinça backaus 12 cm c/ esfera
 0971 - Pinça backaus 13 cm c/ esfera
 0972 - Pinça backaus 14 cm c/ esfera
 0973 - Pinça backaus 15 cm c/ esfera
 0974 - Pinça backaus 16 cm c/ esfera
 0975 - Pinça backaus 17 cm c/ esfera
 0976 - Pinça backaus 18 cm c/ esfera
 0977 - Pinça backaus 19 cm c/ esfera
 0978 - Pinça backaus 20 cm c/ esfera
 0979 - Pinça barret 20 cm p/ colo uterino
 0980 - Pinça beck p/ aorta 14 cm
 0981 - Pinça beck p/ aorta 16 cm
 0982 - Pinça beck p/ aorta 18 cm
 0983 - Pinça beck p/ aorta 20 cm
 0984 - Pinça beck p/ aorta 22 cm
 0985 - Pinça beck p/ aorta 24 cm
 0986 - Pinça bengolea 22 cm reta
 0987 - Pinça bengolea 22 cm curva
 0988 - Pinça Bernhard 16 cm
 0989 - Pinça bonzemann 24 cm
 0990 - Pinça clamp carótica 16 cm
 0991 - Pinça clamp carótica 17 cm
 0992 - Pinça clamp carótica 18 cm
 0993 - Pinça clamp carótica 19 cm
 0994 - Pinça clamp carótica 20 cm
 0995 - Pinça clamp intestinal curva 18 cm
 0996 - Pinça clamp intestinal curva 20 cm

0997 - Pinça clamp intestinal curva 22 cm
 0998 - Pinça clamp intestinal curva 24 cm
 0999 - Pinça clamp intestinal curva 26 cm
 1000 - Pinça clamp intestinal curva 28 cm
 1001 - Pinça clamp intestinal curva 30 cm
 1002 - Pinça clamp intestinal curva 35 cm
 1003 - Pinça clamp intestinal mayo robson curva 25 cm
 1004 - Pinça clamp intestinal mayo robson reta 25 cm
 1005 - Pinça clamp intestinal reta 18 cm
 1006 - Pinça clamp intestinal reta 22 cm
 1007 - Pinça clamp intestinal reta 26 cm
 1008 - Pinça clamp p/ transplante 18 cm
 1009 - Pinça clamp p/ transplante 20 cm
 1010 - Pinça clamp p/ transplante 21 cm
 1011 - Pinça clamp p/ transplante 23 cm
 1012 - Pinça clamp p/ transplante 24 cm
 1013 - Pinça clamp p/ transplante 25 cm
 1014 - Pinça collin coração 14 cm
 1015 - Pinça collin coração 15 cm
 1016 - Pinça collin coração 16 cm
 1017 - Pinça collin coração 17 cm
 1018 - Pinça collin coração 18 cm
 1019 - Pinça collin coração 19 cm
 1020 - Pinça collin coração 20 cm
 1021 - Pinça collin coração 21 cm
 1022 - Pinça collin coração 22 cm
 1023 - Pinça collin coração 23 cm
 1024 - Pinça collin coração 24 cm
 1025 - Pinça collin oval 14 cm
 1026 - Pinça collin oval 15 cm
 1027 - Pinça collin oval 16 cm
 1028 - Pinça collin oval 17 cm
 1029 - Pinça collin oval 18 cm
 1030 - Pinça collin oval 19 cm
 1031 - Pinça collin oval 20 cm
 1032 - Pinça collin oval 21 cm
 1033 - Pinça collin oval 22 cm
 1034 - Pinça collin oval 23 cm
 1035 - Pinça collin oval 24 cm
 1036 - Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 150 mm
 1037 - Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 200 mm
 1038 - Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 250 mm
 1039 - Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 300 mm
 1040 - Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 350 mm
 1041 - Pinça collin p/ instrumentos 1 x 2 x 400 mm
 1042 - Pinça collin reta 25 cm
 1043 - Pinça cooley 16,0 cm
 1044 - Pinça cooley 16,5 cm
 1045 - Pinça cooley 18,0 cm
 1046 - Pinça cooley 18,5 cm
 1047 - Pinça cooley 19,0 cm
 1048 - Pinça crafoord 18 cm curva
 1049 - Pinça crafoord 18 cm reta

1050 - Pinça crafoord 20 cm curva
 1051 - Pinça crafoord 20 cm reta
 1052 - Pinça crafoord 22 cm curva
 1053 - Pinça crafoord 22 cm reta
 1054 - Pinça crafoord 24 cm curva
 1055 - Pinça crafoord 24 cm reta
 1056 - Pinça crile 14 cm curva delicada
 1057 - Pinça crile 14 cm curva
 1058 - Pinça crile 14 cm reta delicada
 1059 - Pinça crile 14 cm reta
 1060 - Pinça crile 16 cm curva delicada
 1061 - Pinça crile 16 cm curva
 1062 - Pinça crile 16 cm reta delicada
 1063 - Pinça crile 16 cm reta
 1064 - Pinça crile 18 cm curva delicada
 1065 - Pinça crile 18 cm curva
 1066 - Pinça crile 18 cm reta delicada
 1067 - Pinça crile 18 cm reta
 1068 - Pinça dandy couro cabeludo 14 cm
 1069 - Pinça dandy couro cabeludo 16 cm
 1070 - Pinça dandy couro cabeludo 18 cm
 1071 - Pinça dandy couro cabeludo 20 cm
 1072 - Pinça dartigues (histerolabo) 24 cm
 1073 - Pinça de bakey 13 cm ponta 45 mm curva
 1074 - Pinça de bakey 16 cm em S
 1075 - Pinça de bakey 18 cm em S
 1076 - Pinça de bakey 20 cm em S
 1077 - Pinça de bakey 22 cm em S
 1078 - Pinça de bakey 24 cm em S
 1079 - Pinça de bakey 26 cm em S
 1080 - Pinça de bakey aneurisma curva 25 cm ponta 85 mm
 1081 - Pinça de bakey aneurisma curva 30 cm ponta 100 mm
 1082 - Pinça de bakey aneurisma curva 32 cm ponta 120 mm
 1083 - Pinça de bakey angulada 45° 12,5 cm ponta 40 mm
 1084 - Pinça de bakey angulada 60° 18 cm ponta 75 mm
 1085 - Pinça de bakey angulada 60° 20 cm
 1086 - Pinça de bakey angulada 60° 23 cm
 1087 - Pinça de bakey angulada 60° 25 cm
 1088 - Pinça de bakey angulada 90° 10 cm ponta 38 mm
 1089 - Pinça de bakey angulada 90° 23 cm ponta 45 mm
 1090 - Pinça de bakey angulada 90° 27 cm ponta 108 mm
 1091 - Pinça de bakey curva 12,5 cm ponta 45 mm
 1092 - Pinça de bakey curva p/ aorta 29 cm
 1093 - Pinça de bakey p/ aorta angulada 60° 25 cm
 1094 - Pinça de bakey p/ aorta angulada 60° 32 cm
 1095 - Pinça de bakey p/ aorta pediátrica 60° 18 cm
 1096 - Pinça de bakey p/ coarctação 21 cm ponta curva 55 mm
 1097 - Pinça de bakey p/ coarctação cabo angulado 17 cm ponta 50 mm
 1098 - Pinça de bakey p/ coarctação cabo angulado 22 cm ponta 75 mm
 1099 - Pinça de bakey p/ coarctação cabo angulado 24 cm ponta 80 mm
 1100 - Pinça de bakey p/ coarctação reta 17 cm ponta 50 mm
 1101 - Pinça de bakey p/ coarctação reta 22 cm ponta 55 mm
 1102 - Pinça de bakey p/ coarctação reta 22 cm ponta 75 mm

1103 - Pinça de bakey p/ coarctação reta 24 cm ponta 55 mm
 1104 - Pinça de bakey p/ coarctação reta 24 cm ponta 75 mm
 1105 - Pinça de bakey reta 12,5 cm 45 mm
 1106 - Pinça de bakey reta 18 cm ponta 75 mm
 1107 - Pinça de bakey reta 23 cm
 1108 - Pinça de bakey reta 25 cm
 1109 - Pinça de bakey vascular periférica Ang. 20 cm
 1110 - Pinça de bakey vascular periférica curva 16 cm
 1111 - Pinça de bakey vascular periférica curva 18,5 cm
 1112 - Pinça de bakey vascular periférica curva 18,0 cm
 1113 - Pinça de bakey vascular periférica curva 20,0 cm
 1114 - Pinça de bakey-bainbridge curva 17 cm
 1115 - Pinça de bakey-bainbridge reta 15,5 cm
 1116 - Pinça de bakey-beck 17 cm
 1117 - Pinça de bakey-glover curta 17 cm
 1118 - Pinça de redução fino encaixe 16 cm
 1119 - Pinça de redução óssea c/ ponta 12 cm
 1120 - Pinça de redução óssea c/ ponta 14 cm
 1121 - Pinça de redução óssea c/ ponta 16 cm
 1122 - Pinça de redução óssea c/ ponta 18 cm
 1123 - Pinça de redução óssea c/ ponta 20 cm
 1124 - Pinça de redução óssea c/ ponta 22 cm
 1125 - Pinça de redução óssea c/ ponta 24 cm
 1126 - Pinça de redução óssea c/ ponta 26 cm
 1127 - Pinça de redução óssea c/ ponta 28 cm
 1128 - Pinça de redução óssea c/ ponta 20 cm abert. 9 mm
 1129 - Pinça de redução reil 17 cm
 1130 - Pinça de seqüestro van buren 23 cm
 1131 - Pinça derra 14 cm
 1132 - Pinça derra 16 cm
 1133 - Pinça derra 17 cm
 1134 - Pinça derra 17 cm ponta 15 mm
 1135 - Pinça derra 17 cm ponta 20 mm
 1136 - Pinça derra 17 cm ponta 25 mm
 1137 - Pinça derra 18 cm
 1138 - Pinça derra 20 cm
 1139 - Pinça derra 22 cm
 1140 - Pinça derra 24 cm
 1141 - Pinça derra forte
 1142 - Pinça cheron serrilhada 16 cm
 1143 - Pinça cheron serrilhada 18 cm
 1144 - Pinça cheron serrilhada 20 cm
 1145 - Pinça cheron serrilhada 22 cm
 1146 - Pinça cheron serrilhada 24 cm
 1147 - Pinça cheron serrilhada 25 cm
 1148 - Pinça cheron serrilhada 28 cm
 1149 - Pinça cheron serrilhada 30 cm
 1150 - Pinça doyen curva intestinal 25 cm
 1151 - Pinça doyen reta intestinal 25 cm
 1152 - Pinça doyen atraumática 14 cm reta
 1153 - Pinça doyen atraumática 16 cm reta
 1154 - Pinça doyen atraumática 18 cm reta
 1155 - Pinça doyen atraumática 20 cm reta

1156 - Pinça doyen atraumática 21 cm reta
 1157 - Pinça doyen atraumática 23 cm reta
 1158 - Pinça doyen atraumática 24 cm reta
 1159 - Pinça doyen atraumática 26 cm reta
 1160 - Pinça doyen atraumática 28 cm reta
 1161 - Pinça doyen atraumática 30 cm reta
 1162 - Pinça doyen atraumática 14 cm curva
 1163 - Pinça doyen atraumática 16 cm curva
 1164 - Pinça doyen atraumática 18 cm curva
 1165 - Pinça doyen atraumática 20 cm curva
 1166 - Pinça doyen atraumática 21 cm curva
 1167 - Pinça doyen atraumática 23 cm curva
 1168 - Pinça doyen atraumática 24 cm curva
 1169 - Pinça doyen atraumática 26 cm curva
 1170 - Pinça doyen atraumática 28 cm curva
 1171 - Pinça doyen atraumática 30 cm curva
 1172 - Pinça duval 12 cm c/ widia
 1173 - Pinça duval 14 cm c/ widia
 1174 - Pinça duval 16 cm c/ widia
 1175 - Pinça duval 18 cm c/ widia
 1176 - Pinça duval 20 cm c/ widia
 1177 - Pinça duval 21 cm c/ widia
 1178 - Pinça duval 22 cm c/ widia
 1179 - Pinça duval 23 cm c/ widia
 1180 - Pinça duval 24 cm c/ widia
 1181 - Pinça duval 25 cm c/ widia
 1182 - Pinça duval 26 cm c/ widia
 1183 - Pinça duval 28 cm c/ widia
 1184 - Pinça duval 30 cm c/ widia
 1185 - Pinça duval 32 cm c/ widia
 1186 - Pinça duval 34 cm c/ widia
 1187 - Pinça duval 35 cm c/ widia
 1188 - Pinça duval collin 12 cm
 1189 - Pinça duval collin 14 cm
 1190 - Pinça duval collin 16 cm
 1191 - Pinça duval collin 18 cm
 1192 - Pinça duval collin 20 cm
 1193 - Pinça duval collin 22 cm
 1194 - Pinça duval collin 24 cm
 1195 - Pinça duval collin 26 cm
 1196 - Pinça duval collin 28 cm
 1197 - Pinça duval collin 30 cm
 1198 - Pinça faure 14 cm reta
 1199 - Pinça faure 16 cm reta
 1200 - Pinça faure 18 cm reta
 1201 - Pinça faure 20 cm reta
 1202 - Pinça faure 22 cm reta
 1203 - Pinça faure 24 cm reta
 1204 - Pinça faure 26 cm reta
 1205 - Pinça faure 14 cm curva
 1206 - Pinça faure 16 cm curva
 1207 - Pinça faure 18 cm curva
 1208 - Pinça faure 20 cm curva

1209 - Pinça faure 22 cm curva
 1210 - Pinça faure 24 cm curva
 1211 - Pinça faure 26 cm curva
 1212 - Pinça faure p/ biopsia uterina 24 cm
 1213 - Pinça clipadora diam. 5,0 x 330 mm p/ LT200
 1214 - Pinça clipadora diam. 10,0 x 330 mm p/ LT300
 1215 - Pinça espanhola 14 cm
 1216 - Pinça espanhola 16 cm
 1217 - Pinça espanhola 18 cm
 1218 - Pinça espanhola 19 cm
 1219 - Pinça espanhola 20 cm
 1220 - Pinça espanhola 22 cm
 1221 - Pinça espanhola 24 cm
 1222 - Pinça espanhola 26 cm
 1223 - Pinça espanhola 28 cm
 1224 - Pinça espanhola 30 cm
 1225 - Pinça fergusson óssea 20 cm
 1226 - Pinça corretora
 1227 - Pinça de compressao
 1228 - Pinça finochietto 20 cm
 1229 - Pinça finochietto 22 cm
 1230 - Pinça finochietto 24 cm
 1231 - Pinça de distração
 1232 - Pinça de rinofaringe jacaré
 1233 - Pinça de rinofaringe jacaré direita
 1234 - Pinça de rinofaringe jacaré esquerda
 1235 - Pinça de rinofaringe jacaré giratória
 1236 - Pinça endoscópica apreensão trava rapida diam. 5,0 x 330 mm
 1237 - Pinça endoscópica apreensão trava rapida diam. 10 x 330 mm
 1238 - Pinça endoscópica doyen giratória 3 x 2 dentes 150 mm
 1239 - Pinça endoscópica doyen giratória 3 x 2 dentes 200 mm
 1240 - Pinça endoscópica doyen giratória 3 x 2 dentes 330 mm
 1241 - Pinça endoscópica doyen giratória 3 x 2 dentes 420 mm
 1242 - Pinça endoscópica grasper diam. 10,0 x 330 mm
 1243 - Pinça foerster 14 cm reta
 1244 - Pinça foerster 16 cm reta
 1245 - Pinça foerster 18 cm reta
 1246 - Pinça foerster 20 cm reta
 1247 - Pinça foerster 22 cm reta
 1248 - Pinça foerster 24 cm reta
 1249 - Pinça foerster 26 cm reta
 1250 - Pinça foerster 28 cm reta
 1251 - Pinça foerster 30 cm reta
 1252 - Pinça foerster 32 cm reta
 1253 - Pinça foerster 34 cm reta
 1254 - Pinça foerster 14 cm curva
 1255 - Pinça foerster 16 cm curva
 1256 - Pinça foerster 18 cm curva
 1257 - Pinça foerster 20 cm curva
 1258 - Pinça foerster 22 cm curva
 1259 - Pinça foerster 24 cm curva
 1260 - Pinça foerster 26 cm curva
 1261 - Pinça foerster 28 cm curva

1262 - Pinça foerster 30 cm curva
 1263 - Pinça foerster 32 cm curva
 1264 - Pinça foerster 34 cm curva
 1265 - Pinça foerster 14 cm reta serrilhada
 1266 - Pinça foerster 16 cm reta serrilhada
 1267 - Pinça foerster 18 cm reta serrilhada
 1268 - Pinça foerster 20 cm reta serrilhada
 1269 - Pinça foerster 22 cm reta serrilhada
 1270 - Pinça foerster 24 cm reta serrilhada
 1271 - Pinça foerster 26 cm reta serrilhada
 1272 - Pinça foerster 28 cm reta serrilhada
 1273 - Pinça foerster 30 cm reta serrilhada
 1274 - Pinça foerster 32 cm reta serrilhada
 1275 - Pinça foerster 34 cm reta serrilhada
 1276 - Pinça foerster 14 cm curva serrilhada
 1277 - Pinça foerster 16 cm curva serrilhada
 1278 - Pinça foerster 18 cm curva serrilhada
 1279 - Pinça foerster 20 cm curva serrilhada
 1280 - Pinça foerster 22 cm curva serrilhada
 1281 - Pinça foerster 24 cm curva serrilhada
 1282 - Pinça foerster 26 cm curva serrilhada
 1283 - Pinça foerster 28 cm curva serrilhada
 1284 - Pinça foerster 30 cm curva serrilhada
 1285 - Pinça foerster 32 cm curva serrilhada
 1286 - Pinça foerster 34 cm curva serrilhada
 1287 - Pinça gemini 16 cm
 1288 - Pinça gemini 18 cm
 1289 - Pinça gemini 20 cm
 1290 - Pinça gemini 22 cm
 1291 - Pinça guyon 14 cm
 1292 - Pinça guyon 16 cm
 1293 - Pinça guyon 18 cm
 1294 - Pinça guyon 20 cm
 1295 - Pinça guyon 22 cm
 1296 - Pinça guyon 24 cm
 1297 - Pinça guyon 26 cm
 1298 - Pinça shoroeder 25 cm 2 x 2 dentes
 1299 - Pinça Hartmann 80 mm
 1300 - Pinça Hartmann 150 mm
 1301 - Pinça Hartmann 190 mm
 1302 - Pinça hemostática kelly reta 12 cm
 1303 - Pinça hemostática kelly reta delicada 14 cm
 1304 - Pinça hemostática kelly reta 14 cm
 1305 - Pinça hemostática kelly reta 15 cm
 1306 - Pinça hemostática kelly reta 16 cm
 1307 - Pinça hemostática kelly reta 18 cm
 1308 - Pinça hemostática kelly reta 20 cm
 1309 - Pinça hemostática kelly reta 24 cm
 1310 - Pinça hemostática kelly reta 25 cm
 1311 - Pinça hemostática kelly reta 26 cm
 1312 - Pinça hemostática kelly reta 28 cm
 1313 - Pinça hemostática kelly reta 30 cm
 1314 - Pinça Kelly-hankin 16 cm reta

1315 - Pinça hemostática kelly curva 12 cm
 1316 - Pinça hemostática kelly curva delicada 14 cm
 1317 - Pinça hemostática kelly curva 14 cm
 1318 - Pinça hemostática kelly curva 15 cm
 1319 - Pinça hemostática kelly curva 16 cm
 1320 - Pinça hemostática kelly curva 18 cm
 1321 - Pinça hemostática kelly curva 20 cm
 1322 - Pinça hemostática kelly curva 24 cm
 1323 - Pinça hemostática kelly curva 25 cm
 1324 - Pinça hemostática kelly curva 26 cm
 1325 - Pinça hemostática kelly curva 28 cm
 1326 - Pinça hemostática kelly curva 30 cm
 1327 - Pinça Kelly-hankin 16 cm curva
 1328 - Pinça kern óssea 13 cm s/ cremalheira
 1329 - Pinça kern óssea 16 cm s/ cremalheira
 1330 - Pinça kern óssea 19 cm s/ cremalheira
 1331 - Pinça kern óssea 21 cm s/ cremalheira
 1332 - Pinça kern óssea 24 cm s/ cremalheira
 1333 - Pinça kern óssea 13 cm c/ cremalheira
 1334 - Pinça kern óssea 16 cm c/ cremalheira
 1335 - Pinça kern óssea 19 cm c/ cremalheira
 1336 - Pinça kern óssea 21 cm c/ cremalheira
 1337 - Pinça kern óssea 24 cm c/ cremalheira
 1338 - Pinça semb 19 cm óssea s/ cremalheira
 1339 - Pinça semb 20 cm óssea s/ cremalheira
 1340 - Pinça semb 19 cm óssea c/ cremalheira
 1341 - Pinça semb 20 cm óssea c/ cremalheira
 1342 - Pinça semb 14 cm
 1343 - Pinça semb 16 cm
 1344 - Pinça semb 18 cm
 1345 - Pinça semb 20 cm
 1346 - Pinça semb 23 cm
 1347 - Pinça semb 25 cm
 1348 - Pinça semb 26 cm
 1349 - Pinça semb 27 cm
 1350 - Pinça semb 28 cm
 1351 - Pinça semb 30 cm
 1352 - Pinça semb 32 cm
 1353 - Pinça halsted mosquito 10 cm reta
 1354 - Pinça halsted mosquito 12 cm reta
 1355 - Pinça halsted mosquito 12,5 cm reta
 1356 - Pinça halsted mosquito 13 cm reta
 1357 - Pinça halsted mosquito 14 cm reta
 1358 - Pinça halsted mosquito 15 cm reta
 1359 - Pinça halsted mosquito 16 cm reta
 1360 - Pinça halsted mosquito 17 cm reta
 1361 - Pinça halsted mosquito 18 cm reta
 1362 - Pinça halsted mosquito 19 cm reta
 1363 - Pinça halsted mosquito 20 cm reta
 1364 - Pinça halsted mosquito 21 cm reta
 1365 - Pinça halsted mosquito 10 cm curva
 1366 - Pinça halsted mosquito 12 cm curva
 1367 - Pinça halsted mosquito 12,5 cm curva

1368 - Pinça halsted mosquito 13 cm curva
 1369 - Pinça halsted mosquito 14 cm curva
 1370 - Pinça halsted mosquito 15 cm curva
 1371 - Pinça halsted mosquito 16 cm curva
 1372 - Pinça halsted mosquito 17 cm curva
 1373 - Pinça halsted mosquito 18 cm curva
 1374 - Pinça halsted mosquito 19 cm curva
 1375 - Pinça halsted mosquito 20 cm curva
 1376 - Pinça halsted mosquito 21 cm curva
 1377 - Pinça halsted mosquito 22 cm curva
 1378 - Pinça micromosquito 12 cm reta
 1379 - Pinça micromosquito 12 cm curva
 1380 - Pinça hemostática mosquito reta 9 cm
 1381 - Pinça hemostática mosquito reta 10 cm
 1382 - Pinça hemostática mosquito reta 12 cm
 1383 - Pinça hemostática mosquito reta 14 cm
 1384 - Pinça hemostática mosquito reta 15 cm
 1385 - Pinça hemostática mosquito reta 16 cm
 1386 - Pinça hemostática mosquito reta 18 cm
 1387 - Pinça hemostática mosquito reta 21 cm
 1388 - Pinça hemostática mosquito reta 23 cm
 1389 - Pinça hemostática mosquito reta 25 cm
 1390 - Pinça hemostática mosquito reta 28 cm
 1391 - Pinça hemostática mosquito reta 30 cm
 1392 - Pinça hemostática mosquito curva 9 cm
 1393 - Pinça hemostática mosquito curva 10 cm
 1394 - Pinça hemostática mosquito curva 12 cm
 1395 - Pinça hemostática mosquito curva 14 cm
 1396 - Pinça hemostática mosquito curva 15 cm
 1397 - Pinça hemostática mosquito curva 16 cm
 1398 - Pinça hemostática mosquito curva 18 cm
 1399 - Pinça hemostática mosquito curva 21 cm
 1400 - Pinça hemostática mosquito curva 23 cm
 1401 - Pinça hemostática mosquito curva 25 cm
 1402 - Pinça hemostática mosquito curva 28 cm
 1403 - Pinça hemostática mosquito curva 30 cm
 1404 - Pinça hemostática schnidt curva leve 18 cm
 1405 - Pinça hemostática schnidt curva forte 18 cm
 1406 - Pinça hemostática schnidt curva leve 21 cm
 1407 - Pinça hemostática schnidt curva forte 21 cm
 1408 - Pinça hemostática schnidt reta leve 18 cm
 1409 - Pinça hemostática schnidt reta forte 18 cm
 1410 - Pinça hemostática schnidt reta leve 21 cm
 1411 - Pinça hemostática schnidt reta forte 21 cm
 1412 - Pinça hemostática scobee- Allis angulada
 1413 - Pinça allis 12 cm
 1414 - Pinça allis 13 cm
 1415 - Pinça allis 14 cm
 1416 - Pinça allis 15 cm
 1417 - Pinça allis 16 cm
 1418 - Pinça allis 17 cm
 1419 - Pinça allis 18 cm
 1420 - Pinça allis 19 cm

1421 - Pinça allis 20 cm
 1422 - Pinça allis 21 cm
 1423 - Pinça allis 22 cm
 1424 - Pinça allis 23 cm
 1425 - Pinça allis 24 cm
 1426 - Pinça allis 25 cm
 1427 - Pinça allis 26 cm
 1428 - Pinça allis 27 cm
 1429 - Pinça allis 28 cm
 1430 - Pinça allis 29 cm
 1431 - Pinça allis 30 cm
 1432 - Pinça moyanihan 21 cm
 1433 - Pinça jacaré ambulatorio angulada
 1434 - Pinça jacaré ambulatorio curva direita
 1435 - Pinça jacaré ambulatorio curva esquerda
 1436 - Pinça jacaré ambulatorio reta
 1437 - Pinça jacaré delicada angulada
 1438 - Pinça jacaré delicada curva direita
 1439 - Pinça jacaré delicada curva esquerda
 1440 - Pinça jacaré delicada reta
 1441 - Pinça jacaré de laringe angulada
 1442 - Pinça jacaré de laringe curva direita
 1443 - Pinça jacaré de laringe curva esquerda
 1444 - Pinça jacaré de laringe reta
 1445 - Pinça microendonasal jacaré 140 mm
 1446 - Pinça anatômica aplic. de clips sugita biart.lateramente
 1447 - Pinça aplic. de clips tipo sugita articulada
 1448 - Pinça aplicadora anatômica clips yasargil mini
 1449 - Pinça aplicadora anatômica clips yasargil standard
 1450 - Pinça museux 22 cm reta
 1451 - Pinça museux 24 cm reta
 1452 - Pinça museux 22 cm curva
 1453 - Pinça museux 24 cm curva
 1454 - Pinça aplicadora clips mackenzie 14 cm
 1455 - Pinça aplicadora clips mackenzie 15 cm
 1456 - Pinça aplicadora clips mackenzie 16 cm
 1457 - Pinça aplicadora clips mackenzie 18 cm
 1458 - Pinça aplicadora clips mackenzie 20 cm
 1459 - Pinça aplicadora clips raney
 1460 - Pinça aplicadora scoville 18 cm
 1461 - Pinça auto centrante 14 cm
 1462 - Pinça auto centrante 16 cm
 1463 - Pinça auto centrante 18 cm
 1464 - Pinça auto centrante 19 cm
 1465 - Pinça auto centrante 20 cm
 1466 - Pinça auto centrante 22 cm
 1467 - Pinça auto centrante 24 cm
 1468 - Pinça auto centrante 26 cm
 1469 - Pinça auto centrante 28 cm
 1470 - Pinça kocher 14 cm reta
 1471 - Pinça kocher 16 cm reta
 1472 - Pinça kocher 18 cm reta
 1473 - Pinça kocher 20 cm reta

1474 - Pinça kocher 22 cm reta
 1475 - Pinça kocher 24 cm reta
 1476 - Pinça kocher 25 cm reta
 1477 - Pinça kocher 25 cm reta coprostasi e intestinal
 1478 - Pinça kocher 26 cm reta
 1479 - Pinça kocher 28 cm reta
 1480 - Pinça kocher 30 cm reta
 1481 - Pinça kocher 35 cm reta
 1482 - Pinça kocher 14 cm curva
 1483 - Pinça kocher 16 cm curva
 1484 - Pinça kocher 18 cm curva
 1485 - Pinça kocher 20 cm curva
 1486 - Pinça kocher 22 cm curva
 1487 - Pinça kocher 24 cm curva
 1488 - Pinça kocher 25 cm curva
 1489 - Pinça kocher 25cm curva coprostasi e intestinal
 1490 - Pinça kocher 26 cm curva
 1491 - Pinça kocher 28 cm curva
 1492 - Pinça kocher 30 cm curva
 1493 - Pinça kocher 35 cm curva
 1494 - Pinça kocher atraumática 22 cm reta
 1495 - Pinça kocher atraumática 24 cm reta
 1496 - Pinça kocher atraumática 25 cm reta
 1497 - Pinça kocher atraumática 26 cm reta
 1498 - Pinça kocher atraumática 28 cm reta
 1499 - Pinça kocher atraumática 22 cm curva
 1500 - Pinça kocher atraumática 24 cm curva
 1501 - Pinça kocher atraumática 25 cm curva
 1502 - Pinça kocher atraumática 26 cm curva
 1503 - Pinça kocher atraumática 28 cm curva
 1504 - Pinça tuffier 14 cm
 1505 - Pinça tuffier 16 cm
 1506 - Pinça tuffier 18 cm
 1507 - Pinça tuffier 20 cm
 1508 - Pinça lahey 15 cm
 1509 - Pinça lahey 19 cm
 1510 - Pinça lahey 20 cm
 1511 - Pinça lahey 24 cm
 1512 - Pinça lambert-kay 21 cm
 1513 - Pinça lane 22 cm s/ cremalheira
 1514 - Pinça lane 27 cm s/ cremalheira
 1515 - Pinça lane 32 cm s/ cremalheira
 1516 - Pinça lane 33 cm s/ cremalheira
 1517 - Pinça lane 43 cm s/ cremalheira
 1518 - Pinça lane 22 cm c/ cremalheira
 1519 - Pinça lane 27 cm c/ cremalheira
 1520 - Pinça lane 32 cm c/ cremalheira
 1521 - Pinça lane 33 cm c/ cremalheira
 1522 - Pinça lane 43 cm c/ cremalheira
 1523 - Pinça magill 12 cm
 1524 - Pinça magill 14 cm
 1525 - Pinça magill 15 cm
 1526 - Pinça magill 16 cm

1527 - Pinça magill 18 cm
 1528 - Pinça magill 20 cm
 1529 - Pinça magill 22 cm
 1530 - Pinça magill 24 cm
 1531 - Pinça magill 25 cm
 1532 - Pinça heiss 20 cm curva
 1533 - Pinça heiss 20 cm reta
 1534 - Pinça Harrington mixer 23 cm
 1535 - Pinça Harrington mixer 32 cm
 1536 - Pinça hartmann halsted 10 cm curva
 1537 - Pinça hartmann halsted 10 cm reta
 1538 - Pinça providence-hospital reta 14 cm
 1539 - Pinça providence-hospital curva 14 cm
 1540 - Pinça mixer 13 cm
 1541 - Pinça mixer 14 cm
 1542 - Pinça mixer 16 cm
 1543 - Pinça mixer 17 cm
 1544 - Pinça mixer 18 cm
 1545 - Pinça mixer 19 cm
 1546 - Pinça mixer 20 cm
 1547 - Pinça mixer 21 cm
 1548 - Pinça mixer 22 cm
 1549 - Pinça mixer 23 cm
 1550 - Pinça mixer 24 cm
 1551 - Pinça mixer 25 cm
 1552 - Pinça mixer 28 cm
 1553 - Pinça mixer 30 cm
 1554 - Pinça mixer 35 cm
 1555 - Pinça mixer 40 cm
 1556 - Pinça mixer 45 cm
 1557 - Pinça verbrugge 17,5 cm
 1558 - Pinça verbrugge 19 cm
 1559 - Pinça verbrugge 20 cm
 1560 - Pinça verbrugge 25 cm
 1561 - Pinça verbrugge 26 cm
 1562 - Pinça verbrugge 27 cm
 1563 - Pinça wetheim 20 cm
 1564 - Pinça wetheim 22 cm
 1565 - Pinça wetheim 24 cm
 1566 - Pinça wetheim 26 cm
 1567 - Pinça winter curva n°1 27 cm
 1568 - Pinça winter curva n°2 27 cm
 1569 - Pinça winter curva n°3 27 cm
 1570 - Pinça winter reta n°1 27 cm
 1571 - Pinça winter reta n°2 27 cm
 1572 - Pinça winter reta n°3 27 cm
 1573 - Pinça winter curva 28 cm
 1574 - Pinça winter reta 28 cm
 1575 - Pinça randall p/ calculo renal n°1
 1576 - Pinça randall p/ calculo renal n°2
 1577 - Pinça randall p/ calculo renal n°3
 1578 - Pinça randall p/ calculo renal n°4
 1579 - Pinça randall 23 cm

1580 - Pinça randall 21 cm
 1581 - Pinça randall 19,5 cm
 1582 - Pinça randall 19,0 cm
 1583 - Pinça forte pegada maingot 25 cm
 1584 - Pinça martin 14 cm p/ menisco
 1585 - Pinça martin 16 cm p/ menisco
 1586 - Pinça martin 18 cm p/ menisco
 1587 - Pinça martin 19 cm p/ menisco
 1588 - Pinça martin 20 cm p/ menisco
 1589 - Pinça martin 22 cm p/ menisco
 1590 - Pinça martin 24 cm p/ menisco
 1591 - Pinça p/ gancho ponte DTT
 1592 - Pinça p/ haste longitudinal
 1593 - Pinça p/ haste transversal
 1594 - Pinça Z clamp 24 cm forte curva
 1595 - Pinça Z clamp 24 cm curva
 1596 - Pinça Z clamp 24 cm leve curva
 1597 - Pinça Z clamp 24 cm semi curva
 1598 - Pinça Z clamp 24 cm reta
 1599 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 2 mm
 1600 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 3 mm
 1601 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 4 mm
 1602 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 5 mm
 1603 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 6 mm
 1604 - Pinça professor medina p/ biopsia 24 cm x 8 mm
 1605 - Pinça pean murphy 14 cm
 1606 - Pinça pean murphy 16 cm
 1607 - Pinça pean murphy reta 16 cm
 1608 - Pinça pean murphy curva 16 cm
 1609 - Pinça pean murphy 18 cm
 1610 - Pinça pean murphy 20 cm
 1611 - Pinça pean murphy 23 cm
 1612 - Pinça pean murphy 25 cm
 1613 - Pinça pean 14 cm
 1614 - Pinça pean 16 cm
 1615 - Pinça pean 18 cm
 1616 - Pinça pean 20 cm
 1617 - Pinça pean 23 cm
 1618 - Pinça pean 25 cm
 1619 - Pinça schnidt 5,0 mm x 21 cm
 1620 - Pinça zenker 29,5 cm forte curva
 1621 - Pinça zenker 29,5 cm curva
 1622 - Pinça zenker 29,5 cm leve curva
 1623 - Pinça zenker 29,5 cm semi curva
 1624 - Pinça zenker 29,5 cm reta
 1625 - Pinça rochester carmalt 16 cm curva
 1626 - Pinça rochester carmalt 18 cm curva
 1627 - Pinça rochester carmalt 20 cm curva
 1628 - Pinça rochester carmalt 22 cm curva
 1629 - Pinça rochester carmalt 24 cm curva
 1630 - Pinça rochester carmalt 28 cm curva
 1631 - Pinça rochester carmalt 16 cm reta
 1632 - Pinça rochester carmalt 18 cm reta

1633 - Pinça rochester carmalt 20 cm reta
 1634 - Pinça rochester carmalt 22 cm reta
 1635 - Pinça rochester carmalt 24 cm reta
 1636 - Pinça rochester carmalt 28 cm reta
 1637 - Pinça rochester-ochsner 16 cm curva
 1638 - Pinça rochester-ochsner 18 cm curva
 1639 - Pinça rochester-ochsner 20 cm curva
 1640 - Pinça rochester-ochsner 22 cm curva
 1641 - Pinça rochester-ochsner 24 cm curva
 1642 - Pinça rochester-ochsner 28 cm curva
 1643 - Pinça rochester-ochsner 16 cm reta
 1644 - Pinça rochester-ochsner 18 cm reta
 1645 - Pinça rochester-ochsner 20 cm reta
 1646 - Pinça rochester-ochsner 22 cm reta
 1647 - Pinça rochester-ochsner 24 cm reta
 1648 - Pinça rochester-ochsner 28 cm reta
 1649 - Pinça rochester-pean 16 cm curva
 1650 - Pinça rochester-pean 18 cm curva
 1651 - Pinça rochester-pean 20 cm curva
 1652 - Pinça rochester-pean 22 cm curva
 1653 - Pinça rochester-pean 24 cm curva
 1654 - Pinça rochester-pean 26 cm curva
 1655 - Pinça rochester-pean 30 cm curva
 1656 - Pinça rochester-pean 16 cm reta
 1657 - Pinça rochester-pean 18 cm reta
 1658 - Pinça rochester-pean 20 cm reta
 1659 - Pinça rochester-pean 22 cm reta
 1660 - Pinça rochester-pean 24 cm reta
 1661 - Pinça rochester-pean 26 cm reta
 1662 - Pinça rochester-pean 30 cm reta
 1663 - Pinça rowel reta lado direito
 1664 - Pinça rowel baioneta lado direito
 1665 - Pinça rowel reta lado esquerdo
 1666 - Pinça rowel baioneta lado esquerdo
 1667 - Pinça rumel curva 24 cm
 1668 - Pinça rumel curva forte 24 cm
 1669 - Pinça rumel curva leve 24 cm
 1670 - Pinça rumel semi curva 24 cm
 1671 - Pinça sarot 24 cm
 1672 - Pinça espécimetro
 1673 - Pinça porta implante
 1674 - Pinça smith
 1675 - Pinça dingman
 1676 - Pinça bico de pato 16 cm
 1677 - Pinça bico de pato 18 cm
 1678 - Pinça bico de pato 20 cm
 1679 - Pinça adlerkreut
 1680 - Pinça adson hemostática reta 18,5 cm
 1681 - Pinça adson hemostática curva 18,5 cm
 1682 - Pinça Adson protetora de dura
 1683 - Pinça pozzi 16 cm
 1684 - Pinça pozzi 18 cm
 1685 - Pinça pozzi 20 cm

1686 - Pinça pozzi 24 cm
 1687 - Pinça pozzi 26 cm
 1688 - Pinça pozzi 28 cm
 1689 - Pinça pozzi 30 cm
 1690 - Pinça pozzi 32 cm
 1691 - Pinça pozzi 34 cm
 1692 - Pinça pratt 2 x 2 dentes 26 cm
 1693 - Pinça pratt 3 x 3 dentes 26 cm
 1694 - Pinça pratt 4 x 4 dentes 26 cm
 1695 - Pinça reynald p/ tubo 14 cm
 1696 - Pinça reynald p/ tubo 16 cm
 1697 - Pinça reynald p/ tubo 18 cm
 1698 - Pinça reynald p/ tubo 20 cm
 1699 - Pinça reynald p/ tubo 22 cm
 1700 - Pinça cushioning 2 x 10 x 120 mm
 1701 - Pinça cushioning 2 x 10 x 150 mm
 1702 - Pinça cushioning 2 x 10 x 180 mm
 1703 - Pinça cushioning 2 x 10 x 200 mm
 1704 - Pinça cushioning 45° p/ cima 2 x 10 x 120 mm
 1705 - Pinça cushioning 45° p/ cima 2 x 10 x 150 mm
 1706 - Pinça cushioning 45° p/ cima 2 x 10 x 180 mm
 1707 - Pinça cushioning 45° p/ cima 2 x 10 x 200 mm
 1708 - Pinça cushioning 45° p/ baixo 2 x 10 x 120 mm
 1709 - Pinça cushioning 45° p/ baixo 2 x 10 x 150 mm
 1710 - Pinça cushioning 45° p/ baixo 2 x 10 x 180 mm
 1711 - Pinça cushioning 45° p/ baixo 2 x 10 x 200 mm
 1712 - Pinça love gruenwald 3 x 10 x 120 mm
 1713 - Pinça love gruenwald 3 x 10 x 150 mm
 1714 - Pinça love gruenwald 3 x 10 x 180 mm
 1715 - Pinça love gruenwald 3 x 10 x 200 mm
 1716 - Pinça love gruenwald p/ cima 45 ° 3 x 10 x 120 mm
 1717 - Pinça love gruenwald p/ cima 45 ° 3 x 10 x 150 mm
 1718 - Pinça love gruenwald p/ cima 45 ° 3 x 10 x 180 mm
 1719 - Pinça love gruenwald p/ cima 45 ° 3 x 10 x 200 mm
 1720 - Pinça love gruenwald p/ baixo 45 ° 3 x 10 x 120 mm
 1721 - Pinça love gruenwald p/ baixo 45 ° 3 x 10 x 150 mm
 1722 - Pinça love gruenwald p/ baixo 45 ° 3 x 10 x 180 mm
 1723 - Pinça love gruenwald p/ baixo 45 ° 3 x 10 x 200 mm
 1724 - Pinça spurling 4 x 10 x 120 mm
 1725 - Pinça spurling 4 x 10 x 150 mm
 1726 - Pinça spurling 4 x 10 x 180 mm
 1727 - Pinça spurling 4 x 10 x 200 mm
 1728 - Pinça spurling p/ cima 45 ° 4 x 10 x 120 mm
 1729 - Pinça spurling p/ cima 45 ° 4 x 10 x 150 mm
 1730 - Pinça spurling p/ cima 45 ° 4 x 10 x 180 mm
 1731 - Pinça spurling p/ cima 45 ° 4 x 10 x 200 mm
 1732 - Pinça spurling p/ baixo 45 ° 4 x 10 x 120 mm
 1733 - Pinça spurling p/ baixo 45 ° 4 x 10 x 200 mm
 1734 - Pinça oldberg 180 mm
 1735 - Pinça landolt 200 mm
 1736 - Pinça yasargil 185 mm
 1737 - Pinça clips
 1738 - Porta especulo de holder

1739 - Redutor de acoplar p/ bainha TP diafragma diam. 12,0 mm p/ 5,0 mm
 1740 - Redutor p/ bainha TP janela 10,0 mm p/ 5,0 mm
 1741 - Suporte de Crânio bud hallo
 1742 - Suporte de Crânio tipo gardner
 1743 - Suporte de Crânio tipo mayfield
 1744 - Suporte de Crânio hallo craniano
 1745 - Suporte flexível
 1746 - Haste de yasargil
 1747 - Afastador millin c/ 5 lâminas abdominais e vesical
 2069 - Alicates p/ quebrar parafuso estendido
 2095 - Afastador Sarks
 2096 - Afastador Smith
 2097 - Afastador Haight 9 x 17,5 cm
 2098 - Afastador Haight 14 x 15 cm
 2099 - Afastador Struck 6,4 x 9,2 cm
 2109 - Afastador Tuffier 12,5 x 17 cm
 2110 - Pinça para Análogo
 2125 - Pinça reta para Bloco Ôsseo
 2388 - Clamp bulldog glover boca curva 70 x 110 mm
 2389 - Clamp bulldog glover boca curva 35 x 70 mm
 2390 - Clamp bulldog glover boca curva 50 x 90 mm
 2391 - Clamp bulldog glover boca reta 70 x 110 mm
 2392 - Clamp bulldog glover boca reta 35 x 70 mm
 2393 - Clamp bulldog glover boca reta 50 x 90 mm
 2406 - Clamp lowmann 1 x 2 140 mm
 2407 - Clamp lowmann 1 x 2 185 mm
 2408 - Clamp lowmann 1 x 2 200 mm
 2409 - Clamp lowmann 2 x 2 140 mm
 2410 - Clamp lowmann 2 x 2 185 mm
 2411 - Clamp lowmann 2 x 2 200 mm
 2682 - Forceps kielland p/ obstetrícia 390 mm
 2683 - Forceps lee p/ obstetrícia 370 mm
 2684 - Forceps piper p/ obstetrícia 440 mm
 2685 - Forceps simpsons p/ obstetrícia 300 mm
 2686 - Forceps simpsons p/ obstetrícia 350 mm
 2687 - Forceps simpsons p/ obstetrícia 500 mm
 2939 - Torquímetro de quebra
 2940 - Torquímetro de quebra 80 newtons
 3754 - Pinça de Bakey (Lambert modif.) 4 x 9,7 x 25,5 cm
 4746 - Pinça de Bakey 3,8 x 8,5 22 cm
 4747 - Pinça de Bakey 4,8 x 9,5 x 26,5 cm
 4748 - Pinça de Bakey 5,1 x 21 cm
 4749 - Pinça de Bakey 5,4 x 9,9 x 27 cm
 4750 - Pinça de Bakey 5,6 x 16 cm
 4751 - Pinça de Bakey 5,8 x 10,3 x 27 cm
 4752 - Pinça de Bakey 7,5 x 11,9 x 28 cm
 4753 - Pinça de Bakey 9 x 19 cm
 4754 - Pinça de Bakey 9,25 x 20 cm
 4755 - Pinça de Bakey- Beck 3 x 6,5 x 20,5 cm
 4756 - Pinça de Bakey- Beck 4,5 x 8 x 21 cm
 4757 - Pinça de Bakey Curva 1,8 x 9,5 x 24 cm
 4763 - Pinça de Bakey curva 5 x 16,5 cm
 4764 - Pinça de Bakey Curva 5,1 x 21 cm

4765 - Pinça de Bakey Curva 8 x 23 cm
 4766 - Pinça de Bakey curva 15° 4,1 x 20 cm
 4775 - Pinça de Bakey curva 15° 5 x 16,5 cm
 4776 - Pinça de Bakey curva 15° 5,1 x 21 cm
 4777 - Pinça de Bakey curva 15° 6,5 x 22,5 cm
 4778 - Pinça de Bakey curva 15° 8 x 24 cm
 4779 - Pinça de Bakey reta 4,1 x 20,5 cm
 4780 - Pinça de Bakey reta 5 x 17 cm
 4781 - Pinça de Bakey reta 6,5 x 22,5 cm
 4782 - Pinça de Bakey reta 8 x 24 cm
 4783 - Pinça de Bakey semi-curva 7,5 x 23 cm
 4784 - Pinça de Bakey Semi-Curva 7,7 x 19 cm
 4785 - Pinça de Bakey-Harken nº1 8,6 x 25,5 cm
 4786 - Pinça de Bakey-Harken nº2 8,6 x 24,5 cm
 4787 - Pinça de Bakey-Harken nº3 8,6 x 24,5 cm
 4788 - Pinça de Bakey-Harken nº4 8,6 x 24,5 cm
 4789 - Pinça de Bakey-MC Quigg-Mixter curva 7 x 21 cm
 4790 - Pinça de Bakey-Mixter curva 8 x 28,5 cm
 4791 - Pinça de Bakey-Rumel curva 8,1 x 24,5 cm
 4792 - Pinça de Bakey-Rumel semi-curva 8,1 x 25 cm
 4793 - Pinça de Bakey-Satinsky 3,2 x 6,8 x 23,5 cm
 4794 - Pinça de Bakey-Satinsky 4 x 7,6 x 24 cm
 4795 - Pinça de Bakey-Satinsky 4,7 x 8,4 x 24,5 cm
 4796 - Pinça Glover 4,7 x 7 x 19,5 cm
 4797 - Pinça Glover 6 x 22 cm
 4798 - Pinça Glover 6,3 x 9,5 x 21 cm
 4799 - Pinça Glover 8,6 x 24,5 cm
 4800 - Pinça Lambert-Kay 4 x 9,3 x 21,5 cm
 4801 - Pinça Lambert-Kay 4,7 x 10 x 21 cm
 4802 - Afastador perma Nº1
 4803 - Afastador perma Nº2
 4804 - Afastador perma Nº3
 4805 - Presilha de trava rápida
 4806 - Presilha auxiliar
 4807 - Presilha lateral p/ haste
 4808 - Presilha lateral
 4809 - Presilha ajustável nº1
 4810 - Presilha ajustável nº2
 4811 - Presilha ajustável nº3
 4812 - Presilha de aperto
 4813 - Mini lamina giratória
 4814 - Mini válvula giratória nº1
 4815 - Prendedor lateral de mesa
 4865 - Pinça angulada para Bloco Ôsseo
 5220 - Adaptador bookwalter c/ regulagem de angulo
 5221 - Adaptador clipe toalha
 5222 - Adaptador engate rápido
 5223 - Adaptador omni c/ regulagem de angulo
 5224 - Adaptador synthes c/ regulagem de angulo
 5225 - Alavanca engate rápido
 5226 - Alavanca punho engate rápido
 5227 - Alavanca punho engate rápido nº1
 5228 - Alavanca punho engate rápido nº2

5229 - Alavanca punho engate rápido bariátrica
5230 - Barra bilateral articulada nº1
5231 - Barra bilateral articulada nº2
5232 - Barra duas ajustável
5233 - Barra duas juntas
5234 - Braço extensão articulada
5235 - Extensor de trilho de mesa
5236 - Grampo 25 cm c/ 1 presilha
5237 - Grampo 25 cm c/ 2 presilha
5238 - Grampo 45 cm c/ 1 presilha
5239 - Grampo 45 cm c/ 2 presilha
5240 - Grampo 55 cm c/ 1 presilha
5241 - Grampo 55 cm c/ 2 presilha
5242 - Grampo 65 cm c/ 1 presilha
5243 - Grampo 65 cm c/ 2 presilha
5244 - Grampo ajustável c/ 1 presilha p/ omni-tract
5245 - Grampo ajustável c/ 1 presilha p/ bookwalter
5246 - Grampo ajustável c/ 1 presilha
5247 - Grampo ajustável c/ 2 presilha
5248 - Grampo trilho
5249 - Manivela engate rápido nº1
5250 - Manivela engate rápido nº2
5251 - Porta instrumento laparoscópica elite
5252 - Porta instrumento laparoscópica
5253 - Suporte de lamina flexível
5254 - Suporte holder flexível elite
5255 - Suporte holder flexível
5256 - Afastador LD

2.4 Registro ANVISA

80218310027

2.5 Apresentação Comercial

01 embalagem contém 01 unidade do produto.

3. Especificações do Produto

3.1 Indicação de Uso / Finalidade

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY são indicados para utilização em intervenções e apoios cirúrgicos, exames e procedimentos ambulatoriais.

3.2 Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY apresentam mecanismo de articulação. Devem ser utilizados por profissionais habilitados porque seus mecanismos auxiliam em intervenções cirúrgicas, exames e procedimentos ambulatoriais para abrir a boca, afastar, apoiar, fixar componentes, fixar agulhas para suturar e segurar tecidos.

3.3 Modo de Uso do Produto

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e ambulatorial e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do instrumento a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica e/ou ambulatorial antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

4. Procedimentos Para Utilização e Reutilização dos Instrumentais

4.1 Utilização

A utilização dos INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita a ambientes clínicos e hospitalares; com os seguintes cuidados:

4.2 Inspeções

Só poderão ser utilizados os instrumentais submetidos à inspeção técnica prévia.

4.3 Inspeção Técnica

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY antes de serem disponibilizados para uso devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado. As peças reprovadas devem ser separadas para revisão e manutenção ou destinadas para descarte. A inspeção deve verificar as características associadas à conservação e a funcionalidade do instrumental, incluindo aspectos superficiais, como manchas, oxidações e danos, além de características pertinentes a cada instrumental, tais como facilidade de articulação e capacidade de apreensão.

4.4 Limpeza

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY devem ser limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras. IMPORTANTE: Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

4.5 Esterilização

Os INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY devem ser esterilizados antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Nota: Todo o instrumental deve ser limpo logo após o término do procedimento cirúrgico, desta forma evitando o endurecimento de líquidos originados do trabalho cirúrgico. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas ou batidas que possam comprometer os instrumentais.

Recomendamos:

Auto Clave: temperatura de 121°C, período de 30 minutos.

Auto Clave de Alto Vácuo: temperatura de 132°C, período de 4 minutos.

4.6 Reutilização

O processo para reutilização dos INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY envolve, no mínimo, seis etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágüe, secagem e esterilização. Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados. Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza. Deve-se assegurar que os instrumentais, estejam livres de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microorganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do aço inoxidável, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

4.7 Limpeza Prévia

O instrumental deve ser mergulhado, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, preferencialmente enzimático, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

4.8 Descontaminação

É feita através da imersão do instrumental, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termokuímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da

INSTRUÇÕES DE USO - IFU0026.1

Revisão 01

temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

4.9 Lavagem

As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias, dando-se especial atenção às articulações, serrilhas, cremalheiras e áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

4.10 Enxágue

O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágue do instrumental.

4.11 Secagem

Deve-se assegurar que os processos de secagem não introduzam umidade, partículas ou felpas na superfície do instrumental. Recomenda-se que o tecido seja absorvente e macio.

4.12 Descarte

O descarte de peças desqualificadas deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. Após a substituição, destruir os componentes danificados evitando o uso posterior de forma indevida.

5. Armazenamento e Transporte

5.1 Condições de Armazenamento

Armazenar em local limpo, seco e protegido de radiação solar direta; Não armazenar com produtos e resíduos químicos; Armazenar de forma organizada para não danificar.

5.2 Condições para o Transporte

Transportar em local limpo e seco, protegido de radiação solar direta; Conservar em temperatura e umidade ambiente; Não transportar com produtos e resíduos químicos; Transportar de forma organizada para não danificar.

6. Condições de Manipulação

Produto de uso profissional; Não deve ser utilizado sem o conhecimento das técnicas adequadas para a execução dos procedimentos; O manuseio dos instrumentos deve ser cuidadoso para evitar danos e alterações de suas características. Evitando batidas e quedas bruscas.

6.1 Prazo de Validade e Lote

A data de validade, de fabricação e o número de lote são informados no rótulo.

7. Advertências

O produto deve ser utilizado conforme a finalidade indicada, somente por profissionais qualificados e devidamente treinados para o manuseio do mesmo. Os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

8. Precauções

É necessário que o profissional tenha formação especializada em técnicas estabelecidas. O manuseio dos instrumentais deve ser feita por pessoas qualificadas. A infraestrutura e higiene devem ser garantidas na manipulação dos produtos. Nunca armazenar instrumentais limpos em locais que possam ser focos de contaminação. Todos os instrumentais deteriorados ou que apresentarem indícios de corrosão deverão ser separados para evitar que o processo de corrosão se alastre.

9. Contraindicações

Todos os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

10. Efeitos Adversos

Não ocorrerão efeitos adversos, desde que sejam atendidas todas as recomendações presentes nas instruções de uso.

11. Explicação da simbologia utilizada na embalagem

	Número de referência
	Número de lote
	Fabricante
	Data de validade
	Data de fabricação
	Não utilizar se a embalagem estiver violada

	Não estéril
	Consultar as instruções de uso
	Mantenha seco
	Mantenha ao abrigo do sol
	Reciclável

Se necessário solicite o formato impresso desta instrução de uso, sem custo adicional através do e-mail sac@factorycirurgico.com.br ou pelo telefone: 11 3974-9119.

Responsável Técnico

Rogério Guedelha Massano
CREA-SP: 5063257311