



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. E COM. LTDA

INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO

Produto Não Estéril

Esterilizar antes do uso

Índice

1. Identificação do Fabricante

2. Dados do Produto

2.1 Nome Técnico

2.2 Nome Comercial

2.3 Modelos Comerciais

2.4 Registro ANVISA

2.5 Apresentação Comercial

3. Especificações do Produto

3.1 Indicação de Uso / Finalidade

3.2 Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

3.3 Modo de Uso do Produto

4. Procedimentos Para Utilização e Reutilização dos Instrumentais

4.1 Utilização

4.2 Inspeções

4.3 Inspeção Técnica

4.4 Limpeza

4.5 Esterilização

4.6 Reutilização

4.7 Limpeza Prévia

4.8 Descontaminação

4.9 Lavagem

4.10 Enxágue

4.11 Secagem

4.12 Descarte

5. Armazenamento e Transporte

5.1 Condições de Armazenamento

5.2 Condições para o Transporte

6. Condições de Manipulação

6.1 Prazo de Validade e Lote

7. Advertências

8. Precauções

9. Contraindicações

10. Efeitos Adversos

11. Explicação da Simbologia Utilizada na Embalagem

1. Identificação do Fabricante

Factory Instrumental Cirúrgico Indústria e Comércio Ltda.

Rua Ambrosia do México, 392-398, Jd. Cidade Pirituba

CEP: 02945-040 - São Paulo - SP

CNPJ: 56.294.952/0001-10

I.E.: 111.573.179.110

AFE: 8.02.183-1

www.factorycirurgico.com.br – SAC: +55 11 3974-9119

2. Dados do Produto

2.1 Nome Técnico

Instrumental Cirúrgico

2.2 Nome Comercial

Instrumental Factory com Conexão a Equipamento

2.3 Modelos Comerciais

Referência - Descrição do Modelo Comercial:

454 - Afastador Abdominal diam.4 mm

455 - Afastador Abdominal diam.10 mm

456 - Afastador de Mama diam.4 mm

457 - Afastador de Mama diam.10 mm

1868 - Afastador alfricht c/ aspiração 110 mm

1869 - Afastador 140 x 140 mm c/ Aspiração

1870 - Afastador universal 110 x 140 mm c/ Aspiração

1871 - Afastador universal 25 x 100 mm c/ Aspiração

1872 - Afastador hemostasia 17 cm c/ Aspiração

1873 - Afastador slim 20 x 130 mm c/ Aspiração

1874 - Afastador slim 20 x 180 mm c/ Aspiração

1957 - Afastador minnesota c/ aspirador 140 mm

1983 - Aspirador de laringe diam 1,5mm

1984 - Aspirador de laringe diam 2,0mm

1985 - Aspirador de laringe diam 2,5mm

1986 - Aspirador de laringe diam 3,0mm

1987 - Aspirador de laringe diam 3,5mm

1988 - Aspirador de laringe diam 4,0mm

1989 - Aspirador de laringe diam 4,5mm

1990 - Aspirador de laringe diam 5,0mm

1991 - Aspirador descolador de amigdal diam.2,0 mm

1992 - Aspirador descolador de amigdal diam.2,5 mm

1993 - Aspirador descolador de amigdal diam.3,0 mm

1994 - Aspirador descolador de amigdal diam.3,5 mm

1995 - Aspirador descolador de amigdal diam.4,0 mm

1996 - Aspirador descolador de amigdal diam.4,5 mm

1997 - Aspirador descolador de septo diam. 2,0 mm

1998 - Aspirador descolador de septo diam. 2,5 mm

1999 - Aspirador descolador de septo diam. 3,0 mm

2000 - Aspirador descolador de septo diam. 3,5 mm

2001 - Aspirador descolador de septo diam. 4,0 mm

2002 - Aspirador descolador de septo diam. 4,5 mm

2003 - Aspirador p/ seio maxilar diam.2,0mm

2004 - Aspirador p/ seio maxilar diam.2,5mm

2005 - Aspirador p/ seio maxilar diam.3,0mm

2006 - Aspirador p/ seio maxilar diam.3,5mm

2007 - Aspirador p/ seio maxilar diam.4,0mm

2008 - Aspirador p/ seio maxilar diam.5,0mm

2009 - Aspirador p/ seio frontal diam.2,0mm

2010 - Aspirador p/ seio frontal diam.2,5mm

2011 - Aspirador p/ seio frontal diam.3,0mm

2012 - Aspirador p/ seio frontal diam.3,5mm

2013 - Aspirador p/ seio frontal diam.4,0mm

2014 - Aspirador yankauer infantil 26 cm

2015 - Aspirador yankauer adulto 28 cm

2016 - Aspirador micro-endonasal diam.2,5mm

2017 - Aspirador micro-endonasal diam.3,0mm

2018 - Aspirador micro-endonasal diam.3,5mm

2019 - Aspirador Luer reto diam. 1,0 mm

2020 - Aspirador Luer reto diam. 1,5 mm

2021 - Aspirador Luer reto diam. 2,2 mm

2022 - Aspirador Luer reto diam. 2,5 mm

2023 - Aspirador Luer reto diam. 3,0 mm

2024 - Aspirador Luer curvo diam. 1,0 mm

2025 - Aspirador Luer curvo diam. 1,5 mm

2026 - Aspirador Luer curvo diam. 2,2 mm

2027 - Aspirador Luer curvo diam. 2,5 mm

2028 - Aspirador Luer curvo diam. 3,0 mm

2029 - Aspirador Frazier diam. 1,0 mm

2030 - Aspirador Frazier diam. 1,5 mm

2031 - Aspirador Frazier diam. 1,8 mm

2032 - Aspirador Frazier diam. 2,0 mm

2033 - Aspirador Frazier diam. 2,3 mm

2034 - Aspirador Frazier diam. 2,5 mm

2035 - Aspirador Frazier diam. 2,7 mm

2036 - Aspirador Frazier diam. 3,0 mm

2037 - Aspirador Frazier diam. 3,5 mm

2038 - Aspirador Frazier diam. 3,7 mm

2039 - Aspirador Frazier diam. 4,0 mm

2040 - Aspirador Frazier diam. 4,5 mm

2041 - Aspirador Frazier diam. 5,0 mm

2042 - Aspirador Atraumatico diam.1,0 mm

2043 - Aspirador Atraumatico diam.1,5 mm

2044 - Aspirador Atraumatico diam.1,8 mm

2045 - Aspirador Atraumatico diam.2,0 mm

2046 - Aspirador Atraumatico diam.2,3 mm

2047 - Aspirador Atraumatico diam.2,5 mm

2048 - Aspirador Atraumatico diam.2,7 mm

2049 - Aspirador Atraumatico diam.3,0 mm

2050 - Aspirador Atraumatico diam.3,5 mm

2051 - Aspirador Atraumatico diam.3,7 mm

2052 - Aspirador Atraumatico diam.4,0 mm

2053 - Aspirador Atraumatico diam.4,5 mm

2054 - Aspirador Atraumatico diam.5,0 mm

2055 - Aspirador de ouvido diam. 0,5 mm

2056 - Aspirador de ouvido diam. 0,6 mm

2057 - Aspirador de ouvido diam. 0,7 mm

2058 - Aspirador de ouvido diam. 0,8 mm

2059 - Aspirador de ouvido diam. 1,0 mm

2060 - Aspirador de ouvido diam. 1,2 mm

2061 - Aspirador de ouvido diam. 1,5 mm

2062 - Aspirador de ouvido diam. 1,8 mm

2063 - Aspirador de ouvido diam. 2,0 mm
 2064 - Aspirador de ouvido diam. 2,1 mm
 2065 - Aspirador de ouvido diam. 2,5 mm
 2066 - Aspirador de ouvido diam. 3,0 mm
 2067 - Aspirador poole reto 24,5 cm
 2068 - Aspirador poole curvo 24,5 cm
 2100 - Bainha C.R TP diafragma c/ torn. diam.5,0 mm x 4,5 cm
 2101 - Bainha C.R TP diafragma c/ torn.diam.10,0 mm x 6 cm
 2105 - Bainha C.R TP janela c/ torn. diam.5,0 mm x 4,5 cm
 2106 - Bainha C.R TP janela c/ torn.diam.10,0 mm x 6 cm
 2111 - Bainha p/ trocater TP diafragma c/ torn.diam.10,0 mm x 11,5 cm
 2113 - Bainha p/ trocater TP diafragma c/ torn. diam.5,0 mm x 11 cm
 2114 - Bainha p/ trocater TP diafragma c/ torn.diam. 10,0 mm x 14 cm
 2118 - Bainha p/ trocater TP janela c/ torn.diam.12,0 mm x 11,5 cm
 2119 - Bainha p/ trocater TP janela c/ torn.diam.5,0 mm x 11 cm
 2120 - Bainha p/ trocater TP janela c/ torn. diam.10,0 mm x 10 cm
 2123 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP diafr.c/ torn. diam.5,0mm x 11 cm
 2126 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP janela c/ torn. diam. 12,0 mm x 11,5 cm
 2127 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP janela c/ torn. diam.5,0 mm x 11 cm
 2134 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP janela c/ torn.diam. 10,0 mm x 10 cm
 2139 - Bainha rosqueavel TP diafragma c/ torn. diam. 12,0 mm x 11,5 cm
 2140 - Bainha TP diafragma obesidade c/ torn.diam. 12,0 mm x 14 cm
 2142 - Bainha TP janela Obesidade c/ torn.diam. 10,0 mm x 14 cm
 2186 - Conector 20ml-Luer Lock 130 mm
 2195 - Conector intermediário 70 mm
 2293 - Ponta de aspiração 3G dia. 1,8 x 150 mm
 2294 - Ponta de aspiração 1B dia. 1,2 x 150 mm
 2867 - Aspirador Descolador p/ palato 20 cm
 2906 - Sonda de itard diam.3,0 x 130 mm
 2907 - Sonda de itard diam.3,5 x 130 mm
 2935 - Tubo p/ aspiração irrigação diam. 5,0 mm x 20 cm
 2936 - Tubo p/ aspiração irrigação diam. 5,0 mm x 33 cm
 2937 - Tubo p/ aspiração irrigação diam. 10,0 mm x 33 cm
 2938 - Tubo p/ aspiração irrigação duas val. pistão diam. 5,0 mm x 33 cm
 2943 - Válvula p/ aspiração irrigação pistão duplo 85 mm
 2957 - Válvula doyan 40 x 250 mm c/ aspirador
 2958 - Válvula doyan 45 x 60 mm c/ aspirador
 2959 - Válvula doyan 45 x 70 mm c/ aspirador
 2960 - Válvula doyan 45 x 90 mm c/ aspirador
 2961 - Válvula doyan 45 x 120 mm c/ aspirador
 2962 - Válvula doyan 45 x 170 mm c/ aspirador
 2963 - Válvula doyan 60 x 90 mm c/ aspirador
 2964 - Válvula doyan 60 x 120 mm c/ aspirador
 2965 - Válvula doyan 60 x 150 mm c/ aspirador
 2966 - Válvula doyan 60 x 180 mm c/ aspirador
 2967 - Válvula doyan 60 x 200 mm c/ aspirador
 2968 - Válvula doyan 70 x 250 mm c/ aspirador
 2969 - Válvula doyan 100 x 140 mm c/ aspirador
 3755 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 150 mm
 3756 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 200 mm
 3757 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 300 mm
 3758 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 400 mm
 3759 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 150 mm
 3760 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 200 mm
 3761 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 300 mm

3762 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 400 mm
 3763 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 150 mm
 3764 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 200 mm
 3765 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 300 mm
 3766 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 400 mm
 3767 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 150 mm
 3768 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 200 mm
 3769 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 300 mm
 3770 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 400 mm
 3771 - Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 150 mm
 3772 - Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 200 mm
 3773 - Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 300 mm
 3774 - Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 400 mm
 3775 - Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 150 mm
 3776 - Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 200 mm
 3777 - Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 300 mm
 3778 - Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 400 mm
 3779 - Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 150 mm
 3780 - Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 200 mm
 3781 - Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 300 mm
 3782 - Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 400 mm
 3783 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 150 mm
 3784 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 200 mm
 3785 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 300 mm
 3786 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 400 mm
 3787 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 150 mm
 3788 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 200 mm
 3789 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 300 mm
 3790 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 400 mm
 3791 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 150 mm
 3792 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 200 mm
 3793 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 300 mm
 3794 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 400 mm
 3795 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 150 mm
 3796 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 200 mm
 3797 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 300 mm
 3798 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 400 mm
 3799 - Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 150 mm
 3800 - Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 200 mm
 3801 - Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 300 mm
 3802 - Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 400 mm
 3803 - Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 150 mm
 3804 - Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 200 mm
 3805 - Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 300 mm
 3806 - Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 400 mm
 3807 - Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 150 mm
 3808 - Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 200 mm
 3809 - Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 300 mm
 3810 - Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 400 mm
 3811 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 150 mm
 3812 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 200 mm
 3813 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 300 mm
 3814 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 400 mm
 3815 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 150 mm
 3816 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 200 mm
 3817 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 300 mm
 3818 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 400 mm

3819 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 150 mm
 3820 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 200 mm
 3821 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 300 mm
 3822 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 400 mm
 3823 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 150 mm
 3824 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 200 mm
 3825 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 300 mm
 3826 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 400 mm
 3827 - Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 150 mm
 3828 - Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 200 mm
 3829 - Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 300 mm
 3830 - Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 400 mm
 3831 - Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 150 mm
 3832 - Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 200 mm
 3833 - Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 300 mm
 3834 - Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 400 mm
 3835 - Ponta de aspiração 1C dia. 6,0 x 150 mm
 3836 - Ponta de aspiração 1C dia. 6,0 x 200 mm
 3837 - Ponta de aspiração 1C dia. 6,0 x 300 mm
 3838 - Ponta de aspiração 1C dia. 6,0 x 400 mm
 3839 - Ponta de aspiração 1FC dia. 2,0 x 150 mm
 3840 - Ponta de aspiração 1FC dia. 2,0 x 200 mm
 3841 - Ponta de aspiração 1FC dia. 2,0 x 300 mm
 3842 - Ponta de aspiração 1FC dia. 2,0 x 400 mm
 3843 - Ponta de aspiração 1FC dia. 2,5 x 150 mm
 3844 - Ponta de aspiração 1FC dia. 2,5 x 200 mm
 3845 - Ponta de aspiração 1FC dia. 2,5 x 300 mm
 3846 - Ponta de aspiração 1FC dia. 2,5 x 400 mm
 3847 - Ponta de aspiração 1FC dia. 3,0 x 150 mm
 3848 - Ponta de aspiração 1FC dia. 3,0 x 200 mm
 3849 - Ponta de aspiração 1FC dia. 3,0 x 300 mm
 3850 - Ponta de aspiração 1FC dia. 3,0 x 400 mm
 3851 - Ponta de aspiração 1FC dia. 3,5 x 150 mm
 3852 - Ponta de aspiração 1FC dia. 3,5 x 200 mm
 3853 - Ponta de aspiração 1FC dia. 3,5 x 300 mm
 3854 - Ponta de aspiração 1FC dia. 3,5 x 400 mm
 3855 - Ponta de aspiração 1FC dia. 4,0 x 150 mm
 3856 - Ponta de aspiração 1FC dia. 4,0 x 200 mm
 3857 - Ponta de aspiração 1FC dia. 4,0 x 300 mm
 3858 - Ponta de aspiração 1FC dia. 4,0 x 400 mm
 3859 - Ponta de aspiração 1FC dia. 5,0 x 150 mm
 3860 - Ponta de aspiração 1FC dia. 5,0 x 200 mm
 3861 - Ponta de aspiração 1FC dia. 5,0 x 300 mm
 3862 - Ponta de aspiração 1FC dia. 5,0 x 400 mm
 3863 - Ponta de aspiração 1FC dia. 6,0 x 150 mm
 3864 - Ponta de aspiração 1FC dia. 6,0 x 200 mm
 3865 - Ponta de aspiração 1FC dia. 6,0 x 300 mm
 3866 - Ponta de aspiração 1FC dia. 6,0 x 400 mm
 3867 - Ponta de aspiração 1LA dia. 2,0 x 150 mm
 3868 - Ponta de aspiração 1LA dia. 2,0 x 200 mm
 3869 - Ponta de aspiração 1LA dia. 2,0 x 300 mm
 3870 - Ponta de aspiração 1LA dia. 2,0 x 400 mm
 3871 - Ponta de aspiração 1LA dia. 2,5 x 150 mm
 3872 - Ponta de aspiração 1LA dia. 2,5 x 200 mm
 3873 - Ponta de aspiração 1LA dia. 2,5 x 300 mm
 3874 - Ponta de aspiração 1LA dia. 2,5 x 400 mm
 3875 - Ponta de aspiração 1LA dia. 3,0 x 150 mm

4104 - Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 200 mm
4105 - Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 300 mm
4106 - Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 400 mm
4107 - Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 150 mm
4108 - Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 200 mm
4109 - Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 300 mm
4110 - Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 400 mm
4111 - Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 150 mm
4112 - Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 200 mm
4113 - Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 300 mm
4114 - Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 400 mm
4115 - Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 150 mm
4116 - Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 200 mm
4117 - Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 300 mm
4118 - Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 400 mm
4119 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 150 mm
4120 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 200 mm
4121 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 300 mm
4122 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 400 mm
4123 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 150 mm
4124 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 200 mm
4125 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 300 mm
4126 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 400 mm
4127 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 150 mm
4128 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 200 mm
4129 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 300 mm
4130 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 400 mm
4131 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 150 mm
4132 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 200 mm
4133 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 300 mm
4134 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 400 mm
4135 - Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 150 mm
4136 - Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 200 mm
4137 - Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 300 mm
4138 - Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 400 mm
4139 - Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 150 mm
4140 - Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 200 mm
4141 - Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 300 mm
4142 - Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 400 mm
4143 - Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 150 mm
4144 - Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 200 mm
4145 - Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 300 mm
4146 - Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 400 mm
4147 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 150 mm
4148 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 200 mm
4149 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 300 mm
4150 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 400 mm
4151 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 150 mm
4152 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 200 mm
4153 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 300 mm
4154 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 400 mm
4155 - Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 150 mm
4156 - Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 200 mm
4157 - Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 300 mm
4158 - Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 400 mm
4159 - Ponta de aspiração 3G dia. 3,5 x 150 mm
4160 - Ponta de aspiração 3G dia. 3,5 x 200 mm

Página 4 de 10

4275 - Ponta de aspiração 3K dia. 6,0 x 400 mm
4276 - Ponta de aspiração 3ME dia. 2,0 x 200 mm
4277 - Ponta de aspiração 3ME dia. 2,0 x 300 mm
4278 - Ponta de aspiração 3ME dia. 2,0 x 400 mm
4279 - Ponta de aspiração 3ME dia. 2,5 x 200 mm
4280 - Ponta de aspiração 3ME dia. 2,5 x 300 mm
4281 - Ponta de aspiração 3ME dia. 2,5 x 400 mm
4282 - Ponta de aspiração 3ME dia. 3,0 x 200 mm
4283 - Ponta de aspiração 3ME dia. 3,0 x 300 mm
4284 - Ponta de aspiração 3ME dia. 3,0 x 400 mm
4285 - Ponta de aspiração 3ME dia. 3,5 x 200 mm
4286 - Ponta de aspiração 3ME dia. 3,5 x 300 mm
4287 - Ponta de aspiração 3ME dia. 3,5 x 400 mm
4288 - Ponta de aspiração 3ME dia. 4,0 x 200 mm
4289 - Ponta de aspiração 3ME dia. 4,0 x 300 mm
4290 - Ponta de aspiração 3ME dia. 4,0 x 400 mm
4291 - Ponta de aspiração 3ME dia. 5,0 x 200 mm
4292 - Ponta de aspiração 3ME dia. 5,0 x 300 mm
4293 - Ponta de aspiração 3ME dia. 5,0 x 400 mm
4294 - Ponta de aspiração 3ME dia. 6,0 x 200 mm
4295 - Ponta de aspiração 3ME dia. 6,0 x 300 mm
4296 - Ponta de aspiração 3ME dia. 6,0 x 400 mm
4297 - Ponta de aspiração 5AL dia. 2,0 x 200 mm
4298 - Ponta de aspiração 5AL dia. 2,0 x 300 mm
4299 - Ponta de aspiração 5AL dia. 2,0 x 400 mm
4300 - Ponta de aspiração 5AL dia. 2,5 x 200 mm
4301 - Ponta de aspiração 5AL dia. 2,5 x 300 mm
4302 - Ponta de aspiração 5AL dia. 2,5 x 400 mm
4303 - Ponta de aspiração 5AL dia. 3,0 x 200 mm
4304 - Ponta de aspiração 5AL dia. 3,0 x 300 mm
4305 - Ponta de aspiração 5AL dia. 3,0 x 400 mm
4306 - Ponta de aspiração 5AL dia. 3,5 x 200 mm
4307 - Ponta de aspiração 5AL dia. 3,5 x 300 mm
4308 - Ponta de aspiração 5AL dia. 3,5 x 400 mm
4309 - Ponta de aspiração 5AL dia. 4,0 x 200 mm
4310 - Ponta de aspiração 5AL dia. 4,0 x 300 mm
4311 - Ponta de aspiração 5AL dia. 4,0 x 400 mm
4312 - Ponta de aspiração 5AL dia. 5,0 x 200 mm
4313 - Ponta de aspiração 5AL dia. 5,0 x 300 mm
4314 - Ponta de aspiração 5AL dia. 5,0 x 400 mm
4315 - Ponta de aspiração 5AL dia. 6,0 x 200 mm
4316 - Ponta de aspiração 5AL dia. 6,0 x 300 mm
4317 - Ponta de aspiração 5AL dia. 6,0 x 400 mm
4318 - Ponta de aspiração LE dia. 2,0 x 200 mm
4319 - Ponta de aspiração LE dia. 2,0 x 300 mm
4320 - Ponta de aspiração LE dia. 2,0 x 400 mm
4321 - Ponta de aspiração LE dia. 2,5 x 200 mm
4322 - Ponta de aspiração LE dia. 2,5 x 300 mm
4323 - Ponta de aspiração LE dia. 2,5 x 400 mm
4324 - Ponta de aspiração LE dia. 3,0 x 200 mm
4325 - Ponta de aspiração LE dia. 3,0 x 300 mm
4326 - Ponta de aspiração LE dia. 3,0 x 400 mm
4327 - Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 200 mm
4328 - Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 300 mm
4329 - Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 400 mm
4330 - Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 200 mm
4331 - Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 300 mm

Página 5 de 10

5097 - Aspirador especial C.T. diam.3,0mm
5098 - Aspirador especial C.T. diam.3,5mm
5099 - Aspirador especial C.T. diam.4,0mm
5100 - Aspirador especial C.T. c/ ponta diam.2,5mm
5101 - Aspirador especial C.T. c/ ponta diam.3,0mm
5102 - Aspirador especial C.T. c/ ponta diam.3,5mm
5103 - Aspirador especial C.T. c/ ponta diam.4,0mm
5104 - Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 1,5 mm
5105 - Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 2,0 mm
5106 - Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 2,5 mm
5107 - Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 3,0 mm
5108 - Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 3,5 mm
5109 - Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 4,0 mm
5110 - Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 4,5 mm
5111 - Aspirador especial C.T. Microlaringe diam. 5,0 mm
5112 - Aspirador especial C.T. face
5113 - Aspirador especial C.T. mama
5119 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 100 mm
5120 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,0 x 350 mm
5121 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 100 mm
5122 - Ponta de aspiração 1B dia. 2,5 x 350 mm
5123 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 100 mm
5124 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,0 x 350 mm
5125 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 100 mm
5126 - Ponta de aspiração 1B dia. 3,5 x 350 mm
5127 - Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 100 mm
5128 - Ponta de aspiração 1B dia. 4,0 x 350 mm
5129 - Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 100 mm
5130 - Ponta de aspiração 1B dia. 5,0 x 350 mm
5131 - Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 100 mm
5132 - Ponta de aspiração 1B dia. 6,0 x 350 mm
5133 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 100 mm
5134 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,0 x 350 mm
5135 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 100 mm
5136 - Ponta de aspiração 1A dia. 2,5 x 350 mm
5137 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 100 mm
5138 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,0 x 350 mm
5139 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 100 mm
5140 - Ponta de aspiração 1A dia. 3,5 x 350 mm
5141 - Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 100 mm
5142 - Ponta de aspiração 1A dia. 4,0 x 350 mm
5143 - Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 100 mm
5144 - Ponta de aspiração 1A dia. 5,0 x 350 mm
5145 - Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 100 mm
5146 - Ponta de aspiração 1A dia. 6,0 x 350 mm
5147 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 100 mm
5148 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,0 x 350 mm
5149 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 100 mm
5150 - Ponta de aspiração 1C dia. 2,5 x 350 mm
5151 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 100 mm
5152 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,0 x 350 mm
5153 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 100 mm
5154 - Ponta de aspiração 1C dia. 3,5 x 350 mm
5155 - Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 100 mm
5156 - Ponta de aspiração 1C dia. 4,0 x 350 mm
5157 - Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 100 mm
5158 - Ponta de aspiração 1C dia. 5,0 x 350 mm

Página 6 de 10

5311 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,0 x 350 mm
5312 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,5 x 100 mm
5313 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 2,5 x 350 mm
5314 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,0 x 100 mm
5315 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,0 x 350 mm
5316 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,5 x 100 mm
5317 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 3,5 x 350 mm
5318 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 4,0 x 100 mm
5319 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 4,0 x 350 mm
5320 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 5,0 x 100 mm
5321 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 5,0 x 350 mm
5322 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 6,0 x 100 mm
5323 - Ponta de aspiração 2ECH dia. 6,0 x 350 mm
5325 - Ponta de aspiração 3B dia. 2,0 x 350 mm
5326 - Ponta de aspiração 3B dia. 2,5 x 100 mm
5327 - Ponta de aspiração 3B dia. 2,5 x 350 mm
5328 - Ponta de aspiração 3B dia. 3,0 x 100 mm
5329 - Ponta de aspiração 3B dia. 3,0 x 350 mm
5330 - Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 100 mm
5331 - Ponta de aspiração 3B dia. 3,5 x 350 mm
5332 - Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 100 mm
5333 - Ponta de aspiração 3B dia. 4,0 x 350 mm
5334 - Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 100 mm
5335 - Ponta de aspiração 3B dia. 5,0 x 350 mm
5336 - Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 100 mm
5337 - Ponta de aspiração 3B dia. 6,0 x 350 mm
5338 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 100 mm
5339 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,0 x 350 mm
5340 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 100 mm
5341 - Ponta de aspiração 3F dia. 2,5 x 350 mm
5342 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 100 mm
5343 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,0 x 350 mm
5344 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 100 mm
5345 - Ponta de aspiração 3F dia. 3,5 x 350 mm
5346 - Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 100 mm
5347 - Ponta de aspiração 3F dia. 4,0 x 350 mm
5348 - Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 100 mm
5349 - Ponta de aspiração 3F dia. 5,0 x 350 mm
5350 - Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 100 mm
5351 - Ponta de aspiração 3F dia. 6,0 x 350 mm
5352 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 100 mm
5353 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,0 x 350 mm
5354 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 100 mm
5355 - Ponta de aspiração 3G dia. 2,5 x 350 mm
5356 - Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 100 mm
5357 - Ponta de aspiração 3G dia. 3,0 x 350 mm
5358 - Ponta de aspiração 3G dia. 3,5 x 100 mm
5359 - Ponta de aspiração 3G dia. 3,5 x 350 mm
5360 - Ponta de aspiração 3G dia. 4,0 x 100 mm
5361 - Ponta de aspiração 3G dia. 4,0 x 350 mm
5362 - Ponta de aspiração 3G dia. 5,0 x 100 mm
5363 - Ponta de aspiração 3G dia. 5,0 x 350 mm
5364 - Ponta de aspiração 3G dia. 6,0 x 100 mm
5365 - Ponta de aspiração 3G dia. 6,0 x 350 mm
5366 - Ponta de aspiração 3GR dia. 2,0 x 100 mm
5367 - Ponta de aspiração 3GR dia. 2,0 x 350 mm
5368 - Ponta de aspiração 3GR dia. 2,5 x 100 mm

Página 7 de 10

5483 - Ponta de aspiração LE dia. 3,0 x 350 mm
5484 - Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 100 mm
5485 - Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 150 mm
5486 - Ponta de aspiração LE dia. 3,5 x 350 mm
5487 - Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 100 mm
5488 - Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 150 mm
5489 - Ponta de aspiração LE dia. 4,0 x 350 mm
5490 - Ponta de aspiração LE dia. 5,0 x 100 mm
5491 - Ponta de aspiração LE dia. 5,0 x 150 mm
5492 - Ponta de aspiração LE dia. 5,0 x 350 mm
5493 - Ponta de aspiração LE dia. 6,0 x 100 mm
5494 - Ponta de aspiração LE dia. 6,0 x 150 mm
5495 - Ponta de aspiração LE dia. 6,0 x 350 mm
5496 - Ponta de aspiração MF dia. 2,0 x 100 mm
5497 - Ponta de aspiração MF dia. 2,0 x 150 mm
5498 - Ponta de aspiração MF dia. 2,0 x 350 mm
5499 - Ponta de aspiração MF dia. 2,5 x 100 mm
5500 - Ponta de aspiração MF dia. 2,5 x 150 mm
5501 - Ponta de aspiração MF dia. 2,5 x 350 mm
5502 - Ponta de aspiração MF dia. 3,0 x 100 mm
5503 - Ponta de aspiração MF dia. 3,0 x 150 mm
5504 - Ponta de aspiração MF dia. 3,0 x 350 mm
5505 - Ponta de aspiração MF dia. 3,5 x 100 mm
5506 - Ponta de aspiração MF dia. 3,5 x 150 mm
5507 - Ponta de aspiração MF dia. 3,5 x 350 mm
5508 - Ponta de aspiração MF dia. 4,0 x 100 mm
5509 - Ponta de aspiração MF dia. 4,0 x 150 mm
5510 - Ponta de aspiração MF dia. 4,0 x 350 mm
5511 - Ponta de aspiração MF dia. 5,0 x 100 mm
5512 - Ponta de aspiração MF dia. 5,0 x 150 mm
5513 - Ponta de aspiração MF dia. 5,0 x 350 mm
5514 - Ponta de aspiração MF dia. 6,0 x 100 mm
5515 - Ponta de aspiração MF dia. 6,0 x 150 mm
5516 - Ponta de aspiração MF dia. 6,0 x 350 mm
5517 - Ponta de aspiração P3G dia. 2,0 x 100 mm
5518 - Ponta de aspiração P3G dia. 2,0 x 150 mm
5519 - Ponta de aspiração P3G dia. 2,0 x 350 mm
5520 - Ponta de aspiração P3G dia. 2,5 x 100 mm
5521 - Ponta de aspiração P3G dia. 2,5 x 150 mm
5522 - Ponta de aspiração P3G dia. 2,5 x 350 mm
5523 - Ponta de aspiração P3G dia. 3,0 x 100 mm
5524 - Ponta de aspiração P3G dia. 3,0 x 150 mm
5525 - Ponta de aspiração P3G dia. 3,0 x 350 mm
5540 - Ponta de aspiração P3G dia. 3,5 x 100 mm
5541 - Ponta de aspiração P3G dia. 3,5 x 150 mm
5542 - Ponta de aspiração P3G dia. 3,5 x 350 mm
5543 - Ponta de aspiração P3G dia. 4,0 x 100 mm
5544 - Ponta de aspiração P3G dia. 4,0 x 150 mm
5545 - Ponta de aspiração P3G dia. 4,0 x 350 mm
5546 - Ponta de aspiração P3G dia. 5,0 x 100 mm
5547 - Ponta de aspiração P3G dia. 5,0 x 150 mm
5548 - Ponta de aspiração P3G dia. 5,0 x 350 mm
5549 - Ponta de aspiração P3G dia. 6,0 x 100 mm
5550 - Ponta de aspiração P3G dia. 6,0 x 150 mm
5551 - Ponta de aspiração P3G dia. 6,0 x 350 mm
5552 - Ponta de aspiração PY dia. 2,0 x 100 mm
5553 - Ponta de aspiração PY dia. 2,0 x 150 mm

Página 8 de 10

5611 - Ponta de aspiração RPON dia. 5,0 x 350 mm
5612 - Ponta de aspiração RPON dia. 6,0 x 100 mm
5613 - Ponta de aspiração RPON dia. 6,0 x 150 mm
5614 - Ponta de aspiração RPON dia. 6,0 x 350 mm
5615 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 100 mm
5616 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 150 mm
5617 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 200 mm
5618 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 300 mm
5619 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 350 mm
5620 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,0 x 400 mm
5621 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 100 mm
5622 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 150 mm
5623 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 200 mm
5624 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 300 mm
5625 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 350 mm
5626 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 2,5 x 400 mm
5627 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 100 mm
5628 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 150 mm
5629 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 200 mm
5630 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 300 mm
5631 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 350 mm
5632 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,0 x 400 mm
5633 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 100 mm
5634 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 150 mm
5635 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 200 mm
5636 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 300 mm
5637 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 350 mm
5638 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 3,5 x 400 mm
5639 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 100 mm
5640 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 150 mm
5641 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 200 mm
5642 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 300 mm
5643 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 350 mm
5644 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 4,0 x 400 mm
5645 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 100 mm
5646 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 150 mm
5647 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 200 mm
5648 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 300 mm
5649 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 350 mm
5650 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 5,0 x 400 mm
5651 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 100 mm
5652 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 150 mm
5653 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 200 mm
5654 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 300 mm
5655 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 350 mm
5656 - Ponta de aspiração 3G2B dia. 6,0 x 400 mm
KT-002 - Ponta de Aspiração c/ 5 peças

2.4 Registro ANVISA

80218310029

2.5 Apresentação Comercial

01 embalagem contém 01 unidade do produto.

3. Especificações do Produto

3.1 Indicação de Uso / Finalidade

O INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO é indicado para utilização em intervenções e apoios cirúrgicos, exames e procedimentos ambulatoriais.

3.2 Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

O funcionamento baseia-se em conectar o instrumento a um equipamento (como uma bomba de sucção, por exemplo) para fazer a aspiração de líquidos como soro, sangue, saliva, etc. Os mesmos atuam no processo de intervenção e apoio cirúrgico, exames e procedimentos ambulatoriais.

3.3 Modo de Uso do Produto

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e ambulatorial e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do instrumento a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica e/ou ambulatorial antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

4. Procedimentos Para Utilização e Reutilização dos Instrumentais

4.1 Utilização

A utilização do INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita a ambientes clínicos e hospitalares; com os seguintes cuidados:

4.2 Inspeções

Só poderão ser utilizados os instrumentais submetidos à inspeção técnica prévia.

4.3 Inspeção Técnica

O INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO antes de ser disponibilizado para uso deve ser submetido à inspeção técnica por responsável habilitado. As peças reprovadas devem ser separadas para revisão e manutenção ou destinadas para descarte. A inspeção deve verificar as características associadas à conservação e a funcionalidade do instrumental, incluindo aspectos superficiais, como manchas, oxidações e danos, além de características pertinentes a cada instrumental.

4.4 Limpeza

O INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO deve ser limpo com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere

fibras. IMPORTANTE: Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

4.5 Esterilização

O INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO deve ser esterilizado antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Nota: Todo o instrumental deve ser limpo logo após o término do procedimento cirúrgico, desta forma evitando o endurecimento de líquidos originados do trabalho cirúrgico. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas ou batidas que possam comprometer os instrumentais.

Recomendamos:

Auto Clave: temperatura de 121°C, período de 30 minutos.

Auto Clave de Alto Vácuo: temperatura de 132°C, período de 4 minutos.

4.6 Reutilização

O processo para reutilização do INSTRUMENTAL FACTORY COM CONEXÃO A EQUIPAMENTO envolve, no mínimo, seis etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágüe, secagem e esterilização. Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados. Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza. Deve-se assegurar que os instrumentais, estejam livres de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microorganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do aço inoxidável, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

4.7 Limpeza Prévia

O instrumental deve ser mergulhado, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, preferencialmente enzimático, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

4.8 Descontaminação

É feita através da imersão do instrumental, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termokuímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

4.9 Lavagem

As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias, dando-se especial atenção às articulações, serrilhas, cremalheiras e áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

4.10 Enxágue

O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágue do instrumental.

4.11 Secagem

Deve-se assegurar que os processos de secagem não introduzam umidade, partículas ou felpas na superfície do instrumental. Recomenda-se que o tecido seja absorvente e macio.

4.12 Descarte

O descarte de peças desqualificadas deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. Após a substituição, destruir os componentes danificados evitando o uso posterior de forma indevida.

5. Armazenamento e Transporte**5.1 Condições de Armazenamento**

Armazenar em local limpo, seco e protegido de radiação solar direta; Não armazenar com produtos e resíduos químicos; Armazenar de forma organizada para não danificar.

5.2 Condições para o Transporte

Transportar em local limpo e seco, protegido de radiação solar direta; Conservar em temperatura e umidade ambiente; Não transportar com produtos e resíduos químicos; Transportar de forma organizada para não danificar.

6. Condições de Manipulação

Produto de uso profissional; Não deve ser utilizado sem o conhecimento das técnicas adequadas para a execução dos procedimentos; O manuseio dos instrumentos deve ser cuidadoso para evitar danos e alterações de suas características. Evitando batidas e quedas bruscas.

6.1 Prazo de Validade e Lote

A data de validade, de fabricação e o número de lote são informados no rótulo.

7. Advertências

O produto deve ser utilizado conforme a finalidade indicada, somente por profissionais qualificados e devidamente treinados para o manuseio do mesmo. Os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

8. Precauções

É necessário que o profissional tenha formação especializada em técnicas estabelecidas. O manuseio dos instrumentais deve ser feita por pessoas qualificadas. A infraestrutura e higiene devem ser garantidas na manipulação dos produtos. Nunca armazenar instrumentais limpos em locais que possam ser focos de contaminação. Todos os instrumentais deteriorados ou que apresentem indícios de corrosão deverão ser separados para evitar que o processo de corrosão se alastre.

9. Contraindicações

Todos os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

10. Efeitos Adversos

Não ocorrerão efeitos adversos, desde que sejam atendidas todas as recomendações presentes nas instruções de uso.

11. Explicação da simbologia utilizada na embalagem

	Número de referência
	Número de lote

	Fabricante
	Data de validade
	Data de fabricação
	Não utilizar se a embalagem estiver violada
	Não estéril
	Consultar as instruções de uso
	Mantenha seco
	Mantenha ao abrigo do sol
	Reciclável

Se necessário solicite o formato impresso desta instrução de uso, sem custo adicional através do e-mail sac@factorycirurgico.com.br ou pelo telefone: 11 3974-9119.

Responsável Técnico

Rogério Guedelha Massano
CREA-SP: 5063257311