



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. E COM. LTDA

INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY

Produto Não Estéril

Esterilizar antes do uso

Índice

1. Identificação do Fabricante

2. Dados do Produto

2.1 Nome Técnico

2.2 Nome Comercial

2.3 Modelos Comerciais

2.4 Registro ANVISA

2.5 Apresentação Comercial

3. Especificações do Produto

3.1 Indicação de Uso / Finalidade

3.2 Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

3.3 Modo de Uso do Produto

4. Procedimentos Para Utilização e Reutilização dos Instrumentais

4.1 Utilização

4.2 Inspeções

4.3 Inspeção Técnica

4.4 Limpeza

4.5 Esterilização

4.6 Reutilização

4.7 Limpeza Prévia

4.8 Descontaminação

4.9 Lavagem

4.10 Enxágue

4.11 Secagem

4.12 Descarte

5. Armazenamento e Transporte

5.1 Condições de Armazenamento

5.2 Condições para o Transporte

6. Condições de Manipulação

6.1 Prazo de Validade e Lote

7. Advertências

8. Precauções

9. Contraindicações

10. Efeitos Adversos

11. Explicação da Simbologia Utilizada na Embalagem

1. Identificação do Fabricante

Factory Instrumental Cirúrgico Indústria e Comércio Ltda.

Rua Ambrosia do México, 392-398, Jd. Cidade Pirituba

CEP: 02945-040 - São Paulo - SP

CNPJ: 56.294.952/0001-10

I.E.: 111.573.179.110

AFE: 8.02.183-1

www.factorycirurgico.com.br – SAC: +55 11 3974-9119

2. Dados do Produto

2.1 Nome Técnico

Instrumental Cirúrgico

2.2 Nome Comercial

Instrumentais Não Articulados Não Cortantes Factory

2.3 Modelos Comerciais

Referência - Descrição do Modelo Comercial:

451 - Afastador Abdominal 32 cm x 30 mm

452 - Afastador Abdominal 32 cm x 50 mm

453 - Afastador Abdominal 32 cm x 70 mm

462 - Colocador 160 mm

513 - Espelho czerny retal 16 cm

951 - Afastador de Pálpebras 5 cm

1752 - Espelho hartmann auricular diam. 2,0 mm

1753 - Espelho hartmann auricular diam. 2,5 mm

1754 - Espelho hartmann auricular diam. 3,0 mm

1755 - Espelho hartmann auricular diam. 3,5 mm

1756 - Espelho hartmann auricular diam. 4,0 mm

1757 - Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 25 x 7 mm

1758 - Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 31 x 10 mm

1759 - Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 42 x 11 mm

1760 - Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 55 x 12 mm

1761 - Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 70 x 14 mm

1762 - Afastador obwegeser curva p/ cima 210 x 80 x 16 mm

1763 - Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 25 x 7 mm

1764 - Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 31 x 10 mm

1765 - Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 42 x 11 mm

1766 - Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 55 x 12 mm

1767 - Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 65 x 14 mm

1768 - Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 70 x 14 mm

1769 - Afastador obwegeser curva p/ baixo 210 x 80 x 16 mm

1770 - Afastador mini langenbeck 160 x 10 x 6 mm

1771 - Afastador mini langenbeck 160 x 17 x 5 mm

1772 - Afastador mini langenbeck 160 x 20 x 6 mm

1773 - Afastador mini langenbeck 160 x 22 x 8 mm

1774 - Afastador langenbeck curva 210 x 28 x 10 mm

1775 - Afastador langenbeck curva 210 x 28 x 14 mm

1776 - Afastador langenbeck curva 210 x 28 x 16 mm

1777 - Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 11 mm

1778 - Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 14 mm

1779 - Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 16 mm

1780 - Afastador langenbeck curva 210 x 33 x 14 mm

1781 - Afastador langenbeck curva 210 x 40 x 10 mm

1782 - Afastador langenbeck curva 210 x 40 x 13 mm

1783 - Afastador langenbeck curva 210 x 50 x 11 mm

1784 - Afastador langenbeck curva 210 x 55 x 11 mm

1785 - Afastador langenbeck curva 210 x 60 x 10 mm

1786 - Afastador langenbeck curva 210 x 60 x 11 mm

1787 - Afastador langenbeck curva 210 x 60 x 12 mm

1788 - Afastador langenbeck curva 210 x 60 x 20 mm

1789 - Afastador langenbeck curva 210 x 70 x 14 mm

1790 - Afastador langenbeck curva 210 x 80 x 12 mm

1791 - Afastador langenbeck curva 210 x 85 x 15 mm

1792 - Afastador love 14 cm

1793 - Afastador love 16 cm

1794 - Afastador love 20 cm

1795 - Afastador kocher 230 x 40 x 18 mm

1796 - Afastador kocher 230 x 60 x 25 mm

1797 - Afastador kocher 230 x 75 x 30 mm

1798 - Afastador kocher 230 x 75 x 40 mm

1799 - Afastador senn muller agudo 16 cm

1800 - Afastador senn muller rombo 16 cm

1801 - Afastador cushion 205 mm

1802 - Afastador cushion 205 x 10 x 13 mm

1803 - Afastador cushion 205 x 14 x 18 mm

1804 - Afastador deaver 315 mm

1805 - Afastador deaver 320 mm

1806 - Afastador deaver 365 mm

1807 - Afastador deaver 19 x 180 mm

1808 - Afastador deaver 22 x 215 mm

1809 - Afastador deaver 25 x 230 mm

1810 - Afastador deaver 25 x 300 mm

1811 - Afastador deaver 25 x 360 mm

1812 - Afastador deaver 38 x 300 mm

1813 - Afastador deaver 50 x 300 mm

1814 - Afastador deaver 75 x 300 mm

1815 - Afastador fomom 2 bolinhas 16 cm

1816 - Afastador holmann 375 x 65 mm

1817 - Afastador holmann 400 x 110 mm

1818 - Afastador em L pequeno 28 cm

1819 - Afastador em L médio 28 cm

1820 - Afastador em L grande 28 cm

1821 - Afastador masing 140 mm

1822 - Afastador senn muller agudo 18 cm

1823 - Afastador meyerding 5 x 10 x 160 mm

1824 - Afastador meyerding 18 x 7 x 160 mm

1825 - Afastador volkmann agudo 220 mm

1826 - Afastador volkmann rombo 220 mm

1827 - Afastador volkmann 2 dentes 220 mm

1828 - Afastador volkmann 3 dentes 220 mm

1829 - Afastador volkmann 4 dentes 220 mm

1830 - Afastador volkmann 6 dentes 220 mm

1831 - Afastador volkmann 8 dentes 220 mm

1832 - Afastador kocher 2 dentes 220 mm

1833 - Afastador kocher 3 dentes 220 mm

1834 - Afastador kocher 4 dentes 220 mm

1835 - Afastador kocher 5 dentes 220 mm

1836 - Afastador scoville Ang. p/ nervos 6 x 230 mm

1837 - Afastador scoville reto. p/ nervos 8 x 230 mm

1838 - Afastador kocher agudo 205 mm
 1839 - Afastador kocher rombo 205 mm
 1840 - Afastador israel 4 dentes 250 mm
 1841 - Afastador israel 5 dentes 250 mm
 1842 - Afastador israel 6 dentes 250 mm
 1843 - Afastador israel 7 dentes 250 mm
 1844 - Afastador taylor 50 x 35 x 195 mm
 1845 - Afastador taylor 55 x 35 x 200 mm
 1846 - Afastador taylor 250 x 32 x 102 mm
 1847 - Afastador taylor 250 x 32 x 76 mm
 1848 - Afastador taylor especial 250 mm
 1849 - Afastador Cooley direito 215 mm
 1850 - Afastador Cooley direito denteado 215 mm
 1851 - Afastador Cooley esquerdo 230 mm
 1852 - Afastador farabeuf 7 x 100 mm
 1853 - Afastador farabeuf 10 x 120 mm
 1854 - Afastador farabeuf 13 x 125 mm
 1855 - Afastador farabeuf 15 x 150 mm
 1856 - Afastador farabeuf 20 x 180 mm
 1857 - Afastador farabeuf 25 x 180 mm
 1858 - Afastador richardson 28 x 20 x 230 mm
 1859 - Afastador richardson 36 x 28 x 230 mm
 1860 - Afastador richardson 44 x 38 x 230 mm
 1861 - Afastador aba nasal 19 cm n°1
 1862 - Afastador aba nasal 19 cm n°2
 1863 - Afastador dedal agudo 65 mm
 1864 - Afastador dedal rombo 65 mm
 1865 - Afastador dedal c/ bolinha 65 mm
 1866 - Afastador malianic n°1 65 mm
 1867 - Afastador malianic n°2 80 mm
 1875 - Afastador alfricht c/ cabo 18 cm
 1876 - Afastador alfricht c/ cabo 16 cm
 1877 - Afastador freeman/ kilner 14 cm
 1878 - Afastador freeman curto 4 garras 6 cm
 1879 - Afastador freeman 14 cm
 1880 - Afastador freeman largo 4 garras 14 cm
 1881 - Afastador freeman largo 7 garras 14 cm
 1882 - Afastador lavassier 20 cm
 1883 - Afastador c/ cabo tipo branemark 18 cm
 1884 - Afastador bennet 220 x 40 mm
 1885 - Afastador bennet 235 x 65 mm
 1886 - Afastador cushioning 19 cm
 1887 - Afastador cushioning 23 cm 10 x 13 mm
 1888 - Afastador cushioning 23 cm 22 x 13 mm
 1889 - Afastador davidson n°1 195 mm
 1890 - Afastador davidson n°2 195 mm
 1891 - Afastador davidson 74 x 92 x 195 mm
 1892 - Afastador sternberg duplo 12 cm
 1893 - Afastador sternberg duplo 14 cm
 1894 - Afastador sternberg duplo 16 cm
 1895 - Afastador sternberg simples 12 cm
 1896 - Afastador sternberg simples 14 cm
 1897 - Afastador sternberg simples 16 cm
 1898 - Afastador de mead universal 16 cm
 1899 - Afastador holmann 10 x 160 mm
 1900 - Afastador holmann 17 x 170 mm
 1901 - Afastador holmann 18 x 240 mm

1902 - Afastador holmann pta fina 18 x 240 mm
 1903 - Afastador holmann 2,8 x 14 x 12 x 140 mm
 1904 - Afastador holmann 20 x 200 mm
 1905 - Afastador holmann 20 x 255 mm
 1906 - Afastador holmann 10 x 220 mm
 1907 - Afastador holmann delicada 10 x 220 mm
 1908 - Afastador holmann pta fina 17 x 240 mm
 1909 - Afastador holmann pta grossa 17 x 240 mm
 1910 - Afastador holmann pta grossa 25 x 240 mm
 1911 - Afastador holmann pta arredonda 25 x 260 mm
 1912 - Afastador holmann 24 x 260 mm
 1913 - Afastador holmann curvo 270 mm
 1914 - Afastador holmann ponta 34 x 285 mm
 1915 - Afastador holmann 3,5 x 18 x 17 x 240 mm
 1916 - Afastador holmann 3,5 x 22 x 17 x 240 mm
 1917 - Afastador holmann 30 x 400 mm
 1918 - Afastador holmann pta romba 30 x 400 mm
 1919 - Afastador holmann 32 x 225 mm
 1920 - Afastador holmann pta romba 35 x 225 mm
 1921 - Afastador holmann 3 x 140 mm
 1922 - Afastador holmann pta fina 43 x 240 mm
 1923 - Afastador holmann 43 x 400 mm
 1924 - Afastador holmann pta romba 43 x 400 mm
 1925 - Afastador holmann 5 x 150 mm
 1926 - Afastador holmann 7 x 14 x 12 x 150 mm
 1927 - Afastador holmann 70 x 300 mm
 1928 - Afastador holmann 7 x 150 mm
 1929 - Afastador holmann 90 x 300 mm
 1930 - Afastador holmann estreito 270 mm
 1931 - Afastador holmann longo 20 x 500 mm
 1932 - Afastador holmann longo 30 x 270 mm
 1933 - Afastador holmann médio 300 mm
 1934 - Afastador holmann mini 160 mm
 1935 - Afastador holmann pequenos fragmentos 160 mm
 1936 - Afastador holmann pta fina 300 mm
 1937 - Afastador holmann pta fina 500 mm
 1938 - Afastador holmann pta grossa 500 mm
 1939 - Afastador pélvico simples pta 24 x 270 mm
 1940 - Afastador Schumacher 18 x 290 mm
 1941 - Afastador Schumacher 18 x 345 mm
 1942 - Afastador wagner pta 17 x 220 mm
 1943 - Afastador Love Ang. 45 ° 19 cm
 1944 - Afastador Love Ang. 90 ° 19 cm
 1945 - Afastador umeral 25 x 20 x 240 mm
 1946 - Afastador umeral 35 x 20 x 240 mm
 1947 - Afastador de raiz 280 mm
 1948 - Afastador manual 3x 105 x 195 mm
 1949 - Afastador Iris tp mola 6 x 12 x 100 mm
 1950 - Afastador Iris tp mola 8 x 12 x 100 mm
 1951 - Afastador Iris tp mola 10 x 12 x 100 mm
 1952 - Afastador de progenismo e ramo 22 x 10 cm
 1953 - Afastador de nervo auxiliar 23 x 20 x 50 cm
 1954 - Afastador de cabeça úmero 22 cm ponta 18 mm
 1955 - Afastador de mento obwegeser 140 mm
 1956 - Afastador minessota 140 mm
 1958 - Afastador de ramo n°1 210 mm
 1959 - Afastador de ramo n°2 210 mm

1960 - Afastador de ramo n°3 210 mm
 1961 - Afastador blount p/ joelho 18 cm
 1962 - Afastador blount 2 pontas 27 cm
 1963 - Afastador blount simples 27 cm
 1964 - Afastador ragnell-davis 14 cm
 1965 - Afastador saad-barbeiro 160 mm
 1966 - Afastador allison p/ tórax grande 30 cm
 1967 - Afastador allison p/ tórax pequeno 26 cm
 1968 - Afastador atrail direito 24 cm
 1969 - Afastador atrail esquerdo 24 cm
 1970 - Afastador diam. 1 x 290 mm
 1971 - Afastador diam. 3 x 290 mm
 1972 - Afastador aufranc 26 cm pta aguda lisa 10 mm
 1973 - Afastador aufranc 26 cm pta aguda serr. 10 mm
 1974 - Afastador aufranc 26 cm pta romba lisa 10 mm
 1975 - Afastador aufranc 26 cm pta romba serr. 10 mm
 2070 - Alavanca de reidbrink n°1 infantil reta 150 mm
 2071 - Alavanca de reidbrink n°1 adulto reta 150 mm
 2072 - Alavanca de reidbrink n°2 adulto esquerda 150 mm
 2073 - Alavanca de reidbrink n°2 infantil esquerda 150 mm
 2074 - Alavanca de reidbrink n°3 adulto direita 150 mm
 2075 - Alavanca de reidbrink n°3 infantil direita 150 mm
 2076 - Alavanca de winter direita 150 mm
 2077 - Alavanca de winter esquerda 150 mm
 2078 - Alavanca de lectuse reta 150 mm
 2079 - Alavanca de seldin n°1 direita adulto 150 mm
 2080 - Alavanca de seldin n°1 direita infantil 150 mm
 2081 - Alavanca de seldin n°1 esquerda adulto 150 mm
 2082 - Alavanca de seldin n°1 esquerda infantil 150 mm
 2083 - Alavanca de seldin n°2 adulto 150 mm
 2084 - Alavanca de seldin n°2 infantil 150 mm
 2085 - Alavanca apical direito adulto 150 mm
 2086 - Alavanca apical direito infantil 150 mm
 2087 - Alavanca apical esquerdo adulto 150 mm
 2088 - Alavanca apical esquerdo infantil 150 mm
 2089 - Alavanca apical reto adulto 150 mm
 2090 - Alavanca apical reto infantil 150 mm
 2091 - Abaixador de língua Bruennings 19 cm
 2092 - Abaixador de língua weider 19 cm
 2093 - Abaixador de língua tobold 14 cm
 2094 - Bastão de ueno 330 mm
 2102 - Bainha C.R TP diafragma s/ torn. diam.6,5 mm x 4,5 cm
 2103 - Bainha C.R TP diafragma s/ torn. diam.5,0 mm x 4,5 cm
 2104 - Bainha C.R TP diafragma s/ torn. diam.10,0 mm x 6 cm
 2107 - Bainha C.R TP janela s/ torn. diam.5,0 mm x 4,5 cm
 2108 - Bainha C.R TP janela s/ torn.diam.10,0 mm x 6 cm
 2112 - Bainha p/ trocater TP diafragma s/ torn.diam. 10,0 mm x 14 cm
 2115 - Bainha p/ trocater TP diafragma s/ torn. diam.5,0 mm x 11 cm
 2116 - Bainha p/ trocater TP diafragma s/ torn. diam.3,0 mm x 11 cm
 2117 - Bainha p/ trocater TP diafragma s/ torn. diam.10,0 mm x 11,5 cm
 2121 - Bainha p/ trocater TP janela s/ torn. diam.5,0 mm x 11 cm
 2122 - Bainha p/ trocater TP janela s/ torn. diam.10,0 mm x 10 cm
 2124 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP diafr.s/ torn.diam.5,0mm x 11 cm
 2128 - Pinça Anatômica Yasargil c/ dente dia. 3,0 x 180 mm
 2129 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP janela s/ torn. diam.5,0 mm x 11 cm
 2130 - Bainha rosqueavel p/ trocater TP janela s/ torn.diam. 10,0 mm x 10 cm

2131 - Bainha rosqueavel p/ Trocater TP diafragma s/ torn. diam. 10,0 mm x 11,5 cm
 2132 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,5 x 180 mm
 2133 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,0 x 220 mm
 2135 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,5 x 220 mm
 2136 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,0 x 180 mm
 2137 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,5 x 180 mm
 2138 - Bainha rosqueavel TP diafragma s/ torn. diam. 12,0 mm x 11,5 cm
 2141 - Bainha TP diafragma obesidade s/ torn.diam. 12,0 mm x 14 cm
 2143 - Bainha TP janela Obesidade s/ torn.diam. 10,0 mm x 14 cm
 2144 - Descolador triangular p/ septo 14 cm
 2145 - Afastador Abdominal Dr. Saldanha c/ Pá 20 cm
 2146 - Balancim
 2147 - Batedor e condensador ósseo 160 mm
 2167 - Cabo p/ bisturi N° 3 13 cm
 2168 - Cabo p/ bisturi N° 4 14 cm
 2169 - Cabo p/ bisturi N° 3 e 4 duplo 17 cm
 2170 - Cabo p/ bisturi N° 5 14 cm
 2171 - Cabo p/ bisturi N° 7 17 cm
 2172 - Cabo p/ serra de gigli esquerdo 9 cm
 2173 - Cabo p/ serra de gigli direito 9 cm
 2174 - Cabo p/ serra de gigli par 9 cm
 2175 - Cabo p/ espelho
 2176 - Cabo p/ bisturi lamina dupla 13 cm
 2177 - Cabo p/ bisturi angulado lateral 13 cm
 2178 - Cabo p/ bisturi angulado vertical 13 cm
 2179 - Cabo p/ bisturi reto chato 13 cm
 2180 - Cabo p/ bisturi reto redondo 13 cm
 2181 - Cabo p/ componente protético p/ He 10 cm
 2182 - Cabo p/ componente protético p/ Hi 10 cm
 2183 - Afastador Abdominal Light 30 cm
 2184 - Afastador dedal 80 mm
 2185 - Afastador dedal c/ Apoio 80 mm
 2187 - Condutor de serra de gigli duplo 300 mm
 2188 - Condutor de serra de gigli simples 300 mm
 2189 - Calcador de fio retrator n°1 16 cm
 2190 - Calcador de fio retrator n°2 16 cm
 2191 - Calcador paiva n°1 16 cm
 2192 - Calcador paiva n°2 16 cm
 2193 - Calcador paiva n°3 16 cm
 2194 - Calcador paiva n°4 16 cm
 2196 - Descolador de Buck n°1 16 cm
 2197 - Descolador de Buck n°2 16 cm
 2198 - Descolador de Buck n°3 16 cm
 2199 - Descolador de Buck n°4 16 cm
 2200 - Descolador de Buck n°5 16 cm
 2201 - Descolador de cerumen n°1 16 cm
 2202 - Descolador de cerumen n°2 16 cm
 2203 - Descolador de cerumen n°3 16 cm
 2204 - Descolador de cerumen c/corpo estranho 16 cm
 2205 - Descolador de seio maxilar n° 1 16 cm
 2206 - Descolador de seio maxilar n° 2 16 cm
 2207 - Descolador de seio maxilar n° 3 16 cm
 2208 - Descolador de seio maxilar n° 4 16 cm
 2209 - Descolador de seio maxilar n° 5 16 cm
 2210 - Descolador diam. 3 x 320 mm
 2211 - Descolador diam. 4 x 320 mm

2212 - Descolador diam. 6 x 320 mm
 2213 - Descolador 320 mm
 2214 - Condensador ward n°1 16 cm
 2215 - Condensador ward n°2 16 cm
 2216 - Condensador ward n°3 16 cm
 2217 - Condensador ward n°4 16 cm
 2218 - Condensador ward n°5 16 cm
 2219 - Condensador ward n°6 16 cm
 2220 - Condensador ward n°1 infantil 16 cm
 2221 - Chave aplicadora 220 mm
 2222 - Chave p/ abrir colocação de laminas
 2223 - Afastador langenbeck curva 210 x 35 x 10 mm
 2225 - Especulo hartmann auricular JG.C/3 pçs. 2,5 - 4 e 5mm diam. infantil
 2226 - Especulo hartmann auricular JG.C/3 pçs. 5 - 6,5 e 7,5mm diam. adulto
 2227 - Especulo politzer auricular JG.C/3 pçs. 3 - 4,5 e 5,5 mm diam. adulto
 2228 - Especulo toynbee JG.C/3 pçs. 4 - 5 e 6 mm diam. adulto
 2229 - Especulo toynbee JG.C/4 pçs. 4 - 5 - 6 e 7 mm diam. adulto
 2230 - Especulo hartmann auricular JG.C/4 pçs.3-4,5-5,5 e 6,5 mm diam.
 2231 - Especulo politzer auricular JG.C/4 pçs. 3-4,5-5,5 e 6,5 mm diam.
 2232 - Especulo hartmann auricular diam. 4,5 mm
 2233 - Especulo hartmann auricular diam. 5,0 mm
 2234 - Especulo hartmann auricular diam. 5,5 mm
 2235 - Especulo hartmann auricular diam. 6,0 mm
 2236 - Especulo hartmann auricular diam. 6,5 mm
 2237 - Especulo hartmann auricular diam. 7,0 mm
 2238 - Especulo hartmann auricular diam. 7,5 mm
 2239 - Especulo politzer auricular diam. 2,0 mm
 2240 - Especulo politzer auricular diam. 2,5 mm
 2241 - Especulo politzer auricular diam. 3,0 mm
 2242 - Especulo politzer auricular diam. 3,5 mm
 2243 - Especulo politzer auricular diam. 4,0 mm
 2244 - Especulo politzer auricular diam. 4,5 mm
 2245 - Especulo politzer auricular diam. 5,0 mm
 2246 - Especulo politzer auricular diam. 5,5 mm
 2247 - Especulo politzer auricular diam. 6,0 mm
 2248 - Especulo politzer auricular diam. 6,5 mm
 2249 - Especulo politzer auricular diam. 7,0 mm
 2250 - Especulo politzer auricular diam. 7,5 mm
 2251 - Afastador senn muller rombo 18 cm
 2252 - Afastador langenbeck curva 210 x 20 x 7 mm
 2253 - Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 7 mm
 2254 - Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 10 mm
 2255 - Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 15 mm
 2256 - Especulo auricular c/ 3 pçs
 2256 - Afastador langenbeck curva 210 x 30 x 20 mm
 2257 - Afastador langenbeck curva 210 x 42 x 16 mm
 2258 - Afastador langenbeck curva 210 x 35 x 7 mm
 2259 - Afastador langenbeck curva 210 x 35 x 15 mm
 2260 - Passador de fio
 2261 - Gancho de Joseph duplo Agudo-Rombo
 2267 - Afastador aba nasal P
 2268 - Afastador aba nasal M
 2269 - Afastador aba nasal G
 2308 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,0 x 220 mm
 2363 - Chave 2 x 9,5 cm
 2364 - Chave 2,3 x 10 cm
 2365 - Chave 2,5 x 11 cm

2366 - Chave 2,7 x 12 cm
 2367 - Clamp bulldog de bakey boca curva 45 x 105 mm
 2368 - Clamp bulldog de bakey boca curva 65 x 115 mm
 2369 - Clamp bulldog de bakey boca curva 20 x 85 mm
 2370 - Clamp bulldog de bakey boca curva 20 x 90 mm
 2371 - Clamp bulldog de bakey boca curva 20 x 95 mm
 2372 - Clamp bulldog de bakey boca reta 30 x 100 mm
 2373 - Clamp bulldog de bakey boca reta 45 x 110 mm
 2374 - Clamp bulldog de bakey boca reta 65 x 120 mm
 2375 - Clamp bulldog de bakey boca reta 20 x 90 mm
 2376 - Clamp bulldog dieffenbanch curvo 38 mm
 2377 - Clamp bulldog dieffenbanch curvo 48 mm
 2378 - Clamp bulldog dieffenbanch curvo 58 mm
 2379 - Clamp bulldog dieffenbanch reto 38 mm
 2380 - Clamp bulldog dieffenbanch reto 48 mm
 2381 - Clamp bulldog dieffenbanch reto 58 mm
 2382 - Clamp bulldog diethrich boca curva 12 x 55 mm
 2383 - Clamp bulldog diethrich boca curva 8 x 50 mm
 2384 - Clamp bulldog diethrich boca curva 16 x 60 mm
 2385 - Clamp bulldog diethrich boca reta 8 x 55 mm
 2386 - Clamp bulldog diethrich boca reta 12 x 60 mm
 2387 - Clamp bulldog diethrich boca reta 16 x 65 mm
 2394 - Clamp bulldog johns-hopkins 40mm
 2395 - Clamp bulldog johns-hopkins 45mm
 2396 - Clamp bulldog johns-hopkins 50mm
 2397 - Clamp bulldog johns-hopkins 55mm
 2398 - Clamp bulldog johns-hopkins 65mm
 2399 - Clamp bulldog johns-hopkins 70mm
 2400 - Clamp bulldog johns-hopkins 75mm
 2401 - Clamp bulldog johns-hopkins 80mm
 2402 - Clamp bulldog johns-hopkins 85mm
 2403 - Clamp bulldog johns-hopkins 90mm
 2404 - Clamp bulldog johns-hopkins 95mm
 2405 - Clamp bulldog johns-hopkins 100mm
 2412 - Descolador 6 x 5 x 220 mm
 2413 - Descolador angulado 4 x 3 x 180 mm
 2414 - Descolador angulado 4 x 4 x 200 mm
 2415 - Descolador angulado 5 x 5 x 245 mm
 2416 - Descolador angulado 5 x 75 x 230 mm
 2417 - Descolador bolinha 190 mm
 2418 - Descolador curvo 6 x 120 x 225 mm
 2419 - Descolador curvo 30 x 185 mm
 2420 - Descolador reto 245 x 25 x 1 mm
 2421 - Descolador romba 5 x fina 5 x 200 mm
 2422 - Descolador serrilhado 21 cm
 2423 - Descolador de cotle 22 cm
 2424 - Descolador de joseph curvo 18 cm
 2425 - Descolador de joseph reto 18 cm
 2426 - Descolador frontoplastia enxada 28 cm
 2427 - Descolador frontoplastia curvo oval 28 cm
 2428 - Descolador frontoplastia bico de pato 28 cm
 2429 - Descolador frontoplastia enxada 24 cm
 2430 - Descolador frontoplastia curvo oval 24 cm
 2431 - Descolador frontoplastia bico de pato 24 cm
 2432 - Descolador hurd p/ amígdalas 23 cm
 2433 - Descolador Crabtree estreito 160 mm
 2434 - Descolador Crabtree largo 160 mm

2435 - Descolador curva direita 160 mm
 2436 - Descolador curva esquerda 160 mm
 2437 - Espátula de conchas nasais 21 cm
 2438 - Descolador de freer duplo 19 cm
 2439 - Descolador de Joseph Nº 1 18 cm
 2440 - Descolador de Joseph Nº 2 18 cm
 2441 - Descolador de Joseph Nº 3 18 cm
 2442 - Descolador de Joseph Nº 4 18 cm
 2443 - Descolador de Joseph Nº 5 18 cm
 2444 - Descolador p/ ouvido curva direita 16 cm
 2445 - Descolador p/ ouvido curva esquerda 16 cm
 2446 - Descolador Eicken 6 x 195 mm
 2447 - Descolador forma de pá 1,5 x 160 mm
 2448 - Descolador garfo torto 160 mm
 2449 - Descolador Gersdorf grossa direito 160 mm
 2450 - Descolador Gersdorf grossa esquerda 160 mm
 2451 - Descolador Jansen 14 x 195 mm
 2452 - Descolador Jansen 9 x 195 mm
 2453 - Descolador p/ seio p/ baixo curva leve 160 mm
 2454 - Descolador p/ seio p/ baixo curva forte 160 mm
 2455 - Descolador p/ seio esquerdo curvo 160 mm
 2456 - Descolador p/ seio freer reto 160 mm
 2457 - Descolador p/ seio curva p/ dentro 160 mm
 2458 - Descolador p/ seio p/ lateral 160 mm
 2459 - Descolador neves pinto reto
 2460 - Descolador periosteo 5 x 160 mm
 2461 - Descolador periosteo curva 1,2 x 160 mm
 2462 - Descolador peristeo 2,5 x 160 mm
 2463 - Descolador plano inclinado 1,5 x 160 mm
 2464 - Descolador redondo curvado diam. 2,5 x 160 mm
 2465 - Descolador reto 165 mm
 2466 - Descolador taco de golf direito 28 cm
 2467 - Descolador taco de golf esquerdo 28 cm
 2468 - Descolador de perio 160 mm
 2469 - Descolador de molt 2/4 180 mm
 2470 - Descolador de molt 180 mm
 2471 - Descolador especial p/ seio maxilar 160 mm
 2472 - Descolador semb 190 mm
 2473 - Descolador semb 200 mm
 2474 - Descolador semb 210 mm
 2475 - Descolador semb 230 mm
 2476 - Descolador dentistinha longa 160 mm
 2477 - Descolador 5 x 20 x 230 mm
 2478 - Descolador 7 x 20 x 230 mm
 2479 - Descolador 15 x 20 x 230 mm
 2480 - Descolador doyan direito 170 mm
 2481 - Descolador doyan esquerdo 170 mm
 2482 - Descolador de mead 170 mm
 2483 - Diapazão nº256
 2484 - Diapazão nº512
 2485 - Diapazão nº1024
 2486 - Espelho de glatzel
 2497 - Expositor de nervo nº1 160 mm
 2498 - Expositor de nervo nº2 160 mm
 2499 - Elevador de membrana sinusal diam. 2,5 mm
 2500 - Elevador de membrana sinusal diam. 3,0 mm
 2501 - Elevador de membrana sinusal diam. 3,5 mm

2502 - Elevador de membrana sinusal diam. 4,3 mm
 2503 - Elevador cobb 35 x 200 mm
 2504 - Elevador cobb 10 x 250 mm
 2505 - Elevador cobb 12 x 250 mm
 2506 - Elevador cobb 15 x 250 mm
 2507 - Elevador cobb 16 x 250 mm
 2508 - Elevador cobb 19 x 250 mm
 2509 - Elevador cobb 20 x 250 mm
 2510 - Elevador cobb 25 x 250 mm
 2511 - Elevador cobb 30 x 250 mm
 2512 - Elevador cobb 35 x 250 mm
 2513 - Elevador cobb 10 x 300 mm
 2514 - Elevador cobb 12 x 300 mm
 2515 - Elevador cobb 13 x 300 mm
 2516 - Elevador cobb 15 x 300 mm
 2517 - Elevador cobb 16 x 300 mm
 2518 - Elevador cobb 19 x 300 mm
 2519 - Elevador cobb 20 x 300 mm
 2520 - Elevador cobb 25 x 300 mm
 2521 - Elevador cobb 30 x 300 mm
 2522 - Elevador cobb 35 x 300 mm
 2523 - Elevador cobb 13 x 320 mm
 2524 - Elevador cobb 16 x 320 mm
 2525 - Elevador cobb 19 x 320 mm
 2526 - Elevador cobb 20 x 320 mm
 2527 - Elevador cobb 25 x 320 mm
 2528 - Elevador cobb 30 x 320 mm
 2529 - Elevador cobb 35 x 320 mm
 2530 - Elevador de cobb 9,5 mm
 2531 - Elevador de cobb 13 mm
 2532 - Elevador de cobb 19 mm
 2533 - Elevador cobb 12 x 340 mm
 2534 - Elevador cobb 15 x 340 mm
 2535 - Elevador cobb 20 x 340 mm
 2536 - Elevador cobb 25 x 340 mm
 2537 - Elevador cobb 30 x 340 mm
 2538 - Elevador cobb 35 x 340 mm
 2539 - Elevador hoen 7 x 180 mm
 2540 - Elevador hoen 15 x 190 mm
 2541 - Elevador hoen 20 x 190 mm
 2542 - Elevador hoen 25 x 190 mm
 2543 - Elevador seldin 190 mm
 2544 - Descolador neves pinto curvo
 2547 - Empurrador de nó angulado diam. 5,0mm x 33 cm
 2548 - Empurrador de nó cambiaghi diam. 5,0mm x 33 cm
 2549 - Empurrador de nó diam. 5,0mm x 33 cm
 2550 - Empurrador de nó endolup diam. 5,0mm x 33 cm
 2551 - Expansor osséo diam. 2,0 mm
 2552 - Expansor osséo diam. 2,5 mm
 2553 - Expansor osséo diam. 3,0 mm
 2554 - Expansor osséo diam. 3,5 mm
 2557 - Espelho auricular c/ 4 pçs
 2558 - Espátula nº 1 160 mm
 2559 - Espátula nº 2 160 mm
 2560 - Espátula haberer 25 x 30 x 280 mm
 2561 - Espátula haberer 37 x 45 x 300 mm
 2562 - Espátula maleável 6 x 200 mm

2563 - Espátula maleável 8 x 200 mm
 2564 - Espátula maleável 10 x 200 mm
 2565 - Espátula maleável 10 x 11 x 200 mm
 2566 - Espátula maleável 12x 200 mm
 2567 - Espátula maleável 13 x 14 x 200 mm
 2568 - Espátula maleável 14 x 200 mm
 2569 - Espátula maleável 16 x 200 mm
 2570 - Espátula maleável 16 x 17 x 200 mm
 2571 - Espátula maleável 18 x 200 mm
 2572 - Espátula maleável 19 x 20 x 200 mm
 2573 - Espátula maleável 20 x 200 mm
 2574 - Espátula maleável 22 x 200 mm
 2575 - Espátula maleável 22 x 25 x 200 mm
 2576 - Espátula maleável 24 x 200 mm
 2577 - Espátula maleável 7 x 8 x 200 mm
 2578 - Espátula maleável 20 x 300 mm
 2579 - Espátula maleável 25 x 300 mm
 2580 - Espátula maleável 30 x 300 mm
 2581 - Espátula maleável 35 x 300 mm
 2582 - Espátula maleável 40 x 300 mm
 2583 - Espátula olivercrona maleável 7 x 9 x 180 mm
 2584 - Espátula olivercrona maleável 11 x 13 x 180 mm
 2585 - Espátula olivercrona maleável 15 x 18 x 180 mm
 2586 - Espátula olivercrona maleável 18 x 22 x 180 mm
 2587 - Espátula ray 10 x 16 x 200 mm
 2588 - Espátula de reverdin baioneta 290 mm
 2589 - Espátula de reverdin reta tp sapateira 290 mm
 2590 - Espátula ribbon maleável 20 x 300 mm
 2591 - Espátula ribbon maleável 25 x 300 mm
 2592 - Espátula ribbon maleável 30 x 300 mm
 2593 - Espátula ribbon maleável 40 x 300 mm
 2594 - Espátula ribbon maleável 50 x 300 mm
 2595 - Espátula ribbon maleável 30 x 330 mm
 2596 - Espátula ribbon maleável 40 x 330 mm
 2597 - Espátula ribbon maleável 50 x 330 mm
 2598 - Espátula scoville maleável 10 x 13 x 200 mm
 2599 - Espátula scoville maleável 16 x 19 x 200 mm
 2600 - Espátula sugital maleável 2,2 x 225 mm
 2601 - Espátula sugital maleável 3,8 x 225 mm
 2602 - Espátula sugital maleável 5,8 x 225 mm
 2675 - Descolador Wagener 45° nº1 160 mm
 2676 - Descolador Wagener 45° nº2 160 mm
 2677 - Descolador Wagener 45° nº3 160 mm
 2678 - Descolador Wagener 45° nº4 160 mm
 2679 - Extrator de apêndice diam. 10,0 mm p/ 5,0 mm
 2680 - Extrator de apêndice pediátrico diam. 10,0 mm p/ 5,0 mm
 2681 - Forceps auxiliar p/ parto 360 mm
 2688 - Afastador 12x70 mm nº1
 2689 - Afastador 12x70 mm nº2
 2690 - Afastador 12x70 mm nº3
 2691 - Afastador Love 13 mm
 2692 - Afastador Love 17 mm
 2693 - Gancho p/ mama 15 cm
 2694 - Descolador p/ palato 16 cm
 2695 - Gancho bergmann 160 mm
 2696 - Gancho brom 170 mm
 2697 - Gancho converse 120 mm

2698 - Gancho cotle 160 mm
 2699 - Gancho cotle angulado 160 mm
 2700 - Gancho crile 200 mm
 2701 - Gancho cushioning n.1 190 mm
 2702 - Gancho cushioning n.2 190 mm
 2703 - Gancho freer 150 mm
 2704 - Gancho frazier 130 mm
 2705 - Gancho gilles n.1 180 mm
 2706 - Gancho gilles n.2 180 mm
 2707 - Gancho graefe agudo 125 mm
 2708 - Gancho graefe rombo 125 mm
 2709 - Gancho graefe n.1 140 mm
 2710 - Gancho graefe n.2 140 mm
 2711 - Gancho graefe n.3 140 mm
 2712 - Gancho guthrie agudo 125 mm
 2713 - Gancho guthrie rombo 125 mm
 2714 - Gancho joseph 3 x 165 mm
 2715 - Gancho joseph 6 x 165 mm
 2716 - Gancho joseph 8 x 165 mm
 2717 - Gancho joseph agudo 150 mm
 2718 - Gancho joseph rombo 150 mm
 2719 - Gancho joseph agudo 165 mm
 2720 - Gancho joseph rombo 165 mm
 2721 - Gancho kilner agudo 80 mm
 2722 - Gancho kilner rombo 80 mm
 2723 - Gancho Kilner agudo 160 mm
 2724 - Gancho Kilner rombo 160 mm
 2725 - Gancho muller 150 mm
 2726 - Gancho muller duplo 150 mm
 2727 - Gancho rollet 2 dentes agudo 135 mm
 2728 - Gancho rollet 2 dentes rombo 135 mm
 2729 - Gancho rollet 4 dentes agudo 135 mm
 2730 - Gancho rollet 4 dentes rombo 135 mm
 2731 - Gancho wagner n.1 150 mm
 2732 - Gancho wagner n.2 150 mm
 2733 - Gancho wagner n.3 150 mm
 2734 - Gancho wagner n.4 150 mm
 2735 - Gancho tonnis 150 mm
 2736 - Descolador de cerumen em baioneta delicado 16 cm
 2737 - Descolador de cerumen em baioneta forte 16 cm
 2738 - Gancho Joseph duplo agudo 160 mm
 2739 - Gancho Joseph duplo rombo 160 mm
 2740 - Placa de altura de cartilagem
 2741 - Gancho fomon duplo c/ bolinha 160 mm
 2742 - Gancho curto p/ derivação de nervo 140 mm
 2743 - Gancho longo p/ derivação de nervo 240 mm
 2744 - Guia de perfuração 7,0 mm
 2745 - Guia de perfuração 9,0 mm
 2746 - Indicador de direção curto 35 mm
 2747 - Indicador de direção longo 55 mm
 2750 - Placa de medição de cartilagem 60 x 80 mm
 2751 - Laringo n° 1 infantil 13 cm x 2 cm
 2752 - Laringo n°2 adulto 16 cm x 2,2 cm
 2753 - Laringo n°3 adulto 16 cm x 2,3 cm
 2754 - Laringo n°4 adulto 17 cm x 2,4 cm
 2755 - Limitador p/ bainha rosqueavel diam.5 mm
 2756 - Limitador p/ bainha rosqueavel diam.10 mm

2757 - Afastador Universal 25x100 mm
 2758 - Gancho elevador 16 cm
 2759 - Descolador-afastador espátula 20 cm
 2760 - Afastador Langenbeck 15x25mm
 2761 - Martelo lajek 150 gr 200 mm
 2762 - Martelo vickers 200 mm
 2763 - Martelo lucae 230 gr 190 mm
 2764 - Martelo lucae 250 gr 190 mm
 2765 - Martelo lucae 260 gr 190 mm
 2766 - Martelo 250 gr diam. 22 x 185 mm
 2767 - Martelo diam. 22 x 185 mm
 2768 - Martelo fickling 190 gr diam. 23 x 190 mm
 2769 - Martelo gerzog 400 gr diam. 30 x 180 mm
 2770 - Martelo hajek 180 gr diam. 26 x 210 mm
 2771 - Martelo universal 150 gr 25 x 195 mm
 2772 - Martelo universal 250 gr 32 x 195 mm
 2773 - Martelo universal 350 gr 35 x 225 mm
 2774 - Martelo universal 500 gr 35 x 225 mm
 2775 - Martelo universal 750 gr 35 x 225 mm
 2776 - Martelo universal 1000 gr 41 x 265 mm
 2777 - Martelo mini 100 mm
 2778 - Martelo metálico 190 mm
 2781 - Martelo ombredanne 520 gr diam.40 x 240 mm
 2782 - Martelo cervical 215 gr diam. 19 x 190 mm
 2783 - Martelo collin (lucae) 210 gr diam. 30 x 210 mm
 2784 - Martelo cotle 235 gr diam. 30 x 185 mm
 2785 - Martelo cotle 120 gr diam. 25 x 210 mm
 2786 - Martelo cotle 170 gr diam. 30 x 200 mm
 2787 - Martelo cotle 180 gr diam. 25 x 210 mm
 2788 - Martelo cotle 260 gr diam. 35 x 210 mm
 2789 - Martelo partsch 200 gr diam 22 x 180 mm
 2790 - Martelo mead 180 gr diam. 20 x 190 mm
 2791 - Martelo mead 320 gr diam. 26 x 170 mm
 2792 - Martelo smith-ertesens 420 gr 38 x 380 mm
 2793 - Martelo heath 660 gr diam. 40 x 185 mm
 2794 - Martelo heath 1000 gr diam. 45 x 200 mm
 2795 - Martelo plugging 165 mm
 2796 - Martelo plugging 190 mm
 2797 - Martelo ribbs 340 gr diam. 38 x 200 mm
 2798 - Martelo steinbach 400 gr 80 x 60 x 240 mm
 2799 - Martelo kirk 690 gr diam. 40 x 195 mm
 2800 - Martelo neufeld. 350 gr 190 mm
 2801 - Martelo neufeld. 500 gr 200 mm
 2802 - Martelo richard 500 gr 200 mm
 2803 - Martelo willinger 300 gr diam. 26 x 240 mm
 2804 - Martelo willinger 340 gr diam. 28 x 240 mm
 2805 - Martelo willinger 380 gr diam. 30 x 240 mm
 2806 - Martelo willinger 400 gr diam. 30 x 240 mm
 2807 - Expansor de summers 18 cm
 2808 - Expansor de summers modificado 18 cm
 2809 - Expansor cônico 18 cm
 2817 - Pinça columela 10 cm
 2818 - Pinça columela 12 cm
 2819 - Pinça tuttle 14 cm
 2820 - Pinça tuttle 16 cm
 2821 - Pinça tuttle 18 cm
 2822 - Pinça tuttle 23 cm

2823 - Pinça tuttle 25 cm
 2824 - Pinça tuttle 26 cm
 2825 - Pinça tuttle 28 cm
 2826 - Pinça tuttle 30 cm
 2827 - Pinça Baioneta 14 cm
 2828 - Pinça Baioneta 16 cm
 2829 - Pinça Baioneta 19 cm
 2830 - Pinça Baioneta 20 cm
 2831 - Pinça Baioneta 22 cm
 2832 - Pinça anatômica adson 12 cm
 2833 - Pinça anatômica adson s/ dente 12 cm
 2834 - Pinça anatômica adson c/ dente 12 cm
 2835 - Pinça anatômica adson brown 12 cm
 2836 - Pinça anatômica adson c/ dente e widia 12 cm
 2837 - Pinça anatômica adson s/ dente e widia 12 cm
 2838 - Pinça anatômica dente de rato 10 cm
 2839 - Pinça anatômica dente de rato 12 cm
 2840 - Pinça anatômica dente de rato 14 cm
 2841 - Pinça anatômica dente de rato 16 cm
 2842 - Pinça anatômica dente de rato 18 cm
 2843 - Pinça anatômica dente de rato 20 cm
 2844 - Pinça anatômica dente de rato 23 cm
 2845 - Pinça anatômica dente de rato 25 cm
 2846 - Pinça anatômica dente de rato 30 cm
 2847 - Pinça anatômica dente de rato 35 cm
 2848 - Pinça anatômica serrilhada 10 cm
 2849 - Pinça anatômica serrilhada 12 cm
 2850 - Pinça anatômica serrilhada 14 cm
 2851 - Pinça anatômica serrilhada 16 cm
 2852 - Pinça anatômica serrilhada 18 cm
 2853 - Pinça anatômica serrilhada 20 cm
 2854 - Pinça anatômica serrilhada 23 cm
 2855 - Pinça anatômica serrilhada 25 cm
 2856 - Pinça anatômica serrilhada 30 cm
 2857 - Pinça anatômica serrilhada 35 cm
 2858 - Afastador Glúteo LCM 1 40 x 90 mm
 2859 - Afastador Glúteo e Abdômen LCM 2 50 x 170 mm
 2860 - Afastador Glúteo e Abdômen LCM 3 50 x 190 mm
 2861 - Afastador Glúteo e Abdômen LCM 4 Par 50 x 190 mm
 2862 - Afastador Hemostasia 10 cm
 2863 - Afastador Hemostasia 13 cm
 2864 - Afastador Hemostasia 17 cm
 2865 - Afastador Slim 130 x 20 mm
 2866 - Afastador Slim 180 x 20 mm
 2868 - Descolador de Braga c/ cabo 20 cm
 2869 - Descolador de Braga 20 cm
 2870 - Descolador estreita 22 x 300 mm
 2871 - Descolador estreita 33 x 300 mm
 2872 - Descolador p/ gesso 20 cm
 2873 - Gancho em V 16 cm
 2874 - Transferência 60 ml-60 ml 8 cm
 2875 - Trava p/ Seringa de 10 ml 10 cm
 2876 - Trava p/ Seringa de 20 ml 10 cm
 2877 - Pinça corn p/ sutura
 2878 - Pinça crane-kaplan direita
 2879 - Pinça crane-kaplan esquerda
 2880 - Pinça porta membrana

2881 - Pino de paralelismo 25 mm
 2882 - Porta algodão 120 mm
 2883 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,5 x 220 mm
 2884 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 3,0 x 180 mm
 2886 - Porta instrumento bunt 12 cm
 2887 - Porta instrumento mayo 14 cm n°1
 2888 - Porta instrumento mayo 14 cm n°2
 2889 - Porta instrumento mayo 14 cm c/ bola
 2892 - Palpador seio frontal 210 mm
 2893 - Palpador seio maxilar 185 mm
 2896 - Posicionador de implante 5,0 mm
 2897 - Posicionador de implante 7,0 mm
 2898 - Posicionador de implante 12,0 mm
 2899 - Régua 15 cm
 2900 - Régua p/ estapedectomia 55 mm
 2901 - Retrator curto n°1 de nervo 160 mm
 2902 - Retrator longo n°2 de nervo 160 mm
 2903 - Descolador langenback estreito 18 mm
 2904 - Descolador langenback largo 18 mm
 2905 - Sonda apalpadora graduada diam.5,0 mm x 33 cm
 2908 - Sonda de medição 160 mm
 2909 - Sonda calibrada 140 mm
 2910 - Sonda explorada n°1 160 mm
 2911 - Sonda explorada n°23 160 mm
 2912 - Sonda exploradora n°47 160 mm
 2913 - Sonda milimetrada 160 mm
 2914 - Sonda periodontal michigan 160 mm
 2915 - Sonda milimetrada goldman fox 160 mm
 2916 - Sonda milimetrada Willians 160 mm
 2917 - Sonda milimetrada goldman fox /willians 160 mm
 2918 - Sonda naber 2N 160 mm
 2919 - Sonda de profundidade 100 mm
 2920 - Sonda milimetrada 120 mm
 2921 - Sonda de profundidade zigomático 150 mm
 2922 - Sonda de profundidade em J 160 mm
 2924 - Trava p/ Seringa de 60 ml 10 cm
 2926 - Separador sagital esquerdo 9 mm
 2927 - Separador sagital direito 9 mm
 2928 - Sindesmótomo 160 mm
 2929 - Suspensor p/ balancim 8 cm
 2930 - Suspensor p/ laringo 6 cm
 2931 - Suporte de abre boca 10 x 13 cm
 2932 - Suporte de abre boca especial 10 x 20 cm
 2933 - Suporte para bisturi 110 mm
 2934 - Suporte de laringe 125 mm
 2944 - Válvula doyan 40 x 250 mm
 2945 - Válvula doyan 45 x 60 mm
 2946 - Válvula doyan 45 x 70 mm
 2947 - Válvula doyan 45 x 90 mm
 2948 - Válvula doyan 45 x 120 mm
 2949 - Válvula doyan 45 x 170 mm
 2950 - Válvula doyan 60 x 90 mm
 2951 - Válvula doyan 60 x 120 mm
 2952 - Válvula doyan 60 x 150 mm
 2953 - Válvula doyan 60 x 180 mm
 2954 - Válvula doyan 60 x 200 mm
 2955 - Válvula doyan 70 x 250 mm

2956 - Válvula doyan 100 x 140 mm
 3751 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 3,5 x 180 mm
 3752 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 3,0 x 220 mm
 3753 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 3,5 x 220 mm
 4445 - Descolador p/ endoscopia n° 1 17 cm
 4446 - Descolador p/ endoscopia n° 2 17 cm
 4447 - Descolador p/ endoscopia n°3 17 cm
 4448 - Descolador p/ endoscopia n°4 17 cm
 4449 - Descolador p/ endoscopia n°5 17 cm
 4450 - Descolador p/ endoscopia n°6 17 cm
 4451 - Descolador p/ endoscopia n°7 17 cm
 4452 - Descolador p/ mama e panturrilha coração 17 cm
 4453 - Descolador p/ mama e panturrilha Dr Vergara 17 cm
 4454 - Descolador p/ mama e panturrilha Dra Ruth Graf 17 cm
 4455 - Descolador p/ mama e panturrilha em J 17 cm
 4456 - Descolador p/ mama e panturrilha 17 cm
 4457 - Adaptador bookwalter s/ regulagem de ângulo 30 cm
 4458 - Adaptador de mesa 10 cm
 4459 - Adaptador omni s/ regulagem de ângulo 30 cm
 4460 - Adaptador synthes s/ regulagem de ângulo 30 cm
 4461 - Afastadores raiz nervosas 45 graus 25 cm
 4462 - Afastadores Raiz nervosas 90 graus 25 cm
 4463 - Barra angular lateral 15 x 15 cm
 4464 - Barra angular lateral 15 x 50 cm
 4465 - Barra angular lateral 20 x 25 cm
 4466 - Barra angular lateral 20 x 40 cm
 4467 - Barra angular lateral 30 x 35 cm
 4468 - Barra bilateral 185 x 340 x 185 cm
 4469 - Barra reta 30 cm
 4470 - Barra reta 50 cm
 4471 - Barra transversal 610 x 280 x 330 cm
 4472 - Bucha 5 mm
 4473 - Bucha 10 mm
 4474 - Chave de cabeça 20 cm
 4475 - Gancho clipe toalha 5 cm
 4476 - Lamina balfour 30 x 30 mm
 4477 - Lamina balfour 50 x 50 mm
 4478 - Lamina balfour 70 x 80 mm
 4479 - Lamina balfour 80 x 50 mm
 4480 - Lamina balfour 80 x 60 mm
 4481 - Lamina balfour 80 x 80 mm
 4482 - Lamina balfour 80 x 130 mm
 4483 - Lamina balfour 90 x 160 mm
 4484 - Lamina balfour 100 x 60 mm
 4485 - Lamina balfour 115 x 60 mm
 4486 - Lamina cerca 100 x 100 mm
 4487 - Lamina cerca 100 x 130 mm
 4488 - Lamina cerca 100 x 150 mm
 4489 - Lamina cerca 100 x 200 mm
 4490 - Lamina côncava 10 x 75 mm
 4491 - Lamina côncava estreito 20 x 35 mm
 4492 - Lamina côncava estreito 20 x 45 mm
 4493 - Lamina côncava estreito 20 x 50 mm
 4494 - Lamina côncava estreito 45 x 55 mm
 4495 - Lamina côncava estreito 45 x 70 mm
 4496 - Lamina côncava lateral 20 x 55 mm
 4497 - Lamina côncava lateral 25 x 30 mm

4498 - Lamina côncava lateral 25 x 35 mm
 4499 - Lamina côncava lateral 25 x 50 mm
 4500 - Lamina côncava lateral 25 x 60 mm
 4501 - Lamina côncava lateral 25 x 70 mm
 4502 - Lamina côncava lateral 25 x 85 mm
 4503 - Lamina côncava média 15 x 50 mm
 4504 - Lamina côncava média 15 x 75 mm
 4505 - Lamina côncava média 15 x 100 mm
 4506 - Lamina côncava média 20 x 50 mm
 4507 - Lamina côncava média 20 x 75 mm
 4508 - Lamina côncava média 20 x 100 mm
 4509 - Lamina côncava média 25 x 50 mm
 4510 - Lamina côncava média 25 x 75 mm
 4511 - Lamina côncava média 25 x 100 mm
 4512 - Lamina côncava média 30 x 70 mm
 4513 - Lamina côncava média 40 x 70 mm
 4514 - Lamina côncava média 40 x 85 mm
 4515 - Lamina de dupla angular 25 x 65 mm
 4516 - Lamina de St. Mark's 65 x 180 mm
 4517 - Lamina de St. Mark's 65 x 140 mm
 4518 - Lamina de St. Mark's s/ lábios 65 x 180 mm
 4519 - Lamina dedo maleável 15,5 cm
 4520 - Lamina dente afastador 75 mm
 4521 - Lamina dente afastador 100 mm
 4522 - Lamina dupla angulada 15 x 70 mm
 4523 - Lamina dupla angulada 15 x 80 mm
 4524 - Lamina dupla angulada 25 x 65 mm
 4525 - Lamina dupla angulada 25 x 80 mm
 4526 - Lamina em Y bexiga 100 mm
 4527 - Lamina fenestrada 45 x 90 mm
 4528 - Lamina fenestrada 50 x 130 mm
 4529 - Lamina Harrington 40 x 130 mm
 4530 - Lamina Harrington 65 x 100 mm
 4531 - Lamina Harrington 65 x 150 mm
 4532 - Lamina Harrington 65 x 200 mm
 4533 - Lamina Harrington 65 x 250 mm
 4534 - Lamina Harrington 115 x 250 mm
 4535 - Lamina Hill-Ferguson retal 25 x 65 mm
 4536 - Lamina Hill-Ferguson retal 30 x 80 mm
 4537 - Lamina Holtgrewe 60 x 150 mm
 4538 - Lamina kelly 40 x 50 mm
 4539 - Lamina kelly 50 x 65 mm
 4540 - Lamina kelly 65 x 80 mm
 4541 - Lamina kelly 80 x 90 mm
 4542 - Lamina lombar cônica 25 x 150 mm
 4543 - Lamina lombar cônica 25 x 200 mm
 4544 - Lamina lombar maléavel 25 x 200 mm
 4545 - Lamina lombar maléavel 30 x 200 mm
 4546 - Lamina lombar rígida 25 x 100 mm
 4547 - Lamina lombar rígida 25 x 150 mm
 4548 - Lamina lombar rígida 25 x 200 mm
 4549 - Lamina lombar rígida 25 x 255 mm
 4550 - Lamina lombar rígida 30 x 100 mm
 4551 - Lamina lombar rígida 30 x 150 mm
 4552 - Lamina lombar rígida 30 x 200 mm
 4553 - Lamina lombar rígida 30 x 255 mm
 4554 - Lamina maléavel 10 x 90 mm

4555 - Lamina maleável 15 x 70 mm
4556 - Lamina maleável 15 x 90 mm
4557 - Lamina maleável 15 x 150 mm
4558 - Lamina maleável 15 x 200 mm
4559 - Lamina maleável 25 x 130 mm
4560 - Lamina maleável 25 x 200 mm
4561 - Lamina maleável 25 x 100 mm
4562 - Lamina maleável 25 x 110 mm
4563 - Lamina maleável 25 x 250 mm
4564 - Lamina maleável 40 x 250 mm
4565 - Lamina maleável 40 x 200 mm
4566 - Lamina maleável 50 x 100 mm
4567 - Lamina maleável 50 x 200 mm
4568 - Lamina maleável 50 x 250 mm
4569 - Lamina maleável 70 x 250 mm
4570 - Lamina maleável 80 x 250 mm
4571 - Lamina maleável 100 x 250 mm
4572 - Lamina maleável côncava renal 25 x 140 mm
4573 - Lamina maleável côncava renal 25 x 190 mm
4574 - Lamina maleável fenda 50 x 200 mm
4575 - Lamina maleável fenda 80 x 200 mm
4576 - Lamina MAS Richardson 50 x 80 mm
4577 - Lamina MAS Richardson 50 x 100 mm
4578 - Lamina MAS Richardson 50 x 130 mm
4579 - Lamina MAS Richardson 50 x 150 mm
4580 - Lamina média direita 60 x 90 mm
4581 - Lamina média direita 70 x 80 mm
4582 - Lamina média esquerda 60 x 90 mm
4583 - Lamina média esquerda 70 x 80 mm
4584 - Lamina p/ próstata 300 mm
4585 - Lamina pata de gato 6 x 64 mm
4586 - Lamina Radiolúcida côncava 20 x 35 mm
4587 - Lamina Radiolúcida côncava 20 x 40 mm
4588 - Lamina Radiolúcida côncava 20 x 45 mm
4589 - Lamina Radiolúcida côncava 20 x 50 mm
4590 - Lamina Radiolúcida côncava 20 x 55 mm
4591 - Lamina Radiolúcida côncava 20 x 60 mm
4592 - Lamina Radiolúcida côncava 20 x 65 mm
4593 - Lamina Radiolúcida côncava 20 x 70 mm
4594 - Lamina Radiolúcida côncava 20 x 80 mm
4595 - Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 30 mm
4596 - Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 40 mm
4597 - Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 45 mm
4598 - Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 50 mm
4599 - Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 55 mm
4600 - Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 60 mm
4601 - Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 65 mm
4602 - Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 70 mm
4603 - Lamina Radiolúcida côncava c/ dentes 20 x 80 mm
4604 - Lamina radiolúcida côncava maleável 25 x 140 mm
4605 - Lamina radiolúcida côncava maleável 25 x 190 mm
4606 - Lamina radiolúcida côncava rígida 25 x 140 mm
4607 - Lamina radiolúcida côncava rígida 25 x 190 mm
4608 - Lamina radiolúcida côncava rígida 25 x 200 mm
4609 - Lamina radiolúcida côncava rígida 25 x 255 mm
4610 - Lamina radiolúcida côncava rígida 25 x 300 mm
4611 - Lamina radiolúcida deaver 25 x 130 mm

4612 - Lamina radiolúcida deaver 40 x 130 mm
4613 - Lamina radiolúcida deaver 50 x 130 mm
4614 - Lamina radiolúcida deaver 80 x 130 mm
4615 - Lamina radiolúcida deaver 100 x 130 mm
4616 - Lamina radiolúcida esplâncnico 25 x 150 mm
4617 - Lamina radiolúcida esplâncnico 25 x 200 mm
4618 - Lamina radiolúcida esplâncnico 50 x 115 mm
4619 - Lamina radiolúcida esplâncnico 50 x 150 mm
4620 - Lamina radiolúcida esplâncnico 50 x 200 mm
4621 - Lamina radiolúcida estreito 20 x 35 mm
4622 - Lamina radiolúcida estreito 20 x 40 mm
4623 - Lamina radiolúcida estreito 20 x 45 mm
4624 - Lamina radiolúcida estreito 20 x 50 mm
4625 - Lamina radiolúcida estreito 20 x 55 mm
4626 - Lamina radiolúcida estreito 20 x 60 mm
4627 - Lamina radiolúcida estreito 20 x 65 mm
4628 - Lamina radiolúcida estreito 20 x 70 mm
4629 - Lamina radiolúcida estreito 50 x 50 mm
4630 - Lamina radiolúcida estreito 50 x 65 mm
4631 - Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 35 mm
4632 - Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 40 mm
4633 - Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 45 mm
4634 - Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 50 mm
4635 - Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 55 mm
4636 - Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 60 mm
4637 - Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 65 mm
4638 - Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 20 x 70 mm
4639 - Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 50 x 50 mm
4640 - Lamina radiolúcida estreito c/ dentes 50 x 65 mm
4641 - Lamina radiolúcida maleável 10 x 90 mm
4642 - Lamina radiolúcida maleável 25 x 110 mm
4643 - Lamina radiolúcida maleável 25 x 200 mm
4644 - Lamina radiolúcida maleável 50 x 200 mm
4645 - Lamina radiolúcida maleável 50 x 255 mm
4646 - Lamina radiolúcida maleável 80 x 255 mm
4647 - Lamina radiolúcida média direita 70 mm
4648 - Lamina radiolúcida média esquerda 70 mm
4649 - Lamina radiolúcida meyerding 50 x 60 mm
4650 - Lamina radiolúcida meyerding c/ dente 50 x 60 mm
4651 - Lamina radiolúcida posterior lombar 20 x 80 mm
4652 - Lamina radiolúcida posterior lombar 20 x 100 mm
4653 - Lamina radiolúcida posterior lombar 20 x 120 mm
4654 - Lamina radiolúcida posterior lombar 20 x 150 mm
4655 - Lamina radiolúcida posterior lombar 20 x 180 mm
4656 - Lamina radiolúcida posterior lombar 45 x 80 mm
4657 - Lamina radiolúcida posterior lombar 45 x 100 mm
4658 - Lamina radiolúcida posterior lombar 45 x 120 mm
4659 - Lamina radiolúcida posterior lombar 45 x 150 mm
4660 - Lamina radiolúcida posterior lombar 45 x 180 mm
4661 - Lamina radiolúcida posterior lombar 60 x 80 mm
4662 - Lamina radiolúcida posterior lombar 60 x 100 mm
4663 - Lamina radiolúcida posterior lombar 60 x 120 mm
4664 - Lamina radiolúcida posterior lombar 60 x 150 mm
4665 - Lamina radiolúcida posterior lombar 60 x 180 mm
4666 - Lamina Rake Murphy delicada 20 x 10 mm
4667 - Lamina Rake Murphy delicada 25 x 15 mm
4668 - Lamina Rake Murphy forte 20 x 10 mm

4669 - Lamina Rake Murphy forte 25 x 15 mm
4670 - Lamina renal maleável 25 x 200 mm
4671 - Lamina Richardson 45 x 50 mm
4672 - Lamina Richardson 50 x 80 mm
4673 - Lamina Richardson 50 x 100 mm
4674 - Lamina Richardson 50 x 130 mm
4675 - Lamina Richardson 50 x 150 mm
4676 - Lamina Richardson 50 x 180 mm
4677 - Lamina Saldanha Arched 80 x 140 mm
4678 - Lamina Volkman delicada 15 x 10 mm
4679 - Lamina Volkman delicada 25 x 10 mm
4680 - Lamina Volkman forte 15 x 10 mm
4681 - Lamina Volkman forte 25 x 10 mm
4682 - Lamina Weinberg 85 x 135 mm
4683 - Lamina Weinberg 100 x 150 mm
4684 - Lamina abdominoplastia 80 x 140 mm
4685 - Lamina abdominoplastia 100 x 140 mm
4686 - Lamina Army-Navy 15 x 55 mm
4687 - Lamina Army-Navy 15 x 65 mm
4688 - Lamina Army-Navy 15 x 75 mm
4689 - Lamina côncava longitudinal 25 x 30 mm
4690 - Lamina côncava longitudinal 25 x 50 mm
4691 - Lamina côncava longitudinal 25 x 70 mm
4692 - Lamina de Balfour s/ lábios 70 x 80 mm
4693 - Lamina de Balfour s/ lábios 90 x 80 mm
4694 - Lamina deaver 25 x 130 mm
4695 - Lamina deaver 40 x 130 mm
4696 - Lamina deaver 50 x 130 mm
4697 - Lamina deaver 65 x 130 mm
4698 - Lamina deaver 80 x 130 mm
4699 - Lamina deaver 100 x 130 mm
4700 - Lamina esplâncnicos 50 x 115 mm
4701 - Lamina esplâncnicos 50 x 150 mm
4702 - Lamina Heany 25 x 100 mm
4703 - Lamina Heany 25 x 130 mm
4704 - Lamina Meyerding 15 x 50 mm
4705 - Lamina Meyerding 15 x 75 mm
4706 - Lamina Meyerding 15 x 100 mm
4707 - Lamina Meyerding 25 x 60 mm
4708 - Lamina Meyerding 25 x 75 mm
4709 - Lamina Meyerding 25 x 100 mm
4710 - Lamina Meyerding 25 x 125 mm
4711 - Lamina Meyerding 50 x 60 mm
4712 - Lamina Meyerding 50 x 75 mm
4713 - Lamina Meyerding 50 x 100 mm
4714 - Lamina Meyerding 50 x 125 mm
4715 - Lamina Meyerding c/ dentes 15 x 50 mm
4716 - Lamina Meyerding c/ dentes 15 x 75 mm
4717 - Lamina Meyerding c/ dentes 15 x 100 mm
4718 - Lamina Meyerding c/ dentes 25 x 60 mm
4719 - Lamina Meyerding c/ dentes 25 x 75 mm
4720 - Lamina Meyerding c/ dentes 25 x 100 mm
4721 - Lamina Meyerding c/ dentes 25 x 125 mm
4722 - Lamina Meyerding c/ dentes 50 x 60 mm
4723 - Lamina Meyerding c/ dentes 50 x 75 mm
4724 - Lamina Meyerding c/ dentes 50 x 100 mm
4725 - Lamina Meyerding c/ dentes 50 x 125 mm

4726 - Lamina radiolúcidas Balfour 65 x 70 mm
4727 - Lamina radiolúcidas Balfour 80 x 70 mm
4728 - Medidor de profundidade 30 cm
4729 - Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 35 mm
4730 - Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 40 mm
4731 - Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 45 mm
4732 - Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 50 mm
4733 - Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 55 mm
4734 - Micro lamina radiolúcida c/ dentes 15 x 60 mm
4735 - Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 35 mm
4736 - Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 40 mm
4737 - Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 45 mm
4738 - Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 50 mm
4739 - Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 55 mm
4740 - Micro lamina radiolúcida côncava 15 x 60 mm
4741 - Mini lamina Richardson 20 x 30 mm
4742 - Mini lamina Richardson 20 x 50 mm
4743 - Mini lamina Richardson 25 x 30 mm
4744 - Mini lamina Richardson 45 x 50 mm
4745 - Mini lamina Richardson 50 x 80 mm
4757 - Haste ajustável P 17 cm
4758 - Haste ajustável M 22 cm
4759 - Haste ajustável G 26 cm
4760 - Haste P 15 x 15 cm
4761 - Haste M 20 x 25 cm
4762 - Haste G 30 x 35 cm
4766 - Válvula estreita 2 x 15 cm
4767 - Válvula 4 lamina 15,5 cm
4768 - Válvula 7 x 20 cm
4769 - Válvula auxiliar lateral 7 x 20 cm
4770 - Válvula 90 graus nº 1 6 x 9 x 25 cm
4771 - Válvula 90 graus nº 2 7 x 10 x 28 cm
4772 - Válvula Balfour P 6 x 7 cm
4773 - Válvula Balfour M 8 x 7 cm
4774 - Válvula Balfour G 9 x 7 cm
4816 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,0 x 150 mm
4817 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,5 x 150 mm
4818 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 4,0 x 150 mm
4819 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 5,0 x 150 mm
4820 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 7,0 x 150 mm
4821 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 4,0 x 180 mm
4822 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 5,0 x 180 mm
4823 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 7,0 x 180 mm
4824 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,0 x 200 mm
4825 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 3,5 x 200 mm
4826 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 4,0 x 200 mm
4827 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 5,0 x 200 mm
4828 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 7,0 x 200 mm
4829 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 4,0 x 220 mm
4830 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 5,0 x 220 mm
4831 - Pinça Anatomica Yasargil c/ dente dia. 7,0 x 220 mm
4832 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,0 x 150 mm
4833 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,5 x 150 mm
4834 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 4,0 x 150 mm
4835 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 5,0 x 150 mm
4836 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 7,0 x 150 mm
4837 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 4,0 x 180 mm

4838 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 5,0 x 180 mm
4839 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 7,0 x 180 mm
4840 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,0 x 200 mm
4841 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 3,5 x 200 mm
4842 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 4,0 x 200 mm
4843 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 5,0 x 200 mm
4844 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 7,0 x 200 mm
4845 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 4,0 x 220 mm
4846 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 5,0 x 220 mm
4847 - Pinça Anatomica Yasargil dia. 7,0 x 220 mm
4848 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 3,0 x 150 mm
4849 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 3,5 x 150 mm
4850 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 4,0 x 150 mm
4851 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 5,0 x 150 mm
4852 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 7,0 x 150 mm
4854 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 4,0 x 180 mm
4855 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 5,0 x 180 mm
4856 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 7,0 x 180 mm
4857 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 3,0 x 200 mm
4858 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 3,5 x 200 mm
4859 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 4,0 x 200 mm
4860 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 5,0 x 200 mm
4861 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 7,0 x 200 mm
4862 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 4,0 x 220 mm
4863 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 5,0 x 220 mm
4864 - Pinça Anatomica Yasargil serrilhada dia. 7,0 x 220 mm
ADP0804201 - Chave Digital Quadrada 4,00mm Curta AP
ADP0804202 - Chave Digital Quadrada 4,00mm Média AP
ADP0804203 - Chave Digital Quadrada 4,00mm Longa AP
CCT0804201 - Chave Catraca AP
CHD0804201 - Chave Digital Hex. 0,90mm Curta AP
CHD0804202 - Chave Digital Hex. 0,90mm Média AP
CHD0804203 - Chave Digital Hex. 0,90mm Longa AP
CHD0804204 - Chave Digital Hex. 1,20mm Curta AP
CHD0804205 - Chave Digital Hex. 1,20mm Média AP
CHD0804206 - Chave Digital Hex. 1,20mm Longa AP
CHD0804207 - Chave Digital Hex. 1,27mm Curta AP
CHD0804208 - Chave Digital Hex. 1,27mm Média AP
CHD0804209 - Chave Digital Hex. 1,27mm Longa AP
CHD0804210 - Chave Digital Quad. 1,30mm Curta AP
CHD0804211 - Chave Digital Quad. 1,30mm Média AP
CHD0804212 - Chave Digital Quad. 1,30mm Longa AP
CHD0804213 - Chave Digital Fenda 0,40mm Curta AP
CHD0804214 - Chave Digital Fenda 0,40mm Média AP
CHD0804215 - Chave Digital Fenda 0,40mm Longa AP
CHD0804216 - Chave Digital Unigrip Curta AP
CHD0804217 - Chave Digital Unigrip Média AP
CHD0804218 - Chave Digital Unigrip Longa AP
CHD0804219 - Chave Digital Torx Curta AP
CHD0804220 - Chave Digital Torx Média AP
CHD0804221 - Chave Digital Torx Longa AP
CHD0804222 - Chave Digital Hex. 2,00mm Interno Curta AP
CHD0804223 - Chave Digital Hex. 2,00mm Interno Média AP
CHD0804224 - Chave Digital Hex. 2,00mm Interno Longa AP
CHD0804225 - Chave Digital Hex. 2,40mm Interno Curta AP
CHD0804226 - Chave Digital Hex. 2,40mm Interno Média AP
CHD0804227 - Chave Digital Hex. 2,40mm Interno Longa AP

CHD0804228 - Chave Digital Hex. 2,50mm Interno Curta AP
CHD0804229 - Chave Digital Hex. 2,50mm Interno Média AP
CHD0804230 - Chave Digital Hex. 2,50mm Interno Longa AP
CHD0804231 - Chave Digital Hex. 2,70mm Interno Curta AP
CHD0804232 - Chave Digital Hex. 2,70mm Interno Média AP
CHD0804233 - Chave Digital Hex. 2,70mm Interno Longa AP
CHD0804234 - Chave Digital Hex. 2,00mm Int. c/ paraf. Curta AP
CHD0804235 - Chave Digital Hex. 2,00mm Int. c/ paraf. Curta AP
CHD0804236 - Chave Digital Hex. 2,00mm Int. c/ paraf. Curta AP
CHF0804201 - Chave T Quad. 4,00mm Ponta Fixa AP
CHF0804202 - Chave T Quad. 4,00mm Ponta Articulável AP
CHF0804203 - Chave Cabo ref. Quad. 4,00mm AP
CHF0804204 - Chave fixa ang. 45 graus Quad. 4,00mm AP
CHF0804205 - Chave fixa ang. 45 graus Quad. 4,00/Hex. 3,2mm AP
CHF0804206 - Chave cachimbo Ang. 45 graus Quad. 4,00mm AP
CHF0804207 - Chave cachimbo Ang. 90 graus Quad. 4,00mm AP
CHF0804208 - Chave Intercambiável (Cabo) AP
CHO0804201 - Chave Octagonal 2,20mm (Ponta Intercambiável) AP
CHT0804201 - Chave p/ Torq. Hex. 0,90mm Curta AP
CHT0804202 - Chave p/ Torq. Hex. 0,90mm Média AP
CHT0804203 - Chave p/ Torq. Hex. 0,90mm Longa AP
CHT0804204 - Chave p/ Torq. Hex. 1,20mm Curta AP
CHT0804205 - Chave p/ Torq. Hex. 1,20mm Média AP
CHT0804206 - Chave p/ Torq. Hex. 1,20mm Longa AP
CHT0804207 - Chave p/ Torq. Hex. 1,27mm Curta AP
CHT0804208 - Chave p/ Torq. Hex. 1,27mm Média AP
CHT0804209 - Chave p/ Torq. Hex. 1,27mm Longa AP
CHT0804210 - Chave p/ Torq. Hex. 1,60mm Curta AP
CHT0804211 - Chave p/ Torq. Hex. 1,60mm Média AP
CHT0804212 - Chave p/ Torq. Hex. 1,60mm Longa AP
CHT0804213 - Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Curta AP
CHT0804214 - Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Média AP
CHT0804215 - Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Longa AP
CHT0804216 - Chave p/ Torq. Quad. 1,30mm Curta AP
CHT0804217 - Chave p/ Torq. Quad. 1,30mm Média AP
CHT0804218 - Chave p/ Torq. Quad. 1,30mm Longa AP
CHT0804219 - Chave p/ Torq. Fenda 0,40mm Curta AP
CHT0804220 - Chave p/ Torq. Fenda 0,40mm Média AP
CHT0804221 - Chave p/ Torq. Fenda 0,40mm Longa AP
CHT0804222 - Chave p/ Torq. Unigrip Curta AP
CHT0804223 - Chave p/ Torq. Unigrip Média AP
CHT0804224 - Chave p/ Torq. Unigrip Longa AP
CHT0804225 - Chave p/ Torq. Torx Curta AP
CHT0804226 - Chave p/ Torq. Torx Média AP
CHT0804227 - Chave p/ Torq. Torx Longa AP
CHT0804228 - Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Interno Curta AP
CHT0804229 - Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Interno Média AP
CHT0804230 - Chave p/ Torq. Hex. 2,00mm Interno Longa AP
CHT0804231 - Chave p/ Torq. Hex. 2,50mm Interno Curta AP
CHT0804232 - Chave p/ Torq. Hex. 2,40mm Interno Média AP
CHT0804233 - Chave p/ Torq. Hex. 2,40mm Interno Longa AP
CHT0804234 - Chave p/ Torq. Hex. 2,50mm Interno Curta AP
CHT0804235 - Chave p/ Torq. Hex. 2,50mm Interno Média AP
CHT0804236 - Chave p/ Torq. Hex. 2,50mm Interno Longa AP
CHT0804237 - Chave p/ Torq. Hex. 2,70mm Interno Curta AP
CHT0804238 - Chave p/ Torq. Hex. 2,70mm Interno Média AP
CHT0804239 - Chave p/ Torq. Hex. 2,70mm Interno Longa AP

CHT0804240 - Chave de Inserção Hex. 2,00mm Média AP
CHT0804241 - Chave de Inserção Hex. 2,00mm Longa AP
CHT0804242 - Chave de Inserção Hex. 2,20mm Média AP
CHT0804243 - Chave de Inserção Hex. 2,20mm Longa AP
CHT0804244 - Chave de Inserção Hex. 2,30mm Média AP
CHT0804245 - Chave de Inserção Hex. 2,30mm Longa AP
CHT0804246 - Chave de Inserção Hex. 2,40mm Média AP
CHT0804247 - Chave de Inserção Hex. 2,40mm Longa AP
CHT0804248 - Chave de Inserção Hex. 2,50mm Média AP
CHT0804249 - Chave de Inserção Hex. 2,50mm Longa AP
CHT0804250 - Chave de Inserção Hex. 2,70mm Média AP
CHT0804251 - Chave de Inserção Hex. 2,70mm Longa AP
CHT0804252 - Chave p/ Esteticone Hex. 3,00mm Curta AP
CHT0804253 - Chave p/ Esteticone Hex. 3,00mm Média AP
CHT0804254 - Chave p/ Esteticone Hex. 3,00mm Longa AP
CHT0804255 - Chave p/ Esteticone Hex. 3,30mm Curta AP
CHT0804256 - Chave p/ Esteticone Hex. 3,30mm Média AP
CHT0804257 - Chave p/ Esteticone Hex. 3,30mm Longa AP
CHT0804258 - Saca Implante Ø3,00mm AP
CHT0804259 - Saca Implante Ø4,00mm AP
CHT0804260 - Saca Implante Ø5,00mm AP
ECT0804201 - Extensor de Chave Catraca 15mm Curto AP
ECT0804202 - Extensor de Chave Catraca 20mm Médio AP
ECT0804203 - Extensor de Chave Catraca 25mm Longo AP

2.4 Registro ANVISA

80218310030

2.5 Apresentação Comercial

01 embalagem contém 01 unidade do produto.

3. Especificações do Produto

3.1 Indicação de Uso / Finalidade

Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY são indicados para utilização em intervenções e apoios cirúrgicos, exames e procedimentos ambulatoriais.

3.2 Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY não apresentam mecanismo de articulação. Devem ser utilizados por profissionais habilitados em intervenções cirúrgicas, exames e procedimentos ambulatoriais para abrir a boca, afastar, medir, apoiar, fixar componentes e segurar tecidos.

3.3 Modo de Uso do Produto

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e ambulatorial e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do instrumento a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de

instrumentação cirúrgica e/ou ambulatorial antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

4. Procedimentos Para Utilização e Reutilização dos Instrumentais

4.1 Utilização

A utilização dos INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita a ambientes clínicos e hospitalares; com os seguintes cuidados:

4.2 Inspeções

Só poderão ser utilizados os instrumentais submetidos à inspeção técnica prévia.

4.3 Inspeção Técnica

Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY antes de serem disponibilizados para uso devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado. As peças reprovadas devem ser separadas para revisão e manutenção ou destinadas para descarte. A inspeção deve verificar as características associadas à conservação e a funcionalidade do instrumental, incluindo aspectos superficiais, como manchas, oxidações e danos, além de características pertinentes a cada instrumental.

4.4 Limpeza

Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY devem ser limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras. IMPORTANTE: Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

4.5 Esterilização

Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY devem ser esterilizados antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Nota: Todo o instrumental deve ser limpo logo após o término do procedimento cirúrgico, desta forma evitando o endurecimento de líquidos originados do trabalho cirúrgico. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas ou batidas que possam comprometer os instrumentais.

Recomendamos:

Auto Clave: temperatura de 121°C, período de 30 minutos.

Auto Clave de Alto Vácuo: temperatura de 132°C, período de 4 minutos.

4.6 Reutilização

O processo para reutilização dos INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES FACTORY envolve, no mínimo, seis etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem,

enxágüe, secagem e esterilização. Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados. Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza. Deve-se assegurar que os instrumentais, estejam livres de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microorganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do aço inoxidável, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

4.7 Limpeza Prévia

O instrumental deve ser mergulhado, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, preferencialmente enzimático, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

4.8 Descontaminação

É feita através da imersão do instrumental, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

4.9 Lavagem

As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias, dando-se especial atenção às articulações, serrilhas, cremalheiras e áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

4.10 Enxágue

O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágue do instrumental.

4.11 Secagem

Deve-se assegurar que os processos de secagem não introduzam umidade, partículas ou felpas na superfície do instrumental. Recomenda-se que o tecido seja absorvente e macio.

4.12 Descarte

O descarte de peças desqualificadas deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. Após a substituição, destruir os componentes danificados evitando o uso posterior de forma indevida.

5. Armazenamento e Transporte**5.1 Condições de Armazenamento**

Armazenar em local limpo, seco e protegido de radiação solar direta;
Não armazenar com produtos e resíduos químicos;
Armazenar de forma organizada para não danificar.

5.2 Condições para o Transporte

Transportar em local limpo e seco, protegido de radiação solar direta;
Conservar em temperatura e umidade ambiente;
Não transportar com produtos e resíduos químicos;
Transportar de forma organizada para não danificar.

6. Condições de Manipulação

Produto de uso profissional;
Não deve ser utilizado sem o conhecimento das técnicas adequadas para a execução dos procedimentos;
O manuseio dos instrumentos deve ser cuidadoso para evitar danos e alterações de suas características. Evitando batidas e quedas bruscas.

6.1 Prazo de Validade e Lote

A data de validade, de fabricação e o número de lote são informados no rótulo.

7. Advertências

O produto deve ser utilizado conforme a finalidade indicada, somente por profissionais qualificados e devidamente treinados para o manuseio do mesmo. Os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

8. Precauções

É necessário que o profissional tenha formação especializada em técnicas estabelecidas. O manuseio dos instrumentais deve ser feita por pessoas qualificadas. A infraestrutura e higiene devem ser garantidas na manipulação dos produtos. Nunca armazenar instrumentais limpos em locais que possam ser focos de contaminação. Todos os instrumentais deteriorados ou que apresentarem indícios de corrosão deverão ser separados para evitar que o processo de corrosão se alastre.

9. Contraindicações

Todos os instrumentais não apresentam contra indicações desde que suas finalidades, precauções, limpeza e esterilização sejam seguidas corretamente.

10. Efeitos Adversos

Não ocorrerão efeitos adversos, desde que sejam atendidas todas as recomendações presentes nas instruções de uso.

11. Explicação da simbologia utilizada na embalagem

	Número de referência
	Número de lote
	Fabricante
	Data de validade
	Data de fabricação
	Não utilizar se a embalagem estiver violada
	Não estéril

	Consultar as instruções de uso
	Mantenha seco
	Mantenha ao abrigo do sol
	Reciclável

Se necessário solicite o formato impresso desta instrução de uso, sem custo adicional através do e-mail sac@factorycirurgico.com.br ou pelo telefone: 11 3974-9119.

Responsável Técnico

Rogério Guedelha Massano
CREA-SP: 5063257311